

# • BIOPFIT 17

## Tépőzárás medenceöv (vászon)


A csontos medencegyűrűt elől tépőzárral szabályozhatóan körbefogja. A rugalmasságot kétoldali gumizás, a gerinc támasztását behelyezhető műanyagbetét biztosítja.

### Javaslat:

- Lumbális porckorong elfajulás, elhasználódás kezdeti szakaszában érdemes rendelni.
- Instabil gerincnél, hosszabb állással, emeléssel, hajlongással vagy üléssel járó terhelések esetén.
- Porckorongsérv műtétek után.

### Csípőméret (cm) = Megfelelő méret

70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,  
105, 110, 115, 120, 125, 130, 135,

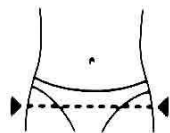

ISO 9001:2015

Eszköz kihordási ideje: 12 hónap

### Termék felvétele és használata:

A termék felvétele mindig fehérenemű alá történjék.

A tépőzárát előzetesen megnyitjuk, majd a medenceövet a nagytomporok magasságában úgy helyezzük el, hogy a csontos medencegyűrűt egyenletesen körbefogja, s hogy a zsebben elhelyezett pelotta a gerincet megfelelően megtámassza. Ezután a medenceövet körbevezetjük a csípő magasságában, majd a tépőzárát a szükséges mértékig meghúzzuk, majd összenyomjuk.

Az öv levételekor a tépőzárát ajánlott összezárni, hogy ne telítődjön idegen anyaggal.

### Kezelési útmutató:

Tisztítás idejére a műanyag betétet ki kell venni, s a tépőzárát össze kell zárni.

Mosása kézmeleg vízben, enyhébb hatású mosószerrel.

Mosógép és centrifuga használata nem ajánlott.

Vegyileg nem tisztítható.

Szükség esetén vasalható.



### ORTETIKA KFT.

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.

Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171

Fax: (26) 530-319

E-mail: ortetika@t-online.hu

www.ortetika.hu



T A G J A