


• BIOPFIT 24

Gumiszövetes bokaízület rögzítő tok

Méretvétel:

A megfelelő méret kiválasztásakor a boka haránt körfogata /c/ legyen az irányadó méret!

	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)
I	26,5	20	28	21
II	28,5	22	30	22
III	30,5	24	33	23
IV	34	28	36	24

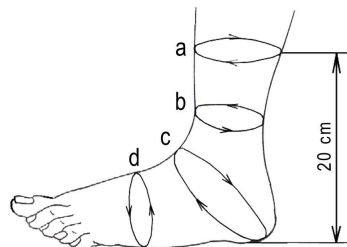

ISO 9001:2015

Eszköz kihordási ideje: 12 hónap



ORTETIKA KFT.

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.

Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171

Fax: (26) 530-319

E-mail: ortetika@t-online.hu

www.ortetika.hu



Termék felvétele:

Az eszköz első felvételekor kérje szakember segítségét!

1. Sarkunkat behelyezzük a sarokkivágásba.
2. A termék alsó tépőzárás részét szorosan zárjuk a lábfej tetején.
3. A terméket a vádlinál fölfelé meghúzzuk, majd a tépőzár segítségével zárjuk a lábszáron.
4. *Az eszköz első felvételekor:*
 - a) *A két sít egyénre szabottan, a bokacsont alakjához igazodva szakemberrel meg kell hajlítani!*
 - b) *Felhelyezzük a boka két oldalára a tépőzárral borított merevítő síneket oly módon, hogy a hajlított részek a bokacsontot két oldalról megtámasszák.*
 - c) *A síneket ne vegyük le az eszköz levételekor, illetve ügyeljünk arra, hogyha mégis levesszük (pl.: mosáskor), akkor ne cseréljük össze a belső és külső sít az eszköz ismételt összeállításakor!*
5. A bokarögzítő felső részénél található gumis szalagokat kellő megfeszítéssel hátulról előre vezetjük, és a tépőzár segítségével összezárjuk.
6. A talp alól kiinduló hosszabbik gumis szalagot folyamatosan megfeszítve átlósan elvezetjük a lábfej és a boka vonalában, megkerüljük vele hátulról a bokát, majd a talp alól kiinduló rövidebbik szalagot megfeszítjük, s a két szalagot a tépőzárral összezárjuk a bokacsont magasságában.

Kezelési útmutató:

A tisztítás idejére a sínezetet eltávolítjuk.

Mosása kézmeleg vízben, enyhébb hatású mosószerrel, kézzel történjen.

Mosógép és centrifuga használata nem ajánlott.

Fektetve szárítandó.

Nem vasalható.

Vegyileg nem tisztítható.

A teljes kiszáradás után visszahelyezzük a síneket, ügyelve arra, hogy az eredeti helyzetükbe kerüljenek vissza.

Anyaga:

Álneoprén