

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## Használati utasítás



Forgalmazza:

**Otto Bock Hungária Kft.**

1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)



## 1 Rendeltetés

Az 50S3 Malleo Sprint ugróízületi-ortézis kizárólag az alsóvégtagok ortetikai ellátására használható.

## 2 Indikáció és hatásmechanizmus

Szalaginstabilitás esetén, posztoperatív szalagszakadások, ugróízület ficamok után, és a külső szalagszakadások funkcionális-konzervatív kezelésére. Az indikációt az orvos határozza meg. Az ortézis a speciális műanyag váza, valamint hevedere segítségével megtámasztja az ízületet. Az ízület everzója és inverziója anélkül korlátozódik, hogy ez a plantár- és dorzálflexiót negatívan befolyásolná.

Forgalmazza:

**Otto Bock Hungária Kft.**


1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)

### 3 Méretezés

Az ortézis a jobb és a bal lábra egyaránt használható. Méretét úgy tudjuk kiválasztani, ha a boka, a rüsztt és a sarok körüli méretet vesszük. A méretet egy frottír zoknival együtt mérjük le.

Cikkszám	Méret	Körméret
50S3=XS	XS	kb. 25,5 – 28,0 cm
50S3=S	S	kb. 28,0 – 30,5 cm
50S3=M	M	kb. 30,5 – 33,0 cm
50S3=L	L	kb. 33,0 – 35,5 cm
50S3=XL	XL	kb. 35,5 – 38,0 cm

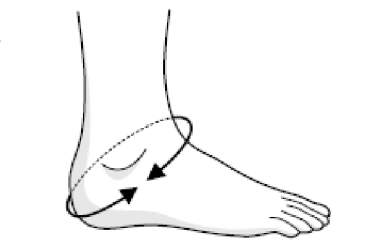

### 4 Az ortézis átadása és próbája

Az átadásnál ellenőrizzük, hogy az ortézis megfelelően illeszkedik-e a lábra.

### 5 Az ortézis felhelyezése

A fűzőt kössük ki. Majd tegyük a lábat az ortézisba (1. ábra), és fűzzük úgy be, mint egy cipőt (2. ábra). Használjuk a gyorsfűzőt is (3. ábra). A rögzítőszíjakat a következőképpen tegyük fel: Helyezzük a külső szíjat a rüsztt fölé, majd belülről (mediálisan) a láb alatt átvezetve a boka felett rögzítsük. A belső szíjat helyezzük ugyancsak a rüsztt fölé, és kívülről (laterálisan) a láb alatt átvezetve a boka felett rögzítsük (5. ábra). Amennyiben az orvos engedélyezi, hogy a páciens teljes súllyal terhelje a lábát, a hevedereket újból húzzuk meg (6. ábra).

### 6 Mellékhatások

#### Figyelem!

Minden segédeszköz - bandázs vagy ortézis - mely külsőleg érintkezik a testfelülettel, ha túl szoros, helyi nyomást fejthet ki, ritkábban elszoríthatja a vérereket és az idegeket is.

#### Figyelem!

Az ortézis nem tűzbiztos. A páciens figyelmét fel kell hívni arra, hogy a terméket ne viselje nyílt tűz vagy egyéb erős hőforrás közelében.

### 7 Ápolási tudnivalók

Használat előtt ellenőrizzük, hogy az ortézis megfelelő állapotban legyen. Amennyiben az ortézis egyik szíja, vagy más alkatrésze erősen kopott, ne használjuk tovább. A fűzőt természetesen kicserélhetjük. Az ortézist langyos vízben, semleges szappannal, kézzel tisztítsuk, és szabad levegőn szárítsuk.

Forgalmazza:

**Otto Bock Hungária Kft.**

1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)



QUALITY FOR LIFE

## **8 Szavatosság**

A gyártó kizárólag abban az esetben vállal felelősséget a termékért, ha azt a megadott feltételek betartásával és rendeltetésének megfelelően használják, A gyártó ajánlja, hogy a terméket szakszerűen kezeljék és karbantartását a használati utasításban foglaltak szerint végezzék.

## **9 CE minősítés**

A termék mindenben megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK direktíva rendelkezéseinek. A terméket a direktíva IX. függelékében a gyógyászati termékekre vonatkozó osztályozási kritériumok alapján az I. osztályba sorolták. A megfelelőségi nyilatkozatot ennek alapján a direktíva VII függelékében foglaltak szerint az Otto Bock kizárólagos gyártói felelőségének tudatában tette.

Forgalmazza:

**Otto Bock Hungária Kft.**

1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)