



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az itt leírtak a német nyelvű útmutatókban foglaltak fordításai.

MEYRA®
ORTOPEDIA

Rollátor négykerekű fékezhető járókeret,
ezüst cikkszám: 30 61 98-2, **bordó** cikkszám: 30 61 99-2

Előszó

Köszönjük bizalmát, amiért Ön egy Meyra terméket választott, mely nagyfokú mobilitást nyújt Önnek és remélhetőleg jó szolgálatot tesz. A gyártás folyamán a termék több ellenőrzési ponton halad át, végül pedig egy teljes minőségi ellenőrzést végeznek rajta.

Átvétel

Az átvételi ellenőrzést legtöbbször már az Ön kereskedője elvégezte. Amennyiben Ön más úton jutott a járókerethez, ajánljuk, végezze el az ellenőrzést.

Hasonlítsa össze a megrendelt árut a kézhez vettel! eltérés esetén forduljon a kereskedőjéhez.

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - ha lehet az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a termék a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg.

Amennyiben úgy találja, hogy a berendezés sérült, erről az Átadóval írjanak jegyzőkönyvet. A hiba kijavítása ezek után a szállító költségére történik. Ha nem történik meg azonnal a jegyzőkönyv kiállítás, a későbbiekben nincs módunk a szállítási károkat elismerni.

Összeszerelés

- A rollátort előszerelt állapotban szállítjuk, azt átvétel után össze kell állítani!
- Hajtsa szét teljesen a rollátort a hátsó vázelem összekötő rúdja lefele nyomásával, addig ameddig a retesz be nem kattant.
- Összehajtásnál először a nyomja be a műanyag retesz csapját.
- Vezesse a kartámasz csövet az első vázelem csövébe és a megfelelő helyen a mellékelt csavarral rögzítse! A csavarnak a csövön kiképzett helye van, ami megfogja az elfordulás ellen.
- Állítsa be fékbowdenek feszességét a fékeknél (a bowden közepén) található csavarokkal.
- Ha szükséges állítsa a kartámaszokat a kívánt magasságba.

Leírás

A rollátort többfunkciós fékkel szereltük fel. A fékkar, mely a fogantyún található üzemi és rögzítő fékként is szolgál. A kézfék egyszerűen kezelhető, a fékkart egyik irányba mozgatva (felfele) üzemi fékként, másik irányba (lefele) mozgatva rögzítő fékként használható, mely a Ideálnál 200 x 50 mm-es hátsó kerekekre hat. A fék kioldáshoz húzza azt enyhén felfele.

A teleszkópos kartámasz cső lehetővé teszi a kéztámaszok - 78,5-100 cm közötti magasságban történő beállítását. Ehhez csavarja ki vagy lazítsa meg a kézi kereket, állítsa be megfelelő magasságba, húzza meg a kézi kereket. A biztonság érdekében soha ne húzza ki túlzottan a kartámasz csövet, az az mindig legalább 75 mm maradjon bedugva.

Biztonsági tudnivalók

- Igyekeztünk Önöknek egy biztonságos segédeszközt tervezni, de saját védelmükben néhány dolgot rendszeresen ellenőrizniük kell.
- Ügyeljen a fékhuzal helyes beállítására, hogy a fék mindig megfelelően működjön!
- Figyeljen arra, hogy használat előtt a fékek mindig rögzített állapotban legyenek, megakadályozva a rollátor elgurulását. Csak **akkor engedje ki a féket, ha már biztonságosan áll** a rollátor mellett.
- Ügyeljen arra, hogy a kartámasz cső csavarja mindig feszesen meg legyen húzva.
- A beépített összehajtás elleni védelem (**biztosító kar**) **mindig támassza meg a csuklót**, így lehetetlenné teszi a véletlen vagy menet közbeni összecukást.
- Csak akkor kezdjen el a rollátorral menni, ha már **egyenesen áll és mindkét keze a kéztámaszokat fogja**.
- A kéztámaszokat soha **ne fogja meg vizes vagy krémes kézzel!!**

- Ha elfárad, húzza be a féket és üljön le a beépített ülőkére!
- A rollátor nem alkalmas nehéz tárgyak szállítására, maximum 5 kg súlyt tegyen a kosárba.
- Ne közlekedjen 20 mm-nél magasabb szegélyeken a rollátorral.
- **Kültéren haladjon sík úton, de ne a forgalomban,** és kerülje a szegélyeket, ha lehet, keressen akadály mentesített átjárókat!
- Lejtős, rézsús, murvás vagy kockaköves utakon ne használja az eszközt, mert elveszítheti felette az uralmát!
- A rollátornak hátramenetben nincs támasztó funkciója, ne használja így!
- Csak Idealnál: a kartámaszok csövei soha ne álljanak kijebb 30 foknál az oldalak síkjától!
- Soha ne támaszkodjon a fékkarra, az csak a fék működtetésére szolgál, csak a kéztámasz fogantyújára.

Tisztítás

Tisztításhoz lehetőleg szappanos – semleges kémhatásúhoz közel álló - oldatot használjon, ne alkalmazzon maró hatású vagy oldószertartalmú szereket. Amennyiben szükségessé válik a fertőtlenítés, használjon fertőtlenítő kendőt.

Ellenőrzés az Orvostechnikai Rendelet előírásai szerint

Az Orvostechnikai Eszközökről szóló Rendelet előírásai szerint nem szükséges időközi felülvizsgálat.

Javítások

Csak eredeti Meyra részeket használjon! Az Ön kereskedője megfelelő készlettel rendelkezik a javítások elvégzéséhez.

Maximális terhelhetőség

A termék maximális terhelhetősége 130 kg.

Minőségi garancia:



I. veszélyességi osztályú orvostechnikai eszköz. A termék teljesíti az EU 93/42/EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó alapvető előírásait és megfelel a 16/2006 (III.27.) EüM. rendeletnek. Az EüM Orvostechnikai Hivatalánál 35153/2000 számon regisztrált.

Garancia:

Magyarországon a Meyra-Ortopedia Kft., mint első forgalomba hozó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre és 24 havi szavatosságot vállal az anyagszerkezetre rendeltetésszerű használat esetén.

- ◇ Ezt a tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.
- ◇ Az eszköz időszakos karbantartása, rendszeres tisztítása, mozgó alkatrészek kenése és a csavarok utána húzása a Tulajdonos feladata. Ennek elmulasztásából származó hibákért felelősséget vállalni nem áll módunkban. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át.
- ◇ A gumi alkatrészek kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására a garancia nem terjed ki
- ◇ Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük hívja fel szakszervizünket a 06 (1) 230 05 93 telefonszámon vagy a 06 (1) 200 0315, ahol éjjel-nappal üzenetrögzítő fogadja hívásaikat, vagy jelentse be e-mailben a szerviz@meyra.hu címen.

Az eszköz sorszámja:

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása: