

## TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### TENA *Comfort* Mini Extra



A TENA *Comfort Mini* egyszerhasználatos inkontinencia betéteket kimondottan az enyhe – közepes súlyos női **vizeletinkontinencia** tüneti ellátására fejlesztették ki.

Magyarországon TB támogatással a TENA *Comfort Mini Plus* és TENA *Comfort Mini Extra* termékváltozatok érhetőek el. A különböző termékváltozatok megfelelő használatával eredményes és hatékony **tüneti kezelés** valósítható meg, amely **megbízható védelmet** nyújt a vizeletinkontinenciára jellemző **folyadékiszvárgással és szagokkal szemben**.

(enyhébb vizeletinkontinencia esetén a *Plus*, míg a közepes vizeletinkontinencia ellátásra az *Extra* alkalmasabb.)

A TENA *Comfort Mini* inkontinencia betétek mérete és használatának módja is nagyban hasonlít a női egészségügyi betéteknél megszokotthoz, ami megkönnyíti az aktív női életvitellel összeegyeztethető - **diszkrét, ergonomikus** –alkalmazást.

A TENA *Comfort Mini Plus és Extra* inkontinencia betétek **külső-belső kialakítása, anyagösszetétele** olyan módon került optimalizálásra, hogy a termékek kiváló folyadékfelszívó és folyadékmegkötő képessége (380 – 500 ml) a **normál női tisztasági betétekkel közel azonos méret és megjelenés** mellett is biztosított legyen. Az inkontinencia betétbe jutott vizelet kiszvárgását – a méretarányosan **magas nedvszívó kapacitás** mellett – az inkontinencia betét **anatómiai formázottsága, speciális illesztőperemezése és oldalgumírozása** akadályozza. A termékcsalád külön - **Odour Control®** - **szagsemlegesítő rendszere** garantálja a vizeletinkontinenciára jellemző szagokért felelős baktériumok szaporodásának fékezését.

A termék egyszerűen, stabilan és pontosan rögzíthető a fehérneműt nem szennyező, de erőteljesen tapadó ragasztószalaggal – akár többszöri újra próbálkozás után is.

## **A TENA Comfort Mini inkontinencia betétek főbb általános termékjellemzői:**

**Anatómiai formázottság:** A megfelelő kialakítás optimális illeszkedést biztosít, kényelmes, biztonságos és diszkrét használatot tesz lehetővé.

**Dry Fast Core - dupla nedvszívó mag:** A külső (bőrfelszínhez közeli) nedvszívó mag az inkontinencia betétre folyó vizeletet tölcser-szerűen összegyűjti és a belső nedvszívó mag felé vezeti. A nagyobb mennyiségű vizelet gyors elvezetését cellulóz kapillárisok biztosítják a külső magban, míg a vizeletet a szuperabszorbens köti meg a belső nedvszívó magban. A belső mag olyan erővel zárja magába a folyadékot, hogy az nyomás alatt sem távozik onnan. (pl. hosszabb ülés a buszon, váróban, ebéd közben stb.). Így a normál tevékenyégeket nem szükséges ilyen okból megszakítani.

**Speciális fedőréteg:** Az inkontinenciabetét bőrrel közvetlenül érintkező részére mikrobolyhos nem szőtt szálszerkezetű textília biztosítja a bőr irritáció mentes átszellőztetését és a hasznos vizeletfelvő felszín megsokszorozását. Ez lehetővé teszi a huzamosabb napközbeni / esti vizeletet és a betétre kerülő vizelet gyors felszívódását, védelmet jelent a bőr számára az ázással és a befülledéssel szemben is.

**Puha gumírozású oldalperem:** az ágyéki-comb terület alakját mozgás-járás közben is jól követő rugalmas ívű gumiperem javítja az inkontinencia betét alakkövetését, illeszkedését és egyfajta plusz oldalirányú szigetelést biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy a betét felületére érkező vizelet - ahelyett, hogy a comb mentén oldalra szivárogná – a betét közepe felé, tehát a nedvszívó mag irányába terelődjön és ott gyorsan felszívódjon.

**Szagsemlegesítő rendszer:** A külön szabadalmaztatott **Odour Control**® rendszer gátolja a vizeletinkontinenciára utaló jellegzetesen intenzív és kellemetlen, szúrós szag ammónia felhalmozódását és a baktériumok kialakulását.

**Vízzáró – légáteresztő külső borítás:** A betét alsónemű felé eső oldalán mikroperforált fólia van, ami átveszt a levegőt, de elzárja a vizelet útját. Ez lehetővé teszi, hogy optimális pára és hőmérséklet kontrol mellett védve maradjon a bőr egészsége és extra védelmet kapjon a ruházat is a vizelet szivárgásával szemben.

**Fixáló rendszer:** az inkontinenciabetét légáteresztő külső borításának széles öntapadó csíkja biztosítja, hogy a termék – akár többszöri próbálkozás után is – egyszerűen pozícionálható és rögzíthető legyen a női alsóneműbe. Így még a nagyobb mennyiségű vizelettel megterhelt betét is a helyén marad állás, ülés, de akár séta, járás vagy lépcsőzés közben is. Ez lehetővé teszi, hogy az egyébként szokásos mindennapi tevékenységeket ne kelljen megszakítani a betét elcsúszása, felgyűrődése vagy ezekkel összefüggő szivárgásos események miatt.

## TENA Comfort Mini – Prémium minőségű betétcsalád\* közepsúlyos inkontinencia kezelésére



Hármas védelmet nyújt a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség ellen.

### Ragasztószalag 1

A széles ragasztócsík biztosítja, hogy a betét biztonságosan rögzíthető a fehéreneműbe.

### Bőrbarát, nem szőtt textília felső réteg 2

Puha, fehérenemű-érzetet kelt. Elvezeti és gyorsan átengedi a vizeletet a cellulóz rétegbe, és speciális kialakításának köszönhetően nem engedi vissza.

### Oldalsó gumirozás 3

Biztosítja a megfelelő forma megtartását, a betét biztonságos és kényelmes illeszkedését az ágyéki részhez. Gyors folyadékfelvezetést biztosít, védi a fehéreneműt.

### Anatómiai formázottság

Megfelelően illeszkedik a betét a genitáliákhoz, így megakadályozza a szivárgást.

### Felső mag 4


A cellulóz gyorsan felszívja, eloszlatja és továbbítja a folyadékot az alsó magba.

### Alsó mag 5

A szuperabszorbens segítségével tárolja a vizeletet.

### Légáteresztő hátsó borítás 6

Az egészséges bőrt.

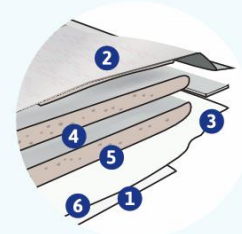

A TENA Comfort Mini betétek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A TENA Comfort Mini termékeket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

## FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1. Hajtogassa szét a betétet, majd távolítsa el a kék színű felirattal ellátott ragasztószalagot az ott jelzettek szerint.
2. Az inkontinencia betét ragasztószalagos oldalát rögzítsük a fehérenemű lábközti részének közepére. (a fehérenemű testhezálló legyen!)

[Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak tudja bejelenteni az \[ogyei@ogyei.gov.hu\]\(mailto:ogyei@ogyei.gov.hu\) címen.](#)

[Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: \[www.tena.hu\]\(http://www.tena.hu\), INKO-INFO: 06-80-20-10-20 \(ingyenesen hívható zöldszám\)](#)

[Lezárás dátuma: 2025.04.16. HMS/INCO/L/Print/160425/1](#)

[Gyártó: Essity Hygiene and Health AB SE-405 03 Göteborg, Sweden](#)

[Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.](#)

A forgalmazó hivatalos weboldalán – [www.tena.hu](http://www.tena.hu) – található termékinformáció:



A TENA Comfort Mini Extra betét még erősebb nedvszívó képességgel rendelkezik, és extra védelmet biztosít. Magas szintű biztonság, kényelem és szárazság: így ritkábban szükséges a terméket cserélni és megvásárolni.

\*Az Odour Control™ szagsemlegesítő rendszer közömbösíti az ammóniát, így megelőzi a kellemetlen szagok kialakulását.

- A Dry Fast Core – a gyors szárazságot biztosító mag
- Az Odour Control szagsemlegesítő rendszer meggátolja a kellemetlen szagok kialakulását
- A ragasztószalag növeli a biztonságérzetet és a kényelmet

✓ **A Dry Fast Core – a gyors szárazságot biztosító mag**  
A Dry Fast Core belső mag kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik, és gyorsan magába zárja a folyadékot, így teljes biztonságban érezheti magát viselésekor.

✓ **Az Odour Control szagsemlegesítő rendszer meggátolja a kellemetlen szagok kialakulását**  
A TENA Comfort Mini betétek Odour Control szagsemlegesítő rendszerrel vannak ellátva. A szuperabszorbensek csökkentik az ammóniatermelő baktériumok szaporodását és ezáltal a kellemetlen szagok kialakulását. Ez a termék kényelmes, a méltóságot megőrző, diszkrét viseletet biztosít.

✓ **A ragasztószalag növeli a biztonságérzetet és a kényelmet**  
Minden TENA Comfort Mini betét hátulján ragasztószalag van, amely az alsóneműhöz rögzíti a betétet.

Hossz: 34 cm

Csomagméret: 30Darab

## A fenntarthatóságról



### TENA Protects program

A TENA Protects program célja az emberek és jóllétük védelme, valamint a klímaterhelésünk csökkentése.



### Tanúsítottan megújuló villamos energia

A TENA európai gyártóüzemeiben tanúsítottan megújuló villamos energiát használunk.

A TENA vállalja, hogy 2030-ra csökkenti a termékek, illetve szolgáltatások karbonlábnyomát. Ennek egyik lépéseként üzeinkben megújuló forrásokból, például vízből, szélből vagy napenergiából származó villamos energiára állunk át. Az üzeinkben felhasznált villamos energiát külső forrásból vásároljuk, és származási garanciával igazoljuk. Ezeket a tanúsítványokat nem mi, hanem külső intézmények, például az Európai Villamosenergia-tanúsítási Rendszer (EECS) állítja ki, hogy garantáltan hitelesek legyenek. Ezzel támogatjuk a megújuló villamos energia előretörését minden piacon.



### Újrahasznosítható csomagolás

A csomagolás a RecyClass újrahasznosítási kialakítás kritériumai alapján gyakorlatilag újrahasznosítható különböző felhasználási célokra. A tényleges újrahasznosítás több tényezőtől függ, pl. hogy az adott helyen rendelkezésre áll-e újrahasznosítási rendszer.

## Bővebben



Orvostechikai eszköz



Egyszeri használatra



### Address of the Manufacturer

Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden



### Visitor's Address

Mölnbals Bro 2, Mölnbald, Sweden