

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA Pants Normal



A súlyos vizelet inkontinencia eszközös ellátása alapvető a társas működéseket blokkoló tünetek 1. vonalbeli kezelésében. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról.) A vizeletfelszívók önálló és kombinált alkalmazása segíthet a vizeletinkontinencia tüneteinek stabilizálásában, ezáltal a betegek családi és kereseti szerepköreinek megóvásában.

A TENA Pants termékcsaládba tartozó termékváltozatok kimondottan a középsúlyos és súlyos vizeletinkontinencia és széklet inkontinencia tüneti ellátására tervezett – komfortos, nagy nedvszívó képességű és ergonomikus felhasználású – speciális gyógyászati segédeszközök és egyben orvostechikai eszközök, amelyeket egyszeri felhasználásra szántak.

A TENA Pants Normal a betegek testi, pszichés és társas mivoltából adódóan kiegyensúlyozott és jó megfelelést adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. Külső és belső szerkezete, anyagösszetétele védelmet nyújt a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlcordulásos, illesztési hiba eredetű, stb. - vizeletszivárgás és szagok ellen.

A termék szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelést nyújtó, kiváló nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű inkontinencia fehérnemű típusú pelenkanadrág. A TENA Pants fehérneműhöz hasonló nadrágpelenkák a különböző típusú (középsúlyos, súlyos, vizelet és széklet inkontinens) betegnek biztonságos, prémium megoldást nyújtanak. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.

A TENA Pants Normal inkontinencia pelenkák főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői:

- 1) Bőrbarát textilszerű felső réteg: A vizeletet a nedvszívó rétegbe vezeti, és szárazon tartja a bőrt.
- 2) Légáteresztő külső borítás: Bőrbarát, mivel hagyja lélegezni a bőrt, így elkerülhetőek a bőrirritációk.
- 3) Dupla cellulóz mag: A felső mag a beérkező folyadékot gyorsan elvezeti, az alsó mag biztonságosan megtartja.
- 4) Feel Dry™ réteg: Elősegíti a gyors folyadék elvezetést, ezáltal szárazon tartja a pelenka bőrrel érintkező felületét, így óvja a bőrt a nedvességtől.
- 5) Körkörös derékgumírozás és hosszanti vízhatlan védőgát:
Szivárgásmentességet, kényelmes viseletet biztosítanak.
- 6) Body-Close Fit™: Pontos illeszkedést és diszkrét viseletet biztosít a testhez álló forma.
- 7) Méret jelölése a terméken: A termék a csomagolásból kivéve is könnyen beazonosítható.
- 8) Szagsemlegesítő rendszer: Savas pH-jának köszönhetően meggátolja a baktériumok szaporodását, ezáltal a kellemetlen szag kialakulását.
- 9) Anatómiailag formázott: A test anatómiájának megfelelően kialakított pelenka forma jó illeszkedést biztosít, így biztonságot és kényelemérzetet nyújt.



A TENA Pants termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A termék gyártója, Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden) gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év. A TENA Pants Normal termék S, M, L méretben kapható.



Tárolási feltételek: szobahőmérsékleten, száraz körülmények között tárolandó

Az eszköz egyszeri használatra szánt

Alapanyag százalékos összetétele:

Cellulóz (62,05%), Szuperabszorbens (22,48%), Borítóanyag (PE, nemszőtt textília) (9,06%),
Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elasztikus szálak: 6,41%)


FELHELVEZÉSI ÚTMUTATÓ

TENA Pants

A TENA Pants egyszerhasználatos termék. Fehérneműhöz hasonló kialakítása révén könnyen felhelyezhető minden testhelyzetben.

Felhelyezés: A nadrág rugalmas gumírozásának köszönhetően felhúzható, mint egy alsónemű.

1. Az elhasznált terméket távolítsa el, tisztítsa és ápolja a bőrt bőrpoló termékekkel.
2. Nyissa ki a TENA Pants csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a pelenkanadrágot.
3. Kezeinket a derékrészbe bújítva a gumírozott részeket szélteben kicsit nyújtsuk meg, hogy lazábbá válhassanak.
4. Tartsuk a terméket magunk elé úgy, hogy a lábkivágás keskenyebb része kerüljön előre.
5. A terméket magunk elé tartva helyezzük be az egyik majd a másik lábat a lábkivágásokba.
6. Húzzuk fel a terméket, úgy, mint egy alsóneműt, a láb közti részt igazítsuk el, hogy kényelmes viseletet érzünk el.

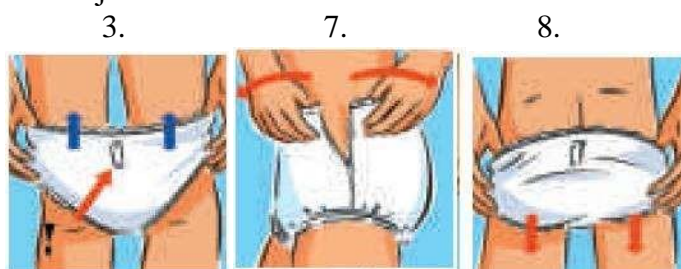

Levétel:

1. Tépje fel a nadrág két oldalán az illesztéseket és egy határozott mozdulattal húzza ki a lábak közül.
2. Eltávolítás után a pelenkát hajtsa össze és a terméken található ragasztószalag segítségével rögzítse, majd dobja ki.
3. A megbízható bőrvédő hatás elérése érdekében javasoljuk a TENA Bőrpolók használatát a következő termék felhelyezése előtt.

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak tudja bejelenteni az ogyei@ogyei.gov.hu címen, valamint a gyártónak: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE405 03, Göteborg, Sweden) vagy a forgalmazónak az alábbi elérhetőségeken.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: www.tena.hu, INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Használati útmutató lezárásának dátuma 2022.07.19.