



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GM egy légkamrás antidecubitus ülőpárna GM két légkamrás antidecubitus ülőpárna

TERMÉK LEÍRÁSA

A GM antidecubitus ülőpárna kiválóan alkalmazható kemény felületen az ülő pozíció javítására, felfekvés megelőzésére.

Használható: kerekesszékekben, autóülésen, padon, illetve széken.

Az ülőpárna egy közös alapra helyeztet több egymással összeköttetésben lévő, levegővel töltött, szilikongél tetejű, hőre lágyuló poliuretán cellákból áll.

Használat közben a felhasználó súlya terheli az egyes cellákat, aminek következtében a nagyobb nyomású cellákból a kisebb nyomású cellákba áramlik a levegő. Ennek következtében a nyomás eloszlik, és a párna felveszi a test formáját illetve fenntartja a megfelelő helyzetet. Az ülő személy testsúlyának egyenletes eloszlásával javítható, a nagy nyomásnak kitett puha szövetek vérkeringése, megakadályozva ezzel a felfekvési panaszok kialakulását.

A párna huzatának felső rétegét fényes dzsörzé borítás fedi. Az alsó réteg vízzáró poliuretán. A párnahuzat mosható, illetve fertőtleníthető. A belső rész nem szív magába nedvességet, így inkontinens betegek részére is ajánlott.

A párnahuzat megelőzi a bőr irritációját és dörzsölését, továbbá lehetővé teszi a levegő áramlását a test és a párna között

Összsúly: ~1,6 kg

Maximális teherbírás: 130 kg, mérettől függetlenül.

Méret:

- egy légkamrás 40x40 cm
- két légkamrás 40x40 cm
- két légkamrás 40x45 cm.

Tartozékok: párnahuzat , kézipumpa

TERMÉK HASZNÁLATA

A GM antidecubitus ülőpárnát úgy kell elhelyezni a kerekesszékekben, hogy a sötétszürke, csúszásgátló réteggel borított felső rész legyen alul, illetve az alsó rész lekerekített sarkai helyezkedjenek el a kerekesszék hátulján.

Előkészítés használatra:

- Vegye ki a biztonsági dugót a szelepből.
- Dugja bele a pumpa fém végét a szelepbe.
- Pumpálja addig a párnát levegővel, amíg közepesen kemény nem lesz.
- Üljön a párnára, és a szelep oldal irányú összenyomásával engedjen ki annyi levegőt, hogy kb. 1,5 cm magas levegőréteg maradjon a párna alapja és a legjobban terhelt rész között.
- Helyezze vissza a biztonsági dugót és tegye a párnát a huzatba úgy, hogy a szelep a huzat nyitott vége felé essen, majd rögzítse a huzat nyitott végét a tépőzárral.



Figyelem!

A párna teljes leeresztése során az összes levegőt ki kell engedni a párnából!

A párnát semmilyen esetben sem szabad túlfújni, illetve addig pumpálni, míg teljesen feszes nem lesz!

Ügyeljen rá, hogy használat során mindig legyen bent elég levegő, a cellák alja ne érjen hozzá az alaphoz!

TISZTÍTÁS – FERTŐTLENÍTÉS - JAVÍTÁS

A párna huzata langyos, semleges szappanos vízben vagy mosógépben 30 °C-on mosható. Ha szükséges, a felfújható rész is tisztítható langyos (nem meleg és forró!) vizes, szappanos ruhával áttörölhető.



Figyelem!

A huzat mosása előtt a párnát el kell távolítani a huzatból! Ne használjon dörzshatású tisztítószer és oldószert a tisztításhoz! A tisztítás végezetével a felfújható részt teljesen szárazra kell törölni! Ne szárítsa magas hőmérsékleten! Ne tegye ki közvetlen hőhatásnak a terméket!

A párna fertőtlenítése előtt minden esetben meg kell tisztítani a párnát! A fertőtlenítési folyamat során csak és kizárólag a meghatározott fertőtlenítő oldatokat használja! A párna javítását bízza szakemberre, forduljon a szakszervizhez!

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától számított 1 év.

Az alábbi esetekben nem tartozik a jótállás hatálya alá

Nem tartozik a jótállás hatálya alá, ha a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például:

- szakszerűtlen üzembe helyezés
- rendeltetésellenes használat, a használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó által vásárolt terméket az átvizsgálása után kicseréljük a vásárló számára.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével –

az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vásárlás helyén ill. a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét: (Szerviz megadása nem kötelező.)

JÓTÁLLÁSI JEGY




Jing Yun Plastic Co. Ltd.

No. 52, Bei Nei Street, Shu Lin District, New Taipei City 238, Taiwan

Tel: +886-2-681-6766

Fax: +886-2-268-19800

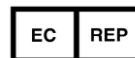

Forgalmazó: Gyógymbolt Kft.

2045 Törökbálint Kisfaludy u 49-1

Telefonszám: 06 30 4394 505

E-mail cím: gyogymboltkft@gmail.com

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Vállalkozás¹ neve és címe: Gyógymbolt Kft (2045 Törökbálint Kisfaludy u 49-1.)

Termék megnevezése: GM egy légkamrás és GM két légkamrás antidecubitus ülőpárna

Termék típusa:

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendó)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

Az eszköz megnevezése: GM egy légkamrás és GM két légkamrás antidecubitus ülőpárna

Az eszköz típusa:

1 légkamrás 40x40 cm

2 légkamrás 40x40 cm

2 légkamrás 40x45 cm

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni.

Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

¹ A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.