

**hu**

**Önhajtós kerekesszék**  
**Budget 9.050**

**Használati útmutató**



**CE**

**MEYRA®**

# Tartalom

BEVEZETÉS .....	3
ALKALMAZÁS.....	4
AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELE .....	4
BEÁLLÍTÁSOK.....	5
ÉLETTARTAM.....	5
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK .....	5
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	6
A KEREKESZÉK FŐ RÉSZEI.....	7
RÖGZÍTŐ FÉK, FÉKEZÉS.....	8
LÁBTARTÓK .....	9
VÁDLI TARTÓ HEVEDER.....	9
LÁBTARTÓK KI-, BE HAJTÁSA.....	9
LÁBTARTÓK LEVÉTELE, VISSZAHELYEZÉSE.....	10
TALPTÁMASZOK .....	10
KARTÁMASZOK .....	11
A KARTÁMASZ LEVÉTELE ÉS VISSZAHELYEZÉSE .....	12
A KARTÁMASZ FEL- ÉS HÁTRAHAJTÁSA.....	12
MEGHAJTÓ KEREKEK .....	13
HASZNÁLATBAVÉTEL.....	14
HASZNÁLAT TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN.....	15
KÖZLEKEDÉS A KÖZÚTI FORGALOMBAN.....	15
A KEREKESZÉK, MINT ÜLÉS HASZNÁLATA GÉPJÁRMŰBEN .....	16
KARBANTARTÁS, ÁPOLÁS .....	17
KARBANTARTÁSI TERV .....	17
ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK .....	19
JAVÍTÁSOK .....	19
TISZTÍTÁS.....	19
MŰSZAKI ADATOK.....	20
MÉRETEK, ADATOK.....	21
A KEREKESZÉKEN ELHELYEZETT MATRICÁK JELENTÉSE.....	22
A TÍPUSTÁBLÁN LÉVŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE .....	22
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK .....	23
GYÁRTÓ: .....	24
JÓTÁLLÁSI JEGY .....	25
SZERVIZKÖNYV.....	27


## BEVEZETÉS


Köszönjük, hogy kitüntette bizalmával cégünket és megvásárolta ezt a kerekesszéket.

A kerekesszék sokrétű beállítási lehetőségei garantálják, az Ön igényeinek legjobb kielégítését.

A KEREKESZÉK EGY ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ, MELYNEK HASZNÁLATÁHOZ ELENEDHETETLEN JELEN ÚTMUTATÓ ÁTTANULMÁNYOZÁSA ÉS MINT MŰSZAKI ESZKÖZ A RENDSZERES ÁPOLÁSA, KARBANTARTÁSA, ILL. KARBANTARTATÁSA. A SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLAT VESZÉLYEKET REJT MAGÁBAN.

Ezt a Használati útmutatót annak érdekében hoztuk létre, hogy segítséget nyújtson Önnek a kerekesszékének optimális használatához.

 Jellel a használati útmutatóban a **fontos** javaslatokat, illetve megjegyzéseinket jeleltük.

 Jel a biztonsági **figyelmeztetéseket** jelöli, ezeket minden esetben tartsa be.

A használati útmutató képei illusztrációk, ara szolgálnak, hogy szemléletesen tudjuk bemutatni Önnek a kerekesszék használatát. Előfordulhat, hogy az Ön kerekesszéke valamelyest eltér az itt bemutatott képektől, de ez nem befolyásolja a Használati Útmutatóban leírtak érvényességét, illetve a termék használatát. Jelen Használati Útmutató esetenként tartalmazza a kerekesszék opcionális felszereltségű változatait, melyek eltérhetnek az Ön által használt kivitelől.

A használati útmutató a legfrissebb műszaki adatokat és termékinformációkat tartalmazza, amelyek a kiadás pillanatában, érvényben voltak. Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

A gyártó nem felelős olyan sérülésekért és/vagy károkért, amelyek olyan emberi mulasztásokra vezethetők vissza, amikor a használati útmutató előírásait, figyelmeztetéseit és felhívásait nem tartották be, illetve olyan emberi hiba okozta sérülésekért és/vagy károkért, amelyek egyébként a kerekesszék jó szándékú használata és/vagy elvárható gondosság mellett keletkeznek.

### **Figyelem:**

Az Ön biztonsága érdekében olvassa el:

- jelen **Használati útmutatót**, ismerje meg a tökéletes kezelés technikáját, mielőtt használni kezdi kerekesszékét.

### **Fontos:**

Amennyiben a kerekesszéket gyermek használja, úgy a szülővel vagy a felügyelettel megbízott személlyel együtt tanulmányozzák át ezt az útmutatót.

## ALKALMAZÁS

A Budget 9.050 kerekesszék az összecsukható kerekesszék termékcsaládhoz tartozó acélvázás kerekesszék.

A kerekesszék kizárólag egy, az ülésen helyet foglaló, ülő személy szállítására alkalmas, felszerelt lábtartóval és oldaltámasszal. Nem használható más eszköz, állat, személy vontatására vagy szállítására.

A kerekesszék főként rövid idejű használatra megfelelő. Azt a célt szolgálja, hogy Ön képes legyen beltéri (lakás, gondozó otthon) mozgásra, lakásának rövid idejű elhagyására, friss levegőn tartózkodhasson és eljuthasson lakásának környezetében lévő, az életviteléhez tartozó helyekre, mint például bevásárló hely, gyógyszertár stb., valamint elérje és használni tudja a tömegközlekedési eszközöket.

### ! FIGYELEM:

- A kerekesszék sík, szilárd, talajon használható.
- Tilos a kerekesszék használata homokban, vizes fövényen, nagy sárban, vízben, nagy hóban. A kerekesszék károsodása mellett ezeken a helyeken előfordulhat, hogy Ön a talaj lazasága miatt nem tudja elhagyni az adott helyszínt!

## AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELE

Minden Meyra kerekesszéket a gyárban átvizsgálunk és hibátlan állapotban speciális kartonba csomagoljuk.

### Fontos:

Ennek ellenére kérjük Önt, hogy az eszközt közvetlen átvétele után - lehetőleg az átadó jelenlétében vizsgálja át:

- Azt a terméket kapta, melyet megrendelt! Amennyiben eltérést tapasztal, forduljon az eszközt kiszolgáló kereskedőjéhez.
- Ellenőrizze, hogy a terméken nincs-e szállítási sérülés. Sérülés esetén vegyenek fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a terméket. Átvétel után, a későbbiekben nincs mód a szállítási károk megtérítésére.
- A kerekesszék - mint gyógyászati segédeszköz - szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata és kötelessége. Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabályok által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a kerekesszék jótállásában javítandó hibájának.
- Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy, Szervizkönyv a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!

## BEÁLLÍTÁSOK

A kerekesszék széles beállítási és beszabályozási lehetőségeket kínál a használó fizikai méreteinek és korlátainak megfelelően.

### Fontos:

- A kerekesszéket az első használat előtt a kerekesszéket átadó beállítja, hogy az megfeleljen az Ön igényeinek és biztonságának!
- Javasoljuk a kerekesszék beállításának rendszeres felülvizsgálatát, hogy biztosítsa az optimális működést a felhasználó állapotának megváltozása esetén is.
- Főként gyermekek és kamaszok esetén ajánlott a beállítások 6 havonkénti ellenőrzése, módosítása.
- Javasoljuk, rendszeresen vesse alá magát orvosi vizsgálatnak, hogy változás esetén a szükséges beállításokkal biztosítva legyen a kerekesszék optimális használata.

## ÉLETTARTAM

A kerekesszék élettartama nagymértékben függ a használat gyakoriságától és körülményeitől. Rendeltetésszerű használat, az előírt karbantartások elvégzése, szakszerű javítás és gondos ápolás, kezelés mellett a kerekesszék átlagos, várható élettartama meghosszabbítható.

Gyári pótalkatrészek használatával a termék élettartama meghosszabbítható.

## Környezeti feltételek

A környezeti feltételek befolyásolhatják az Ön kerekesszékének biztonságát, teljesítményét és élettartamát.

A nem megfelelő környezeti feltételek közötti használat miatt bekövetkezett meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki.

### Eső, havas eső és hó

- ! Amennyiben valamely csapadéknak, nagyfokú párának van kitéve, az Ön kerekesszéke fogékony a mechanikus részegységek károsodására. A víz a kerekek csapágyazásában korróziót idézhet elő, a kárpitot károsíthatja. Ne használja kerekesszékét csapadékos időben, vagy vízben, ne tárolja vizes, párás helyiségben.


### Hőmérséklet

- ! Tűző napon a kerekesszék fém részei felforrósodhatnak, és ez égési sérülésekhez vezethet. A kárpit magas hőmérsékleten károsodhat. Kerülje el a felmelegedést oly módon, hogy a kerekesszéket árnyékba állítja.

## **ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

- A kerekesszék leparkolásához vagy a kerekesszékbe történő átüléshez válasszon ki egy lehetőleg vízszintes, sík és szilárd felületet. Biztosítsa a kerekesszéket elgurulás ellen. – Nyomja meg pl. a rögzítő féket.
- A jogosulatlan használat, visszaélés vagy leszerelés megakadályozásához ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen a használaton kívüli kerekesszéket.
- A kerekesszékben soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni gyermekeket és fiatalokat.
- Ne tehermentesítse lábait bútordarabra vagy más tárgyra történő felhelyezéssel.  
– A hátradőlés megváltoztatja a súlypontot és növeli a dőlésveszélyt.
- Használjon állítható magasságú lábtámaszokat.
- Ne dugja az ujját a nyitott csővázba (pl. a lábtartó levétele esetén). – Sérülésveszély!
- A kerekesszék használatakor, de leálláskor is és főként emelkedőn/lejtőn biztonságos ülő pozíciót kell felvenni. – Balesetveszély!
- Biztos ülőhelyzetben a kerekesszékben ülő személy háta a háttámla hevederen/hátpárnán fekszik, medencéje pedig a biztonsági öv/ülőpárna hátsó részén található.
- Ügyeljen arra, hogy ha tárgyat szállít magával, vagy tartozékokat/komponenseket szerel fel vagy le, akkor biztonsági szempontból lényeges módon megváltozhatnak a súlypontviszonyok és ezáltal a menettulajdonságok.
- A beállító egységek (pl. háttámla vagy lábtámaszok) működtetésekor tilos az alkatrészek forgatási területére nyúlni. Becsípődés miatt sérülésveszély alakul ki.
- Tárgyak kerekesszéken történő szállítása esetén ügyeljen arra, hogy ezek ne korlátozzák vagy veszélyeztessék a kerekesszék kezelését.
- Rendelkezik elegendő erővel a támaszkodáshoz, hogy a járműben kritikus menetviszonyok esetén (pl. fékezéskor, kanyarodáskor, akadályokon történő átkeléskor) biztonságosan megtartsa magát a kerekesszékben?
- Nyomvályúkat, síneket, lefolyócsatorna fedeleket vagy hasonló veszélyforrásokat nagy ívben ki kell kerülni. Ha másként nem lehetséges, akkor az ilyen akadályokon merőleges (90°) irányban kell áthaladni.
- Lehetőleg ne induljon el egyedül, hogy meghibásodás esetén mindig álljon rendelkezésre segítség.
- A kerekesszékhez tartozó alkatrészeket nem szabad dobni vagy ejteni! – A levehető egységeket, mint pl. a kartámaszt vagy a lábtámaszokat szakszerűen kell kezelni. Csak így szavatolható a tartós működőképesség.
- Használat előtt ellenőrizni kell a levehető egységek megfelelő rögzítését, mint pl. a kartámasz vagy a lábtámasz, meghajtó kerekek, patent tengely.
- Ha akadályba ütközött, akkor ellenőrizze a kerekesszék sérülésmentességét. – Látható és/vagy hallható károsodás esetén javíttatás céljából haladéktalanul keressen fel szakszervizt.

## A KERESSZÉK FŐ RÉSZEI

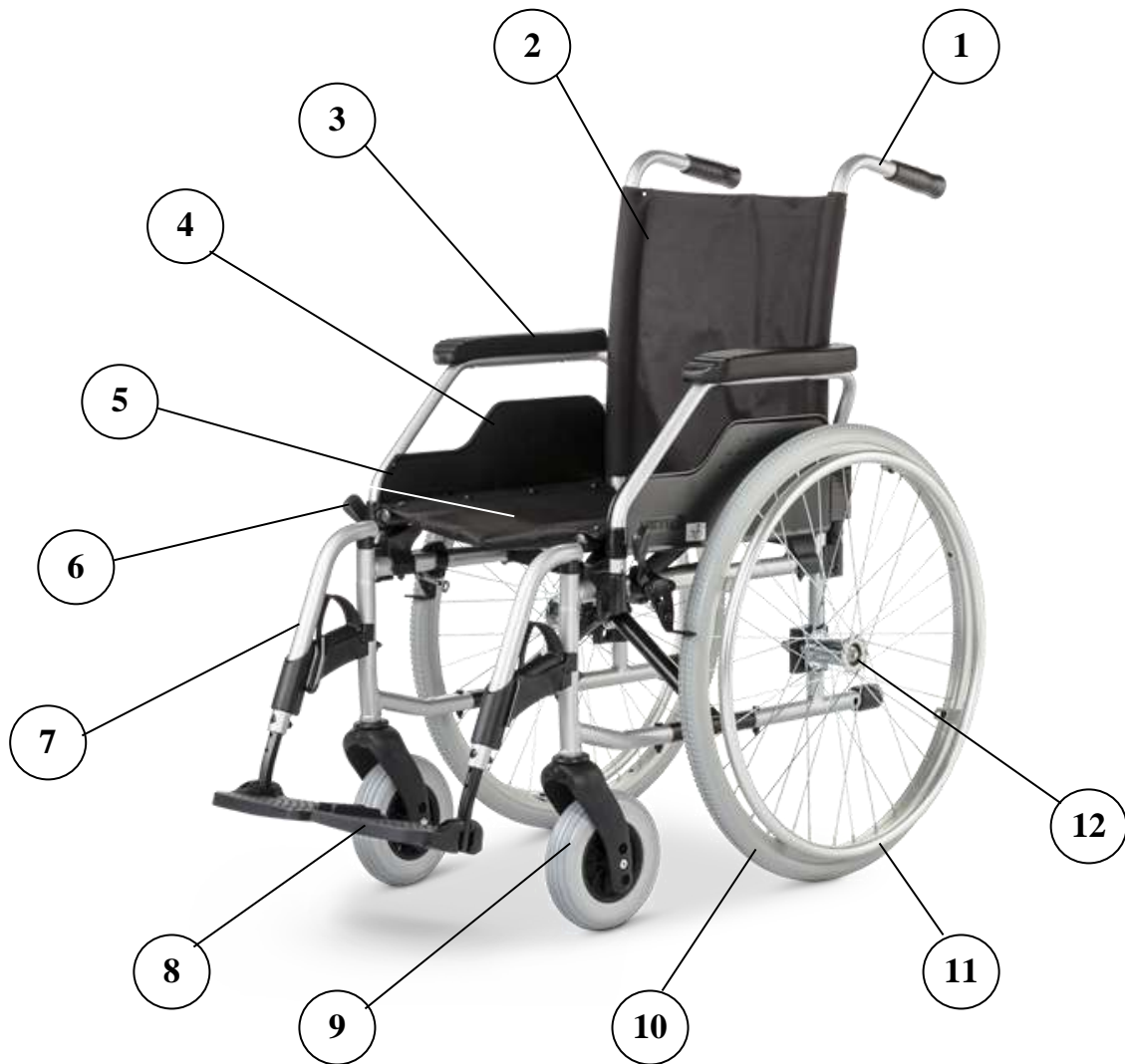

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Tolókar             | 7. Lábtartó a kioldó karral        |
| 2. Háttámla            | 8. Talptámasz                      |
| 3. Kartámasz           | 9. Bolygó kiskerék                 |
| 4. Ruhavédő oldallemez | 10. Hajtó nagykerék                |
| 5. Ülész               | 11. Hajtókarika                    |
| 6. Rögzítő fék         | 12. Gyorskioldású (patent) tengely |

## RÖGZÍTŐ FÉK, FÉKEZÉS

A kerekesszék két rögzítő fékkel van felszerelve. A fékek közvetlenül a kerekre hatnak. A fék működtetéséhez nyomja előre mindkét fékkart.


A fék kiengedéséhez húzza a fékkarokat hátra.

A fékhatás csökken a következő eseteknél:

- lekopott gumimintázat,
- rosszul beállított fékek,
- nedves gumiabroncs,
- ha módosult a meghajtó kerekek tengelypozíciója,
- a fékkar mechanikájának meglazulása esetén.

### ! Figyelem:

- A fékhatás csökkenésekor a féket haladéktalanul javítsa meg, állítsa be a szakszervizzel.
- A kerekesszéket ne tolják, hajtsák a fékek rögzített állapotában.
- A fékek nem üzemi fékek, mozgás közben ne alkalmazza azokat. Fékezzen mindig a hajtókarikával.
- A hajtókarika és a kéz között keletkező súrlódási hő kézsérülést okozhat!

 Szükség esetén használjon megfelelő kesztyűt a kerekesszék fékezéséhez.


A haladás minden egyes megszakításakor, be-, ill. kiszállás, valamint a kerekesszék leállítása esetén húzza be a fékeket mindkét oldalon, hogy megakadályozza a kerekesszék véletlen elgurulását.

### ! Figyelem:

- Nagyon óvatosan fékezze le a kerekesszékét hátramenetben.



- A hirtelen fékezés a kerekesszék felborulását idézheti elő! Kerülje a kerekesszék rendkívül erős lefékezését a hajtókarikával.
- A hajtókarika és a kéz között keletkező súrlódási hő kézsérülést okozhat!
- Lehajtott talptámasz vagy kihajtott lábtartó esetén ne fékezze le a kerekesszéket a lábaival. Ha a kerekesszék alá befordul a lába, balesetet okozhat!

 Hosszabb leállítás esetén a kerekesszékeket ne a fékkel rögzítse, mert az deformálhatja a gumiabroncsot. Más módon biztosítsa a kerekesszék elgurulás elleni rögzítését, például a meghajtó kerekek kivételével.



## LÁBTARTÓK

A kerekesszékbe való be- és kiszálláshoz, átüléshez, a kerekesszék szállításához a lábtartók ki- és behajthatók, levehetőek.

### ! Figyelem:

A lábtartók kezelése előtt mindig rögzítse a kerekesszék a rögzítő fékkel.

### Vádli tartó heveder

A vádli tartó tépőzáras heveder megakadályozza a lábak hátracsúszását a talptámaszról. A heveder hossza a tépőzárak oldása után a kívánt hosszra beállíthatóak.

Az eltávolításához akassza le a tartóhorogról.



### Fontos:

A heveder hosszának állítása után ellenőrizze a hevederek megfelelő rögzítését.

### Lábtartók ki-, be hajtása

A lábtartók ki- és behajtásához, húzza fel a képen látható reteszelő kart, majd fordítsa a lábtartókat a kívánt irányba.

### ! Figyelem:

- A kireteszelt lábtartók könnyen leeshetnek. Erre ügyelni kell a kerekesszék kezelésekor, mint például a szállítás.
- A lábtartók ki- és behajtásakor, levételékor ügyeljen, hogy keze ujjja ne szoruljon az alkatrészek közé!



A lábtartók visszafordításához egyszerűen hajtsa vissza a lábtartót. A lábtartó automatikusan reteszelődik egy jól hallható kattanással.


### Lábtartók levétele, visszahelyezése

A lábtartó levételéhez hajtsa a lábtartót ki vagy be és emelje meg, míg a helyező csap ki nem emelkedik a vázcső furatából

Visszahelyezéshez a lábtartó oldalra fordított állapotában illessze a helyező csapot a vázcső furatába, tolja be, majd hajtsa előre a lábtartót. A lábtartó automatikusan reteszelődik egy jól hallható kattanással.

#### **Fontos:**

A lábtartók visszahelyezése, visszahajtása után mindig ellenőrizze a megfelelő rögzítést.

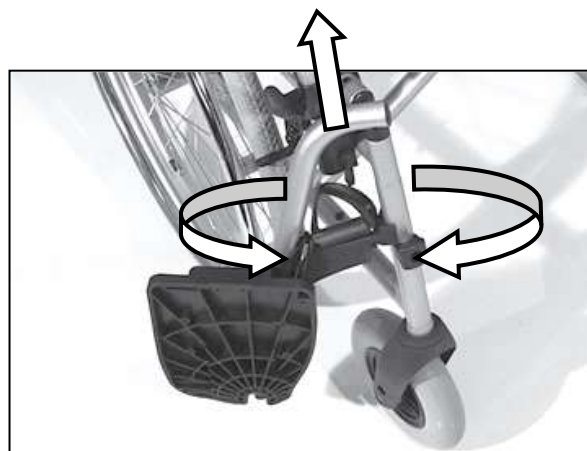

### Talptámaszok

A kerekesszékbe való be- és kiszálláshoz, átüléshez a talptámaszok fel- és lehajthatóak.


A talptámaszok fel- és lehajtásakor vegye le a lábát a talptámaszokról.

#### **Figyelem:**

- Soha ne álljon rá a talptámaszokra, mert azok letörhetnek, a kerekesszék felbillenhet [2] – Balesetet veszély!
- A talptámasz fel- és lehajtásakor ügyeljen, hogy keze, ujjá ne szoruljon az alkatrészek közé!

#### **Fontos:**

A kerekesszék használatakor talpa mindig legyen biztonságosan a talptámaszokon.

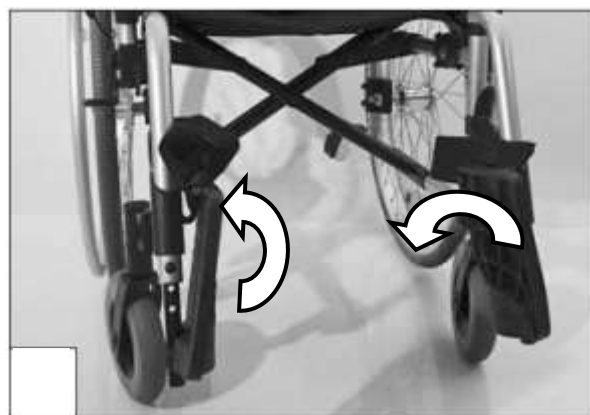

## KARTÁMASZOK

A kartámaszok az Ön kényelme érdekében magasságban állíthatóak, a kerekesszékbe való beülést és kiszállást segítő fel- és hátrahajthatók, kivehetők, valamint ruhavédő lemezzel vannak ellátva.

### ! FIGYELEM:

- A kartámaszokat soha ne használja a kerekesszék felemeléséhez és szállításához!
- Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját, amikor a kartámaszt le- vagy felhajtja. Ne nyúljon a váz és a kartámasz közé!
- A kartámasz a kerekesszékben történő kényelmes üléspozíciót szolgálja. Ne támaszkodjon rá teljes súlyával sem felnyitott, sem lehajtott állapotában, ne kapaszkodjon bele a kerekesszékbe való be- és kiszállás alkalmával!
- Ne helyezzen nagyobb tárgyakat maga mellé, mert az befeszítheti az oldallemezt, amely eltörhet és sérüléseket okozhat!
- Ne közlekedjen kartámaszok nélkül!
- A kerekesszék kísérő általi tolásakor kezeit, karját helyezze a kartámaszra vagy az ölébe. Ne nyúljon ki a kartámaszokon kívül, valamint ne tegye karját, kezét maga mellé a teste és a kartámasz közé. Az ujjak becsípődhetnek!
- A kartámaszok mozgatása (levétel, hátrahajtás) után mindig győződjön meg róla, hogy a kartámaszok megfelelően rögzítve legyenek.
- A kartámasz és az oldallemez károsodásának javítása, mint a használat módjától erősen függő elemek, nem része a garanciális javításnak!



## A kartámasz levétele és visszahelyezése

A kerekesszék szállításához szükség lehet a kartámaszok eltávolítására.

A kartámasz levételéhez először fordítsa felfelé a műanyag reteszelő karokat mind az első (1), mind a hátsó (2) kartámasz tartókon.

A karpárna közepét megfogva emelje fel a kartámaszt és közben enyhén döntse hátrafelé, a kartámasz ki fog emelkedni a tartójából [3].

A kartámasz visszahelyezéséhez az enyhén hátradöntött kartámasz helyező csapját dugja a hátsó tartó fészekbe, majd hajtsa előre, úgy hogy az első kartámasz csap illeszkedjen az első fészekbe. Ügyeljen, hogy a kartámasz hátsó csöve illeszkedjen a hátsó vezetékbe [3].

A műanyag reteszelő karokat fordítsa le elöl és hátul, ezzel biztosítva a kartámaszt.




## A kartámasz fel- és hátrahajtása

A kerekesszékbe/-ből történő átüléshez a kartámaszt fel lehet hajtani, valamint a háttámla mögé lehet hajtani.

A kartámasz felhajtásához először fordítsa felfelé az elülső reteszelő kart (1).

Ezután hajtsa fel a kartámaszt teljesen és fordítsa a háttámla mögé.

Lehajtáskor fordított sorrendben járjon el. Ügyeljen a megfelelő reteszelésre!

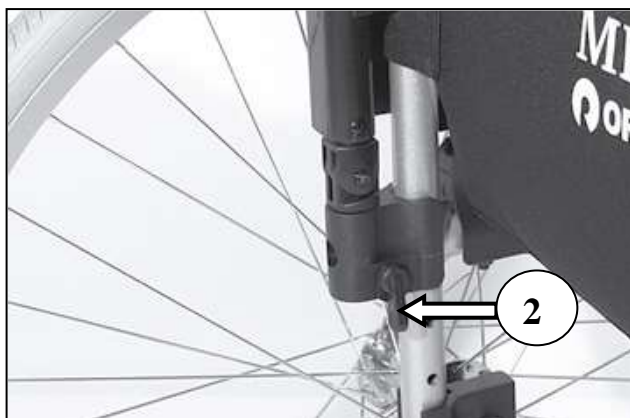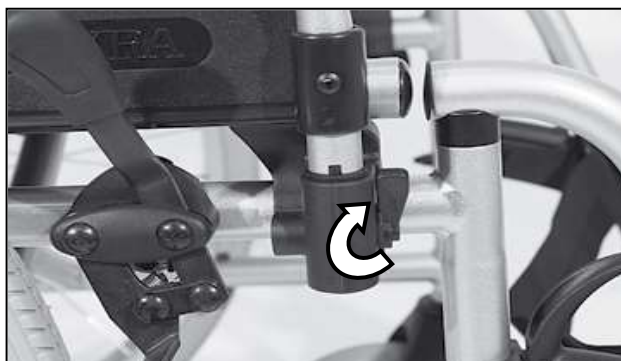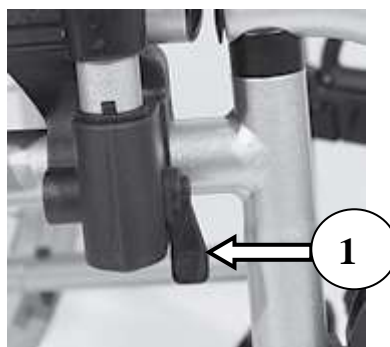

## MEGHAJTÓ KEREKEK

A meghajtó kerekek szerszám nélkül levehetőek és felhelyezhetőek.

### ! FIGYELEM:

- Ha a meghajtó kerék túl nagy oldalsó hézaggal rendelkezik, vagy nem reteszeli a patent tengely, javítás céljából azonnal forduljon szervizhez.
- A kerekek levételekor vagy felhelyezésekor senki sem ülhet a kerekesszékekben. A kerekesszéknek sima és szilárd talajon kell állnia. A vázat bármelyik kerék leszerelése előtt támassza alá borulás biztos módon, és biztosítsa a kerekesszék felborulás és elgurulás ellen.


A levételhez először nyomja be a patent (gyors kioldású) tengely kioldó gombját a kerékagy közepén és húzza kifelé a kereket a tengellyel együtt.

A felhelyezéshez nyomja be a patent tengely kioldó gombját, a kerékagyat a patent tengellyel együtt tolja be tengelyfészekbe ütközésig. Engedje el a kioldó gombot. Próbálja meg a kereket lehúzni, hogy meggyőződjön a megfelelő rögzítésről.

### ☞ FIGYELEM:

A meghajtó kerék felhelyezése után a tengelykioldó gombnak néhány milliméterrel ki kell állnia a kerékanyából.

Ügyeljen a kezére olyan szűken határolt szakaszon történő áthajtáskor, mint pl. épületek bejáratában, ajtókon, valamint szűk nyílásokon történő átkeléskor [1]. – A kéz sérülésveszélye!

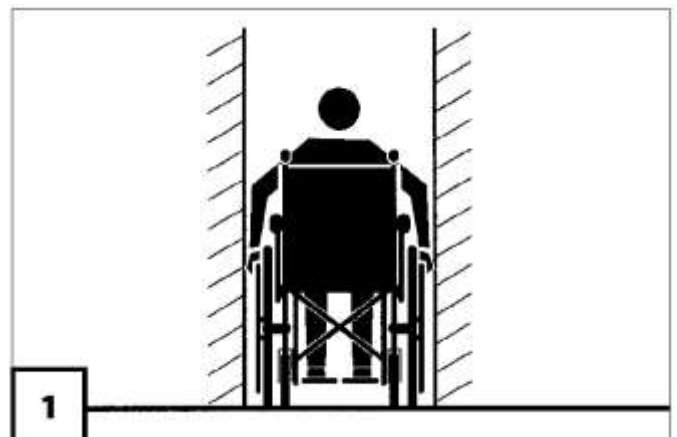


A sérült hajtókarikákat azonnal ki kell cserélni, hogy kizárja a kezek sérülését a hajtókarikán, és hogy a kerekesszék mozgását mindig kontrollálhassa.

## HASZNÁLATBAVÉTEL

A kerekesszék lakóterületen, valamint lakáson kívüli, biztonságos használatához szükséges az alapvető közlekedési helyzetek intenzív gyakorlása:

- elindulás,
- kormányzás,
- fékezés egyenes szakaszon, kanyarban, hátrafelé haladás sík talajon (esetleg segítővel).

Ismerje meg alaposan kerekesszéke menettulajdonságait, és óvatosan mérje fel korlátait. A kerekesszéket csak akkor szabad a megszokott környezetén kívül vagy közúti forgalomban használni, ha már biztosan uralja a kerekesszéket.


 Minden egyes használat előtt ellenőrizni kell:

- a fékek működését,
- a patent tengelyek reteszelését,
- kartámasz, lábtartó rögzítését.

 **Fontos:**

- Először kerülje az erősen emelkedő vagy csúszós területeket [1], a rossz útszakaszokat vagy a hasonló környezetet [2]. – Balesetveszély!
- A rendkívüli közlekedési helyzetben, pl. az emelkedőn, lejtőn, akadályon és rossz útviszonyok között történő haladás csak kísérő személy segítségével lehetséges.
- Nedves úttesten, laza vagy dőlésszöggel rendelkező talajon mindig csúszásveszély áll fenn, és a fékút általában a szokásosnál hosszabb.

- Kerülje a haladás hirtelen megváltoztatását emelkedőről és lejtőről vízszintes területre történő áthaladáskor, akadálynál és kanyarban történő haladáskor.
- Kanyar előtt mindig csökkentse a sebességet. Minél szűkebb a kanyar, annál kisebb sebességgel szabad behajtani. Kanyarban ne hajoljon ki.
- Nehéz forgalmi helyzetben vagy szűk helyiségben csökkentse a sebességet.
- Haladjon óvatosan laza, vizes, csúszós, jeges talajon.

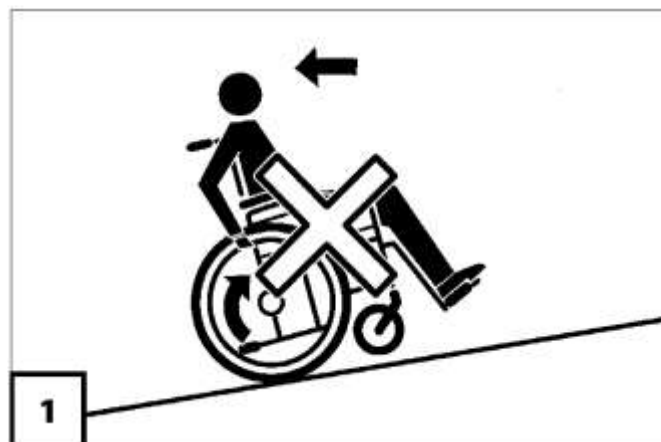

# HASZNÁLAT TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN

## Kerekesszékes hely

A kerekesszék leállítására kijelölt hely [1] szimbólummal van jelölve.



Helyezze el a kerekesszéket menetiránnyal szemben, a kijelölt helyen.

A kerekesszéket úgy kell elhelyezni, hogy a háttámla a kijelölt helyet határoló szerkezethez támaszkodhasson.

A kerekesszék egy további oldala egy másik határoló szerkezetre támaszkodjon, hogy a kerekesszék ne csúszhasson el baleset során vagy hirtelen fékezéskor.


### Fontos:

- Rögzítse a kerekesszéket a rögzítő fékkel.
- Amennyiben a jármű kijelölt helyén van rögzítő heveder, rögzítse magát és a kerekesszéket azzal is.

## KÖZLEKEDÉS A KÖZÚTI FORGALOMBAN

A kerekesszékesekkel közlekedő személy gyalogosnak minősül, rá a KRESZ gyalogosra vonatkozó szabályai vonatkoznak.

Rossz látási viszonyok és főként sötétség esetére javasoljuk működő világítóberendezés felszerelését és bekapcsolását, hogy jobban lásson és Önt is lássák [1].

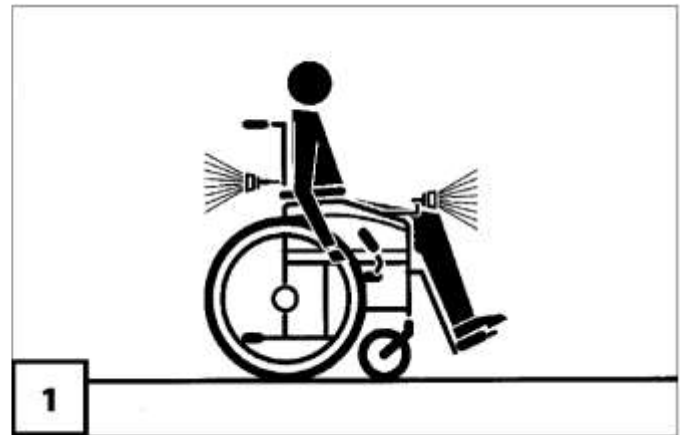

### Fontos:




- A közúti forgalomban történő részvétel esetén a felhasználó felel a jármű működés- és üzembiztos állapotáért.
- Közúti forgalomban történő közlekedés esetén be kell tartania az érvényes közúti forgalmi szabályokat.
- Sötétben történő közlekedés esetén lehetőleg világos, feltűnő ruhát, vagy láthatósági mellényt viseljen, hogy jobban lássák.
- Sötétben történő közlekedés esetén kerülje az úttestek és kerékpárutak használatát.
- Ügyeljen arra, hogy a fényvisszaverő prizmákat, matricákat ne takarja el a ruha vagy más, a kerekesszéken rögzített tárgy.

A lakásán kívüli közlekedés esetén a mindenkori időjárási és közlekedési viszonyoknak megfelelően közlekedjen.

## A KERESSZÉK, MINT ÜLÉS HASZNÁLATA GÉPJÁRMŰBEN

Gépjárművel történő közlekedés közben, pl. fékezéskor, karambol esetén lényegesen nagyobb, összetettebb erők lépnek fel, mint amelyekre általános esetben a kerekszékek tervezve vannak. A kerekszékek, vagy egyes elemei nem tudnak ezeknek az erőknek ellenállni.

A kerekszékek a mozgásában korlátozott személyeknek készülnek, mindennapjaik megkönnyítésére, mozgási képességeik javítására. A kimondottan gépjárműben történő szállításhoz tervezett kerekszék ezt a célt nem tudná kielégíteni, ahhoz túl súlyos és nehezen kezelhető lenne, amely nem csak nem könnyítené meg a rászoruló mindennapi életét, hanem még nehezebbé tenné.

 A legnagyobb biztonságot nyújtó megoldás a jármű, megfelelően rögzített és a járműbiztonsági előírásoknak megfelelő rögzítő, támasztó rendszerrel felszerelt saját ülése. Minden esetben javasoljuk, hogy a kerekszéket használó járműben való szállítása esetén a mozgáskorlátozott a kerekszékből üljön át a jármű saját ülésébe, rögzítse magát és a kerekszéket üresen szállítsák. Szükség esetén az átüléshez vegyen igénybe segítséget.

Amennyiben semmiképp nem megvalósítható a gépjármű saját ülésének használata, bizonyos feltételek mellett, az önhajtós kerekszék használható ülésként gépjárműben. Ezt a kerekszék adattábláján piktogrammal jelöltük.



### Fontos:

- A gépjármű legyen felkészítve a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak (ISO 10542) megfelelő WTORS (**W**heelchair **T**iedown and **O**ccupant **R**estraint **S**ystems) kerekszék lekötő heveder és utas rögzítő biztonsági öv rendszerrel.
- Csak az előző pontban leírt, jelölt helyeken rögzíthető a kerekszék a WTORS lekötő hevederekkel.
- A kerekszék és használójának rögzítése minden esetben feleljen meg a WTORS előírásainak, ajánlásainak.
- További kérdés esetén forduljon a kerekszék nagykereskedelmi forgalmazójához.

### FIGYELEM!

Baleset esetén a WTORS rendszer és megfelelő kerekszék kialakítás melletti biztonság sem egyenértékű a gépjármű saját ülésrendszerének biztonságával szemben. A kerekszék ülésként való használata a WTORS rendszerben is kockázatokat hordoz!



## KARBANTARTÁS, ÁPOLÁS

Az Ön kerekesszéke minimális karbantartást igényel. Ennek ellenére, mint bármilyen műszaki berendezés, rendszeres karbantartást, ápolás igényel. A nem megfelelő karbantartás, ápolás csökkenti a kerekesszékeének élettartamát és használhatóságát.

A zavarmentes használat érdekében tartsa be az alább felsorolt karbantartási ellenőrzési időpontokat.

### Fontos:

A kerekesszék hiányos ápolása és karbantartása vagy az ápolás és karbantartás elhanyagolása korlátozza a termékszavatosságot.

### Karbantartási terv

MIKOR	MIT	MEGJEGYZÉS
Használat előtt	<b>Általános</b> Ellenőrizni kell a kifogástalan működést.	Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig segítő személy végzi el.
Használat előtt	<b>Ellenőrizze a fékrendszer kifogástalan működését</b> Nyomja a fékkart ütközésig.	Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig segítő személy végzi el. A fékezett kerekek üzemi feltételek mellett már nem forognak. Ha mégis továbbforognak, akkor szervizzel kell megjavíttatni a fékeket.
Használat előtt	<b>Ellenőrizze a rögzítő fék kopását</b> A fékkart mozgassa oldalra.	A felhasználó vagy segítő személy végezheti el. Ha megnövekszik a fékkar játéka, forduljon haladéktalanul szakszervizhez. – Balesetveszély!
Használat előtt	<b>Ellenőrizze a háttámla tartócsövek és a keret-tartó csövek épségét</b>	Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig segítő személy végezze el. Haladéktalanul forduljon szakszervizhez deformálódás esetén, vagy ha repedések jelennek meg a hegesztési varrat területén. – Balesetveszély!
<b>Főként sötétben történő használat előtt</b>	<b>Ellenőrizze a fényvisszaverő prizma tisztaságát</b> (ha vannak)	Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig segítő személy végzi el.

<b>MIKOR</b>	<b>MIT</b>	<b>MEGJEGYZÉS</b>
<b>8 hetente</b> (a használat gyakoriságától függően)	<b>Ellenőrizze az abroncsprofil</b> Minimális profilmélység = 1 mm	A felhasználó szemrevételezéssel elvégezheti. Kopott kerékabroncs vagy a kerék sérülése esetén szakszervizzel javíttassa meg azt.
<b>8 hetente</b> (a használat gyakoriságától függően)	<b>A következő alkatrészeket néhány csepp olajjal kell lekenni</b> - a reteszelés mozgó alkatrészeit. - a fékkar csapágyat.	A felhasználó vagy segítő személy végezheti el. Az alkatrészekről olajozás előtt törölje le a fáradt olaj maradványait. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön felesleges olajmennyiség a környezetbe (pl. a ruhájára).
<b>8 hetente</b> (a használat gyakoriságától függően)	<b>Ellenőrizze valamennyi csavar szorosságát</b>	Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig segítő személy végzi el.
<b>6 havonta</b> (a használat gyakoriságától függően)	<b>Ellenőrizze a</b> - tisztaságot - az általános állapotot.	Lásd az ápolást. Lásd a javítást.
<b>A gyártó ajánlása:</b> 18 havonta (a használat gyakoriságától függően)	Biztonsági felülvizsgálat	A szakszerviznek kell elvégeznie.

## **Alkatrészek, tartozékok**

Egyes részek esetleges cseréjénél csak eredeti Meyra terméket vásároljon, melyet a szakszerviz a gyártótól rendel meg és szereli be. Csak olyan kiegészítéseket, és tartozékokat szerelhet a kerekesszékre, melyet a Meyra jóváhagyott.

## **Javítások**

Amennyiben kérdése merül fel, illetve segítségre van szüksége, forduljon a MEYRA szaküzlethez.

A tévedések elkerülése végett alkatrészeket rendeléskor adja meg a kerekesszék vázszámát, gyártási számát. A Szervizkönyvbe jegyeztesse be a dátumot és az elvégzett javításokat minden esetben.

## **Tisztítás**

### **! FIGYELEM:**

- A kerekesszéket soha ne tisztítsa magas nyomású berendezéssel, vagy bő vízzel, mert a zsírozott részek beázhatnak és korrózióhoz vezethet!
- A homok, tengervíz, útszóró só károsítja a tengelyeket és a csapágyakat. Ilyen körülmények közötti használat után tiszta vízzel mossa át a kerekesszéket és szárítsa meg.

### **Ülés- és háttámla kárpit**

A huzatokat meleg vízzel tisztítsa. Kímélő mosópor hozzáadása javasolt. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra.

## **Műanyag részek**

Ezeket általános használatú műanyagtisztítóval ápolja. Tartsa szem előtt a tisztítószer általános információit.

## **Fém elemek:**

Kímélő mosóporos nedves törlőruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A víz fényét megőrizheti, ha tisztítás után autóviasszal áttörli.

Amennyiben a felület megkarcolódik, akkor javítsa ki azt autó lakk felhasználásával.

## MŰSZAKI ADATOK

A <Műszaki adatok > összes adata az alapki-  
vitelre vonatkozik.

A teljes hossz függ a meghajtó kerekek  
helyzetétől és méretétől.

Amennyiben nincs más feltüntetve, akkor a  
méretek alapja  $\varnothing$  610 mm-es (24"-os) meg-  
hajtó kerék.

Mérettűrés  $\pm 1,5$  cm,  $\pm 2^\circ$ .

A szállítható csomagsúly számítása:

### ! FIGYELEM:

- A pótlólag felszerelt tartozék miatti  
plusz súly csökkenti a maximális  
terhelhetőséget!
- A megengedhető maximális testsúly  
megegyezik a max. terhelhetőséggel,  
ha a használó nem visz magával  
csomagot.
- Maximális csomagsúly 10 kg!

A szállítható csomagsúly kiszámítható a  
kerekeszék max. terhelhetőségéből, a max.  
csomagsúly adatból, és a használó  
testsúlyából.

Példák:

1. A használó testsúlya 122 kg. Az elméleti  
szállítható csomagsúly a max. terhelhetőség  
mínusz a használó testsúlya, azaz a példa  
szerint  $130-122=8$  kg. A 8 kg kevesebb, mint  
10 kg, tehát szállítható.

2. A használó testsúlya 95 kg. Az elméleti  
szállítható csomagsúly a max. terhelhetőség  
mínusz a használó testsúlya, azaz a példa  
szerint  $130-95=35$  kg. A 35 kg több, mint a  
max. csomagsúly, tehát nem szállítható.

## Méretetek, adatok

Teljes hossz lábtartókkal (min/max):..... 102/108 cm  
Hossz (Lábtartók nélkül):..... 77/83 cm  
Beülő szélesség: .....38, 40, 43, 46, 48, 51 cm  
Teljes szélesség: ..... beülő szélesség + 18 cm  
Teljes magasság: .....96 cm  
Tolókar magassága: .....90 cm  
Ülésmélység: .....43 cm  
Elülső ülés magasság, ülőpárna nélkül: .....47 cm  
Kartámasz magassága az ülésfelülettől: .....23 cm  
Háttámla magasság:.....42 cm  
Talptámasz ülésig, ülőpárna nélkül (alsó lábszár hossza)(min/max): ..... 38/50 cm

Teljes hossz lábtartók nélkül: .....75 cm  
Összecsukott szélesség: .....28 cm  
Összecsukott magasság:.....min 96 cm

Kis kerék: ..... Ø 180 x 40 mm (7") PU  
Meghajtókerék: ..... Ø 610 mm (24 x 1 3/8") PU  
Hajtókarika:..... Ø 535 mm


Max. akadálymagasság (beállított lábtámaszmagasság): .....0-tól 100 mm-ig  
Minimális fordulási sugár: ..... 1250 mm  
Engedélyezett emelkedő: ..... 4,5° (8 %)  
Engedélyezett lejtő: ..... 4,5° (8 %)  
Engedélyezett keresztirányú lejtő: ..... 4,5° (8 %)  
Borulás elleni statikai védelem az összes irányba: ..... 6° (10 %)

Környezeti hőmérséklet: ..... -25 °C-tól +50 °C-ig  
Tárolási hőmérséklet: ..... -40 °C-tól +65 °C-ig

Max. terhelhetőség (beleértve a szállított csomagot is): .....130 kg  
Max. csomagsúly: .....10 kg  
Önsúly. .... min. 17,5 kg


Szállítási súly (lábtámaszok, oldaltámaszok, párna, meghajtókerekek nélkül): ..... min. 9 kg  
Legnehezebb egyedi összetevő súlya (meghajtó kerék). .....2,5 kg

## A kerekesszéken elhelyezett matricák jelentése

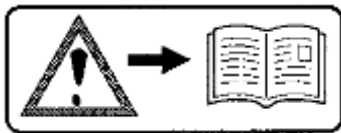

### Figyelem!

A használati útmutatókat, valamint a mellékelt dokumentációkat olvassa el.

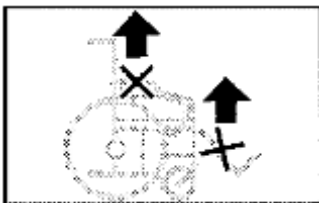

A kerekesszéket ne emelje meg a kartámaszoknál vagy a láb-támaszoknál fogva!

A levehető alkatrészek nem alkalmasak felfüggesztési pontként!


## A típustáblán lévő szimbólumok jelentése



Gyártó



Rendelészám

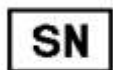

Sorozatszám/gyártási szám




Gyártás dátuma (év-naptári hét)



Megengedett maximális terhelhetőség



Engedélyezett összsúly

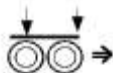

Engedélyezett tengelyterhelés



Engedélyezett emelkedő



Engedélyezett lejtő

max. ... km/h

Engedélyezett max. sebesség



A termék gépjárműben használható ülésként



A termék gépjárműben nem használható ülésként

# JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt az alábbiakkal egészítjük ki.

## A termék jótállási ideje 2021.01.01-től a termék eladási árához kapcsolódik

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

## Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

## A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetészerű használatól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

## Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

## Javítási igény

A fogyasztó a javítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

## Javítások jótállása

A javítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

#### **Vitás esetben**

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

#### **Szavatosság**

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013./V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli.

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A termék teljesíti az EU 2017/745 orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendelet előírásait.

#### **Forgalmazza és javítja Magyarországon:**

##### **MEYRA-ORTOPEDIA Kft.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Tel/Fax: +36-26-886-244

E-mail: info@meyra.hu, szerviz@meyra.hu

Internet: <http://www.meyra.hu>

##### **Gyártó:**

##### **Meyra GmbH. & Co. KG.**

D-32689 Kalletal-Kalldorf, Meyra Ring 2.

Tel: (0049) 57 33 922 0

E-mail: info@meyra.de

Internet: [www.meyra.de](http://www.meyra.de)

**A Használati útmutatót, Jótállási jegyet és a Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**



# JÓTÁLLÁSI JEGY

Budget 9.050

<b>Garanciális javítások</b> Hiba jellege:  Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője:  Aláírás: _____ Dátum: _____	<b>Garanciális javítások</b> Hiba jellege:  Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője:  Aláírás: _____ Dátum: _____
<b>Garanciális javítások</b> Hiba jellege:  Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője:  Aláírás: _____ Dátum: _____	<b>Garanciális javítások</b> Hiba jellege:  Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője:  Aláírás: _____ Dátum: _____

Az eszköz sorszámja:

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása:



<b>Meyra-Ortopedia Kft.:</b> 2000 Szentendre, Kalászi út 3 Telefon: <b>06 (1) 230 0593</b> <a href="mailto:szerviz@meyra.hu">szerviz@meyra.hu</a>	<b>SZERVIZKÖNYV</b>	
	Eszköz típusa:	Önhajtós kerekesszék
	Megnevezése:	<b>Budget 9.050</b>
	Sor- / Vázszám:	
Név:	TAJ szám:	
Kiadás jogcíme: Ált. / Üb. / Kgy / Egyedi	TB támogatással javíthatóság <b>utolsó napja:</b>	Kiadás napja + kihordási idő
Kiadta:	Kiadás időpontja:	

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás nincs.

A Szervizkönyv javítást végző munkatársunknak történő átadása a vényes javítás elvégzésének feltétele!

**Az eszközön a Meyra-Ortopedia Kft. alkalmazottain kívül javítást más nem végezhet!**

Sorsz.	Dátum	Hiba jellege	Jav. nettó díja	Jav. bruttó díja	Javítást végző
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

## VÉNY FELÍRATÁSI SEGÉDLET JAVÍTÁSHOZ

### TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

- A jótállási idő (1 év) lejárt.
- Orvosi vény megléte.
- Legyen megállapítható, hogy a gyógyászati segédeszköz a javítást igénylőnek lett társadalombiztosítási támogatással felírva és kiszolgálva.
  - A használati útmutató megléte, benne az eszköz gyári száma és a jótállási jegy fejlécében és/vagy a szervizkönyvben a jogosult neve, TAJ száma, a kiszolgálás dátuma, **vagy**
  - kórházi zárójelentés vagy ambuláns lap megléte, amin a felíró orvos a segédeszközt felírta, a kiszolgálás kori számla vagy egyéb okirat, amin a beteg neve és a felírt eszköz azonosítása együtt szerepel, **vagy**
  - OEP igazolás, hogy a javítást kérőnek ki lett szolgálva az adott eszköz a kiszolgálás dátumával.
- Szervizkönyv megléte, benne az eddigi javításokkal és azok költségével.
- Az eszköz legyen azonosítható (típus tábla, gyári szám megléte magán az eszközön).

### JAVÍTÁSI VÉNY

#### **Ki írhat fel javítási vényt?**

A 14/2007.(III./14.) EüM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése szerint:

“A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a **kezelőorvosnak** vagy a **házi orvosnak** vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.”

#### **Mit kell tartalmaznia a vénynek?**

**Eszköz pontos megnevezése, Gyártási száma (A)**  
**Hiba jellege (B)**

**(A) Megnevezés** a társadalombiztosítással rendelhető gyógyászati segédeszközök jegyzékében (tb. lista) szereplő módon és az eszköz gyártási száma.

**(B) Hiba jellege** az OEP által meghatározottak szerint:

- Vázjavítás
- Fék jav., csere, beállítás
- Karfa, kárpit csere
- Kerék javítás, csere
- Gumi csere

Amennyiben több hiba is javítást igényel, azokat egy vényre kell felírni.

**Javasoljuk**, hogy a vény felírás előtt a vegye fel a kapcsolatot a Meyra-Ortopedia Kft. szervizével és kérjen segítséget a hiba jellegének meghatározásához.

#### **Példák:**

„Budget 9.050 önhajtós kerekesszék  
Gy.sz.: 6209187  
Vázjavítás”

„Budget 9.050 önhajtós kerekesszék  
Gy.sz.: 15005616  
Fék jav., csere, beállítás”

### HOL ÉS HOGYAN VÁLTHATÓ BE A JAVÍTÁSI VÉNY

A felírt vény birtokában kell jelentkezni a **Meyra-Ortopedia Kft.** ügyfélszolgálatánál vagy szervizénél (e-mail: [info@meyra.hu](mailto:info@meyra.hu); [szerviz@meyra.hu](mailto:szerviz@meyra.hu); telefon: 06-1-230-0593; 06-30-962-7624). A vényt nem kell postázni, azt a javítás során veszik át a munka elvégzésekor.