


TouchCare Nano CGM (szenzor és távadó) felhelyezési útmutató


Szenzor felhelyezése

A szenzor steril, egyszerhasználatos csomagolásban kerül forgalmazásba. A szenzor a behelyező eszközbe (applikátorba) van integrálva, így külön behelyező eszközre nincs szükség a felhelyezéshez.

Hajlítsa meg az applikátor biztonsági reteszét balra vagy jobbra mozgatva és törje le. A biztonsági retesz akadályozza meg a belövő gomb véletlenszerű megnyomását.

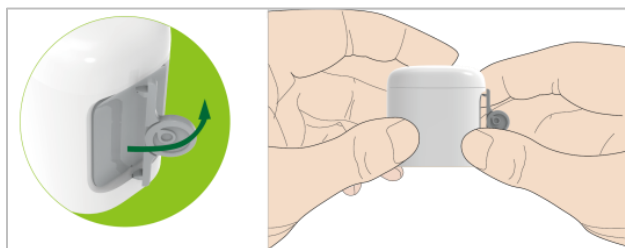


Fogja meg az applikátort és távolítsa el mindkét védőfóliát a szenzor aljáról. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a ragasztós felülethez.

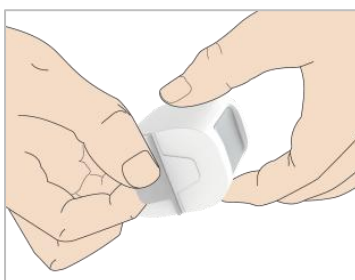


Tisztítsa meg a felhelyezési területet alkoholos törlőkendővel és hagyja teljesen megszáradni a levegőn, mielőtt felhelyezi a szenzort.

Az applikátort enyhe nyomással, a kiválasztott bőrfelületre teljesen felfektetve használja, így elősegítve a szenzor pontos és megfelelő behelyezését. Helyezze egyik ujját az applikátor tetejére, hüvelykujjával határozottan nyomja meg a szürke (belövő) gombot, amíg kattató hangot nem hall, ami a szenzor belövését jelzi.

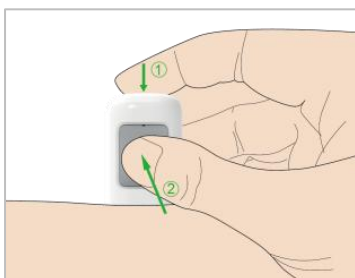

Emelje el az applikátort függőlegesen a testétől. Csak a szenzor aljzata marad a bőrön.

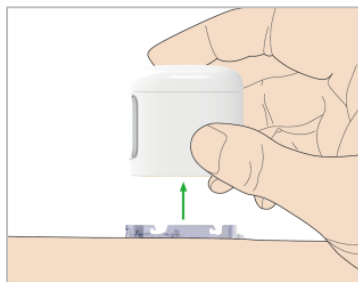


Ellenőrizze, hogy a szenzor aljzata szorosan tapad-e a bőrhöz.

Távadó csatlakoztatása

Győződjön meg arról, hogy a távadó alján lévő arany színű csatlakozó egy vonalban van a szenzor aljzatán lévő elektronikai csatlakozóval. Tartsa a távadót párhuzamosan a szenzor aljzatával, majd pattintsa a helyére.



A távadó csatlakoztatása után húzza végig az ujját az összeszerelt szenzor/távadó egység oldalain, és ellenőrizze, hogy a távadó megfelelően rögzült-e a szenzor aljzatán lévő kapcsokba. Ha bármilyen ütközést érez, az azt jelenti, hogy a távadó nem rögzült teljesen a helyére. Nyomja le határozottan a távadót a biztonságos csatlakozáshoz.

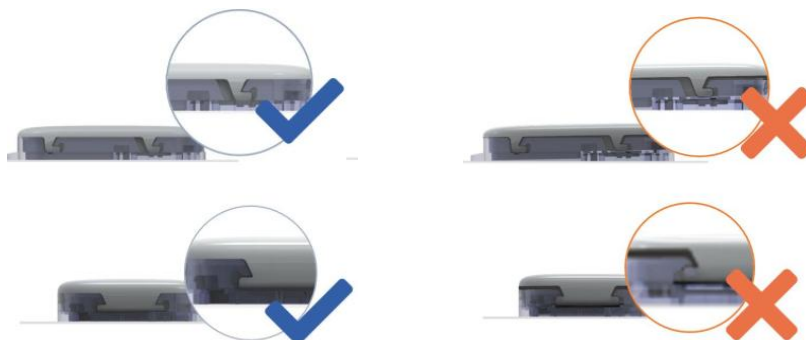

A távadó jelzőfénye zölden villog, háromszor, ha a csatlakozás sikeres, majd fél percen belül további hat alkalommal, ha a rendszerellenőrzés sikeres.

Húzza végig az ujját a szenzor körüli ragasztó teljes hosszán, hogy kisimítsa az esetleges ráncokat, így elősegítve a stabil rögzítést.



Javasolt a szenzor csomagolásában található fedőtapasz használata a stabil rögzítéshez és a szenzor helyén tartásához.


Szenzor/távadó eltávolítása a bőrről

Óvatosan emelje fel a ragasztószalag szélét a bőrről, és távolítsa el a szenzor/távadó egységet.



Távadó leválasztása az elhasznált szenzorról

Hajtsa le és törje le a szenzor aljzatának fülecskáját, hüvelykujjal kissé nyomja előre a távadót vízszintes irányban, hogy leváljon az aljzatról. Ezt követően óvatosan vegye ki a távadót a szenzorból. Az elhasznált szenzort a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.

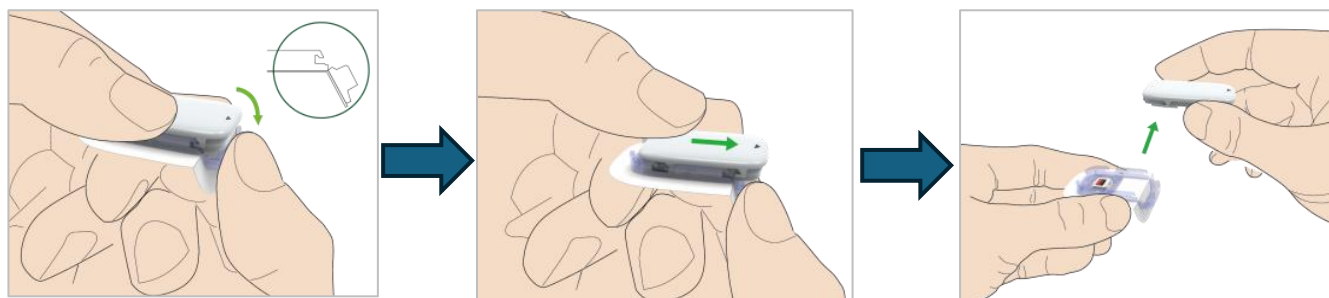

NE dobja ki a távadót, mivel az újra felhasználható.