

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

### Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az alumíniumból készült, könnyű, több fokozatban állítható járóbot, mint gyógyászati segédeszköz kizárólag az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható (lásd használati útmutató). A bot használata segíti a postoperatív állapotokból való gyógyulást. Krónikus ellátásban, pedig növeli a páciens önállóságát.

### Indikáció:

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

### Ajánlás:

Állítható járóbot a meggyengült, fájdalmas vagy bizonytalan alsó végtagot részlegesen tehermentesíti és járás stabilitást ad.

### Kontraindikáció és figyelmeztetés:

Kérjük amennyiben úgy érzi, a segédeszköz segítségével is bizonytalan a járása, szédül, egyensúlyában nem biztos, ne használja a terméket és kérjen segítséget! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a botvég gumi ép-e, és ha nem, azonnal cserélje ki! A kopott, átszakadt gumi miatt megcsúszhat a bot, és fennáll az elesés veszélye! Kérjük csúszós, jeges, fagyott úton fokozott óvatossággal használja a terméket! A termék használata előtt és a megfelelő beállításhoz kérje ki kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó segítségét!

### Használati útmutató:

A magassági fokozatot a járóbot felső csövén található csapos külső rögzítő gyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintással állítható be. A járóbot rúd irányú terhelhetősége: max. 110 kg.

A járóbot használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A járóbot optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magásra a vállat. A járóbot mindig a jó oldali kézben fogva tesszük előre, ezután a sérült, gyenge lábbal lépünk. Amennyiben két botra lenne, szükségünk a két botot tesszük előre, ezután a sérült, fájós lábbal, majd a jó lábbal lépünk. Sikos, pl. jeges úton, a járóbottal fokozott óvatossággal közlekedjünk. A botvég gumi elhasználódása esetén azt ki kell

### Használati útmutató

#### Járóbotok

(Alapvető UDI-DI: 5996320STIK19U)

cserélni. A botvég gumik a kiszolgálási helyen és gyógyászati segédeszköz üzletekben kaphatók.

#### Tisztítási útmutató:

Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha ruhával áttörölve.

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



RS-11



RS-13



RS-14



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz