

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### B-4263

#### Összecsukható, állítható járókeret



#### 1. Felhasználási terület

A B-4263 állítható magasságú, összecsukható járókeret, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás járásbiztonsága többirányú megtámasztást igényel.

A járókeret állíthatósága a rehabilitációs változásoknak megfelelően használható fel, de az ismételt beállítás (átállítás) szakorvos, vagy gyógytornász tanácsa alapján történhet.

#### 2. Méretek, műszaki adatok

Jellemző/méret	Gy/I.	Gy/II.	I.	II.
Markolat magasság (mm)	420-520	515-615	755-855	765-945
Szélesség	530	530	530	530
Max. terhelhetőség	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Tömeg	1,7 kg	1,9 kg	2,5 kg	3 kg

#### 3. Használat

A járókeret használatánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni. A járókeret használatba vételéhez nyissuk szét a járókeret két szárnyát, amíg az oldalkereteket összekötő, egymásba csúszó felső csövön lévő rugózott csap a helyére nem ugrik (I., II. méret).

Vegyük ki a keresztmervítő csövön található két darab csapos rugózó műanyag gyűrűt és helyezzük az első lábakon lévő furatokba, evvel rögzítjük a keresztmervítő csövet. Győződjünk meg arról, hogy mindkét csapos gyűrű utközéig be van tolva. A járókeret összecsukása - a csapos gyűrűk eltávolítását követően - az oldalkereteket összekötő, egymásba csúszó felső csövön lévő rugózott csap benyomásával (I., II. méret) - lehetséges.

A magassági fokozat a járókeret láb részén található egy-egy rugós csap benyomásával, majd a két egymásba csúszó cső elmozdítása után a kívánt magassági mérethez tartozó furatba a csapot visszaengedve állítható be. Mind a négy lábat azonos módon egyforma magasságra kell beállítani, ezt segíti az állító furatok melletti sorszám.

A járókeret magasságát úgy állítsuk be, hogy a keretben állva a könyök kissé hajlított legyen, tenyerünkre támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat.

A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

**Ajánlatos a járástanulást az alábbiak szerint kezdeni:** a lépés első fázisaként előre tesszük a járókeretet féllépésnyire, majd a beteg, gyenge, fájós lábbal közelépünk úgy, hogy közben függőlegesen rátámaszkodva a keretre (tehermentesítve a fájós lábat) a jó lábbal kissé eléje lépünk.

Az I., II. felnőtt méretű keret első lábain lévő, a keresztmervítő csövet rögzítő csapos gyűrűt a furatokból kivéve (és tárolás céljából a keresztmervítő, erre a célra kialakított furatába helyezve) a járókeret lépegető funkcióval bővül.

Ez esetben ajánlatos a járástanulást a következő szerint kezdeni: a lépés első fázisaként a beteg végtag felőli oldalon lévő keret oldalt kissé megemelve előre helyezzük a lábakat, majd mellé lépünk miközben testsúlyunkat függőlegesen áthelyezzük a keret ezen oldalára. Ezután az ellenkező oldalt megemelve kissé a másik elé helyezzük a járókeret ezen oldalát, majd a jó végtaggal mellé lépünk. Végül a sorrendet betartva lépegetünk



REHAB Zrt.  
2000 Szentendre, Kalászi út 3 A MEYRA tagja  
Telefon: +36-26-886-288  
info@rehabrt.hu

#### FIGYELEM!

- A járókeret oldalirányban nem terhelhető!
- A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot.
- A járókeret szétnyitása után ellenőrizni kell a rugós csap helyreugrását.
- A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn.
- Csak az előírt botvéggumi (belső átmérő: 28 mm) használható.

- A magassági méret szabályozására szolgáló bármely rugós csap meghibásodása esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- A műanyag markolat megsérülése esetén a járókeret nem használható. Csere szükséges!
- A csuklórészek közti rugós csap megsérülése, meghibásodása esetén a járókeret nem használható! A szerkezetet ki kell cserélni! Összecsukódás veszélye áll fenn.
- A járókeret túlterhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.
- *Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási – vagy kiszolgálási helyén lehetséges.*

#### **4. Karbantartás, tárolás**

##### **4.1 Karbantartás**

A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsukást biztosító szerkezet, valamint az összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, után húzása szükséges.

##### **4.2 Tisztítás**

A járókeretet karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni. A bot minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető. Ajánlatos időnként a markolatot a ráakódott szennyeződésektől megtisztítani.

##### **4.3 Tárolás**

A járókeret jellegének megfelelő függőleges helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni, illetve összecsukva bármely módon elhelyezhető. Gyakoribb szállítás esetén az elhelyezést megkönnyíti az összecsukott állapot.

##### **4.4 Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált járókeretet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

#### **5. Jótállás**

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

##### **A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik**

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

##### **A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben**

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetészerű használatól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

##### **Tartozékok jótállása**

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mi vel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

##### **Javítási igény**

A fogyasztó a javítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiusuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.