

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az alumíniumból készült, könnyű, több fokozatban állítható járókeret, mint gyógyászati segédeszköz kizárólag az előírásoknak megfelelő méretbeállításal használható (lásd használati útmutató). A járókeret használata segíti a postoperatív állapotokból való gyógyulást. Krónikus ellátásban, pedig növeli a páciens önállóságát.

Indikáció:

Alsóvégtagok izületeinek kopásos fájdalma, gyulladás, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

Ajánlás:

Állítható járókeret olyan személyek részére javasolt, kiknek alsó végtagjuk tehermentesítése ilyen módon megoldható, valamint járás-biztonsága javítható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van. Különösképpen javasolt alsó végtagok izületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, bénulása esetén.

Kontraindikáció és figyelmeztetés:

Kérjük amennyiben úgy érzi, a segédeszköz segítségével is bizonytalan a járása, szédül, egyensúlyában nem biztos, ne használja a terméket és kérjen segítséget! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a botvég gumi ép-e, és ha nem, azonnal cserélje ki! A kopott, átszakadt gumi miatt megcsúszhat a bot, és fennáll az elesés veszélye! Kérjük csúszós, jeges, fagyott úton fokozott óvatossággal használja a terméket! A termék használata előtt és a megfelelő beállításához kérje ki kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó segítségét!

Használati útmutató:

A magasság a járókeret felső csövein található csapos külső rögzítő gyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintással állítható be. A beállítást minden lábon egyformán kell elvégezni. Maximálisan 95 cm állítható be, felnőtt magassághoz 6 fokozatban. A járókeret terhelhetősége: max. 110 kg.

A járókeret használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A járókeret optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat. A járókeretet felemelve előre - nem túl messzire - tesszük, ezután rátámaszkodva lépünk.

Használati útmutató Járókeretek (Alapvető UDI-DI: 5996320WFRA18M)

Síkos, pl. jeges úton, a járókerettel fokozott óvatossággal közlekedjünk!

A botvég gumik elhasználódása esetén azokat ki kell cserélni.

Tisztítási útmutató:

Semleges mosószerral, langyos vízzel lemosva, majd puha ruhával áttörölve. A járókeret jellegének megfelelően függőleges helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.




RS-02



RS-03



RS-04

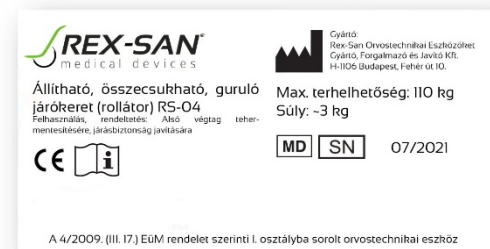

A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz