

☺ ☹ **Állítható, összecukható kerekes járókeret**



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

1. Felhasználási terület:

A B-4261 típusú állítható, összecukható kerekes járókeret olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.

A járókeret elején lévő 2 db műanyag kerék a továbbítást és a haladást könnyíti meg, míg gumivégek a biztonságos támaszkodást segítik elő.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

2. Jellemző méretek, adatok

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

A két alaplámpában készülő járókeret fogantyúinak magasságát 25 mm-enként lehet beállítani:

felnőtt méret esetén: 785 mm – 1050 mm -ig

gyermek méret esetén: 640 mm – 810 mm -ig

Tömeg: 5.4 kg

Beállítás a következőképpen történik:

A fogantyútartó csövek végeinél található műanyag forgatógombos csavarokat ki kell lazítani (kb. 20 mm), majd a fogantyúkat a megfelelő magassági méretre kell állítani. A fogantyúkat a csavarok visszacsavarásával fixen, mozgás- kotyogásmentesen kell rögzíteni. A művelet végén a csővégeket lezáró műanyag gyűrűket vissza kell tolni a helyükre.

FIGYELEM!

Amennyiben a forgatógombos csavarokat túlságosan vagy teljesen kicsavarták, a visszacsavaráskor ügyelni kell arra, hogy a fémgyűrű menetes furata és a keretcső furata fedésbe kerüljön!

3. Használat

A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) utasítását kell figyelembe venni. **A járókeret beltéri használatra alkalmas.**

A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy kell beállítani, hogy a keretben állva, a könyökök kissé hajlítva legyenek, a tenyérre támaszkodva viszont a könyökök kiegyenesedjenek, de ne nyomják fel magásra a vállakat.

A járástanulást az alábbiak szerint kell kezdeni:

a lépés első fázisaként kissé megemelve félépésnyire előre kell tolni a kerekeken a járókeretet és meg kell támasztani a gumivéges lábakon. Majd a beteg, gyenge, fájós lábbal közé kell lépni úgy, hogy közben függőlegesen mind két kézzel a keretre kell támaszkodni (tehermentesítve a fájós lábat) és a jó lábbal kissé eléje kell lépni.

A járókeret összecukható a merevítő rudazat (krómozott) középső csukló részének megemelésével. A szétnyitás a merevítő rudazat kiegyenesítésével és végpontig történő lenyomásával történik

A járókeret a magassági méretének 1/10-re csukható össze.

FIGYELEM!

- **TILOS a jó végtaggal kezdeni a járást**
- **A járókeret oldalirányú terhelése TILOS!**
- **A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni.**
- **A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.**
- **Soha ne fogja a markolatot, vizes, zsíros, krémes kézzel!**
- **Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne érjenek az összecukukódó merevítők közé! Balesetveszély!**
- Csak az előírt botvéggumi használható belső méret Ø 22 mm.
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
- A magassági méret szabályzására szolgáló csavarok meghibásodása esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült, elgörbült alkatrészt ki kell cserélni!
- A műanyag markolat megsérülése esetén a járókeret nem használható! A markolat csere szükséges!
- A kerekeket külső felületük roncsolódása esetén ki kell cserélni – billenés veszély, elakadás, bukásveszély miatt.
- A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Időnkénti meghúzásuk szükséges.
- A keret szétnyitásakor a merevítők rögzítő csuklószerkezete a végpontig (pattintásig) ki legyen nyitva. Rosszul kinyitott járókeretet használni TILOS!

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető. Ajánlatos időnként a műanyag markolatot a ráakadó szennyeződésektől megtisztítani.

4.2. Tárolás

A járókeretet összecsucokott állapotban fektetve lehet tárolni.

4.3. Karbantartás

A járókeret rendszeres karbantartást nem igényel, de használatkor esetlegesen meglazuló csavarokat meg kell húzni!

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

5. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania.

A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli.

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szerviz egységek:**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606;	Tel.: 06/20 950-4735
-----------------------------	----------------------	----------------------

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137;	Tel.: 06/20 952-2135
--------------------------------	----------------------	----------------------

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7190
-----------------------------------	---------------------

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.	Tel.: +36-26-886-244
--------------------------------	----------------------

JÓTÁLLÁSI JEGY**Eladószerv tölti ki!**

A vásárlás napja:

20..... hónap

(hónap betűvel)

aláírás (P.H.)

Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3 Típus: B-4261 Gyártási szám: Kelt:.....20...-.....hónap Eladó:	Bejelentés 3 Megjavítás időpontja: Bejelentett hiba Elhárított hiba A jótállás új határideje Munkalapszám: Kelt:..... 20..... Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI 2 Típus: B-4261 Gyártási szám: Kelt:.....20...-.....hónap Eladó:	Bejelentés 2 Megjavítás időpontja: Bejelentett hiba Elhárított hiba A jótállás új határideje Munkalapszám: Kelt:..... 20..... Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI 1 Típus: B-4261 Gyártási szám: Kelt:.....20...-.....hónap Eladó:	Bejelentés 1 Megjavítás időpontja: Bejelentett hiba Elhárított hiba A jótállás új határideje Munkalapszám: Kelt:..... 20..... Aláírás (P.H.)

Gyártó:**REHAB Zrt.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

info@rehabrt.hu

