

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4200/P

ÖNHAJTÓS KEREKESZÉK

(STANDARD, TH, TL kivitelben)



Figyelem

Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy:

- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!
- Mind a neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás!

A kerekesszék - mint gyógyászati segédeszköz - **szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata** és kötelessége. Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabályok által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a kerekesszék jótállásában javítandó hibájának.

Bármilyen javítással kapcsolatos kérdés esetén forduljon a használati útmutató végén található **Szervizkönyvben felsorolt szerződött javító partnerünkhöz.**

TARTALOM

I.	Bevezetés	3
II.	Felhasználási terület	3
III.	Élettartam	3
IV.	Biztonsági utasítások	4
V.	Szerkezeti felépítés	5
VI.	Összeszerelés	6
VII.	Beállítások	7
VIII.	Kezelés	9
IX.	Akadályok leküzdése	12
X.	Karbantartás és Ellenőrzés	13
XI.	Műszaki jellemzők	14
XII.	Jótállás	15

Mellékletek:

Vényfelíratási segédlet

Szervizkönyv

Jótállási jegy

I. BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Rehab Zrt. és a SUNRISE MEDICAL kooperációs gyártásában készülő B-4200/P típusú önhajtós kerekesszéket. A SUNRISE MEDICAL és a Rehab Zrt. ISO 9001 minősített vállalat, melynek köszönhetően a minőség, a tervezés és a gyártás minden fázisában biztosított.

A kerekesszék egy orvostechikai eszköz, melynek használatához elengedhetetlen jelen útmutató áttanulmányozása, és mint műszaki eszköz a rendszeres ápolása, karbantartása, ill. karbantartatása. A szakszerűtlen használat veszélyeket rejt magában.

A használati útmutató képei illusztrációk, ara szolgálnak, hogy szemléletesen tudjuk bemutatni Önnek a kerekesszék használatát. Előfordulhat, hogy az Ön kerekesszéke valamelyest eltér az itt bemutatott képektől, de ez nem befolyásolja a Használati Útmutatóban leírtak érvényességét, illetve a termék használatát.

A használati útmutató a legfrissebb műszaki adatokat és termékinformációkat tartalmazza, amelyek a kiadás pillanatában, érvényben voltak. Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

A gyártó nem felelős olyan sérülésekért és/vagy károkért, amelyek olyan emberi mulasztásokra vezethetők vissza, amikor a használati útmutató előírásait, figyelmeztetéseit és felhívásait nem tartották be, illetve olyan emberi hiba okozta sérülésekért és/vagy károkért, amelyek egyébként a kerekesszék jó szándékú használata és/vagy elvárható gondosság mellett keletkeznek.

II. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A B-4200/P önhajtós kerekesszék elsősorban **beltéri** használatra készült, hogy járásképtelenség, illetve erősen korlátozott járásképeség esetén az alapvető szükségletek szintjén biztosítsa a lakásban történő mozgás lehetőségét. A kerekesszék főként **rövid idejű** használatra megfelelő, de kialakítása lehetővé teszi, hogy igény esetén **akadálymentesített** kültéri környezetben, rövid távon elérhesse a lakás közelében lévő helyeket, melyek az életviteléhez szükségesek.

A kerekesszék kizárólag egy, az ülésen helyet foglaló, ülő személy szállítására alkalmas, felszerelt lábtartóval és oldaltámasszal. Nem használható más eszköz, állat, személy vontatására vagy szállítására.

FIGYELEM!

- A kerekesszék tulajdonságait, csak akadálymentesített, sík, szilárd talajon való használat esetén őrzi meg. Ettől eltérő használat esetén a kerekesszék sérülhet, meghibásodhat.
- Tilos a kerekesszék használata homokban, vizes fűvenyen, sárban, vízben, hóban. A kerekesszék károsodása mellett ezeken a helyeken előfordulhat, hogy Ön a talaj lazasága miatt nem tudja elhagyni az adott helyszínt!

III. ÉLETTARTAM

A kerekesszék élettartama nagymértékben függ a használat gyakoriságától és körülményeitől. Rendeltetészerű használat, az előírt karbantartások elvégzése, szakszerű javítás és gondos ápolás, kezelés mellett a kerekesszék átlagos, várható élettartama 4 év.

Gyári pótalkatrészek használatával a termék élettartama meghosszabbítható.

IV. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kerekesszék tervezésénél és gyártásánál a maximális biztonságot tartottuk szem előtt. A kerekesszék valamennyi nemzetközi biztonsági előírás követelményeinek megfelel, vagy meghaladja azokat. A nem rendeltetésszerű használat azonban balesetekhez vezethet, ezért a következő utasításokat minden esetben be kell tartani:

- **FIGYELEM!** A kerekesszék javítását, módosítását csak szakember végezheti.
- Általában akadálymentesített, sík, kemény burkolatú talajon közlekedjen!
- Akadályokon történő áthaladáshoz mindig vegyen igénybe segítőt!
- Sötétben történő közlekedésnél mindig viseljen világos ruházatot, fényvisszaverő mellényt!
- Az első használatkor legyen különösen óvatos, ismerje meg jól a kerekesszék tulajdonságait, viselkedését! Figyelje meg, hogy a súlypontjának megváltozása hogyan hat a kerekesszékre. Gyakorolja a használatot sík terepen, lejtőn és emelkedőn egyaránt.
- **FIGYELEM!** A fékek az álló kerekesszék rögzítésére szolgálnak. A mozgó kerekesszék lefékezésére nem használhatók! Egyenetlen vagy lejtős talajon történő megállásnál mindig használja a fékeket! Minden esetben mindkét oldalon rögzítse a fékeket.

FIGYELEM! Ne tegye az ujját a fékek és a kerekek közé!

- A kerekesszéket csak jól rögzített pontoknál emeljék. A kerekesszéket csak üres állapotban szabad emelni. Amennyiben a beteg a kerekesszékben ül, csak tolni szabad!
- Használat előtt ellenőrizze a követezőket: Gumik, guminyomás (tömlős kerékekkel szerelt változatok esetén) fékek. A fékek nem működnek megfelelően alacsony guminyomás esetén, illetve ha a fékek és a kerekek közötti távolság túl nagy.
- **A kerekesszék maximális terhelhetősége 125 kg.** Ne terhelje túl a kerekesszéket hátizsák, gyermek vagy állatok szállításával.
- 10%-nál meredekebb lejtőn vagy emelkedőn ne használja a kerekesszéket.
- Tilos járműben ülésenként használni, ülésenként lekötöni!
- Amennyiben a kerekesszéket hosszabb ideig napon tárolják, a felületek felforrósodhatnak, és ez égési sérülésekhez vezethet!
- Ügyeljen rá, hogy a kerekesszék valamennyi kereke a földön legyen.
- Ne használja a kerekesszéket sérült hajtókarikával.
- Ne használja a kerekesszékét annak bármely meghibásodása esetén.
- Ügyeljen arra, hogy az ülésről ne lógjon le ruhadarab, sál, táska stb.
- TILOS a kerekesszékben dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni!
- A kerekesszék gumi és műanyag alkatrészeket tartalmaz, ezeket a magas hőmérséklet maradandóan károsíthatja. Ezért kérjük, ne állítsa hőforrás, kályha, konvektor közelébe!
- TILOS másik személy vagy állat szállítása!
- TILOS gyúlékony és robbanó anyagok szállítása!
- TILOS bármely eszköz vagy állat vontatása!
- TILOS a kerekesszéket megtévesztő világítással ellátni.
- TILOS a kerekesszéket alkoholos állapotban használni.
- TILOS a hajtókarikát menetközben elengedni.
- TILOS 3 cm-nél magasabb akadálnak nekihajtani, arra felugratni.
- Bármilyen rendellenességet észlel a kerekesszék használata során, azonnal forduljon a legközelebbi szakszervizhez!

V. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS



1. ábra

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Tolókar | 7. Váz |
| 2. Háttámla | 8. Bolygó kiskerék |
| 3. Kartámasz | 9. Ülés |
| 4. Hajtókerék | 10. Lábtartó |
| 5. Hajtókarika | 11. Saroktámasz |
| 6. Rögzítő fék | 12. Talptámasz |

VI. ÖSSZESZERELÉS

1. A lábtartók felszerelése

Nyissa szét a kerekesszéket a VIII/1. pont szerint. Az oldalra hajtott pozíciójú lábtartó helyező csapját illessze a vázcsőre és tolja be, majd hajtsa előre a lábtartót, míg az a megfelelő pozícióban bereteszelődik. A lábtartók fel- és leszereléséhez segítséget nyújt a VIII/3. pont.


FIGYELEM!

- *Soha ne tegye az ujját a lábtartó és a kerekesszék vázcsőve közé kinyitáskor, illetve összeszukáskor!*
- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a lábtartó megfelelően rögzítve van!*

2. Háttámla magasító, tolókar (csak +TH –TL kivitelhez) (2. ábra)

A háttámla magasító jobb és bal oldali tartócsövét illessze a háttámla oldalcső furatokhoz, nyomja be a rugós rögzítő csapokat és tolja be magasító csöveit, míg a rugós csapok a helyükre nem pattannak rögzítve a háttámla magasító helyzetét.

A tolókart vízszintes állásában a nyíl irányába tolja rá a váz tartócsövön lévő toldatokba úgy, hogy a rögzítő csapokat benyomja. Tolja a tolókart befelé, míg a tolókart biztosító csapok helyükre be nem pattannak.

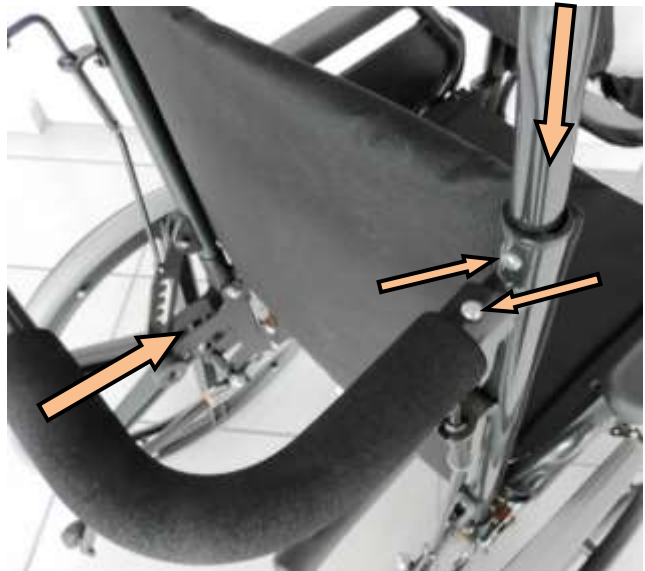

2. ábra

FIGYELEM!

- *Soha ne tegye az ujját az összeillesztendő csövek közé szét-, illetve összeszereléskor!*
- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a háttámla és a tolókar a helyén van, és azok megfelelően rögzítve vannak!*

3. Borulás gátló (csak +TH-TL kivitelhez) (3. 3A ábra)

A borulás gátló kerekék tartócsövét dugja a váz alsó csövébe és a csöveken lévő furatokat illessze egy vonalba. A csapos rögzítő csapját dugja át a csöveken és nyomja be teljesen. Mindkét oldalon végezze el ezeket a műveleteket.



3. ábra



3A. ábra

FIGYELEM!

- *Soha ne használja a dönthető háttámlával szerelt kerekesszéket borulás gátló nélkül!*

VII. BEÁLLÍTÁSOK

1. Talptámasz (Standard kivitel) (4. ábra)

A talptámasz magasságának (kb. 10 cm-es tartomány) beállításához csavarja le a rögzítő csavaranyát és vegye ki a csavart. Állítsa be a megfelelő magasságot, majd rögzítse azt az új pozícióban a csavar visszahelyezésével és meghúzásával. Ehhez 10-es villás és 5 mm-es imbusz kulcsot használjon



4. ábra

2. Talptámasz (+TH-TL kivitel) (4. ábra)

A talptámasz magasságának beállításához kb. (kb. 22 cm-es tartomány) lazítsa meg a lábtartó csövén lévő rögzítő gyűrű csavarját. Állítsa be a megfelelő magasságot, majd rögzítse azt az új pozícióban a csavar meghúzásával. Ehhez 5 mm-es imbusz kulcsot használjon.



5. ábra

3. Talptámasz dőlésszöge (Standard +TH-TL) (6. ábra)

A talptámasz dőlésszögének beállításához ($\pm 10^\circ$) csavarja ki talptámasz oldalán lévő rögzítő csavart egy 5 mm-es imbusz kulcs segítségével, emelje ki a műanyag fedéllel együtt a házból. A rovatkolásnak megfelelően állítsa be a szöget, helyezze vissza a fedelet a csavarral és húzza meg a csavart.



6. ábra

4. Vádli tartó helyzete (+TH-TL kivitel) (7. ábra)

A magasság beállításához lazítsa meg a lábtartó csövén lévő magassághatároló gyűrű és a vádli tartó konzol rögzítő gyűrű csavarjait, állítsa be a megfelelő magasságot és húzza meg a csavarokat. Ehhez 10-es villás, 4 és 5 mm-es imbusz kulcsot használjon.



7. ábra

5. Súlypont helyzete (Standard kivitel) (8. ábra)

Bizonyos esetekben szükség lehet a kerekesszék stabilitásának növelésére. Ez a súlypont, azaz a meghajtó kerék tengelyének hátrahelyezésével érhető el.


A hátrahelyezéshez csavarja le a meghajtó kerék tengelycsavarjáról az anyát, távolítsa el az alátétet és húzza ki a kereket a tengellyel együtt a tengelyházból.

A tengelyház konzolját szerelje le a tartó csavarok eltávolításával és forgassa át 180°-al úgy, hogy a tengelyház a vázcső mögé kerüljön. Ügyeljen arra, hogy a konzol belső lemeze ugyan úgy belülré, illetve a külső lemeze kívülré kerüljön.

Helyezze vissza műanyag íves alátéteket és szerelje vissza a konzolt új önbiztosító anyákat (M6) használva. A csavaranyákat 20 Nm nyomatékkal kell meghúzni

Helyezze vissza a kereket a menetes tengellyel, tegye fel az alátétet és új önbiztosító anyával (M12) rögzítse. A csavaranyát 40 Nm nyomatékkal kell meghúzni.

A súlypont áthelyezéséhez használjon 19 és 10 mm-es villás és 5 mm-es imbusz kulcsokat.

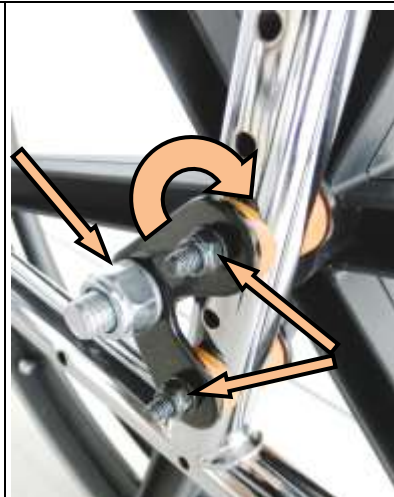

8. ábra

FIGYELEM!

- **Javasoljuk, hogy a súlypont áthelyezéséhez szakembert vegyen igénybe.**
- **Használatba vétel előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően rögzítve vannak!**
- **A hátrahelyezést követően a fékberendezések pozícióinak átállítása szükséges!**

6. Fék (Standard + TH-TL) (9,10. ábra)

A gumiabroncs kopása estén kismértékű után állítás szükséges a fék hatékonyságának megőrzése érdekében.

Az állításhoz lazítsa meg a 9. ábrán jelzett csavarokat egy 5 mm-es imbusz kulcs segítségével, és csúsztassa hátra a fék szerkezetet. A fékpofa és a kerék közötti távolság 25-30 mm legyen.

A visszaszereléshez új önzáró anyákat használjon (M6, M8). Az M8 csavaranya meghúzási nyomatéka 10 Nm, az M6 csavaranyáké 7 Nm legyen.

A szereléshez használjon 10 és 8 mm-es villás és 4 mm-es imbusz kulcsokat



9. ábra

FIGYELEM!

- **Javasoljuk, hogy a fék útszereléséhez szakembert vegyen igénybe!**
- **Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fékek megfelelően és hatékonyan működnek.**

FIGYELEM!

- **Minden beállítás után győződjön meg arról, hogy a megbontott csavarkötések a beállítás után megfelelően rögzítésre kerültek!**

Nagyobb beállításhoz, átállításhoz (pl.: kerék hátrahelyezést követően) a **10. ábrán** jelzett csavarokat távolítsa el, a vázcsövön és a fékszerkezetet tartó konzolon található furatok megfelelő kiválasztásával szerelje vissza a tartó konzolt és a fékszerkezetet. A csavar a fékszerkezet alján található.



10. ábra

VIII. KEZELÉS

1. Szétnyitás (11. ábra)

Húzza szét az oldalkereteket 15-20 cm távolságra a kartámaszoknál, majd az ülés két szélső csövet felülről tenyérrel nyomja lefelé, amíg az ülés és a háttámla feszes nem lesz és az üléskárpitot tartó csövek a vázon lévő fészkekbe be nem ülnek.

2. Összecsukás

Hajtsa fel a talptámaszokat, majd fogja meg az üléskárpitját középen elől és hátul és húzza felfelé míg a kerekesszék kezd összecsukódni. Folytassa az összecsukást a váz összenyomásával. Amennyiben a lehető legkisebbre szeretné összecsukni, vegye le a lábtartókat a következő pontban leírtak szerint.



11. ábra

FIGYELEM!

- *Leülés előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az ülés a megfelelő pozícióban van!*
- *Soha ne tegye az ujját, kezét az ülés és a váz csövei közé kinyitáskor, illetve összecsukáskor!*

3. Lábtartók (Standard) (12. ábra)

A lábtartók ki- illetve befördíthatók, levehetőek, a talptámasz felhajtható.

A **lábbtartó kihajtásához** húzza hátra biztosító kart és hajtsa kifelé az egész lábtartót.

Visszahajtva a reteszelő csap automatikusan a megfelelő pozícióban rögzíti a lábtartót.

A **lábbtartó levételéhez** hajtsa ki a lábtartót a fentiek szerint, fogja meg a lábtartó felső hajlított cső részét és húzza felfelé míg a lábtartó helyező csapja ki nem emelkedik a váz függőleges csövéből.

Visszahelyezésekor kihajtott állásban illessze a helyező csapot a vázcsőre és tolja be, majd hajtsa előre a lábtartót míg az a megfelelő pozícióban bereteszelődik



12. ábra

FIGYELEM!

- *A talptámaszokra tilos ráállni! A talptámasz sérülése, törése nem javítható jótállásban!*
- *Soha ne tegye az ujját a lábtartó és a kerekesszék vázcsöve közé kinyitáskor, illetve összecsukáskor!*
- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a lábtartó megfelelően rögzítve van!*

4. Lábtartók (TH-TL) (12A. ábra)

A lábtartók ki- illetve befördíthatók, levehetőek, a talptámasz felhajtható.

A **lábtartó kihajtásához** húzza hátra biztosító kart és hajtsa kifelé az egész lábtartót.

Visszahajtva a reteszelő csap automatikusan a megfelelő pozícióban rögzíti a lábtartót.

A **lábtartó levételéhez** hajtsa ki a lábtartót a fentiek szerint, fogja meg a lábtartó felső hajlított cső részét és húzza felfelé míg a lábtartó helyező csapja ki nem emelkedik a váz függőleges csövéből.

Visszahelyezésekor kihajtott állásban illessze a helyező csapot a vázcsőre és tolja be, majd hajtsa előre a lábtartót míg az a megfelelő pozícióban bereteszlődik



12A. ábra

5. Lábtartó szögben emelése (csak a +TH-TL kivitel) (13. ábra)

A jobb és a bal oldali lábtartók szögbe állítása egymástól független.

Emeléskor, egyszerűen emelje a lábtartót felfelé kézzel. Emelés közben halk kattánást hall a beállítható pozíciókban.

A leengedéshez nyomja meg a nyíllal jelzett kart, és a lábtartó teljesen lecsukódik, vagy kézzel visszahajtva a kívánt szögben beállítható.



13. ábra

FIGYELEM!

- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a lábtartók megfelelően rögzítve vannak!*
- *Ügyeljen arra, hogy az alsó pozícióba állított talptámasz lehajtott lábtartóval ütközhet kiemelkedő akadályokkal (küszöb, járdaszegély stb.)!*


6. Háttámla szögbe állítás (csak a +TH kivitel, 14. ábra)

Lazítsa meg a reteszelő rudazat rögzítő marokcsavarjait mindkét belső oldalon.

Támassza meg kezeit a kerekesszék tolókarján és a háttámla reteszelő rudazatot, annak fogantyújával emelje meg.

Tartsa a rudazatot kiemelve, a háttámlát a megfelelő pozícióba állítsa be, majd a reteszelő rudazatot engedje vissza. Ügyeljen arra, hogy a rudazat visszaengedésekor a rudazat fésűje a helyes pozícióban rögzüljön.

A reteszelő rudazat marokcsavarjaival rögzítse a rudazatot

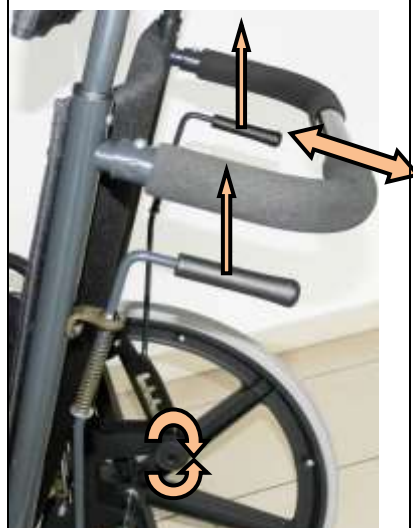

14. ábra

FIGYELEM!

- *Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a háttámla és a reteszelő rudazat megfelelően rögzítve van!*
- *Legyen óvatos, ne csípje be az ujját a háttámla le- és felemelésekor a mozgó alkatrészek közé!*
- *A háttámla leengedésekor a kerekesszék stabilitása csökken, legyen óvatos!*
- *Mielőtt leengedi a háttámlát, győződjön meg arról, hogy a kerekesszékben ülő keze vagy karja nincs az ülés és a háttámla között, elkerülve az esetleges beszorulást vagy becsípődést!*
- *A dönthető háttámla csak a borulás gátló kerekekkel felszerelt kerekesszéken alkalmazható!*
- *Mindig ellenőrizze, hogy a tolókar mindkét oldalon a megfelelő pozícióban rögzítve van!*
- *Soha ne közlekedjen leeresztett háttámlájú kerekesszékkel!*

7. Rögzítő fék (15. ábra)

A fékberendezés a kerekesszék álló helyzetének rögzítésére szolgál! Mindig mindkét oldali féket használja.

Fékezéshez nyomja a fékkart előre ütközésig. A fék csuklós mechanizmusa fékezéskor egy meghatározott pozíciót vesz fel a karrendszer holtpontján történő átbillenésével. Ez az átbillenés jól érzékelhető, nem igényel nagy erő kifejtést. Ügyeljen arra, hogy a holtponton történő átbillentést követően ne terhelje a fékkart.

A fék oldásához húzza hátra ütközésig a fékkart. Ügyeljen arra, hogy mozgás közben a féklemezek ("fékpofák") ne érjen hozzá a kerekekhez.

FIGYELEM!

A rögzítő fék nem használható a mozgó kerekesszék fékezésére, lassítására!



15. ábra

8. Kartámasz (Standard)

A kartámasz hátrahajtható.

A **hátrahajtáshoz** nyomja hátra a kartámasz elején lévő reteszelő műanyag elemet, majd húzza a kartámaszt felfelé (16. ábra).

Visszahajtáskor nyomja le a kartámaszt, amíg a reteszelő horog be nem kattán és rögzíti a kartámaszt.

A kartámasz **oldallemeze** arra szolgál, hogy ruhája vagy annak részei ne tudjanak kilógni és a kerékküllők közé szorulni.



16. ábra

9. Kartámasz (TH-TL)

A kartámasz nem hajtható hátra, csak kivethető.

Egyszerűen a karpárnánál fogva emelje ki (17. ábra) a kartámaszt a helyéről.

Visszahelyezéshez egyszerűen tolja vissza a helyére a kartámaszt.

A kartámasz magasságát a csavar segítségével lehet előre beállítani.



17. ábra

FIGYELEM!

- *Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját, amikor a kartámaszt le- vagy felhajtja, illetve kivesszi és visszahelyezi!*
- *Győződjön meg róla, hogy a kartámasz megfelelően rögzítve legyen a kerekesszék használata során!*
- *Soha ne emelje a kerekesszéket a kartámaszoknál fogva, mert sérülést okozhat a széket használónak, illetve a segítőnek is. Az kartámasz sérülése nem javítható jótállásban!*
- *Ne helyezzen nagyobb tárgyakat maga mellé, mert az befeszítheti az oldallemezt, amely eltörhet és sérüléseket okozhat. Az oldallemez sérülése nem javítható jótállásban!*

IX. AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE

Amennyiben nem tudja elkerülni, hogy akadályokon áthaladjon, azt a következők szerint végezze.

Általános tanácsok:

- A technikákat először üres kerekesszékekkel próbálja ki és gyakorolja be.
- Az akadályokat mindig merőlegesen, lassan közelítse meg, ne ütközzön neki, ne hajtson bele (a kerekesszék sérülhet vagy felborulhat).
- A kerekesszék mozgatásánál a két első kerék vagy a két hátsó kerék mindig a talajon legyen (soha ne döntse meg úgy a kerekesszéket, hogy az egy keréken legyen!).

Emelkedőn és járdaszegényen felfelé a törzset hajtja előre. Lejtőn és járdaszegényen lefelé a törzset hajtja hátra.



Akadály leküzdése segítő igénybevételével:

- A kerekesszékben ülőt a segítő mindig tájékoztassa mi fog történni, hogy a kerekesszék szokatlan mozgása ne érje váratlanul. A kerekesszékben ülő a törzsének előre-hátra mozgatásával segítse a kerekesszék mozgatását.

Járdaszegélyen fel:

- tolja a kerekesszéket a teljesen járdaszegélyhez,
- az egyik lábával lépjen rá a kerekesszék taposó csővére miközben a tolókart is lefelé nyomva a kerekesszéket hátrafelé dönti, míg az első kerék a járdaszegély fölé nem kerül (ügyeljen arra, hogy a szükségesnél jobban ne döntse hátra a kerekesszéket!),
- tolja előre a kerekesszéket addig, míg az első kerekek teljesen a felső szintre kerülnek, lassan engedje vissza a kerekesszéket, hogy az a kerekeken álljon,
- tolja a kerekesszéket előre míg hátsó kerekek el nem érik a járdaszegélyt,
- a tolókar segítségével a hátsó kerekeket lassan gördítse fel a járdaszegélyre.



Járdaszegélyen le:

- óvatosan tolja a kerekesszéket a teljesen járdaszegélyhez,
- a taposócső segítségével billentse enyhén hátra a kerekesszéket (ügyeljen arra, hogy a szükségesnél jobban ne döntse hátra a kerekesszéket!),
- tolja előre, míg a hátsó kerekek a járdaszegély szélére nem érnek,
- tartva a kerekesszék döntött állapotát lassan görgesse le a hátsó kerekeket a járdaszegélyről,
- engedje vissza a kerekesszéket az első kerekeire.
- Ezt a technikát lehet alkalmazni járdaszegélyre hátrafelé történő felhajtáskor is. Ez kisebb erőt és gördülékenyebb felhajtást eredményez.



Gödrökön, bukkánókon történő áthaladás:

- óvatosan tolja a kerekesszéket a teljesen az akadály széléhez,
- a taposócső segítségével billentse enyhén hátra a kerekesszéket (ügyeljen arra, hogy a szükségesnél jobban ne döntse hátra a kerekesszéket!),
- tolja előre a kerekesszéket míg az első kerekek túl nem haladnak az akadályon,
- engedje le a kerekesszéket az első kerekeire,
- tolja a kerekesszéket előre míg a hátsó kerekek el nem érik az akadály szélét, óvatosan görgesse át a hátsó kerekeket az akadályon.

X. KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

KARBANTARTÁS

A használat ideje alatt minden rögzítést rendszeresen ellenőrizni, beállítani, illetve szükség esetén cserélni kell, különös tekintettel a kerekekre, fékekre, kartámaszra, valamint a kárpitra. A kárpitot és a vázat rendszeresen tisztítsa. A tisztításhoz semleges mosószert, és kézmeleg vizet használhat. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra. A váz fényét megőrizheti, ha tisztítás után autóviasszal áttörli.

FIGYELEM!

- *A kárpitot mosógépben mosni, illetve szárító gépben szárítani tilos!*
- *A homok, tengervíz, útszóró só károsítja a tengelyeket és a csapágyakat. Ilyen körülmények közötti használat után tiszta vízzel mossa át a kerekesszéket és szárítsa meg.*

Minden, a biztonság szempontjából fontos csavarkötés önzáró anyával van biztosítva. Az önzáró anyák, csak egyszer használatosak. A csavarkötések megbontása után használjon mindig új önzáró anyákat.

Megsemmisítés: A kerekesszék veszélyes alapanyagot nem tartalmaz. Elhasználódás után a fém vázat a fémgyűjtő helyen lehet leadni.

ELLENŐRZÉS

A következő rendszeres ellenőrzések segítségével lesznek a kerekesszék élettartamának meghosszabbításában, illetve a zavartalan működésében.

Hetente ellenőrizze a fékek működőképességét és hatékonyságát.

Havonta ellenőrizze a kerékabroncsok állapotát.

3 Havonta ellenőrizze az összes csavarkötést, szükség esetén húzza meg a laza csavarokat.

Évente: szakszerviz által történő ellenőrzés javasolt.

XI. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális terhelhetőség: 125 kg

Teljes hossz lábtartóval (lábtartó nélkül): 1110 mm (710 mm)

Max. hossz dönthető háttámlával és szögben emelhető lábtartóval: 1150 – 2000 mm

Teljes szélesség: beülő szélesség + 18cm

Összecsukott szélesség: 310 mm

Beülő szélesség: 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm

Beülő mélység: 41 cm

Beülő magasság: 50,5 cm

Ülőlap dőlésszög: 3°

Háttámla magasság: 444 mm (TH: 820 mm)

Háttámla dőlésszög: 8°

Szögben emelhető lábtartó szög tartomány (TL): 70°

Dönthető háttámla szögtartomány (TH): 70°

Első kerekek: Ø 200 mm tömör.

Hátsó kerekek: Ø 24" tömör.

Keréktengely: fix, menetes rögzítés.

Statikus stabilitás: 10°

Tömeg: 19,5 kg (standard kivitel)

Tartozék: Használati útmutató a Jótállási jeggyel és Szerviz könyvvel.

Rendelhető kiegészítés (opció): Dönthető magasított háttámla (TH), szögben emelhető lábtartó (TL).

Figyelem: dönthető háttámla utólag nem felszerelhető, ezen opciót a kerekesszék megrendelésekor kell rögzíteni!

Pótalkatrészek: a kerekesszék minden egyes részegysége, mint pótalkatrész rendelhető.

XII. JÓTÁLLÁS

Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karkafopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a

vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebben az időtartamban a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető

testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Gyártja

Sunrise Medical
D-69254 Malsch/Heidelberg
Kahlbachring 2-4,

Forgalmazza

REHAB Zrt. A **MEYRA**
GROUP tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

www.rehabzrt.hu

info@rehabrt.hu



VÉNY FELÍRATÁSI SEGÉDLET JAVÍTÁSHOZ

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELENEK FELTÉTELEI:

- A jótállási idő (1 év) lejárt.
- Orvosi vény megléte.
- Legyen megállapítható, hogy a gyógyászati segédeszköz a javítást igénylőnek lett társadalombiztosítási támogatással felírva és kiszolgálva.
 - *A használati útmutató megléte, benne az eszköz gyári száma és a jótállási jegy fejlécében és/vagy a szervizkönyvben a jogosult neve, TAJ száma, a kiszolgálás dátuma, **vagy***
 - *kórházi zárójelentés vagy ambuláns lap megléte, amin a felíró orvos a segédeszközt felírta, a kiszolgálás kori számla vagy egyéb okirat, amin a beteg neve és a felírt eszköz azonosítása együtt szerepel, **vagy***
 - *OEP igazolás, hogy a javítást kérőnek ki lett szolgálva az adott eszköz a kiszolgálás dátumával.*
- Szervizkönyv megléte, benne az eddigi javításokkal és azok költségével.
- Az eszköz legyen azonosítható (típusábra, gyári szám megléte magán az eszközön).

JAVÍTÁSI VÉNY

Ki írhat fel javítási vényt?

A 14/2007.(III./14.) EüM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése szerint:

“A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a **kezelőorvosnak** vagy a **házi orvosnak** vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.”

Mit kell tartalmaznia a vénynek?

Eszköz pontos megnevezése, Gyártási száma (A)
Hiba jellege (B)

(A) Megnevezés a társadalombiztosítással rendelhető gyógyászati segédeszközök jegyzékében (tb. lista) szereplő módon és az eszköz gyártási száma.

(B) Hiba jellege az OEP által meghatározottak szerint:

- Vázjavítás
- Fék jav, csere, beállítás
- Karfa, kárpit csere
- Kerék javítás, csere
- Gumi csere

Amennyiben több hiba is javítást igényel, azokat egy vényre kell felírni.

Javasoljuk, hogy a vény felíratás előtt a szervizkönyvben lévő javító egységek valamelyikével lépjen kapcsolatba és kérjen segítséget a hiba jellegének meghatározásához.

Példák:

„B-4200/P Önhajtós kerekesszék Gy.sz.: 15025879 Fékvjavítás”	„B-4200/P + TH+ TL Önhajtós kerekesszék Gy.sz.: 15005616 Vázjavítás”
--	--

HOL ÉS HOGYAN VÁLTHATÓ BE A JAVÍTÁSI VÉNY

A felírt vény birtokában kell jelentkezni az eszköz használati útmutatójában található **szervizkönyvben feltüntetett javító egység** valamelyikénél (telefon, e-mail).

A vényt nem kell postázni, azt a javítás során veszik át a munka elvégzésekor.

SZERVIZKÖNYV

A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606
	Tel.: 06/1 783-3869
	Tel.: 06/20 950-4735
	Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137
	Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7190
-----------------------------------	---------------------

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

2000 Szentendre, Kalászi út 3.	Tel.: +36-26-886-244
--------------------------------	----------------------

MEDIPLUSZ KFT.

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2.	Tel.: 06/74 413-238
---------------------------------------	---------------------

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jóállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók!

.....gyártási számú kerekesszékhez/mopedhez

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Önhajtós kerekesszék

Az eszköz típusa: B-4200/P (+TH+TL)

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

.....

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY B-4200/P (+TH+TL) Önhajtós kerekesszék	TAJ szám:
Eladószerző tölti ki!		
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre		Levágandó jótállási, javítási szelvények (ELADÓ TÖLTI KI)
Bejelentés időpontja:	5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5
Bejelentett hiba:		Típus: B-4200/P (+TH+TL)
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		Eladó aláírás (P.H.).....
Bejelentés időpontja:	4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4
Bejelentett hiba:		Típus: B-4200/P (+TH+TL)
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		Eladó aláírás (P.H.).....
Bejelentés időpontja:	3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Bejelentett hiba:		Típus: B-4200/P (+TH+TL)
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		Eladó aláírás (P.H.).....
Bejelentés időpontja:	2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Bejelentett hiba:		Típus: B-4200/P (+TH+TL)
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		Eladó aláírás (P.H.).....
Bejelentés időpontja:	1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
Bejelentett hiba:		Típus: B-4200/P (+TH+TL)
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.).....		Eladó aláírás (P.H.).....

VISSZAKÜLDENDŐ!

Cím:
Rehab Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Melléklet a Használati útmutatóhoz

Biztonságtechnikai nyilatkozat a
B-4200/P
ÖNHAJTÓS KERESSZÉKHEZ

Alulírott.....tulajdonos (gondnok)

kijelentem, hogy aszámú kerekesszékhez a mellékelt Használati útmutatót, érvényesített Jótállási jegyet, valamint a Szervizkönyvet átvettem.

A Használati útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat maradéktalanul betartom.

Dátum

.....
átadó

.....
üzemeltető (tulajdonos/gondnok)

VISSZAKÜLDENDŐ!

REGISZTRÁCIÓS LAP

Név:

Lakcím:.....

Telefonszám:.....

TAJ-szám:.....

Vény vonalkód:.....

Közgyógy. ig. szám:.....

Típus:B-4200/P

Gyártási szám:.....

Méret:.....

Kiszolgálás dátuma:.....

Kiszolgáltá:

.....

Jelen regisztrációs lap aláírásával és visszaküldésével hozzájárulásomat adom a REHAB Zrt.-nek, hogy személyes adataimat kapcsolattartás céljából kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.