

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RS – 40 típusú Fürdőkád kapaszkodóhoz

Alkalmazás:



Az RS 40 típusú fürdőkád kapaszkodó anyaga acélcső, mely hajlítással és hegesztéssel adja az eszköz végleges alakját. A felület bevonta műanyag szinter.

Az eszköz **csak beépített kádakhoz használható**, kétkonzolos, kerékpár fogantyúval ellátott támasztó karja a kád belső oldalán, a csőkeret alsó részén elhelyezett, csavaros állítású, botvég gumival ellátott három rögzítő tuskó a

külső, csempézett oldalon támaszkodik fel. A három külső tuskó megfelelő leszorításával az eszköz megnyugtató módon van rögzítve és így alkalmas a kádba be ill. abból kiszállás megkönnyítésére.

Használati utasítás:

Az eszköz előírt rögzítése után a fürdőkádba való belépés biztonságosan elvégezhető.

Tisztítása: nedves ruhával és semleges mosószerrel történhet.



A termék teljesíti orvostechikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait. I. veszélyességi osztályú orvostechikai eszköz.

Gyártó és forgalomba hozó:

 **REX-SAN[®]**
REHA & ORTOPEDIC

REX-SAN Kft., 1106.Budapest, Fehér út 10.
Tel/Fax (06 1) 262-9829, web: www.rex-san.hu