

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## RS-41 típusú fürdőkádban ülőkéhez



**Alkalmazás:** Az RS-41 típusú fürdőkádban ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését szolgálja. Olyan mozgásukban korlátozott személyeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek. RS-41-es fürdőkádban ülőke 4 gumikupakkal rögzül a kád pereméhez, a csőkeret pedig a fürdőkád felső peremére támaszkodik. Miután az ülőke szinte megfelezi a

kád pereme és alja közti távolságot megkönnyíti beülést, illetve a felállást a kádban. Használata során a tisztálkodás egyszerűbbé és biztonságosabbá válik.

**Tisztítás:** nedves ruhával és semleges mosószerrel történjen. Javasolt rendszeres időközönként az ülőfelületet fertőtlenítő hatású tisztítószerrel letisztítani.

**Maximális terhelhetőség:** 90 kg. Ülés belső szélessége 39 cm, külső szélessége 42 cm, teljes szélesség 67 cm.

A használat során minden esetben ellenőrizze az ülőke stabilitását!



A termék teljesíti orvostechnikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait. I. veszélyességi osztályú orvostechnikai eszköz.

**Gyártó és forgalomba hozó:**

 **REX-SAN<sup>®</sup>**  
REHA & ORTOPEDIC

REX-SAN Kft., 1106.Budapest, Fehér út 10.  
Tel/Fax (06 1) 262-9829, web: [www.rex-san.hu](http://www.rex-san.hu)