

Ballon nélküli katéter

Figyelmeztetés: Használat előtt olvassa el az összes figyelmeztetést, óvintézkedést és utasítást. Ennek elmulasztása a beteg súlyos sérülését/halálát okozhatja.

Rendeltetés: Egy utas PVC katéter: A hólyagból a vizelet rutinszerű elvezetésére vagy a hólyagból a vizelet műtét utáni rutinszerű elvezetésére szolgál.

Javallatok: Egy utas nelaton / női katéter: Alkalmazása akkor javasolt, ha a húgyhólyagból a vizelet rutinszerű elvezetésére van szükség akár műtét után, akár vizeletelvezetést igénylő neurológiai állapotú betegeknél és vizeletürítésre szoruló betegeknél.

Ellenjavallatok:

1. Allergia
2. Átjárhatatlan húgyutak
3. Fokozott iatrogén húgycsőszűkület

Célcsoport: Felnőtt és gyermekbetegek számára, akiknek a hólyagból a vizelet rutinszerű elvezetésére, vagy a hólyagból a vizelet műtét utáni rutinszerű elvezetésére, vagy öblítésére van szükségük. A megfelelő katéter méretet a betegspecifikus jellemzők és az anatómia alapján kell kiválasztani.

Rendeltetésszerű felhasználó: Az orvosok képzésében részesülnek a vonatkozó anatómiai tájékozódási pontokról, a biztonságos technikáról és az ezen eszközök használatának lehetséges szövődményeiről.

Termékleírás: 1 lumenű PVC alapanyagú, nelaton végű katéter. Átmérőjének mérete franch (Fr.), Charrière (Ch.) vagy milliméter (mm) mértékegységben van feltüntetve. Az egyes katéterek csomagolásán; méretenként színekkel van jelölve. A mérettartomány: 6-20 Ch./Fr. Hosszuk 18 és 40 cm között változik. A tényleges hossz az egyes csomagok címkéjén szerepel.

A használati időtartama: Ez a készülék az Is osztályba tartozik.

Felkészülés a használatra/használat előtti ellenőrzések: Vegye ki a katétert a tasakból aszeptikus technikával. Szemrevételezéssel ellenőrizze a katétert, hogy nincs-e rajta mechanikai sérülés. Csak a katéter csúcsát kenje be vizes bázisú síkosító géllal (szükség szerint helyi érzéstelenítővel, vagy anélkül). Ügyeljen arra, hogy a síkosító gél ne kerüljön a kezére.

A felhelyezés alapelvei: A katétert a húgycsőbe vezetjük, és óvatosan felfelé toljuk a húgycsőben, amíg el nem éri a hólyagot.

Figyelmeztetés: A kizárólag egyszer használatos orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása a teljesítmény romlásához vagy a funkciók elvesztéséhez vezethet. Az egyszer használatos eszközök újrafelhasználása vírusos, bakteriális, gombás vagy prion kórokozókval való érintkezést eredményezhet. Ezekhez az orvostechnikai eszközökhöz nem állnak rendelkezésre validált tisztítási és sterilizálási módszerek, valamint az eredeti előírásoknak megfelelő újrafeldolgozási utasítások. Ez a termék nem tisztítható, nem fertőtleníthető, illetve nem sterilizálható. Nem szabad kőolaj alapú síkosító anyagot használni. A katéter tengelyét soha ne törje meg/csíptesse össze, szükség esetén használjon dugót. A sterilitás csak abban az esetben garantált, ha a csomagolás bontatlan és nem sérült.

Tárolás és kezelés: Ezek a termékek az eredeti dobozban száraz helyen, közvetlen és közvetett fény- és hőforrástól távol tartandók. A termékeket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell az éles tárgyakkal való durva kezelést.

Katéter eltávolítása: A szepszis/aszepszis szabályainak betartásával történik.

Mellékhatások:

1. Kellemetlenség a beteg számára
2. Irritáció
3. Katéterelzáródása/Varképződés
4. Fertőzés
5. Trauma

Használat után az eszközt az országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.