



B-4021 Szobai WC



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

B-4021/F Fix szobai WC

B -4021/G Gördíthető szobai WC

1. Felhasználási terület:

A szobai WC a házi betegápolás megkönnyítésére, az önellátására tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni. A kárpitozott ülőbetéttel szobai székként is használható.

A B-4021/G szobai WC nem alkalmas a beteg mozgatására, kerekesszékként való használatra!

2. Jellemző méretek, adatok:

	B-4021/F	B-4021/G
Felhasználó max. megengedett tömege:	100 kg	100 kg
Beülő magasság (ülőkebetét nélkül):	455 mm	470 mm
Beülő magasság (ülőkebetéttel):	490 mm	505 mm
Beülő szélesség:	440 mm	440 mm
Beülő mélység:	430 mm	430 mm
Magasság:	850 mm	860 mm
Hosszúság (kihajtott lábtartóval) :	N/A	660 mm
Szélesség:	545 mm	545 mm
WC csésze befoglaló méretei, ami fölé a termék elhelyezhető (szél x mag):	440 x 385 mm	440 x 390 mm
Tartozékok:		
1db műanyag edény fedővel		
1db ülőbetét		
1db használati útmutató		

3. Használat

A **B-4021/F** szobai WC lábtartója a szállítás miatt be van hajtva. Kérjük, üzembe helyezés előtt a lábtartót hajtsa ki és rögzítse a bilincs csavarjainak meghúzásával.

A szoba WC-t az ülőkéjét takaró ülőkebetét, valamint a vödörtető eltávolítása után lehet használni. Ezt követően a szoba WC elé háttal állva, a karfákon megtámaszkodva ráereszkedünk az ülőkére. Lényeges, hogy mind a két kézzel támaszkodjunk, ellenkező esetben billenés veszélye áll fenn. Erős fizikai gyengeség esetén a beülés, illetve a kiszállás mindenképpen segítő közreműködésével történjen!

A műanyag vödör az ülés alatti sínbe hátulról tolható be, illetve húzható onnan ki.

Vödör nélkül a termék, beépített WC csésze fölé helyezhető.

Beülés előtt a B-4021/G típust a hátsó keréken lévő rögzítő fékekkel minden esetben rögzíteni kell! Használat és a kiszállás után oldja a féket a WC mozgatásához.

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani. A kárpitozott felső rész, illetve az ülőke fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

4.2. Tárolás

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

4.3. Karbantartás

A szobai WC csavarkötéseit a használat gyakoriságától függően havonta- negyedévente ellenőrizni szükséges. Lazulás esetén a csavarokat után kell húzni.

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

FIGYELEM!

- **A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében **KÖTELEZŐ!****
- **A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!**
- A kartámasz megsérülése, meglazulása esetén után húzás vagy csere szükséges!
- A kerek külső felületének roncsolódása esetén a kereket ki kell cserélni!
- A fékhiba esetén a kereket ki kell cserélni!
- Használat előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vödör a megvezető sínek között helyezkedik-e el, illetve arról, hogy a fedél nélküli vödör az ütközőcsapokig be legyen tolv!
- A szoba WC- t csak a megengedett súlyhatárig lehet terhelni!
- A talptámaszra ráállni TILOS! A talptámasz törése nem része a garanciális jogosultságnak.
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása esetén a szoba WC-t használni TILOS!
- A B-4021/F típus botvéggumijának elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, csúszás- ill. billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 22 mm

Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Szerviz egységek:

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.	Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.	Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20.	Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)	Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.	Tel.: 06/1 320-1606;	Tel.: 06/20 950-4735
-----------------------------	----------------------	----------------------

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.	Tel.: 06/62 553-480
-------------------------------	---------------------

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel.: 06/66 441-137;	Tel.: 06/20 952-2135
--------------------------------	----------------------	----------------------

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.	Tel.: 06/1 433-7196;	Tel.: 06/80 201-276
-----------------------------------	----------------------	---------------------

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.	Tel.: +36-26-886-244
--------------------------------	----------------------

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénytel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

JÓTÁLLÁSI JEGY	
Eladószerv tölti ki! A vásárlás napja: aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	Bejelentés 3
Típus: B-4021/ Gyártási szám: Kelt:.....20.....hónap Eladó: aláírás (P.H.)	Megjavítás időpontja:..... Bejelentett Elhárított A jótállás új határideje:..... Munkalapszám:..... Kelt:..... 20..... hó Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	Bejelentés 2
Típus: B-4021/ Gyártási szám: Kelt:.....20.....hónap Eladó: aláírás (P.H.)	Megjavítás időpontja:..... Bejelentett Elhárított A jótállás új határideje:..... Munkalapszám:..... Kelt:..... 20..... hó Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	Bejelentés 1
Típus: B-4021/ Gyártási szám: Kelt:.....20.....hónap Eladó: aláírás (P.H.)	Megjavítás időpontja:..... Bejelentett Elhárított hiba:..... A jótállás új határideje:..... Munkalapszám:..... Kelt:..... 20..... hó Aláírás (P.H.)

6. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 - 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 - 250 000 forint eladási ár felett három év.
- E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és ülőlappal tudjuk átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani.

Gyártja és forgalmazza:

Rehab Zrt a **MEYRA** tagja
2000 Szentenare
Kalász út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88
info@rehabrt.hu

