

## Használati útmutató B-4322 Összecsukható, hordozható szobai WC



**Figyelem:** Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került

### 1. Felhasználási terület:

A házi betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A kárpitozott ülőkebetéttel szobai székként is használható. A műanyag edény eltávolítása után összecsukott állapotban viszonylag kis helyen tárolható.

**A gördíthető szobai WC nem alkalmas a beteg mozgatására, kerekesszékként való használatra.**

### 2. Jellemző méretek, adatok

A termék két típusban készül: B-4322 Fix és B-4322/G Gördíthető változat

Méretek mm-ben	B-4322/F	B-4322/G
Hosszúság	620	670
Szélesség	540	560
Magasság	1000	1070
Beülő szélessége	440	440
Ülőke magassága	480	540
Kartámasz magassága ülőke fölött	250	250
Befoglaló méretek összecsukva	540x240x 1360	540x240x 1335
Teljes súly (kg)	8,8	9,8
Kerék méret	-	80
Terhelhetőség (kg)	100	100

*Tartozékok:*

1db műanyag edény fedővel

1db ülőbetét

1db használati útmutató

### 3. Használat

A szobai WC felállításakor először a lábak alsó keresztmervítőjén található rögzítő szalagon lévő tépőzárat kell szétbontani, majd egyik kézzel a háttámla cső felső vízszintes részét középen megfogva a WC hátsó lábait a talajon megtámasztva, másik kézzel az ülőkét felül megfogva hajtsuk lefelé az ülőkét. Az első láb kinyitásával összhangban a háttámlát folyamatosan döntsük hátrafelé, hogy az első lábak alsó vége mindig a talaj közelében maradjon. A nyitást addig végezzük, míg a szék teljesen ki nem nyitódik. Ezután a lábak közötti mervítő oldalrudazatok lenyomásával a széket összecsukódás ellen biztosítjuk. Hajtsuk le a kartámaszokat és az ülőkére helyezzük az ülőkebetétet.

Hátulról illesztjük be a műanyag vödör peremét az ülőke alján lévő vezetősínbe és csúsztassuk előre az ülőke nyílása alá.

A szobai WC összecsukása az előbbiekkal ellentétes módon és sorrendben történik.

**Figyelem! Az összecsukásnál és szétnyitásnál ügyeljen arra, hogy ujjja, keze ne szoruljon be a vázcsövek, illetve a csövek és ülőke közé!**

**Beülés előtt a gördíthető WC-t a hátsó keréken lévő rögzítő fékekkel minden esetben rögzíteni kell!** Használat és a kiszállás után oldja a féket a WC mozgatásához.

## **4.Karbantartás, tárolás**

### **4.1. Tisztítás**

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani.

A kárpitozott felső rész, illetve az ülőke fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

### **4.2. Tárolás**

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

### **4.3. Karbantartás**

A szobai WC rendszeres karbantartást nem igényel.

### **4.4. Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

## **FIGYELEM!**

- ***A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében KÖTELEZŐ!***
  - ***A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!***
  - A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
  - Botvéggumi mérete: Ø 22 mm belső átmérőjű.
  - A kerekek cseréje, külső felületük roncsolódása esetén feltétlenül szükséges!
  - Sérült repedt vödör nem használható, cseréje szükséges!
  - Használat előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vödör a megvezető sínek között helyezkedik-e el!
  - A szobai WC- t csak a megengedett súlyhatárig lehet terhelni!
  - A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása, kötőelemek lazulása esetén a szobai WC-t használni TILOS!
  - Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.
- Alkatrészek beszerzése a szervizegységknél lehetséges.***

**A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**

### **Jótállás**

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

**A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik**

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

### **Jótállási jegy**

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével. EZ a kezelési útmutató egyben a jótállási jegyis.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

**A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben**

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetészerű használatától eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,

- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás.
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

### **Tartozékok jótállása**

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

### **Javítási igény**

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

### **Vitás esetben**

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

### **Szavatosság**

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania.

Vj58

A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénytel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példány a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

## Gyártja és forgalmazza

**REHAB Zrt.** A **MEYRA GROUP** tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

info@rehabrt.hu



## Szerviz egységek:

### **REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

Tel.: 06/46 508-284

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.

Tel.: 06/35 300-224

3300 Eger, Knézich u. 20.

Tel.: 06/36 320-826

3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.)

Tel.: 06/47 560-130

### **REHAB-GENERAL KFT.**

1044 Bp., Reviczky utca 38.

Tel.: 06/1 320-1606;

Tel.: 06/20 950-4735

### **REHAB-HUNGARIA KFT.**

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.

Tel.: 06/62 553-480

### **PRÍMA PROTETIKA KFT.**

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Tel.: 06/66 441-137;

Tel.: 06/20 952-2135

### **PROMOBIL ZRT.**

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

Tel.: 06/1 433-7196

### **MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Tel.: +36-26-886-244