



**Használati útmutató**  
**B-4323**  
Állítható magasságú szobai WC

**+REHAB®**  
Alapítva 1915

**Figyelem:** Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

**1. Felhasználási terület:**

A B-4323 típusú állítható magasságú szobai WC otthoni használatra, a házi betegápolás megkönnyítésére készül. Alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelységet a beteg nem tudja megközelíteni. Azoknak a betegek, akiknek a vízöblítéses WC ülőke magassága túl alacsony, és a felállás, illetve a leülés nehézséget okoz, a műanyag edény eltávolítása után a WC kagyló fölé állítva WC magasítóként is használható.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

**2. Jellemző méretek, adatok**

Tömeg:..... 10 kg

Felhasználó max. tömege:..100 kg

Beülő magasság: .....480–580 mm

Magasság állíthatóság .....25,4 mm/fokozat

Beülő szélesség:.....400 mm

Kartámasz magassága ülőkétől: 220 mm

Magasság: .....670 - 770 mm

Hosszúság: .....520 mm

Szélesség: .....520 mm

*Tartozékok:*

1 db. műanyag edény

1 db. Használati útmutató

**3. Használat**

A szobai WC ülőke magasságának alapértéke 480 mm, amely 25,4 mm-enként állítható 580 mm beülő magasságig.

A magasság beállítása a lábakon található rugós csapok segítségével történik. A csapot benyomva a két csövet egymáshoz képest elcsúsztatjuk, majd a csapot a kívánt furatba visszaengedjük. Az összes lábon ugyanazt a beállítást használjuk!

Az ülőkefedél az ülőke felhajtott állapotában a hátsó ütközőhöz támaszkodik, vagy fal mellé állítva a falhoz ütköztethető. A műanyag edény az ülőkét felemelve, felülről helyezhető be, ill. vehető ki.

Az edény behelyezésekor figyeljünk, hogy pontosan az ülőkényílás alá kerüljön.

Szállításkor vagy hosszabb ideig tartó tároláshoz a szobai WC szétszedhető, a műanyag edény kiemelése után az ülőkevázat tartó 8 db M8-as csavar oldásával.

**A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**

**4. Karbantartás, tárolás**

**4.1. Tisztítás**

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani. Az ülőke és ülőke fedél fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

**4.2. Tárolás**

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

**4.3. Karbantartás**

A szobai WC csavarkötéseit a használat gyakoriságától függően havonta-negyedévente ellenőrizni szükséges. Lazulás esetén a csavarokat után kell húzni.

**Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és ülőlappal tudjuk átvenni. Ellenkező esetben az átvételt kénytelenek vagyunk megtagadni!**

#### **4.4. Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

#### **FIGYELEM!**

- **A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében KÖTELEZŐ!**
- **A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!**
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, csúszás- ill. billenésveszély áll fenn! A botvéggumi belső mérete: Ø 28 mm.
- A magassági méret szabályozására szolgáló bármely rugós csap meghibásodása esetén a szobai WC-t nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- Sérült, repedt vödör nem használható, csere szükséges!
- A szobai WC-t csak a megengedett maximális felhasználói tömegig szabad terhelni!
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása, kötőelemek lazulása esetén a szobai WC-t használni TILOS!

#### **5. Jótállás**

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

#### **A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik**

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,  
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

#### **Jótállási jegy**

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

#### **A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben**

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás.
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

#### **Tartozékok jótállása**

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

#### **Javítási igény**

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt megüszülő javítási késedelem ideje nem tartozik bele.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

### **Vitás esetben**

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

**Szerviz egységek:****REHAB-ÉSZAK KFT.**

---

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224

3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826

3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

**REHAB-GENERAL KFT.**

---

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

**REHAB-HUNGARIA KFT.**

---

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

**PRÍMA PROTETIKA KFT.**

---

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20  
952-2135

**PROMOBIL ZRT.**

---

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196

**MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.**

---

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

**Gyártja és forgalmazza**

Rhab Zrt a **MEYRA** tagja  
2000 Szentendre, Kalászi út 3.  
Telefon: 06-26/88-62-88

