



**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

PP-5022 Gördíthető szobai WC, fékkel

Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pávilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel: 20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pácsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pácsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax: 76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

Nagykereskedelmi lerakat:

5600 Békéscsaba, Vandhádi út 1. Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.

PRIMA-PROTETIKA Kft.

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

A tájékoztatót készítette: Droppa Éva
Jóváhagyta: Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
A vásárlói tájékoztató kiadva: 2016. április 10.

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Gyártási szám:

Megrendelő neve:

címe:

Megrendelő TAJ száma:

Termék átadásának kelte: 20..... év hó nap

Felíró orvos neve:

Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!

EAN kód címke:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

1. Általános leírás

Az Ön által megrendelt és átvett eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

A toalettszék mozgássérült és járásképtelen betegek részére készült ülőbútor, melynek párnázott ülőlapját leemelve, az alaplapon elhelyezett lyuk alatt műanyagvödör is található.

2. Használat

A toalettszék a párnázott ülőlap eltávolításával szobai WC-ként használható, az ülőlap visszahelyezésével kényelmes ülőhelyül szolgálhat mozgássérült, vagy járásképtelen betegek részére.

Az ülőlap két oldalán kartámasz biztosítja a kényelmes ülést. A kartámasz felhajtható. Ez megkönnyíti a használó (beteg) átültetését. A gördíthető kivitelű eszköz lakáson belüli helyváltoztatásra alkalmas. Az első kerekek fölött elhelyezkedő lábtartók felhajthatók. **Figyelem! Ajánlatos a hátsó kerekek fékeit rögzíteni a használat során!**

Ha a görgők akadnak, elszennyeződnek, javasoljuk, hogy javításhoz a kiszolgáló (csillaggal jelölt) szaküzlet szolgáltatását vegye igénybe. A toalettszék csavarkötéseit rendszeresen ellenőrizni szükséges, (ülőke, háttámla, görgő, lábtartó, kartámasz) fellazulásuk esetén azokat haladéktalanul meg kell húzni.

3. Műszaki leírás

A toalettszék vázszerkezete acélcsőből készül, hegesztési eljárással. A WC ülőlap és hátlap vákuum formázott műanyaglapból áll, amely a vázhoz popszegeccsel van rögzítve. A fedlap kárpitozott.

Az alján található két csap az ülőlap furataiba illesztve stabilizálja azt. A kartámasz szivaccsal borított és felhajtható.

A WC lap alatti műanyag edény szolgál a vizelet és a széklet gyűjtésére. A műanyag vödör a vezetősínen hátracsúsztatva kiemelhető, ezután a szék könnyen a beépített WC fölé tolható. Első két kereke önbeálló görgővel van ellátva, a hátsó kettő fékezhető. A lábtartók az első kerekek fölött helyezkednek el és felhajthatók.

Saját tömeg:	9,6 kg	Magasság:	910 mm
Terhelhetőség:	110 kg	Szélesség:	525 mm
		Hossza:	455 mm

4. Tisztítás

A toalettszék semleges hatású mosószeres vízzel átitatott puha, karcmentes anyaggal lemosható, majd szárazra törlendő.

Figyelem! Javasoljuk a műanyag vödör rendszeres fertőtlenítését!

5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (002) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14
EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

OEP által támogatott eszköz.

6. Megfeleléségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfeleléségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá vonatkozatható alapvető követelmények mindegyikét.

Kedves vásárlónk!

Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!

.....