



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4295

Fordítható kádülőke

**Figyelem:** Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

Vj 61

### **1./ Felhasználási terület:**

A B-4295 típusú fordítható kádülőke mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegfürdetés megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes.

### **2./ Jellemző adatok:**

A fordítható kádülőke olyan peremes fürdőkádakhoz használható, melyekbe a kitámasztó szerkezettel biztonságosan rögzíthető, és a jobb és baloldali szélső helyzetben sem tud bebillenni a kádba.

Felhasznált anyagok: szerkezeti acél, rozsdamentes acél, műanyag, gumi, felületkezelt kötőelem.

Befoglaló méret (hossz x szélesség x magasság): 72x52x56 cm

Tömeg: 6,5 kg

A felhasználó megengedett max. testtömege: 100 kg

### **3./ Használat:**

A kád szélére felhelyezett kádülőkét a gumivégű állítócsavarokkal a kád belső méretének megfelelően (kitámasztani) rögzíteni kell.

Az ülőke az oldalsó fordítókarral felhúzása után a kívánt irányba elfordítható. A kar elengedése után az ülés az előre kialakított helyzetbe automatikusan rögzül, ami a be- és kiszállást biztonságossá teszi. Amennyiben a beteg erőnléte megengedi a terméket egyedül is használhatja.

### **4./ Karbantartás, tárolás:**

#### **4.1. Tisztítás**

A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

A műanyagülőkét időnként (intézményi használat esetén minden használat után) fertőtlenítőszeres vízzel szükséges lemosni, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében!

#### **4.2. Karbantartás**

A termék nem rozsdamentes anyagból készült alkatrészei műanyag alapú festékekkel vannak védve, csökkentve a korróziós hajlamot. Ügyeljen, hogy a festékréteget ne sértse fel a fém részekben. A terméket használat után szárazra kell törölni, illetve megszáritani a korrózió és vízkőlerakódás megelőzése érdekében.

#### **FIGYELEM !**

- **A terméket a kádhoz történő rögzítés, kitámasztás nélkül használni TILOS!**
- Az állítócsavar megsérülése esetén (menetszakadás, gumivég kitörés) a termék használata TILOS!
- A megsérült fordítókarral (elhajlás, eltörés) a termék nem használható!
- Az ülőke rögzítés nélküli használata nem biztonságos! (Billenés és csúszásveszély)
- Sérült, repedt ülőkével a termék nem használható!
- A csővégeket lezáró, műanyag fogantyúkat sérülése esetén (repedés, kitörés, leválás) ki kell cserélni! Sérülés, billenés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
- Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

**Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.**

#### **4.3. Tárolás**

A fürdőkádülőkét száraz, páramentes helyen tárolja.

#### **4.4. Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

#### **5./ Jótállás**

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt az alábbiakkal egészítjük ki.

##### **A termék jótállási ideje 2021.01.01-től a termék eladási árához kapcsolódik**

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

##### **Jótállási jegy**

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

##### **A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben**

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használatól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

##### **Tartozékok jótállása**

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

##### **Javítási igény**

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének

megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghíúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

### **Javítások jótállása**

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

### **Vitás esetben**

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

### **6./ Szavatosság**

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igényrel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

### **Gyártja és forgalmazza:**

Rehab Zrt A **MEYRA** tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3

Telefon: 06-26/88-62-88



## 7./ Szerviz egységek:

### **REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224  
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826  
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

### **REHAB-GENERAL KFT.**

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

### **REHAB-HUNGARIA KFT.**

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

### **PRÍMA PROTETIKA KFT.**

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

### **PROMOBIL ZRT.**

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196

### **MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Tel.: +36-26-886-244

<b>JÓTÁLLÁSI JEGY</b>		<b>B-4295 Fordítható kádülőke</b>	
<b>Eladószerv tölti ki!</b>			
A vásárlás napja 20..... hó ..... nap. (hónap betűvel)		..... aláírás (P.H.)	
<b>Levágandó jótállási, javítási szelvények</b>		<b>Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre</b>	
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>3</b>		<b>3</b>	
Típus: <b>B-4295</b>		Bejelentés időpontja: .....	
Gyártási szám: .....		Bejelentett hiba: .....	
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap		Elhárított hiba leírása: .....	
Eladó ..... aláírás (P.H.).....		A jótállás új határideje: .....	
		Munkalapszám: .....	
		Kelt: .....	
		20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)..	
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>2</b>		<b>2</b>	
Típus: <b>B-4295</b>		Bejelentés időpontja: .....	
Gyártási szám: .....		Bejelentett hiba: .....	
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap		Elhárított hiba leírása: .....	
Eladó ..... aláírás (P.H.).....		A jótállás új határideje: .....	
		Munkalapszám: .....	
		Kelt: .....	
		20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)..	
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> <b>1</b>		<b>1</b>	
Típus: <b>B-4295</b>		Bejelentés időpontja: .....	
Gyártási szám: .....		Bejelentett hiba: .....	
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap		Elhárított hiba leírása: .....	
Eladó ..... aláírás (P.H.).....		A jótállás új határideje: .....	
		Munkalapszám: .....	
		Kelt: .....	
		20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)..	