

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## RS-42 típusú fürdőkád ülőkéhez



**Alkalmazás:** Az RS-42 kifordítható fürdőkád ülőke használata kádban ülve a tisztálkodás kényelmes elvégzését szolgálja. Olyan mozgáskorlátozott betegeknek ajánljuk, akik önellátásra csak segítséggel képesek. A termék egy hegesztett acélváz szerkezetre épülő műanyag ülőke, mely a kádba való behelyezés után lehetővé teszi az egyszerűbb ki-be szállást, azáltal hogy a váz a beépített

csapágy segítségével körbe forgatható és negyedfordulatonként rögzíthető. Előnye, hogy a beteget nem kell a kádba beemelni, mivel a forgatás során a beteg csak beül az ülőkébe, lábait vízszintbe emeli, s a befordítás, majd lerögzítés után a tisztálkodás könnyen elvégezhető.

**Tisztítás:** nedves ruhával és semleges mosószerrel történjen. Javasolt rendszeres időközönként az ülőfelületet fertőtlenítő hatású tisztítószerrel letisztítani.

**Maximális terhelhetőség:** 90 kg. Ülés belső szélessége 39 cm, külső szélessége 42 cm, teljes szélesség 65 cm.

A használat során minden esetben ellenőrizze az ülőke stabilitását!



A termék teljesíti orvostechnikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait. I. veszélyességi osztályú orvostechnikai eszköz.

**Gyártó és forgalomba hozó:**

 **REX-SAN<sup>®</sup>**  
REHA & ORTOPEDIC

REX-SAN Kft., 1106. Budapest, Fehér út 10.  
Tel/Fax (06 1) 262-9829, web: [www.rex-san.hu](http://www.rex-san.hu)