

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4311

Felhajtható fürdető ülés

1. Biztonsági előírások

- **A fürdető ülést csak megfelelő szilárdságú falra lehet szerelni, mivel a nem megfelelő falszerkezetekre történő rögzítés esetén az eszköz használata BALESETVESZÉLYES!**
- A fürdető ülést az ülő felület előre lejtése esetén használni **TILOS** és **BALESETVESZÉLYES!**
- A terméket a megengedett maximális súly feletti terheléssel használni **TILOS!**
- A hibás gumivéggel (kitörött, lekopott) a terméket használni **TILOS** és **BALESETVESZÉLYES!** Az alkatrészt le kell cserélni, majd az esetleges után állításokat elvégezni!
- Sérült, repedt ülőfelület a használat során **SÉRÜLÉST OKOZHAT**, ezért ilyen esetben a termék használata **TILOS!** Az ülő felületet ki kell cserélni!
- Megsérült, elhajlott vázzal a terméket használni **TILOS** és **BALESETVESZÉLYES!**

2. Felhasználási terület

A felhajtható fürdető ülés otthoni használatra, a házi mosdás és mosdatás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. A zuhanyozófülkék falára szerelve az ülő helyzetben történő tisztálkodást teszi lehetővé. Segít minden olyan esetben, amikor a fürdőkádás mosdás nem alkalmazható, de a mosakodó vagy mosdatott személy ülni és kapaszkodni képes. Javasoljuk fali kapaszkodó felszerelését az ülőke mellé.

Fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

3. Méret, jellemző adatok

Névleges ülésmagasság:	500 mm
Teljes szélesség:	530 mm
Teljes mélység:	535 mm
A termék súlya:	8 kg
A felhasználó megengedett max. súlya:	100 kg

FIGYELEM: a szerelési magasságot a szerelési útmutató szerint kell meghatározni!

Tartozékok:

- 8 db. Hatlapfejű állványcsavar 8x60
- 8 db. Műanyag tipli 12x60
- 8 db. Alátét M8

4. Szerelési útmutató

A fürdető ülés elsősorban nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke) történő használatra szolgál. Mivel ezek a helyiségek fokozottan balesetveszélyesek (nedves, csúszós, kemény padló- és falburkolat), különösen fontos a fürdető ülés megfelelő felszerelése és rögzítése.

Javasoljuk, a szerelést bizza szakemberre!

A szerelési magasság meghatározásához először a lábak magasság állító csavarjait állítsa közép helyzetbe, hogy később a falra szerelést követően még tudja korrigálni a beállítást.

Helyezze a fürdető ülést lehajtott ülőrészsel a falhoz, úgy hogy a lábak közel függőlegesen álljanak, az ülőlap pedig enyhén hátra dőlt, majdnem vízszintes legyen, a felfogó lap simuljon a falhoz. A rögzítő furatok helyzetét a felfogó lemeztől jelölje át a falra.

A fúrás ne a felfogó lemezen keresztül történjen!

A termék rögzítéséhez csak általános érvényű útmutatást lehet adni, a különböző falszerkezetek anyagának és vastagságának sokfélesége miatt.

A rögzítés módját a falszerkezettől függően egyedileg kell megválasztani úgy, hogy az ülés a felszerelése után szilárdan álljon a falon, és használat közben a rögzítő csavarok ne lazuljanak ki. Az általunk mellékelte műanyag dübel és facsavar csak megfelelő szilárdságú téglá- vagy betonfal esetén nyújt biztonságos rögzítést. **FIGYELEM!** A kisebb szilárdságú falak (pl. vályog, gázbeton stb.) esetén ez a típusú dübel és facsavar nem alkalmazható!

A terméket tisztított felületre (csempe, fal) kell felszerelni. Az egyenletes felfekvés és a nedvesség elleni védelem érdekében a felfekvő felületek közé, valamint a csavaralátét alá vékony rétegben gumi vagy szilikongumi masszát kell kenni. A rögzítő csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a fürdető ülés szilárdan álljon. A csavarfej alá minden esetben kerüljön fel az alátét, megelőzendő a festékréteg sérülése és egy későbbi rozsdásodás.

FIGYELEM! Amennyiben a felszerelés után az ülő felület lehajtván nem kerül enyhén hátradőlt állapotba, a lábak stabilan függőleges helyzetbe, akkor a lábakon lévő kontra anyák kilazítása után a gumivégek ki-vagy becsavarásával kell a stabil helyzetet beállítani, majd a kontra anyák meghúzásával rögzíteni!

Használatba vétel előtt nedves padlón ellenőrizze, hogy az ülőke stabil, terhelésre a lábai sem előre sem hátra nem csúsznak ki, illetve be!

Tájékoztatjuk, hogy a fürdető ülést javításra, csak tisztán, fertőtlenített állapotban tudjuk átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani!

5. Kezelési útmutató

Az ülőke lehajtása

Fogja meg az ülőke két oldalán található kapaszkodócső végét, és lassan hajtsa lefelé az ülő felületet, míg a lábak fixen nem állnak a talajon. A lábak mozgatórúdjának előfeszített állapota és a váz súlypontjának elhelyezkedése miatt a lehajtáshoz először nagyobb erő szükséges.

Az ülőke felhajtása

A kapaszkodócső végénél fogva lassan hajtsa felfelé az ülő felületet függőleges helyzetbe ütközésig, majd ellenőrizze, hogy az ülőke a falnak támaszkodva megáll.

Tisztítás

A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt karcmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, illetve kezelhető.

A műanyagülőkét időnként (intézményi használat esetén minden használat után) fertőtlenítőszeres vízzel le kell mosni, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében!

Karbantartás

A termék nem rozsdamentes anyagból készült alkatrészei műanyag alapú festékkel vannak védve, csökkentve a korróziós hajlamot. Ügyeljen, hogy a festékréteget ne sértse fel a fém részekben. A páradús tevékenység (fürdés, mosás, szárítás stb.) után szellőztesse ki a helyiséget, a fürdető ülést törölje szárazra a korrózió és vízkőlerakódás meggátolása érdekében.

Időnként ellenőrizze a falra rögzítés megfelelőségét, az ülő felület és a gumivégek beállítását, és állapotát. Szükség esetén állítson utána, ill. az erősen kopott alkatrészeket cseréltesse ki szakemberrel!

Alkatrészek beszerzése a termékek vásárlási, vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

6. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

7. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetészerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás.
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a

fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebben az időtartamban a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szerviz egységek:

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

Tel.: 06/46 508-284

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.

Tel.: 06/35 300-224

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38.

Tel.: 06/1 320-1606

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B.

Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Tel.: 06/66 441-137;

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a.

Tel.: 06/1 433-7190

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Tel.: +36-30-886-244

Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

Gyártó és forgalmazó:
 Rehab Zrt
 2000 Szentendre, Kalászi út 3
 Telefon: 06-26/88-62-88
 www.rehabzrt.hu



Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY Felhajtható fürdető ülőke	TAJ szám:
Eladószerz tölti ki!		
A vásárlás napjaév..... hónap (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre (szerviz tölti ki)		Levágandó jótállási, javítási szelvények (eladó tölti ki)
Bejelentés időpontja: _____	5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5
Bejelentett hiba: _____		Típus: Felhajtható fürdető ülőke
Elhárított hiba leírása: _____		Gyártási szám: _____
A jótállás új határideje: _____		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám: _____		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt: _____		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja: _____	4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4
Bejelentett hiba: _____		Típus: Felhajtható fürdető ülőke
Elhárított hiba leírása: _____		Gyártási szám: _____
A jótállás új határideje: _____		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám: _____		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt: _____		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja: _____	3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Bejelentett hiba: _____		Típus: Felhajtható fürdető ülőke
Elhárított hiba leírása: _____		Gyártási szám: _____
A jótállás új határideje: _____		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám: _____		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt: _____		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja: _____	2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Bejelentett hiba: _____		Típus: Felhajtható fürdető ülőke
Elhárított hiba leírása: _____		Gyártási szám: _____
A jótállás új határideje: _____		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám: _____		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt: _____		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja: _____	1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
Bejelentett hiba: _____		Típus: Felhajtható fürdető ülőke
Elhárított hiba leírása: _____		Gyártási szám: _____
A jótállás új határideje: _____		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám: _____		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt: _____		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		