

6. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4312

Felhajtható fali kapaszkodó

1. Felhasználási terület

A felhajtható fali kapaszkodó WC ülőke mögötti falra szerelve a leülés és felállás, kerekesszékből történő átülés megkönnyítése, vagy mosdókagylók mellé szerelve kapaszkodásra használható.

Használaton kívül, felhajtott állapotban helyigénye jelentősen lecsökken, ezáltal megkönnyíti a WC- vagy mosdókagyló kerekesszékekkel történő megközelítését.

2. Jellemző méretek, adatok

Anyag: szénacél műanyag festékbevonattal

Csőátmérő: 22 mm

Befoglaló méret (hossz x magasság x szélesség): 670 x 220 x 100 mm

Talplemez méret (alap x magasság) 220 x 100 mm

Tömeg: 1,7 kg

Maximális terhelhetőség: 100 kg

Tartozékok

4 db. 8x60 mm-es hatlapfejű facsavar

4 db. K 12 típusú KOELNER dübel

4 db. Lapos alátét



Management System
ISO 9001:2008
Valid until:
2016.12.10
www.tuv.com
ID 9105076980

REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A MEDORT csoport tagja.



3. Szerelési útmutató

Kapaszkodóink elsősorban nedves helyiségekben (fürdőszoba, zuhanyozófülke, WC) történő közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják. Mivel ezek a helyiségek fokozottan balesetveszélyesek (nedves, csúszós, kemény padló- és falburkolat), különösen fontos a kapaszkodók megfelelő felszerelése és rögzítése.

A szerelési magasságot a felhasználás jellegének és a használó testalkatának megfelelően kell megválasztani! A rögzítő furatok helyét fúrás előtt célszerű a talplemezről a falfelületre átjelölni. **A fúrás ne a talplemezen keresztül történjen, mert a termék korrózióvédelmét biztosító műanyag bevonat megsérülhet.**

A kapaszkodó rögzítéséhez nem lehet általános érvényű útmutatást adni a különböző falszerkezetek anyagának és vastagságának sokfélesége miatt. A rögzítés módját a falszerkezettől függően egyedileg kell megválasztani.

Az általunk mellékelt műanyag dübel és facsavar csak megfelelő szilárdságú téglá- vagy betonfal esetén nyújt biztonságos rögzítést. Kisebb szilárdságú falakhoz (pl. vályog, gázbeton stb.) ez a típusú dübel nem alkalmazható.

Javasoljuk, a szerelést bízza szakemberre!

A falburkolat védelme érdekében a furatok elkészítése után, a kapaszkodó és a falburkolat egymáshoz illeszkedő felületeit gondosan meg kell tisztítani, mert a köztük maradó törmelékcsémák a csavarok meghúzásakor a csempeburkolatot elrepszthetik.

Az egyenletes felfekvés és a nedvesség elleni védelem érdekében a felfekvő felületek közé vékony rétegben gumiám vagy szilikon masszát kell kenni. A masszából kenjük vékony rétegben az alátétek alá is, hogy a csavar meghúzásakor esetleg megsérülő felületnél ne induljon el korróziós folyamat. Megszilárdulás után a felületek közül kinyomódott massa könnyen eltávolítható. A rögzítő csavarokat úgy kell meghúzni, hogy a kapaszkodó mozgásmentes legyen, szilárdan álljon.

4. Használat

A kapaszkodókar lehajtása: Húzza a kapaszkodókart a faltól elfele addig, amíg a rögzítő fészkekből kipattan, majd lassan hajtsa lefelé a kart vízszintes helyzetig.

A kapaszkodókar felhajtása: hajtsa felfelé a kart függőleges helyzetbe, majd enyhe nyomással pattintsa a rögzítő fészekbe, és így, a kapaszkodó kar megáll.

FIGYELEM!

- A támasztókart függőleges helyzetben rögzítő fészek megrepedése, eltörése esetén a termék nem használható, a lecsapódás veszély miatt. Az alkatrészt ki kell cserélni.
- A kapaszkodó használat során valamelyik rögzítő csavar fellazulása tapasztalható, haladéktalanul gondoskodni kell a meghúzásáról, javításról, mert az összes kötés gyors tönk्रे meneteléhez vezet, ami balesetet, kiszakadást idéz elő!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

5. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A kapaszkodó minden része a háztartásokban szokásosan használt karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

4.2. Karbantartás

A kapaszkodó nem rozsdamentes alapanyagból készül, ezért érzékeny a festék réteg megsértésére, és az állandó nedves környezetre. A korrózió elkerülése érdekében ne sértse meg a festékréteget. A vizes helyiséget a páradús tevékenység (mosás, szárítás, fürdés stb.) után szellőztesse ki és a kapaszkodót száraz ronggyal törölje át.

A rögzítéseket időszakonként ellenőrizni, illetve után húzni szükséges.

4.3. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!