



Használati útmutató

Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg alatt
Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg felett

Gyártja és forgalmazza:
 TAAN Kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28.
 www.ortoprofil.hu

A használati útmutató elérhető honlapunkon is.

A párna kiválasztásakor vegye figyelembe a beteg súlyát, mert más anyagsűrűségű párna kell a 70 kg alatti és a 70 kg feletti betegeknek.

Az eszköz csak un. I. típusú diabetezes tünetek esetén alkalmazható tünetenyhítő és preventív jelleggel (pl. bőrkípirosodás esetén). Amennyiben ennél súlyosabb a diabetes szövődményeihez kapcsolódó tünetei vannak, forduljon a kezelőorvoshoz.

Bevezető, javallat, felhasznált anyagok

Az Activ antidecubitus párna orvostechikai eszköz. Felfekvés megelőzésére kerekesszéket használó, érzéskieséssel nem rendelkező, járásképtelen, mozgássérült betegek ajánljuk. Alkalmazható kerekesszékekben és fotelben egyaránt. A felületi kiképzések tehermentesítik a decubitus miatt fokozottan érzékeny területeket. Hatásmechanizmusa azon alapszik, hogy a nyomást egyenletesen osztja el az ülőfelületen, ezáltal fenntartható a megfelelő vérkeringés. A párna poliuretán hab anyagból készül. A huzat vászon anyagú.

Figyelmeztetések

Ha bármilyen szokatlan rendellenességet tapasztal az eszköz használata során, amely vélhetően az eszköz használatával függ össze, vagy csak akkor jelentkezik, ha az eszközt alkalmazza, kérjük értesítse a gyógyászati segédeszköz boltot, ahol az eszközt vásárolta, illetve konzultáljon kezelőorvosával és hagyja abba a használatot

Alkalmazás, használat:

Az eszköz sík fele kell, hogy lefelé legyen. A megfelelő higiénia érdekében ajánlatos a párnára huzatot húzni.

Karbantartás, állagmegóvás:

A párna kézzel mosható semleges mosószerrel. Otthoni körülmények között fürdőkádban, bő vízzel, bármilyen fertőtlenítő tisztítószerrel kimoshatjuk. Igen lényeges az alapos öblítés. Legalább egy éjszakára hagyjuk a fürdőkádban kifolyni belőle a vizet, utána lehet szellős helyre téve szárítani. Az ülőpárna huzattal együtt tüskéivel befelé összetekerve, összekötve mosógépben max. 60 fokon mosható. Szárítása sugárzó hőtől távol. Intézményi körülmények között a párnát önmagában autoclavban 120 fokon 20 percig lehet sterilizálni.

Tisztítási előírások

- csak kézzel mosható
- nem fehéríthető
- szárítógépben nem szárítható
- vízszintesen kiterítve szárítható
- nem vasalható
- nem vegytisztítható
- hőforrástól távol szárítható
- óvatosan csavarható

Ártalmatlanítás, hulladékkezelés, újra felhasználás:

Huzamosabb idejű használat, vagy tárolás esetén előfordulhat, hogy vagy „ki van ülve” az eszköz, vagy már nem kellően rugalmas, puha. Ha ezeket a rendellenességeket észleli, már ne használja az eszközt, mert gyógyhatást már nem tudja megfelelően biztosítani. Az eszköz normál hulladékként kezelendő, veszélyes anyagot nem tartalmaz.

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat:

A jelen használati útmutató szerinti termék megfelel az orvostechikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Jótállás, szavatosság:

Vevői panasz esetén a kiszolgálás helyén kell a panaszt kivizsgálni és az esetleges ebből adódó jogos igényeket érvényesíteni. Vevői panasz esetén a vevőt a szavatossági jogok illetik meg, amellyel kapcsolatban a Ptk. „Hibás teljesítés”-re vonatkozó előírásai érvényesek. A szavatossági igény jellemzően 6 hónapon belül érvényesíthető.