

• BIOPFIT 45

Gumiszövetes térdtámasztó tok, szabad ízülettel

CE

ISO 9001:2015

Eszköz kihordási ideje: 12 hónap



ORTETIKA KFT.

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.

Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171

Fax: (26) 530-319

E-mail: ortetika@t-online.hu

www.ortetika.hu



T A G J A

Indikáció: Térdízületi instabilitás

Termék sínezetének beállítása:

Az eszköz első feladását, valamint a sínezet beállítását szakembernek kell végeznie!

- A láb külső és belső vonalához igazodva meghajlítjuk a síneket.
- Az eszköz belső oldalán két sintakaró rész található, melyek felső részénél egy kis nyíláson keresztül behelyezzük a síneket.

Termék felvétele:

1. A térdtámasztó felvételekor az érintett lábra helyezzük a testsúlyt.
2. A szétnyitott eszköz közepén lévő nyílást a térdhajlathoz helyezzük.
(A bevarrt tájékoztató címkéknek a termék felvételekor a comb hátsó részénél kell elhelyezkedniük.)
3. Az eszközt kellően megfeszítve zárjuk a tépőzárak segítségével először a comb magasságában, majd a térd alatt, úgy hogy a zárás következtében kialakult nyílás körülölelje a térdkalácsot.
4. A tépőzárás rögzítő bandázsok segítségével rögzítjük a kötést a combon, s az alsó lábszáron.

Kezelési útmutató:

A tisztítás idejére a síneket ki kell venni!

(A sín eltávolítását ne az eszköz színoldaláról kíséreljük meg! Az eszköz belső oldalán két sintakaró rész található, melyek felső részénél egy kis nyíláson keresztül a síneket el tudjuk távolítani. Jegyezzük meg, hogy melyik volt az eszköz belső, illetve külső oldalán, mert visszatételükkor nem cserélhetők fel!)

Mosása kézmeleg vízben, enyhébb hatású mosószerrel, kézzel történjen!

Mosógép és centrifuga használata nem ajánlott.

Fektetve szárítandó.

Nem vasalható.

Vegyileg nem tisztítható.

A teljes kiszáradás után visszahelyezzük a síneket.

Anyaga: Álneoprén