

# • BIOPFIT 42

**Gumiszövetes térdtámasztó készülék, szabályozható mozgásterjedelmű 4-tengelyes oldalsínnel**



**ISO 9001:2008**

**Eszköz kihordási ideje:** 12 hónap



## **ORTETIKA KFT.**

2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 149.

Tel.: (26) 331-201, (26) 331-145, (26) 331-171

Fax: (26) 530-319

E-mail: ortetika@t-online.hu

www.ortetika.hu



## **Indikáció:**

- térdizület gyulladós folyamata után,
- a térd egyéb okból kialakuló instabilitása, lötyögése esetén,
- a térd oldal- és nyílirányú stabilizálására,
- a térdizület műtét előtti nyugalomba helyezésére,
- postoperatív ellátásra.

## **Termék sínezetének beállítása:**

Az eszköz első feladását, valamint a sínezet beállítását szakembernek kell végeznie!

- Az orvos által meghatározott mozgásterjedelmet beállítjuk a síneken a mozgásterjedelmet határoló csavarok segítségével.
- A láb külső és belső vonalához igazodva meghajlítjuk a síneket.
- A combtokot és a vádlitokot felhelyezzük a lábra.
- A két sint felhelyezzük a megfelelő helyre a tépőzárak segítségével.
- A tépőzárás rögzítőbandázsok segítségével rögzítjük a tokokat a lábon.

## **Termék felvétele:**

*A termék felvételekor kövessük a szakember útmutatásait a termék helyes helyzetének megtalálásához.*

1. A tépőzárak segítségével zárjuk a combtokot, majd a vádlitokot.
2. A négy tépőzárás bandázs megfelelő megfeszítésével rögzítjük a kötést.

*Az eszköz levételekor a sínezetet ne távolítsuk el, hogy a szakember által beállított helyzetük ne változzon.*

## **Kezelési útmutató:**

A térdrögzítő tisztításának idejére a sínezetet eltávolítjuk a tokokról. *(Jegyezzük meg, hogy melyik volt az eszköz belső, illetve külső oldalán, mert visszatételükkor nem cserélhetőek fel!*

*Valamint ügyeljünk levételükkor a helyzetükre, hogy visszahelyezésükkor ugyanoda kerüljenek vissza.)*

A palástok mosása max. 40 °C-os vízben, enyhébb hatású mosószerrel, kézzel történjen!

Centrifuga használata tilos.

Fektetve szárítandó.

Nem vasalható.

Vegyileg nem tisztítható.

A tokok teljes kiszáradása után ismét összeszereljük az eszközt, ügyelve a tokok és a sínek helyzetének pontos beállítására.