

**PM-433 ADAPTÁLHATÓ TÉRDORTÉZIS, GUMISZÖVETES,
TÉRDMOZGÁST SZABÁLYOZÓ OLDALSÍNNEL**
Mozgástartomány: flexió 0-90°, extenzió 0-20°

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki ismertető:

A készülék a lábszár alsó harmadától a comb felső harmadáig érő, sínvázal erősített, szabad térdmozgást biztosító, tépőzáras rögzítéssel és állítással készülő lábszár- és combmandzsetta. Anyaga elasztikus laminált textil. A lábszár- és combmandzsetta mindkét oldalán végigvonuló oldalsíneket az orvos által meghatározott flexiós és extenziós mozgást biztosító állítható ízület kapcsolja össze. Mozgástartomány: flexió 0-90°, extenzió 0-20°. A készülék első feladását, a síneket beállítását ill. változtatását minden esetben az orvos javaslata alapján ortopéd technikai szakembernek, vagy szakképesítéssel rendelkező gyógyászati segédeszköz forgalmazónak kell végeznie.

Síneket beállítása: A síneket textilborítása nincs végig levarrva, így tapintással megkeressük a nem levarrt részt, és könnyedén kihúzzuk a síneket. A 0° és 90° mozgástartomány közötti 15° – 30° – 45° -60° – 75° értéket a csavar áthelyezésével lehet biztosítani (lásd ábra). A mozgástartomány beállítása után a textilborítás nyílásán a sín visszahelyezhető. Vigyázni kell a jobb- és baloldali síneket helyes behelyezésére, a síneket ne cseréljük fel!

Méreték:	1	2	3	4
Térdkalács felett 5 cm-rel mért körméret	45cm	50 cm	55 cm	60 cm
Térdkalács alatt 5 cm-rel mért körméret	36 cm	41 cm	46 cm	51cm

Orvosi ismertető:

Ezt a térdortézist akkor rendeljük, amikor térdműtét vagy rövidebb-hosszabb teljes rögzítés után a térdízületi folyamat gyógyulásával egyre több mozgást remélhető és engedélyezhető. Ez a készülék csak a térdízület rögzítésére alkalmas, tehermentesítés esetén más, komolyabb készüléket kell egyedi méret alapján készíteni.

Használati útmutató:

- Válassza ki a megfelelő méretű segédeszközt, a térdkalács felett 5 cm-rel, valamint a térdkalács alatt 5 cm-re mért körméret alapján, a fenti táblázat segítségével.
- Helyezze az eszközt a térd köré, ügyelve arra, hogy a sínezen található ízületek a térd két oldalán, a csukló mozgás forgáspontjánál helyezkedjenek el, és a gumiszövet összeerősítése előre kerüljön.
- A tépőzárakkal rögzítse a kívánt körméterre rögzítjük a tokot.

További felvilágosításért kérjük, forduljon az eszközt átadó egészségügyi szakemberhez.

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére, használatára átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Tisztítás:

Távolítsa el a síneket a tokból. A frottír bélésű rugalmas szövetet 30 °C-os vízben, semleges vegyhatású mosószerrel, kézzel kell mosni. Szárítás természetes módon, vasalni tilos.



A Promobil Zrt. tanúsítja, hogy jelen termék kialakítása az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17) EÜM rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechikai eszköz, megfelel a rendelet 1 sz. mellékletben foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetészerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Készíti: PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/A
Tel./fax: 433-7190 Zöld szám: 06-80-201-276
www.promobil.hu e-mail: promobil@promobil.hu

EMKI

ISO 9001
ISO 13485



EAN kód: 599631841202