

**Szerviz egységek:****REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284  
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224  
 3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826  
 3900 Szerencs, Bekecski út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

**REHAB-GENERAL KFT.**

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

**REHAB-HUNGARIA KFT.**

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

**PRÍMA PROTETIKA KFT.**

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

**PROMOBIL ZRT.**

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

**MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.**

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

**Használati útmutató****B-4322**

Összecsukható, hordozható szobai WC



**Figyelem:** Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került

**1. Felhasználási terület:**

A házi betegápolás megkönnyítésére, az önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottak részére készül. Alkalmazható korházakban, szociális intézményekben is. Minden olyan esetben javasolt a használata, ahol a mellékhelyiséget a beteg nem tudja megközelíteni. A felhajtható kartámasz megkönnyíti az ágyról, kerekesszékről történő átülést. A kárpitozott ülőkebetéttel szobai székként is használható. A műanyag edény eltávolítása után összecsukott állapotban viszonylag kis helyen tárolható.

**A gördíthető szobai WC nem alkalmas a beteg mozgására, kerekesszékként való használatra.**

**2. Jellemző méretek, adatok**

A termék két típusban készül: B-4322 Fix és B-4322/G Gördíthető változat

Méretek mm-ben	B-4322/F	B-4322/G
Hosszúság	620	670
Szélesség	540	560
Magasság	1000	1070
Beülő szélessége	440	440
Ülőke magassága	480	540
Kartámasz magassága ülőke fölött	250	250
Befoglaló méretek összecsukva	540x240x1360	540x240x1335
Teljes súly (kg)	8,8	9,8
Kerék méret	-	80
Terhelhetőség (kg)	100	100

**Tartozékok:**

1db műanyag edény fedővel

1db ülőbetét

1db használati útmutató

**1. Használat**

A szobai WC felállításakor először a lábak alsó keresztmerezítőjén található rögzítő szalagon lévő tépőzárakat kell szétbontani, majd egyik kézzel a háttámla cső felső vízszintes részét középen megfogva a WC hátsó lábait a talajon megtámasztva, másik kézzel az ülőket felül megfogva hajtsuk lefelé az ülőket.

Az első láb kinyitásával összhangban a háttámlát folyamatosan döntjük hátrafelé, hogy az első lábak alsó vége mindig a talaj közelében maradjon. A nyitást addig végezzük, míg a szék teljesen ki nem nyitódik. Ezután a lábak közötti merevítő oldalrudazatok lenyomásával a széket összecsukódás ellen biztosítjuk. Hajtsuk le a kartámaszokat és az ülőkére helyezük fel az ülőkebetétet.

JÓTÁLLÁSI JEGY	
Eladószerv tölti ki!	
A vásárlás napja 20..... hó ..... nap. .... (hónap betűvel) ..... aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b>	<b>3</b>
Típus: <b>B-4322</b>	Bejelentés időpontja: ..... <b>3</b>
Gyártási szám: .....	Bejelentett hiba: .....
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap	Elhárított hiba leírása: .....
Eladó ..... aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje: .....
	Munkalapszám: .....
	Kelt: .....
	20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b>	<b>2</b>
Típus: <b>B-4322</b>	Bejelentés időpontja: ..... <b>2</b>
Gyártási szám: .....	Bejelentett hiba: .....
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap	Elhárított hiba leírása: .....
Eladó ..... aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje: .....
	Munkalapszám: .....
	Kelt: .....
	20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)
<b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b>	<b>1</b>
Típus: <b>B-4322</b>	Bejelentés időpontja: ..... <b>1</b>
Gyártási szám: .....	Bejelentett hiba: .....
Kelt: ..... 20..... hó ..... nap	Elhárított hiba leírása: .....
Eladó ..... aláírás (P.H.)	A jótállás új határideje: .....
	Munkalapszám: .....
	Kelt: .....
	20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.)

Hátulról illesztjük be a műanyag vödör peremét az ülőke alján lévő vezetősínbe és csúsztassuk előre az ülőke nyílása alá.

A szobai WC összecukása az előbbiekkal ellentétes módon és sorrendben történik.

**Figyelem! Az összecukásnál és szétnyitásnál ügyeljen arra, hogy ujjja, keze ne szoruljon be a vázcsövek, illetve a csövek és ülőke közé!**

**Beülés előtt a gördíthető WC-t a hátsó keréken lévő rögzítő fékekkel minden esetben rögzíteni kell!** Használat és a kiszállás után oldja a féket a WC mozgatószárhoz.

## 2. Karbantartás, tárolás

### 4.1. Tisztítás

A szobai WC vázszerkezetét és kárpitozott részét semleges hatású karcolásmentes mosószeres textíliával lehet lemosni, majd szárazra törölni.

A műanyag vödört minden használat után ki kell üríteni, és a háztartásban használt fertőtlenítőszerrel (Hypo, Domestos) kitisztítani. A kárpitozott felső rész, illetve az ülőke fertőtlenítése időnként (intézményi használat esetén minden használat után!) szintén javasolt!

### 4.2. Tárolás

A szoba WC-t hagyományos formában, székként is lehet tárolni!

### 4.3. Karbantartás

A szobai WC rendszeres karbantartást nem igényel.

### 4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

## FIGYELEM!

- **A higiéniai előírások betartása a fertőzésveszély elkerülése érdekében **KÖTELEZŐ!****
- **A szobai WC egyoldali, félkezes terhelése TILOS!**
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
- Botvéggumi mérete: Ø 22 mm belső átmérőjű.
- A kerekek cseréje, külső felületük roncsolódása esetén feltétlenül szükséges!
- Sérült repedt vödör nem használható, cseréje szükséges!
- Használat előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vödör a megvezető sínek között helyezkedik-e el!
- A szobai WC- t csak a megengedett súlyhatárig lehet terhelni!
- A vázszerkezet bármilyen elgörbülése, deformálódása, kötőelemek lazulása esetén a szobai WC-t használni TILOS!
- Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

*Alkatrészek beszerzése a szervizegységeknél lehetséges.*

**A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételel vásárolta!**

## JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

**A jótállási igény a jótállási jeggyel és számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) vagy a kijelölt szerviz egységeknél érvényesíthető.**

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

**Tájékoztatjuk, hogy a Szobai WC-t javításra, csak tisztán, fertőtlenített vödörrel és ülőlappal tudjuk átvenni.** Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani.

**REHAB Zrt.**



A **MELDORT** csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330