

ALAPLAP felhelyezés kétrészes terméknel

1.



- ❖ A szennyeződés nagyobb részét száraz törlővel távolítsa el. Tisztítsa meg a sztóma környékét „STOMIC” bőrtisztító folyadékkal majd törölje szárazra a bőr felületét.

2



- ❖ A sztóma környékének ápolására használja a „STOMIC” bőrtápláló krémet

3



- ❖ A sztóma körüli egyenetlenségeket, redőket töltsse ki „STOMAGARD SP60” pasztával, amelyet vizes kézzel kell a sztóma köré felvinni

4



- ❖ Az alaplapot csak a tökéletes száradás után lehet felhelyezni. A megfelelő méretre kivágott alaplap hátoldalán lévő védőfóliát távolítsa el

5

Helyezze a hasfalra az alaplapot úgy, hogy nyílásának alsó szélét a sztóma alsó széléhez igazítja. Majd körkörös nyomó és simító mozdulatokkal felfelé haladva óvatosan a sztóma körüli bőrre nyomkodja