

## Használati utasítás egyrészes zárt zsákok felhelyezéséhez

1.



- ❖ Mielőtt a sztómazsákokat felhelyezi a sztóma környékét szappanos vízzel vagy „STOMIC” lemosóval tisztítsa meg, majd a bőr felületét törölje szárazra.

2



- ❖ A sztóma környékének ápolására használja a „STOMIC” bőrtápláló krémet
- ❖ A sztómazsák felhelyezését a krém teljes beszívódása után kezdje meg

3

A zsák nyílását a bejelölt körök mentén vágja méretre (kivéve ha a méret megfelelő). Vágásnál vigyázzon, hogy a legszélső körnél kívül ne kerüljön mert megsérülhet az a ragasztóréteg, amely biztosítja a sztóma környékének szivárgás mentes elzárását

4



- ❖ Erősen fújjon a zacskóba, vegye le a védőfóliát a tapadószelatinről. Illessze a zacskót a sztóma nyílására, tenyerével szorítson rá, majd ujjal simítsa el, hogy a zacskó jól odatapadjon

5

A hidrokolloid megtapadása hosszabb időt vesz igénybe, mert a ragasztó a test melegének átvétele után fejt ki az optimális hatást, ezért a zsák felhelyezésekor a körkörös nyomó és simító mozdulatokat többször és hosszabb ideig kell végezni

6

A zacskó eltávolítását a tapadó zselatin felülről lefelé történő óvatos lefejtésével éri el

7.

A szűrőtakaró a szűrő lezárására / pld. zuhanyozásnál / illetve a zsák időszakos gáztalanítására szolgál.