

Használati utasítás egyrészes nyitott zsákok felhelyezéséhez

1.


Felhelyezés előtt a sztómazsákokat le kell zárni. A zárás három módon lehetséges

❖ Zárócsattal



A zacskó nyakrészét hajtsa rá a csat pengéjére, ujjával szorítsa le, majd fordítsa a csat tokjába és a rugózó záró résszel rögzítse.

❖ Záró csíkkal

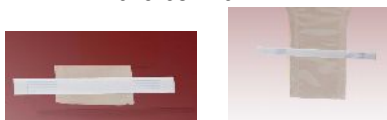

Távolítsa el a védőborítást a ragasztócsíkról. A zsák nyílórészének 2-3 felfelé tekerése után a záró csíkot a hidrokolloid gyűrűvel ellentétes oldalra hajtsa be szoros illesztéssel.

❖ Tépőzárral



A sztómazsák alsó nyílását összenyomjuk, majd 2 felfelé tekerő mozdulat után a tépőzár bolyhos részével rögzítjük.

2.



❖ Mielőtt a sztómazsákokat felhelyezi a sztóma környékét szappanos vízzel vagy „STOMIC„ lemosóval tisztítsa meg, majd a bőr felületét törölje szárazra.

3.



❖ A sztóma környékének ápolására használja a „STOMIC” bőrtápláló krémet
❖ A sztómazsák felhelyezéséért krém teljes beszívódása után kezdje meg

4

A zsák nyílását a bejelölt körök mentén vágja méretre (kivétel ha a méret megfelelő) Vágásnál vigyázzon, hogy a legszélső körnél kívül ne kerüljön mert megsérülhet az a ragasztóréteg, amely biztosítja a sztóma környékének szivárgás mentes elzárását

5



❖ Erősen fújjon a zacskóba, vegye le a védőfóliát a tapadó zselatinról. Illessze a zacskót a sztóma nyílására, tenyerével szorítson rá, majd ujjal simítsa el, hogy a zacskó jól odatapadjon

6

A hidrokolloid megtapadása hosszabb időt vesz igénybe, mert a ragasztó a test melegének átvétele után fejti ki az optimális hatást, ezért a zsák felhelyezésekor a körkörös nyomó és simító mozdulatokat többször és hosszabb ideig kell végezni

7

A szűrőtakaró a szűrő lezárására / pld. zuhanyozásnál / illetve a zsák időszakos gáztalanítására szolgál

8

A zacskó eltávolítását a tapadó zselatin felülről lefelé történő óvatos lefejtésével éri el. A sztómazsákok nyitása a zárással ellentétes módon lehetséges. A zsák ürítése után a nyílást ajánlatos kívül-belül nedves törülkövel megtisztítani.