

## **QMED Life: QS-610 Ágyék-keresztcsont ortopédiai fűző**

### **Általános ismertető:**

Az intervertebrális (csigolyák közti) ízületek és porckorongok, izomkapcsolódások, az ágyéki terület ínszalagjai, és az ágyéki-keresztcsonti ínszalagok sérülései, betegségei vagy működési zavara (diszfunkciója) esetén a QS-610 medenceöv hatékonyan segít a rehabilitációban, és a panaszok kezelésében. A dinamikus rögzítés lehetővé teszi a mozgás terjedelmének hatékony kontrollálását, valamint a testtartás javítását, ami enyhítheti a degeneratív változásokkal, vagy a gerincszelvények diszfunkcionális működésével kapcsolatos tüneteket. A QS-610 használható az ágyék-keresztcsonti területkülönböző eredetű működési zavarainak műtét nélküli kezelésére, az ágyéki szelvények instabilitásának műtete utáni rögzítésre, idegsebészeti/ortopédiai beavatkozások utókezelésére – funkcionális kezelésre, sérülések vagy túl-terhelés megelőzésére, az ágyéki terület veleszületett rendellenességeire (fájdalmas vagy panaszmentes), fájdalmakkal járó degeneratív gerincbetegekre.

### **Indikáció**

Lumbago, postdissectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.

### **Kontraindikáció, ellenjavallat:**

Az ágyék-keresztcsonti terület immobilizációját (rögzítését) igénylő állapot fennállása esetén nem ajánlott.

### **Működése:**

Csökkenti az ágyéki gerincrés flexióját / extenzióját. Kiegyenlíti az intervertebrális porckorongokon és ízületeken lévő nyomást. Megtámasztja az elgyengült és / vagy merev izmokat és enyhíti a terhelésüket. Mechanikai stabilizációt biztosít.

### **A fűző felhelyezése:**

Mindig győződjünk meg róla, hogy a fűző méretét gondosan választottuk meg, mert a fűző, támasz funkcióját csak így tudja megfelelően ellátni. A fűzőt kinyitott állapotban helyezzük a medence köré úgy, hogy az 2cm-el legyen a farkcsonti csigolyái felett – a termék belső oldalán található címke felfelé kell álljon. A hátsó merevítőknak az ágyék-keresztcsonti gerincréshez kell tapadniuk. A tépő-zár segítségével erősítsük magunkra a fűzőt.

Győződjünk meg róla, hogy a fűző optimális rögzítést biztosít, ugyanakkor nem zavarja a légzést. A fűző használatának mértékét és időtartamát egészségügyi szakember-embernek kell pontosan megállapítania, csak úgy, mint a megfelelő rehabilitációs tornagyakorlatokat.

## **Tisztítás**

A fűzőt kézzel mossuk semleges hatású mosószerrel legfeljebb 35°C-on. Ne klórozzuk, ne szárítsuk szárítóban, ne centrifugáljuk, gyengén csavarjuk ki szárítás előtt. Ne szárítsuk mesterséges hőforráshoz közeli helyen. Víz-szintesen, fektetve szárítsuk. Ne vasaljuk.

## **FIGYELEM!**

A személyi higiéniai szabályok figyelmen kívül hagyása és a termék nem megfelelő mosószerrel való mosása a bőrhámlásához, horzsolódásához, vagy más, izzadással és a baktériumok elszaporodásával kapcsolatos kellemetlen (diszkomfort) érzetkezéshoz vezethet. Kérjük, ne használja a terméket együtt melegítő hatású olajokkal, vagy gélekkel. Mosás után hagyjuk a terméket teljesen megszáradni - a mosószer maradvány, ami a termékben marad, bőrkellemetlenségeket és az ortézis szövetének a károsodását okozhatja.

## **SZAKEMBER HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK A MEG-FELELŐ SEGÉDESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK ÉSKIVÁLASZTÁSÁNAK ELDÖNTÉSE.**

**Anyagösszetétel:** poliészter 52%, poliamid 16%, latex 32%

## **Méretezés:**

<b>Derékbőség (cm)</b>	<b>Méret</b>
56-71	XS
69-84	S
81-96	M
94-109	L
107-122	XL
120-135	XXL

**Gyártja :** MDH SP Z O.O., ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 LODZ, Lengyelország

**Forgalmazza:** REHAB Zrt., 2000 Szentendre, Kalászi út 3., Tel.: +36 26 88 62 88 , Fax: +36 1 700 17 21,  
[www.rehabzrt.hu](http://www.rehabzrt.hu)



LENGYEL TERMÉK