



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VCM202

Váltakozó nyomású antidecubitus matrac



Gyártja:

MDH SP Z O.O.,
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349
LODZ, Lengyelország

Forgalmazza:

REHAB Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Tel.: +36 26 88 62 88
Fax: +36 1 700 17 21

A **MEDORT** csoport tagja.

Figyelem:

Az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!

1. Felhasználási terület

Váltakozó nyomású felfekvés elleni légkamrás matrac ágyra rögzíthető fülekkel. Maximális terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén: 120 kg.

Felfekvés jellegű problémák megelőzésére és a kialakult felfekvés gyógyulásnak elősegítésére használható. Alkalmazható otthoni és intézményi körülmények közötti ápolásra.

2. Működés

A két légkörös rendszerben váltakozva leereszti és felfújja az egyes légkörök celláit matracban. A matrac és a pumpa együttes működése során folyamatos mozgást biztosít (váltogatja a test felfekvési pontjait), ezáltal folyamatosan masszírozza az izomzatot és elősegíti a vér keringését, ami meggátolja felfekvés kialakulását.

3. Használat

A beteg pozícióját a matracon változtatni kell a matrac használata mellett is. A lehető legjobb eredmény eléréséhez megfelelő nyomás szükséges, ezért kérjük, **mindig konzultáljon orvosával, mielőtt a matracot használja!**

A matracot egyszerre csak egy beteg használhatja (a matracon egyidejűleg csak 1 személy tartózkodhat).

A felfújható matracon nem végezhető fizioterápiás kezelés vagy rehabilitáció.

3.1. Összeállítás:

1. Helyezze a matracot egy normál ágyra, úgy hogy a levegő csatlakozása a beteg lábánál legyen. Rögzítse a fülekkel a matracot az ágyhoz.
2. Terítse le a matracot lepedővel.
3. Ellenőrizze, hogy a pumpa kapcsolója "OFF" állásban legyen
4. Csatlakoztassa a pumpát az elektromos hálózathoz
5. Csatlakoztassa a légcsöveket a pumpához és a matrachoz
6. Helyezze a pumpát kemény felületre vagy akassza fel a zsanérok segítségével. Száraz és tiszta helyen kell működtetni a pumpát. Por, szőr vagy más szennyeződés eltávolíthatja a szűrőt.
7. Kérjük, ellenőrizze, hogy a csövek nincsenek meghajolva vagy megtörve (pumpa és a matrac között).
8. Kapcsolja be a pumpát.
9. Állítsa be a nyomásszabályozót maximumra. Ez csökkenti a matrac felfújási idejét, amely kb. 15-20 perc.
10. Miután felfújtuk a matracot, akkor válassza ki a megfelelő nyomást az orvos ajánlása szerint.
11. Fektesse a beteget a matracra.

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY VCM202 Antidecubitus matrachoz	TAJ szám:
Eladószerző tölti ki!		
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre		Levágandó jótállási, javítási szelvények
Bejelentés időpontja:	5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5
Bejelentett hiba:		Típus: VCM202 Antidecubitus matrac
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja:	4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4
Bejelentett hiba:		Típus: VCM202 Antidecubitus matrac
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja:	3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Bejelentett hiba:		Típus: VCM202 Antidecubitus matrac
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja:	2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Bejelentett hiba:		Típus: VCM202 Antidecubitus matrac
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		
Bejelentés időpontja:	1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
Bejelentett hiba:		Típus: VCM202 Antidecubitus matrac
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapszám:		Eladó aláírás (P.H.)
Kelt:		
20..... hó nap aláírás (P.H.)		

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a hatályos jogszabályok alapján meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül oly mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével. **A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.**

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe. A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe – ha nem javítható másképpen - csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak egy példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Jótállási igényét bejelentheti a kiszolgálás helyén vagy a forgalmazónál

3.2. Pumpa működésének fázisai:

1. fázis: cellák felfújása
 2. fázis: leereszti első légkör celláit
 3. fázis: a leeresztett cellák visszafújása
 4. fázis: leereszti a második légkör celláit
 5. fázis: a leeresztett cellák visszafújása
- A fázisok 6 percenként változnak.

3.3. Kikapcsolás:

1. Fordítsa a kapcsolót "OFF" állásba.
2. Húzza ki a csöveket, hogy a levegő el tudjon távozni a matracból.

4. Kezelés

Válassza le az elektromos hálózatról a pumpát. Tisztítsa meg a matrac felületét nedves kendővel és kímélő tisztítószer. Ezután törölje át újra nedves majd száraz puha ruhával. A pumpát csak akkor lehet tisztítani ha nem csatlakozik az elektromos hálózathoz. A pumpának száraznak kell lennie mielőtt csatlakoztatják az elektromos hálózathoz.

FIGYELEM!

A matrac langyos vízzel, szappannal és kímélő folyékony mosószerrel tisztítható. A tisztítás után gondosan szárítsa meg a matracot. A pumpát nedves ruhával törölje át. A matracot és a pumpát hagyja teljesen megszáradni.

A matracot tilos:

- magas hőmérsékleten tisztítani,
- szárítógépben szárítani,
- fehérítővel, oldószerrel tisztítani,
- kémiai vegyszerekkel kezelni,
- vasalni.

A matracot tároláshoz hajtsa össze. Mielőtt összehajtja, kérjük, ellenőrizze, hogy teljesen száraz-e a matrac. A matracot száraz helyen kell tárolni. Ne tegye a matracot nyílt láng közelébe ill. ne tegye ki erős hőhatásnak.

5. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg javítani a pumpát, ne szerelje szét, áramütés kockázatának teheti ki magát!

5.1. A pumpa be van kapcsolva, és nem működik:

- Kérjük, ellenőrizze a kábel csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Ha nem, akkor csatlakoztassa azt.
- Kérjük, ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték kiégett, akkor cserélje ki.
- Kérjük, ellenőrizze az elektromos hálózatot, hogy van-e áram az elektromos csatlakozóban.
- Kérjük, ellenőrizze nem sérült-e a kábel. Ha sérült ki kell cserélni a kábelt.

5.2. A pumpa túl lassan működik, vagy a nyomás túl alacsony:

- Kérjük, ellenőrizze a nyomásszabályozó a megfelelő nyomásra van-e beállítva. Ha nem, kérjük, állítsa be a megfelelő nyomásra.
- Kérjük, ellenőrizze a légcsövek megfelelően csatlakoznak-e a pumpához. Ha nem, kérjük csatlakoztassa azokat megfelelően, így megakadályozva a levegő eltávozását.
- Kérjük, ellenőrizze a csöveket ne legyenek megtörve vagy meghajtvva. Ha igen, kérjük, kiegyenesítse ki a csöveket.
- Kérjük, ellenőrizze a cellák nem sérültek-e. Ha sérültek kérjük, használja a javító készletet.
- Kérjük, ellenőrizze a pumpa megfelelően működik-e. Ha furcsa, sziszegő hangot ad, akkor forduljon szervizhez.

A termék szervizét a forgalmazó látja el.

6. Műszaki adatok

<u>Pumpa:</u>	<u>Matrac</u>
Tápellátás: 220 V 60 Hz	Méret: 200 cm x 90 cm x 7 cm
Levegő kimenet: 7-8 liter / perc.	Súly: 2,2 kg
Nyomás tartomány: 70 Hgmm - 135 Hgmm	Egyenletes eloszlású max. terhelés: 120 kg
Ciklus idő: 6 perc	Anyaga: PVC (EN-71)
Fogyasztás: 7 W	130 buborék sejtek
Biztosíték: 1 A	szín: bézs
Méret: 28 cm x 10,5 cm x 9,5 cm	PVC vastagság: 0,30 mm
Súly: 1,4 kg	Gyári szám: A csomagoláson

7. A készlet tartalma

- PVC matrac
- Elektromos pumpa
- Légvezeték
- Javító egység PVC ragasztóval, PVC folttal,
- Használati útmutató

7. Biztonsági figyelmeztetések

- A matracot ne használja gyúlékony anyagok közelében, mert az robbanáshoz vezethet!
- Mindig ellenőrizze, hogy a pumpa megfelelő elektromos hálózathoz csatlakozik (220V/60 Hz)!
- Ha nem használja a matracot, a pumpát mindig kapcsolja ki és válassza le az elektromos hálózatról.
- A pumpát száraz helyre kell tenni, nem érheti víz!
- Kérjük, ne érintse meg a pumpát, ha a pumpa vagy a keze nedves!
- Kérjük, fordítson különös figyelmet a pumpa elhelyezésére, ha gyermekek vagy fogyatékkal élők is vannak a környezetben!
- A pumpát csak a matrac felfújására használja. Ne használja azt más célra, más levegővel töltött eszközök felfújására!
- Soha ne használja a pumpát, ha sérülés látható a kábelen!
- Tartsa távol a kábelt forró felületektől!
- Soha ne hagyja a pumpát olyan helyen, ahol a kábel vagy a csövek veszélyesek lehetnek azok számára, akik nem ismerik a készüléket!
- Ha leválasztja a hálózatról, mindig a dugót fogva húzza ki hálózatról, ne a kábelt!
- A pumpa szűrőnek mindig tisztának kell lennie minden szennyeződéstől!
- A PVC anyag bőrrallergiát okozhat némely személynél, ezért mindig használjon lepedőt a matrac felett.

FIGYELEM:



**A ragasztó és gőze fokozottan tűzveszélyes!
Bőr- és súlyos szemirritációt okoz!
Szédülést, álmosságot okozhat!**

- Gyermekektől elzárva tartandó!
- Távol tartandó nyílt lángtól, szikrától, direkt hőforrástól, dohányzás tilos!
- A tubust szorosan zárva tartva tárolandó!
- Használatakor kesztyű, védőruha, arc és szemvédő viselendő!
- Ha szembe kerül bő vízzel, azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni!
- Bőrre kerülve bő vízzel azonnal le kell mosni!
- Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni!