



Használati útmutató a E10 Push Chair





FIGYELMEZTETÉS:

SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT, HA A GYERMEK KIESIK VAGY KICSÚSZIK A GYERMEKKOCSIBÓL.

MINDIG KAPCSOLJA BE A BIZTONSÁGI ÖVET.

SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL.

FONTOS: ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBBIEKBEN IS SEGÍTSÉGÉRE LEHESSEN.

A GYERMEK BIZTONSÁGA AZ ÖN FELELŐSSÉGE. EZ A GYERMEKKOCSI KIZÁRÓLAG EGY GYERMEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTONSÁG

- Pontosan kövesse az utasításokat. A nem megfelelő használat károsíthatja a gyermekocsit.
- A termék maximális terhelhetősége 40 kg.
- A gyermeket mindig kösse be, és soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekocsiban.
- FONTOS - Gyermek biztonságáért, mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági öv hevederei megfelelően vannak-e beállítva. Ha a hevedereket nem az utasításoknak megfelelően állítja be, a gyermekocsi veszíthet a stabilitásából.
- A hevederek és a biztonsági öv nem helyettesíti a megfelelő szülői felügyeletet.
- A beállítások végzése során, ügyeljen arra, hogy a gyermek közelében ne legyenek mozgó alkatrészek.
- FONTOS - VESZÉLY: Nagyon fontos, hogy a gyermekocsi összecukásánál vagy kinyitásánál a gyermek ne legyen a gyermekocsi közvetlen közelében. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, ezen műveletek során fennáll a veszélye, hogy valamilyen esetleg becsúszhat vagy beszorul.
- A megadott terhelhetőségen felül ne szállítson további gyermekeket vagy csomagokat a gyermekocsin. Túlzott terhelés hatására a gyermekocsi instabillá válhat, és az alkatrészekre nehezedő nyomás azok töréséhez vezethet.
- A túlzott terhelés, a nem megfelelő összecukás és bizonyos tartozékok használata (pl. gyermekülés, csomagtartó kampók, esővédők, testvérfellépő – a gyártó által jóváhagyottak kivételével) a gyermekocsi sérülését vagy törését okozhatják.
- Nem vállalunk garanciát abban az esetben, ha a meghibásodást olyan tartozék alkalmazása okozta, amelyet nem a gyártó bocsátott rendelkezésre.
- Soha ne hagyja a gyermeket a gyermekocsiban, amikor lépcsőn, mozgólépcsőn vagy más, szállításra alkalmas eszközön kíván közlekedni.
- A gyermekocsinak minden esetben könnyen kinyithatónak és összecukhatóknak kell lennie. Ne erőltesse. Előfordulhat, hogy a későbbiekben újra el kell olvasnia az utasításokat.
- Óvatosan tolja a gyermekocsit a járdaszegélyeknél és az egyenetlen talajon. Az ilyen jellegű túlzott igénybevétel károsíthatja a gyermekocsit.
- Ne engedje, hogy a gyermek ráálljon a lábtartó panelre.
- Ne tegye ki a gyermekocsit hő hatásának (pl. radiátor vagy közvetlen napfény).
- Ne tegyen semmit a nap- esőtető ponyvájának a tetejére, mert felsértheti.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

A gyermekkocsi rendszeres karbantartása nagyon fontos. Rendszeresen ellenőrizze a szegecseket és a csavarokat, hogy nem lazultak-e ki. Ellenőrizze a fékeket, a kerekeket és a gumikat; cseréltesse ki vagy javíttassa meg, ha szükséges. Ellenőrizze a biztonságot szolgáló eszközöket, hogy megfelelően működnek-e, különös tekintettel az elsődleges és másodlagos zárrakra. Ezeknek mindenkor szabadon kell mozogniuk. Ne használja a terméket, ha szerkezetében meghibásodott.

- Javasoljuk, hogy évente szervizeltesse.
- Ha a kerekek csikorognak, kenje be teflont vagy szilikon tartalmazó kenőanyaggal. NE használjon olaj vagy zsír alapú termékeket, mert ezek magukba szívják a szennyeződések és eltömődve blokkolják a mozgó alkatrészek működését.
- Kizárólag a gyártó által rendelkezésre bocsátott cserealkatrészt használjon. Egyéb alkatrészek használata nem biztonságos.

TISZTÍTÁS

- Tisztítsa meg a vázat enyhe mosószeres, nedves ruhával, majd törölje szárazra.
- Ha a gyermekkocsi váza sós vízzel érintkezett, javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb csapvízzel öblítse le,
- A nap- esőtetőt enyhe mosószeres, nedves szivaccsal is át lehet óvatosan törölni. Az ülés huzata, a fejpárna, az oldalpárnák és a párnázott hevederek moshatók. Teljesen szárítsa meg, mielőtt újra használja őket.
- A terméket nedves, vizes állapotban ne hajtja össze. Ne tárolja nedves helyiségben. Ez a termék rozsdásodását/penészedését okozhatja.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy folyamatos termékfejlesztése során és annak eredményeképpen változtatásokat eszközöljön a terméken.

UTASÍTÁSOK

FONTOS:

- HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT, HOGY A KÉSŐBIEKBEN IS SEGÍTSÉGÉRE LEHESSEN.
- HASZNÁLJA MINDKÉT FÉKET, HA A GYERMEKKOCSIT LEPARKOLJA..
- GYERMEKE BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETHETI, HA NEM KÖVETI EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

A GYERMEKKOCSI FŐBB RÉSZEI



HÁTSÓ
TENGYEL



LÁBTARTÓ



ELSŐ KEREKEK



HÁTSÓ KER-
EKEK



NAP- ES-
ÖTETŐ



OLD-
ALPÁRNÁK



ÜLÉSSZÖVET




VÁZ ÉS ALSÓ
TÁROLO



MEGJEGYZÉS: EZ AZ ALKATRÉSZ CSAK A SOMAGOLÁS RÉSZÉ

1. VÁZ

Nyissa ki a vázat és állítsa függőleges (álló) helyzetbe. Amikor az elsődleges és a másodlagos zár is aktiválódik, egy kattánó hangot fog hallani.

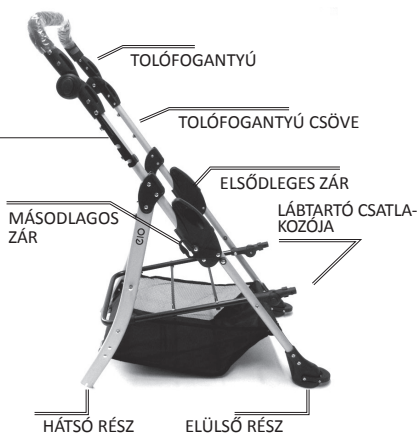

2. HÁTSÓ TENGYEL

Nyomja a váz hátsó csövét a hátsó tengelybe. Megfelelő illeszkedéskor egy kattánó hangot fog hallani.



3. HÁTSÓ KEREKEK

Nyomja az egyik hátsó kereket a hátsó tengely bal részébe. Tegye ugyanezt a jobb oldalon. Megfelelő illeszkedéskor egy kattánó hangot fog hallani.



4. ELSŐ KEREKEK

Nyomja a bal első kereket a váz elülső csövébe. Tegye ugyanezt a jobb oldalon. Kenje be teflont vagy szilikont tartalmazó kenőanyaggal. Megfelelő illeszkedéskor egy kattánó hangot fog hallani.



5. LÁBTARTÓ

Állítsa úgy a lábtartót, hogy felfelé nézzen. Ezt követően egyszerre nyomja a lábtartó jobb és bal oldali csövét a keretbe. Megfelelő illeszkedéskor egy kattánó hangot fog hallani.



6. ÜLÉSSZÖVET

A tolófogantyú csövén pattintsa be a két patentot (jobb és bal oldalon).
Megfelelő illeszkedéskor egy bepattanó hangot fog hallani.



A. ÜLÉSSZÖVET

A hátsó csövekre pattintsa rá az oldal merevítőpántjait.
Megfelelő illeszkedéskor egy bepattanó hangot fog hallani.



B. ÜLÉS ALATTI PÁNTOK 2 DB


ELÜLSŐ PÁNT (csavar felett, a lábtartó illesztése alatt)

HÁTSÓ PÁNT




C. FONTOS: ÜLÉS ALATTI PÁNT D-BUJTATÓK

Alulról fűzze be, majd a teteje felett áthaladva lefelé.

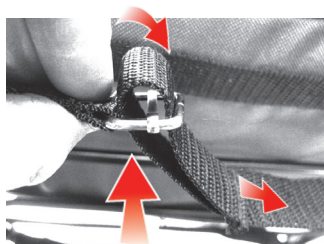


D. ÜLÉS ALATTI PÁNT D-BUJTATÓK

Az ülés alatti pánt szabadon lévő végét igazítsa be a pánt meghúzott része és az ülés közé.
NE húzza túl szorosra.

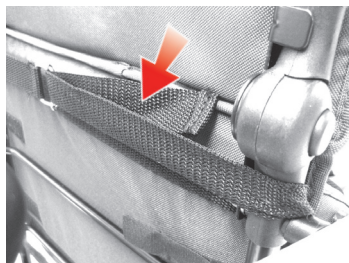

E. LÁBTARTÓ PÁNTJAI 2 DB

Pattintsa a lábtartó szövetét a lábtartón lévő patentokra.
Megfelelő illeszkedéskor egy bepattanó hangot fog hallani.

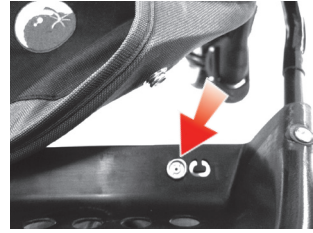


F. LÁBTARTÓ TÉPŐZÁR 2 DB

Hajtsa át a tépőzárát a lábtartó váza körül, és rögzítse.
Tegye ugyanezt a jobb oldalon.




G. OLDALTÁSKÁK

T Hajtsa át az elsőleges (váz)záron és tépőzárral rögzítse.
egybe ugyanezt a jobb oldalon.

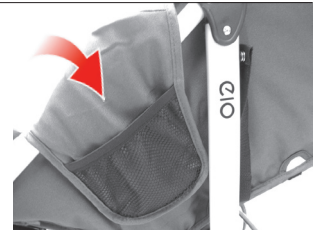


7. NAP- ESŐTETŐ

- (A) Csúsztassa a nap- esőtető csatlakozó végét a váz csatlakozójába.
Ne erőltesse. Ellenőrizze, nehogy szövet kerüljön közéjük.
Tegye ugyanezt a bal oldalon. Megfelelő illeszkedéskor egy kattánót fog hallani.
- (B) A nap- esőtető eltávolításához nyomja le a tető csatlakozó végét és tolja felfelé.

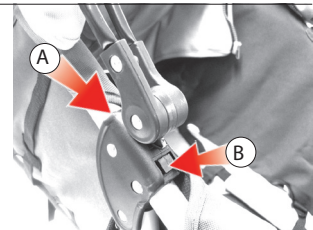


NAP- ESŐTETŐ PATENTKAPOCS ÉS CIPZÁR

A tető két oldalán pattintsa be a patentokat és húzza be a cipzárakat. A cipzárnak és a patentkapocsnak a tolófogantyú beállítógombja alatt kell elhelyezkedniük.
Tegye ugyanezt a bal oldalon.
MEGJEGYZÉS: Eltávolíthatja a nap- esőtető teljes hátsó felét, ha kicipzárzza a központi illesztésnél.

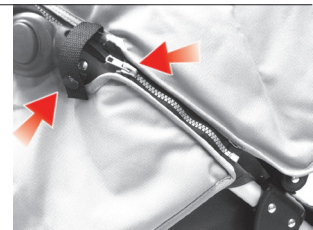


8. OLDALPÁRNÁK 4 DB

Fűzze be a tépőzárral ellátott pántokat az ülésen, illetve a háttámlán látható nyílásokba.

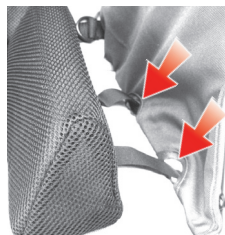

TÉPŐZÁRRAL ELLÁTOTT PÁNTOK

Húzza át a tépőzárral ellátott pántokat az ülés (illetve a háttámla) külső oldali felszínére. Hajtsa át a vázont, és így rögzítse a tépőzárral. Ismételje meg valamennyi pánttal.

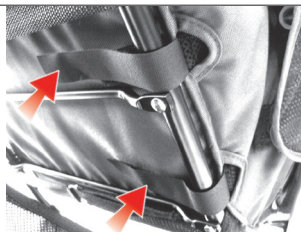



9. BIZTONSÁGI ÖV/ A HÁM HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos sérüléseket okozhat, ha a gyermek kiesik vagy kicsúszik a gyermekkocsiból. A villás végű pántot mindig együtt kell használni a vállak és a csípők felől jövő hevederekkel

A HEVEDER ILLESZTÉSE

- (A) Illessze mindkét nyelvet a csatba úgy, hogy kattanjon..
- (B) Állítsa be a hevederek hosszát. A villás végű (alsó) hevedernek és a vállak felől jövő hevedereknek szorosan kell illeszkedniük.
A HEVEDER KIENGEDÉSE
- (C) Nyomja össze a csat két oldalát (ahová a nyelvek bekattantak) és húzza felfelé.

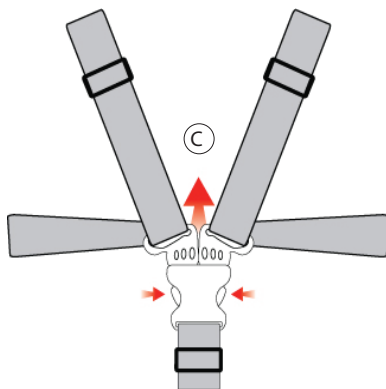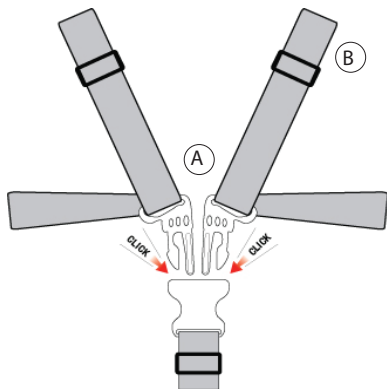

10. VÁLLHEVEDER (KIS GYERMEK)

IHa gyermeke még kicsi, másképpen is befűzheti a vállhevedereket, a gyermek kényelmesebb elhelyezkedése érdekében. Fűzze be a pántot az elülső alsó réseken és vissza ki a felső réseken. Helyezze a fejpárnát a csatokra, hogy a dörzsölődést elkerülje.



HÁTTÁMLA FELÜLETE

11. FÉK

Fékezéskor lábával nyomja le, kioldáskor lábával emelje fel.



12. ÁLLÍTHATÓ TÁMLA

FELFELÉ: A dőlést szabályozó kapcsot nyomja felfelé, és húzza lefelé a hevedert.

LEFELÉ: A dőlést szabályozó kapcsontartsa lenyomva a nyílal jelzett gombot, és engedje le a háttámlát.



13. LÁBTARTÓ SZÖGE

A lábtartó szögének beállításához, nyomja meg egyszerre a két oldalán lévő gombot. A zár aktiválásakor egy kattánót fog hallani.



14. BOLYGÓSÍTHATÓ ELSŐ KEREKEK

Az első kerekek bolgyósításához nyomja fel a fület a zármechanizmus feloldásához, illetve nyomja le a fület, hogy a zárat aktiválja (kerekek egyenesen futnak). Tegye ugyanezt a bal oldalon. A zár aktiválásakor egy kattánót fog hallani. MEGJEGYZÉS: Az első kerekek forgó mozgásának aktiválásához vagy fixálásához az első kerekeknek előre felé kell nézniük.



15. ÖSSZECSUKÁS

- (A) Teljesen hajtsa hátra a háttámlát
- (B) A nap- esőtető ponyvájának hátsó-alsó része a háttámla felett legyen (ne legyen beakadva a háttámla alá)
- (C) Helyezze a tolófogantyút felső állásba
- (D) Első bolygósítható kerekek zárját engedje ki (Mindkét oldalon nézzenek előre)
- (E) Helyezze a lábtartót lenti pozícióba
- (F) Álljon a gyermekocsi mögé, húzza fel az első leges zárat (mindkét oldalon) és a második leges zárat (jobb oldalon).




ÖSSZECSUKÁS

- (A) Az elsőleges zár kienged
- (B) Nyomja lefelé a gyermekocsi tolófogantyúját.



ÖSSZECSUKÁS

- (A) Rögzítse a kapcsolás

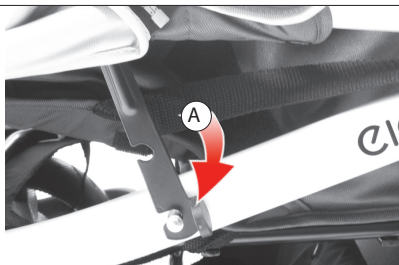

twoyear
warranty

IMPORTANT- WARRANTY WILL BE VOID IF DEFACED OR REMOVED

Az Ön által vásárolt gyermekocsira a vásárlástól számított 1 évig garanciát vállalunk, feltéve, hogy rendeltetészerűen, a használati útmutatóban foglaltak szerint használja. A garanciaállalás kizárólag a vásárlást igazoló dokumentum és szervizkönyv ellenében érvényes. A vásárláskor kapott, a vásárlást igazoló dokumentumot őrizze meg, ezen korlátozott garanciaállalással együtt.

Amennyiben javításra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot a szervizkönyvben megjelölt forgalmazóval.

VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A GARANCIAVÁLLALÁS NEM ALKALMAZHATÓ A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

- A meghibásodás a nem rendeltetészerű használat vagy a karbantartás hiánya miatt következik be.
- A javítást valamilyen harmadik fél végzi.
- A gyermekocsi meghibásodása az általános elhasználódás, a mindennapi használat eredménye.
- A gyermekocsi baleset miatt hibásodott meg.
- A gyártót/forgalmazót nem tudják hitelet érdemlően meggyőzni arról, hogy a garanciaállalás feltételeit teljesítették.



MANUFACTURED BY
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE**

GLOBAL CAREHAB
ROSENVANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK

TELEPHONE: +45 24 65 55 50
WEB SITE: www.glojalcarehab.com

DATE OF MANUFACTURE:



© 2009 Bergeron By Design
Jelen dokumentumban található információ változtatásának jogát fenntartjuk. A Bergeron By Design nem vállal felelősséget a kiadványban esetlegesen előforduló hibákért.