

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4263 ÁLLÍTHATÓ ÉS ÖSSZECUKHATÓ JÁRÓKERET

1. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS

A mozgást és járást segítő nagy stabilitást adó járókeretek segítséget nyújthatnak a biztonságos helyváltoztatásban. Ezek a két karral működtetett járást segítő eszközök több ponton stabilan adnak megtámasztást, nagyfokú lépésbiztonságot jelentve a mozgásban korlátozott használójuknak a lakásban és kültéren egyaránt.

2. INDIKÁCIÓ

Azoknak a személyeknek nyújthat segítséget, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás- és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van. Mozgáskoordinációs, vagy egyensúlyzavarok esetén javítja a járóképességet, illetve tehermentesítheti a sérült vagy fáradt lábat. Ideális azok számára, akik az alsó végtagjaik ízületi kopásának fájdalmától, gyulladástól, reumás vagy egyéb mozgásszervi panasztól szenvednek. Baleset vagy betegség következtében szintén indikált lehet használata. Gyermekkori fejlődésirendellenesség, vagy bénulás miatt nehézkes járás esetén is segítség lehet. Illetve, ha alsó az végtag protézis miatt, a műtét utáni felépülés fázisában járása nehézkessé vált emiatt segítségre szorul. Nemcsak időskori gyengeség miatt, de akár egy fiatalkori egyensúlyzavar esetén is azonnali megoldást nyújthat.

3. FELÍRÁSRA JOGOSULT ORVOSOK MEGHATÁROZÁSA

ortopédia-traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

4. MŰSZAKI ADATOK

Váz:	<ul style="list-style-type: none"> extra könnyű, a váz szerkezete extrudált alumínium csőből készült rozsdamentes felület 2 fajta kivitel: 100 kg és 150 kg max. terhelhetőséggel váz belső alapterület 57x28x50 cm
Markolat:	<ul style="list-style-type: none"> kényelmes habszivaccsal burkolt markolatai könnyed fogásd biztosítanak kényelmes megtámaszkodásra szolgál
Lábazat:	<ul style="list-style-type: none"> beltéri és kültéri használatra egyaránt, minden felületen használható állítható magasság 8 fokozatban 80-97 cm között
Botvég:	<ul style="list-style-type: none"> gumiból készült cserélhető botvégek a gumivégek 4 pontban érinti az földet a tökéletes egyensúly és mozgás érdekében, illetve elősegíti a könnyű sétát bármilyen felületen csúszásgátló gumi felülete hozzátapad a járda felületéhez, ezáltal jobb stabilitást biztosít. Cserélhető, ha a gyakori használat során elhasználódik

5. A TERMÉK HASZNÁLATA

Magasság beállítása: Az első használat előtt a járókeret magasságát be kell állítani és üzembe helyezni. A beállítás során a járókeret mind a négy lábát be kell állítani a felhasználó magasságnak és a testsúly megfelelően. A járókeret magassága akkor megfelelő, ha használat közben terhelve, a könyök kiegyenesedik, míg a keretben állva kissé behajlik.

A beteg számára megfelelő magasság beállításáról érdemes konzultálni háziorvossal illetve gyógytornással! A járókeret lábainak alsó része állítható. A lábakon elhelyezett fém csapok megnyomásával tudjuk le- és felfelé állítani a lábak hosszát. A beállítás elvégzése során fontos hogy minden fém csapot a megfelelő pozícióba (vízszintesen egy vonalban) igazítsunk. Magasság állítás előtt a rögzítő gyűrűt oldja meg. Az állítócső helyzetét, a felső cső, illetve az állítócső sugár irányú furatába helyezett, rugós rögzítő gombok használatával lehet beállítani. Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag vezetőelemek segítik. Győződjön meg róla, hogy a gomb megfelelően bepattant-e a helyére. Miután beállította a megfelelő magasságot, mindig szorítsa meg a rögzítő gyűrűt.

Összecsukás/kinyitás: Könnyebb tárolhatóság és kis hely esetén nagyon egyszerűen össze lehet csukni. A felső áthidalón lévő push jelzés lenyomása után a járókeret oldalait be lehet hajtani. Ismételt használatkor a keret két oldalát kinyitjuk, míg nem halljuk az összeütközést jelző kattantást.

Botvég gumi: A járókeret használata előtt ellenőrizni kell a lábak végén található botvég gumik megfelelő illeszkedését a talajhoz. A mindennapi használat során a gumik természetes kopásnak vannak kitéve. Az elkopott botvég gumikat javasolt kicserélni, mivel ilyen esetekben már nem nyújtanak teljes biztonságot a járókeret stabilitásának. A gumik kopása esetén nem szükséges a teljes terméket lecserélni, mivel a botvég gumik külön is megvásárolhatóak a termék forgalmazójánál.

Ha a gumivég elkopott, akkor nem fog tapadni és könnyen megcsúszhat. Ellenőrizze rendszeresen és cserélje ki, ha elhasználódott.

A termék használata során törekedni kell arra, hogy a helyesen kialakított mozdulatok a begyakorlás által automatikussá váljanak, és a mindennapi mozgást megkönnyítsék!

Csapadéktól nedves felületen közlekedjen óvatosabban! Kisebb és lassabb lépésekkel mozogjon, mivel a nedves, vizes felületen fokozottan nagy a csúszás és a baleset veszélye!

A járókeret elsősorban hosszirányú terhelés felvételére alkalmas, ezért kerülni kell a nem rendeltetésszerű terhelését! A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

6. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerrel tisztítható. A háztartásokban használt nem agresszív, fertőtlenítő, semleges hatású tisztítószerekkel tisztítható. A mosás után tiszta vízzel öblítse le, majd száraz ruhával törölje át!

7. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni a botvég gumik kopását.



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 53 00
info@patella.hu
www.patella.hu



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268

8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

9. VONALKÓD



10. GARANCIA

Ezt a tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétékor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges. Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át. A műanyag alkatrészek (ülőlapp és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, rongálódására a garancia nem terjed ki.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezettől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyzeti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen

Verziószám: GM 4263-2021/05/17.

használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkek vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-27-504-131, 06-30-442-8088

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: **Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.**

Termék megnevezése: **GM 4263 ÁLLÍTHATÓ ÉS ÖSSZECUKHATÓ JÁRÓKERET**

Típus*: **100 kg 150 kg**

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való *átadásának* vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az *üzembe helyezés** időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történet, amelynek időpontja: