

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM WC MAGASÍTÓ

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁTVÉTEL

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - lehetőleg az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg! Ellenőrizze, nincs-e látható sérülése a terméknek. Ha bármilyen sérülést lát, vagy hibát gyanít, ne használja a terméket, hanem lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni alapvető fiziológiai szükségleteiket. Egy nehezen mozgó ember mindennapi teendőinek elvégzése megterhelő lehet megfelelő segédeszközök hiányában. Számukra segítséget nyújthat a már beépített mosdók és WC-k egyszerű átalakítása segédeszközökkel. A laza csatolású toalettülések használatával a WC ülőmagassága centiméterekkel növelhető. A rögzítő rendszerek segítségével a magasító biztonságosan és gyorsan rögzíthető a legtöbb típusú WC-csészéhez. A legtöbb angol WC csésze formához megfelel. Ajánlott mozgásukban korlátozottak számára, akiknek nehézséget okoz a WC-re való leülés és felállás. A GMed WC magasító használatával, az ülőmagasság 10 illetve 15 centiméterrel növelhető.

Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, valamint térdízület kopása miatti, vagy csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgás beszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása.

Kontraindikáció: kognitív rendellenesség, egyensúlyzavarok és ülésre való képtelenség.

Felírásra jogosult orvosok meghatározása: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina,

neurologia, gyermekneurologia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa.

3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- elülső és hátsó bevágással a könnyebb tisztálkodás érdekében
- a legtöbb standard WC-csészéhez használható
- 4 csavaros rögzítő rendszer, melyek segítségével könnyen a WC csészéhez erősíthető
- a WC magasító és a csavarok anyaga polipropilén műanyag
- rendelhető 2 méretben: 10 cm magas fedeles vagy fedél nélküli modell, illetve 15 cm magas fedeles modell

| GM WC magasító | 10 cm magas | | 15 cm magas |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|
| | fedél nélkül | fedéllel | fedéllel |
| Mélység/Hossz (cm): | 42 | 42 | 42 |
| Magasság (cm): elől-hátul | 10-13 | 10-13 | 15-20 |
| Nyílás (cm): | 21,5x27 | 21,5x27 | 21,5 x 27 |
| Szélesség (cm): | 38 | 38 | 38 |
| Rögzítési szélesség (cm): | 32,5 – 40,5 | 32,5-40,5 | 32,5-40,5 |
| Termék súlya (kg): | 1,3 | 1,4 | 1,7 |
| Max. terhelhetőség (kg): | 100 | 100 | 100 |
| Doboz mérete (cm): | 42x38x17 | 42x38x18 | 42x38x21 |

4. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A terméket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja! A GM WC magasítót a WC-én ülésre tervezték, ezért soha ne használja bármilyen egyéb célra pl. ne használja a terméket létraként, és ne álljon rá!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a rögzítő elemek erősen meg vannak-e húzva! Gondosan ellenőrizze az eszköz alkatrészeinek állapotát! Ha úgy tűnik, hogy valamelyikük nincs megfelelő állapotban, azt eredeti alkatrészsel kell kicserélni.

Maximálisan 100 kg-al terhelje a berendezést!

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmazható, ne használja kültéren, és ne tárolja a szabadban! Használat előtt ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e! Fali rögzítésű csészénél ügyeljen a csésze terhelhetőségére!

Ügyeljen arra, hogy a magasító biztonságosan illeszkedjen a WC csészébe!


Az eszköznek szappan és tusfürdő mentesnek kell lennie a csúszásveszély elkerülése érdekében!

Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a külső sérüléseket! Ne használja, ha sérült!

Ne tegye ki az eszközt 85 Celsius foknál magasabb hőmérsékletnek!

Ne engedje, hogy gyerekek játszanak vele! A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet nélküli gyermekekkel történhetnek a termék használata kapcsán.

5. FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

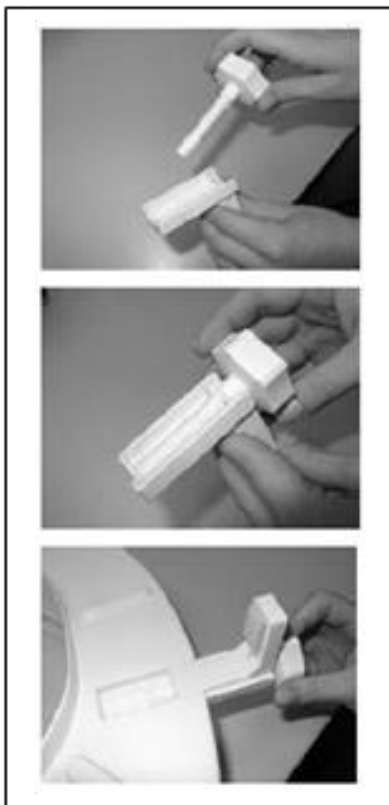

A WC-magasító – helytakarékosági okokból – darabokban kerül szállításra, használat előtt a 4 db rögzítő körmöt fel kell szerelni.

- A műanyag rögzítő csavart a váll részénél pattintsa az L-alakú tartóba!
- Az L alakú tartót – csavarral a WC-magasító felé – dugja a WC-magasító kivágásába!
- Csavarja be a csavart az óramutató járása szerint!
- Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is!
- Hajtsa fel a WC-re szerelt fedelet és ülőkét!
- Helyezze a WC-ülőkemagasítást a WC-csésze közepére úgy, hogy az első ütköző kívülről hozzáérjen a csésze elejéhez!
- Húzza meg mindkét oldalt a rögzítő csavarokat!
- Ellenőrizze a biztonságos és szilárd illeszkedést!



Leszerelés: Kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben! A magasítót felfelé, függőlegesen irányban kell eltávolítani! Levétel előtt mind a 4 db csavart lazítsa meg, ezáltal törés nélkül tudja levenni a WC magasítót! Nem megfelelő használat miatti törések esetén a garancia nem érvényes!

6. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A műanyag részekről a szennyeződés hagyományos tisztítószerrel eltávolítható. A tisztító folyadék PH értéke 6-8 között legyen (enyhén savanyú- enyhén lúgos) pl. szappanos vízzel. Kerülje a súroló szerek alkalmazását, és vegye figyelembe a tisztítószer tájékoztatóját is!

Csak hagyományos szereket alkalmazzon a fertőtlenítéshez, tisztításhoz, ne pedig maró- és oldó hatású anyagokat!

7. VONALKÓDOK



8. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



Gyártó és forgalmazó:
Patella-96 Kft.
 HU-2045 Törökbálint
 Kisfaludy u 49-1.
 Tel.: +36 1 248 5300
 info@patella.hu
 www.patella.hu
 www.gyogybolt.hu



Distributor:
SC Vital Logistic Srl.
 RO-540210 Tirgu Mures
 str Gheorghe Doja nr 177
 Corp C1-C2 Parter
 comenzi@vital-logistic.ro
 Tel.: +40 265 265 268
 www.vital-logistic.ro

9. GARANCIA

Ezt a tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges. Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át. A műanyag alkatrészek (ülőlapp és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, rongálódására a garancia nem terjed ki

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyeztetni üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát

vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok...) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználataszerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-27-504-131, 06-30-442-8088

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Termék megnevezése: GM WC MAGASÍTÓ

Típus*: 10 cm fedél nélkül / 10 cm fedéllel / 15 cm fedéllel

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: