

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

### Termékleírás és várható klinikai haszon:

A manuális kerekesszékek önerővel és segéderővel mozgatható, összecsucskozható, szétszedhető gyógyászati segédeszközök. Műanyag lábtámaszos lábtartói levehető, felhajthatóak, kartámasza kivethető.

Négykerékű kerekesszék, kézi hajtású, tömör abroncsos 24"-os hátsókerékkel, meghajtó kerékre ható fékkel és önbeálló 200 x 50 mm-es tömör első kerékkel ellátva. Hátsó kerekei kivethetők. Szinterezett bevonattal, műszálal textil kárpittal.

A manuális kerekesszék nagyban hozzájárul, hogy járásnehezítettséggel küzdő páciensek is képesek legyenek helyváltoztatásra, akár kísérővel, akár önállóan is.

### Indikáció:

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen.

### Ajánlás:

A manuális kerekesszék otthoni használatra és korlátozottan szabadban történő használatra alkalmas és olyan emberek segítségére szolgál, akik nem képesek hosszán segédeszközzel sem gyalogolni.

A felhasználói csoportba a rövid ideig ill. hosszú távon használók (azaz akinek egész nap ülve telik) is beletartoznak. Olyan személyek számára is ajánljuk, akik önmaguk nem képesek hajtani a kerekesszéküket, de kísérő segítségével hosszabb távok megtételére is képesé válnak használatával.

### Kontraindikáció és figyelmeztetés:

A kerekesszék szilárd, sík talajon használható. Ki- és beszálláskor mindig ügyeljen rá, hogy a fékek legyenek behúzva és lehetőleg sík, szilárd, vízszintes felületen álljon. Kerülje a homokos, lágy talajokat, amelyekből önerőből nem tud kihajtani a székkal. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek működését, az abroncsok állapotát, a kar-, és lábtámaszok, valamint a kioldható kerekek rögzítését. Amennyiben úgy érzi, hogy segítség nélkül nem tudja használni a kerekesszéküket, ne induljon el egyedül és kérjen segítséget!

### Használati útmutató:

#### Összecucskás

Hajtsa fel a lábtámaszokat! Amennyiben szükséges, reteszelve a háttámaszfeszítőt. Ezután fogja meg az üléshezát elülső és hátsó peremét mindkét kézzel és húzza fel. A kerekesszék egyik oldalára is lehet billenteni. Nyomja össze a toló fogantyúkat, illetve a kartámaszokat.

### Használati útmutató Manuális kerekesszékek (Alapvető UDI-DI: 5996320MWHC17J)

#### Szétnyitás

Szétnyításhoz fogja meg a kartámaszt vagy az Önhöz a legközelebb eső oldalrészét - majd oldalra billentse a kerekesszék (ekkor a hátsó - és a bolygókerék a földről felemelkedik). Ezzel egy időben nyomja le teljesen az üléstartó csövét. Az üléshezátoknak feszülnie kell.

#### Hajtás

Kerekesszéke két hajtókarikával rendelkezik. Kezelőorvosa feladata megállapítani a rokkantságnak legmegfelelőbb közlekedési módszert. A hajtókarikákat a megfelelő fogás alapján kell megválasztani. A jobb fogás érdekében különböző tartozékok állnak rendelkezésre ( műanyag réteg, büttyökös betétek, szilikon bevonat, stb.). Testével lassan dőljön előre és hozza mozgásba a hajtókarikákat egymást követő tolásokkal. A hajtókarika lehetővé teszi a megfelelő sebesség és irány tartását. A sebesség és az irány befolyásolásával, amit a hajtókarika szorosabb vagy lazább fogásával érhet el, legyen mindig ura a kerekesszéknek.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

#### Tisztítási útmutató:

Száraz, puha ronggyal tisztítsa meg a kerekesszékének különböző részeit. A vinyl, illetve műbőr üléshezátot és háttámasz huzatot, valamint az abroncsokat nedves szappanos ronggyal tisztíthatja. Közlekedés során, és minden esetben, amikor víz vagy nedvesség éri a fém felületeket, törölje le és szárítsa meg az idő előtti korrózió elkerülése érdekében.

#### Tárolás

Kerekesszéke hosszabb ideig történő üzemén kívül helyezése esetén az alábbi elővigyázatossági intézkedések betartása segít abban, hogy kerekesszéke hosszabb tárolás után is megőrizze kifogástalan állapotát.

Csukja össze a kerekesszékét.

Ne terhelje meg súlyos tárgyakkal.

Takarja le a kerekesszékét a por ellen.

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.



Ha bármilyen rendelkezésséget tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

### Bridge kerekesszék méretei (ülésszélesség)

38 cm, 41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm



### Bridge A kerekesszék méretei (ülésszélesség)

38 cm, 41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm



### RS-50 kerekesszék méretei (ülésszélesség)

41 cm, 43 cm, 45 cm, 48 cm, 51 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

