



Piper Comfort

Gyermekkoscsi



Figyelem

Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy:

- A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja igényelni az ingyenes javítást!
- Mind a neve, mind a TAJ száma felírásra került a jótállási jegyen és a szervizkönyvön. E nélkül egy esetleges későbbi javításra nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatás!

A moped - mint gyógyászati segédeszköz - **szakszerű átadása, szükség szerinti beállítása és a kezelés betanítása a kiszolgáló feladata** és kötelessége. Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabályok által Önnek biztosított szolgáltatást. A nem vagy nem megfelelő beüzemelésből, beállításból, betanításból eredő hibák nem tekinthetők a moped jótállásában javítandó hibájának.

Tartalom

Bevezető	3
BIZTONSÁG	3
Kicsomagolás	4
A gyermekkocsi fő alkotórészei	5
A gyermekkocsi kezelése	6
A gyermekkocsi kinyitása	6
A gyermekkocsi összecukása.....	7
Kárpit le- és felszerelése és tisztítása	8
Lábtámasz fel- és leszerelése, magasság beállítása	9
Lábszár alátámasztó beállítása	11
Háttámla döntése.....	11
Öt pontos biztonsági öv.	13
Első kerekek irányrögzítése és feloldása.....	14
Hátsó kerék fékezése és feloldása	14
Kerekek le és felszerelése	15
A gyermekkocsi kezelése	16
A gyermek behelyezése	16
A gyermek kivétele	16
Kisebb akadályok leküzdése.....	16
Mozgatás lépcsőn lefelé	16
Mozgatás lépcsőn felfelé	17
Alap tartozékok.....	18
FLEXI beülés szűkítő	18
Abdukciós ék	18
Fejtámasz.....	19
Tartozék (Külön feliratható).....	20
Ülésbetét	20
Opcionális tartozék	21
Napvédő ernyő.....	21
Esővédő	21
Műszaki adatok	22
Karbantartás	22
Címkézés és csomagolás.....	23
Jótállás	24
Vény felíratási segédlet javításhoz.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Szervizkönyv.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Jótállási jegy	31

Bevezető

Köszönjük, hogy az **Rehab Zrt.** által forgalmazott **Piper Comfort** gyermekkocsit választotta. Büszkék vagyunk az általunk gyártott/forgalmazott biztonságos és kényelmes termékeinkre.

A gyermekkocsit sérült gyermekek számára, kül- és beltéri használatra fejlesztették ki.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, illetve valamennyi biztonsági előírást tartson be, hogy teljesüljön az eszköz kényelmes és rendeltetésszerű használata.

A következőkben röviden ismertetjük az eszköz felépítését, kezelőszerveit, használatának, karbantartásának módját.

Ne sajnálja az időt a termék megismerésére. Kérjük, hogy gondosan tanulmányozza át ezt az útmutatót és tartsa szem előtt az abban leírt útmutatásokat és figyelmeztetéseket. Ha az útmutatónak megfelelően jár el, megkönnyíti saját maga számára a termék helyes kezelésének elsajátítását, üzembiztosan, és hosszú ideig fogja szolgálni Önt. Célunk, hogy vásárlóink minden tekintetben elégedettek legyenek termékeinkkel.

Fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak. A Használati Útmutató fényképei tájékoztató jellegűek, attól az Ön gyermekkocsija eltérhet, de ez nem befolyásolja a Használati Útmutatóban leírtak érvényességét, illetve a termék használatát.

A termékkel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdéseivel a hivatalos és megbízott alábbi magyarországi forgalmazóhoz, vagy szervizhálózatának bármely tagjához forduljon bizalommal:

REHAB Rt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3..

Telefon.: +36 26 886 288

e-mail: info@rehabrt.hu

BIZTONSÁG

- Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Soha ne tegye az ujját mozgó alkatrészek közé a használat során.
- Az eszköz egyszerre egy gyermek szállítására alkalmas.
- Senki ne álljon a lábtartóra, mivel annak funkciója kifejezetten csak az eszközben ülő személy lábának megtartása.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket az eszközben. Akkor sem, ha a kocsit befékezte és a biztonsági öv be van-e kapcsolva.
- A gyermekkocsi 6 hónapnál fiatalabb gyermek mozgatására nem alkalmas.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes rögzítő eszköz megfelelően rögzítve van-e.
- Soha ne használja sérülten az eszközt!
- Soha ne javítsa házilag az eszközt!
- Biztonsági okok miatt kizárólag e tevékenység végzésére feljogosított szervizben, illetve a forgalmazónál lehet az eszközt javíttatni, melynek során kizárólag a gyártótól beszerzett alkatrészeket lehet csak felhasználni, ellenkező esetben a garanciára való jogosultság nem érvényesíthető!
- A csatlakoztatott biztonsági öv kizárólag a test rögzítésére használható, nem eszközfékező, visszahúzó szíjként.
- A gyermekkocsit TILOS használni ülőhelyként a gyermek számára, ha motoros járművön (busz) utazik.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermek távol van a mozgó alkatrészekről, amikor beállítja a gyermekkocsit, hogy elkerülje a további sérüléseket.
- Amikor a háttámla dőlésszögét beállítja, akkor soha ne állítsa nem rögzített állapotba.
- Soha ne hagyja, hogy a gyermek önállóan kimásson a gyermekkocsiból.
- Minden esetben használja a féket, ha a gyermekkocsit otthagyja vagy nem mozgatja.
- Minden esetben személyesen ellenőrizze, hogy a biztonsági eszközök rögzítése megfelelő-e
- A kezelőt fel kell készíteni arra, hogy mit kell tennie tűz esetén
- Soha ne tegyen, vagy akasszon gyerekjátékot a gyermekkocsira.
- Vezetés közben fokozottan ügyeljen arra, hogy kerülje a veszélyes helyzeteket.
- Soha ne terhelje túl a gyermekkocsit. Maximális terhelhetőség 50 kg
- Fokozottan figyeljen a gyermekkocsival történő mozgás közben, hogy ne okozzon sérülést a gyermeknek vagy önmagának.
- Ha lehetséges, használjon rámpát, vagy liftet, ha fel kell mennie valahova.
- Minden esetben két ember emelje a gyermekkocsit.
- A gyermekkocsi nem úgy lett kialakítva, hogy önállóan le lehessen tolni egy lépcsőn.

- Ha a gyermekocsit az úttesten tolja, fokozottan tartsa be a közlekedési szabályokat.
- Soha ne használja a gyermekocsit más célra.
- A gyermekocsi csak egy gyermek szállítására lett kialakítva.
- Csak eredeti PATRON alkatrészeket és tartozékokat használjon a gyermekocsihoz
- Amikor a gyermekocsit kinyitja, vagy összecsukja, akkor gondosan tartsa be a használati útmutató útmutatásait, hogy elkerülje a gyermekocsi sérülését, vagy a balesetet.
- Ha olyan hiba merülne fel, ami a kocsi biztonságos használatát meggátolja, azonnal függeszse fel a gyermekocsi használatát
- A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal olyan sérülésekért, amit a nem megfelelő biztonsági berendezések vagy tartozékok használatából ered.

Kicsomagolás

- A terméket összeszerelt állapotban kapja kézhez. Távolítsa el a kocsiról a védőfóliát, és a termék alaphelyzetben további szerelést nem kíván. Az egyes tartozékok fel- és leszerelését illetve kezelését a használati útmutató tartalmazza.

A gyermekkocsi fő alkotórészei



1	Fejtámasz	8	Kerék elfordulás gátló
2	Megnövelt háttámla	9	Lábtámasz állító rudazat
3	FLEXI-pad ülészélesség állító	10	Fékezhető hátsókerék (225 mm)
4	Abdukciós ék	11	Csukló
5	Állítható lábszártámasz	12	Profil alumínium váz szerkezet
6	Állítható lábtámasz	13	5 pontos biztonsági öv r
7	Bolygó első kerék (175 mm)	14	Összecsukható toló kar

A gyermekkocsi kezelése

A gyermekkocsi kinyitása

<p>A képen a gyermekkocsi összehcsukott állapotban látható.</p>		
 <p>Zárt állapot</p>	<p>1. Az első kerekeknél és a toló karnál fogva kezdje el kinyitni a gyermekkocsit a nyílak által mutatott irányban. A nyitás közben a kocsi oldal irányban is nyílik automatikusan.</p>	
 <p>Köztes állapot</p>		 <p>Nyitott állapot.</p>
<p>1. A kinyitás végén, a gyermekkocsit rögzíteni kell a nyitott állapotában. A rögzítéshez a kocsi hátulján levő kart teljesen le kell nyomni. Ehhez nagyobb erő kifejtésére van szükség. A szerkezet egy halk kattanással ugrik a helyére.</p>		
 <p>Kioldott állapot</p>	 <p>Rögzített állapot</p>	
<p>Az 1-gyel jelzett karnak rögzített állapotban lefelé kell állnia</p>		
<p>2. A toló karnak is teljesen rögzített, kifelé ívelt állapotban kell lennie.</p>		
		
	<p>A kinyitás után ellenőrizze, hogy minden, a kinyitásban szerepet játszó alkatrész a helyén van, feszes és magától nem tud elmozdulni.</p>	

A gyermekkocsi összecsuksása.

<p>A képen látható állapotban a gyermekkocsi nyitott állapotban van</p>		
<p>1. A gyermekkocsi összecsuksása a toló kar behajlításával kezdődik. A kar közepén látható gombot (1) be kell nyomni és a kart kétoldalt (2) előre kell nyomni.</p>		
 <p>Rögzített állapot</p>	 <p>Kioldott állapot</p>	
<p>2. Következő lépésként a gyermekkocsi rögzítőt ki kell oldani. Ehhez a kocsi hátulján levő kart a fogantyúnál fogva fel kell húzni a nyíl irányában. Ehhez nagyobb erő kifejtésére van szükség. A szerkezet egy halk kattanással old ki.</p>		
 <p>Rögzített állapot</p>	 <p>Kioldott állapot</p>	
<p>Az 1-gyel jelzett karnak kioldott állapotban felfelé kell állnia</p>		
<p>3. A toló kart előre nyomva a gyermekkocsi elkezd összecsuksódni és egyúttal oldal irányban is záródik.</p>		
 <p>Nyitott állapot</p>	 <p>Köztes állapot</p>	 <p>Összecsuksott állapot.</p>
	<p>Felszerelt lábtámasszal a gyermekkocsi nem csukató össze. Győződjön meg arról, hogy minden, a gyermekkocsi összecsukszásában szerepet játszó alkatrész kinyitott állapotban legyen. Ha feszes állapotban marad, akkor károsodhat, eltörhet..</p>	


Kárpit le- és felszerelése és tisztítása

Kárpit leszerelése


<p>1. A kereten található patentokat (1) oldja fel. 4-4 patent van mind a két oldalon</p>	
<p>2. A lábszártámaszról húzza le a kárpitot a nyílnak megfelelően és fűzze ki az ötponthoz tartozó biztonsági öv pántjait..</p>	
<p>3. A háttámláról is húzza le a kárpitot a nyílnak megfelelően,</p>	

Kárpit felszerelése



A leszereléskor végrehajtott lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani.

	<p>Figyeljen arra, hogy felszereléskor a patentok megfelelően pattanjanak a helyükre és fixen álljanak.</p>
---	---

Kárpit tisztítása




	<p>A kárpitot csak kézzel, alacsony hőmérsékleten (max 40°C) lehet mosni.</p>
---	---

Lábtámasz fel- és leszerelése, magasság beállítása

Lábtámasz felszerelése	
 <p>Lábtámasz</p>	 <p>Megfelelően felszerelt lábtámasz</p>

Illessze a lábtámasz illesztő tengelyét a lábtámasz magasság beállító rúd erre a célra kialakított furatába.

 <p>Illesztő tengely</p>	 <p>Illessze a lábtámasz magasság beállító rúd furatába.</p>	 <p>Tolja be teljesen a furatba, amíg egy halk kattantást nem hall.</p>
---	--	--

-  Ha a lábtámasz fel van szerelve a gyermekocsira, az összecsapás nem lehetséges.
-  Győződjön meg róla, hogy a lábtámasz nem tud kicsúszni a furatból.
-  Soha ne álljon senki a lábtámaszra, mert az letörhet vagy megsérülhet.. A lábtámasz csak a láb megtámasztására szolgál.

Lábtámasz leszerelése	
<p>Nyomja meg a lábtámasz magasságbeállító rúd alján található hatszögletű gombot (1), és húzza ki a lábtámasz tengelyét a furatból a nyíl által mutatott irányban, először az egyik oldalon, azután a másik oldalon.</p>	

Lábtámasz magasság állítása
A lábtámaszt a lábtámasz tartó kihúzásával és visszatolásával lehet fokozatosan 5 pozícióban állítani. A lábtámasz magasság beállítót a rögzítőjének segítségével lehet egy adott pozícióban fixen tartani.

<p>A lábtámasz tartó rögzített magasságban van.</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Lábtámasz magasság állító rúd(2) Rögzítő mechanizmus(3) Pozícionáló furatok	
<p>Lábtámasz rögzítő kioldása</p>	
<p>Húzza ki a rögzítő mechanizmus (2) csapját (4) a nyíl által jelzett irányba.</p>	
<p>Magasság beállítás</p>	
<p>A csap (4) kihúzott állapotában a magasságállító rúd (1) segítségével állítsa a lábtartót a kívánt magasságba a nyíl irányában mozgatva le vagy fel.</p>	
<p>Magasság rögzítése</p>	
<p>A csap elengedése után, a lábtámasz magasságállító rudat finoman mozgatva a csap be fog ugrani a legközelebbi furatba (3).</p>	
	<p>Amíg a csap nem ugrott vissza a helyére, a magasságállító rúd elmozdulhat és nem tartja meg a lábat.</p>

Lábszár alátámasztó beállítása

A lábszár alátámasztó egy pozícióban rögzíthető, ami elfektetett helyzetben hasznos támaszt tud adni a lábnak.

Lábszártámasztó rögzített állapota	
A lábszártámasztó a képen látható pozícióban rögzíthető.	
Lábszártámasztó kioldása	
A képen látható gombot (1) mindkét oldalon benyomva, a lábszártámasztó megemelhető, vagy leengedhető a nyíl irányában gomb által jelzett tengely körül.	

Háttámla döntése






A gyermekkocsi háttámlája 4 különböző pozícióban rögzíthető.

Legmeredekebb állapot	
A képen a háttámla a legjobban felemelt állapotában látható.	
Legjobban elfektetett állapot	
A képen a háttámla a legjobban elfektetett állapotában látható.	
A háttámla rögzítésének felengedése	

<p>A háttámla rögzítő mechanizmus kioldására a gyermekkosci hátulján található, a képen látható fül használható.</p>	
<p>A rögzítő oldása</p>	
<p>Emelje fel a fület. Ennek hatására a háttámla szabadon mozgathatóvá válik.</p>	
<p>Háttámla döntése</p>	
<p>Döntse a háttámlát a kívánt helyzetbe a nyílnak megfelelően.</p>	
<p>Háttámla rögzítés</p>	
<p>A rögzítés oldására szolgáló fület engedje el és a háttámlát finoman mozgassa addig, amíg egy halk kattanással nem rögzül.</p>	
	<p>Rögzítetlen háttámlával a gyermekkoscit használni tilos! Finom mozdattal győződjön meg arról, hogy a háttámla magától nem tud elmozdulni.</p>


Öt pontos biztonsági öv.

A személy biztonságos szállítása érdekében ágyék és váll párnázattal ellátott 5 pontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

<p>1. Nyissa ki a csatlakozók párnázott védőburkolatát és láthatóvá válik a csatlakozó.</p>	
<p>2. Csatlakoztassa a két oldalsó öv csatlakozóját. Az övek hosszát a gyermek méretének megfelelően be kell állítani.</p>	
<p>3. Csatlakoztassa a két felső öv karabinerét. Ezek hosszát is a gyermek igényeinek megfelelően kell beállítani.</p>	
<p>4. Hajtsa a csatlakozóra a párnázott védőburkolatot és rögzítse a tépőzárral.</p>	
	<p>A biztonsági öv a gyermek biztonságát szolgálja. Minden esetben kapcsolja be a biztonsági övet. A biztonsági övnél fogva visszahúzni, emelni tilos..</p>

Első kerekek irányrögzítése és feloldása

A sima egyenes futás érdekében az első kerekeket elfordulását rögzíteni lehet.

<p>Elfordulás megakadályozása</p> <p>Az első kerék elforduló részén található egy retesz (1), ami a rögzítő (3) hornyába (2) illeszkedik, amikor a rögzítőt (3) a nyíl irányába elmozdítja.</p>	
<p> A retesz és a horony akkor illeszkedik egymásba, ha a kerék a megfelelő pozícióban van. A lenyomás lábbal is elvégezhető, de ha az illeszkedés nem megfelelő, a műanyag rögzítő (3) letörhet. Óvatosan kezelje az alkatrészt.</p>	
<p>Elfordulás lehetővé tétele</p> <p>A rögzítőt (3) a nyíl irányában elmozdítva a retesz (1) és a horony (2) elválnak egymástól, lehetővé téve a kerék szabad elfordulását.</p>	

Hátsó kerék fékezése és feloldása

<p>Fékezés</p> <p>A gyermekkocsi fékezéséhez a fékkart (1) a nyíl irányába le kell nyomni. A kar lábbal is működtethető.</p>	
<p>Fék feloldása</p> <p>A képen látható behúzott féket a fékkar (1) nyíl irányába történő elmozdításával lehet feloldani. A kar lábbal is működtethető.</p>	
<p> A lábbal kezelés esetén óvatosan járjon el, nehogy letörje a kart.</p>	

Kerekek le és felszerelése

Első kerék (Ø175 mm) felhelyezése

Illessze a kerék tengelyét (1) a vázszerkezet elején található furatba és tolja be ütközésig. A kerék rögzített állapotát egy halk kattanas jelzi

**Első kerék leszerelése**


Az első kereket tartó vázszerkezeti elem hátsó oldalán található egy nyomógomb (2), amit megnyomva a kerék tengelye kihúzható a furatból.

**Hátsó kerék (Ø225 mm) felhelyezése**

Illessze a kerék tengelyét (3) a vázszerkezet hátulján található furatba és tolja be ütközésig. A kerék rögzített állapotát egy halk kattanas jelzi.

**Hátsó kerék leszerelése**

A hátsó kereket tartó vázszerkezeti elem hátsó oldalán található egy nyomógomb (4), amit megnyomva a kerék tengelye kihúzható a furatból.

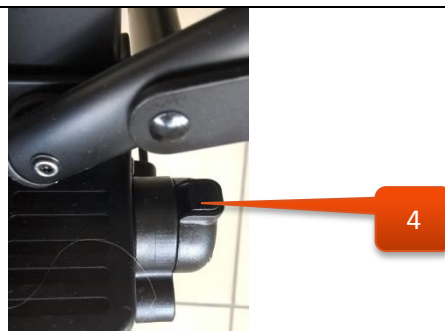

A kerekeket csak indokolt esetben szabad eltávolítani.

A gyermekkocsi kezelése

A gyermek behelyezése

Fékezz be a gyermekkocsit. A gyermek állapotától függően a lábtartót le kell szerelni.



Győződjön meg arról, hogy a fék megfelelően meg van-e húzva, magától nem tud kioldani.

Ha lehetséges, akkor támassza a gyermekkocsit nem mozdítható tárgynak, például egy falnak, vagy kérjen meg egy másik személyt, hogy tartsa meg a gyermekkocsit. A gyermeket óvatosan helyezze a gyermekkocsiba, kapcsolja be a biztonsági övet és helyezze fel a lábtámaszt.



Győződjön meg arról, hogy a gyermek kényelmesen ül-e.

A gyermek kivétele

Fékezz be a gyermekkocsit. A gyermek állapotától függően a lábtartót le kell szerelni.



Győződjön meg arról, hogy a fék megfelelően meg van-e húzva, magától nem tud kioldani.

Ha lehetséges, akkor támassza a gyermekkocsit nem mozdítható tárgynak, például egy falnak, vagy kérjen meg egy másik személyt, hogy tartsa meg a gyermekkocsit. Kapcsolja ki a biztonsági övet. A gyermeket óvatosan vegye ki a gyermekkocsiból.

Kisebb akadályok leküzdése

Lefelé

Tolja a gyermekkocsit az akadályhoz úgy, hogy az első kerék az akadály széléhez érjen (járdaszegély). A toló kart óvatosan lefelé nyomva egyensúlyozza a gyermekkocsit a hátsó keréken. Tolja az egyensúlyozott gyermekkocsi hátsó kerekét az akadályhoz, és a hátsó kereket engedje le az akadály szélén. Ezek után óvatosan tegye le az első kerekeket a földre.



A babakocsi mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a gyermek a lehető legkevésbé rázkódjon.

Felfelé

Tolja a gyermekkocsit az akadályhoz úgy, hogy az első kerék az akadály széléhez érjen (járdaszegély).



Soha ne ütközzön neki az akadálynak.

A toló kart óvatosan lefelé nyomva egyensúlyozza a gyermekkocsit a hátsó keréken. Tolja előre addig, hogy az első kerék már az akadály fölött legyen és engedje le az első kerekeket a földre. Tolja előre a gyermekkocsit, hogy a hátsó kerék az akadály széléhez érjen. Emelje fel a gyermekkocsit a toló kar segítségével és tolja a hátsó kereket is az akadály fölé, majd helyezze a földre.



A babakocsi mozgatásakor ügyeljen arra, hogy a gyermek a lehető legkevésbé rázkódjon.





Mozgatás lépcsőn lefelé

Tolja a gyermekkocsi első kerekét a lépcső széléhez. Tartsa meg a gyermekkocsit és tolja előre addig, amíg a hátsó kerék a lépcső széléhez ér. A segítő személy, aki a

gyermekkoszi előtt áll, tartsa meg a gyermekkoszit az első lábaknál fogva, és óvatosan gördítsék a hátsó kereket lépcsőről lépcsőre, amíg le nem érnek a lépcső aljára.

Mozgatás lépcsőn felfelé

Kissé nyomja le a toló kart és illessze a hátsó kerekeket a lépcső aljának. A segítő személy, aki a gyermekkoszi előtt áll, tartsa meg a gyermekkoszit az első lábaknál fogva, és óvatosan gördítsék a hátsó kereket lépcsőről lépcsőre, amíg fel nem érnek a lépcső tetejére.

	Tartson szünetet és pihenjen, ha elfáradt.
	Soha ne emelje fel a gyermekkoszit a lábtartónál fogva.
	A szállított személy kezei maradjanak az üléstéren belül kézi szállítás során.
	Ha csak lehetséges, kerülje a lépcsőn való szállítást, de ha elkerülhetetlen, akkor minden esetben vegye igénybe segítő személy segítségét.

Alap tartozékok

FLEXI beülés szűkítő

	
<p>A különálló darabok</p>	<p>A három szűkítő egyben</p>
<p>A Flexi szűkítő (1) egyes darabját, vagy a darabok tetszőleges kombinációját a tépőzárak segítségével be lehet tenni a gyermekkosiba a betét használata nélkül.</p>	

Abdukciós ék

Az ék megakadályozza, hogy ki lehessen csúszni a székből.

Az ék rögzítésére az 1-es csat szolgál. A csatot át kell bújtatni a biztonsági öv melletti nyíláson és az ék alján található tépőzárat ré kell nyomni a gyermekkosiban található tépőzárra.



A képen, a gyermekkosci alján átbújtatott csat látható. (A gyermekkosci alulról fényképezve.)



<p>A beszerelt ék látható a képen.</p>	
	<p>Győződjön meg arról, hogy az ék rögzítő csatja nem tud kicsúszni a számára kialakított résből és a tépőzár megfelelően fogja..</p>

Fejtámasz

A fejtámasz a fej oldalirányú megtámasztására szolgál.

<p>A fejtámaszt a tépőzár szalagok segítségével lehet a háttámla felső részéhez rögzíteni. A fejtámaszt a fejnek megfelelő magasságban kell felszerelni.</p>	
<p>A képen a felszerelt fejtámla látható.</p>	

Tartozék (Külön feliratható)

Ülésbetét

A gyermekkosziba az alábbi betétet lehet behelyezni

 <p>Betét előlnézet</p>	 <p>Betét hátnézet</p>
<p>Helyezze a betétet (1) a gyermekkosziba és a betétet előre döntve, a biztonsági övnek kialakított nyíláson (3) dugja át a biztonsági övet-(2).</p>	
<p>A betét felső rögzítő szalagját húzza rá a háttámla tetejére. Ezzel rögzíti a betét felső részét a gyermekkoszsihoz.</p>	
<p>A betét rész még két további beülés szélesség szűkítőt is tartalmaz</p>	
 <p>1</p>	 <p>2</p>
<p>A tépőzárak segítségével az 1 szűkítő önmagában, vagy az 1 – 3 szűkítők együtt is behelyezhetők, a személy igényeinek megfelelően.</p>	

Opcionális tartozék

Napvédő ernyő

A napvédő ernyőt a gyermekkosci vázára lehet felszerelni a két csat segítségével. A napvédő tető hátulját bele kell akasztani a háttámla felső részébe.

A napvédő ernyő csatját (1) át kell bújtatni az ülésen kialakított résen (2) és be kell zárni. A záródást egy hal kattanás jelzi. A csatok úgy vannak kialakítva, hogy azok pontosan illeszkednek a kocsi vázához jellegzetes profiljához.



A felszerelt napvédő ernyő képe zárt állapotban. A napvédő tető tetejét a nyíl irányában elmozdítva, lehajtható.



Előlről



Oldalról

A felszerelt napvédő ernyő képe nyitott állapotban. A napvédő tető tetejét a nyíl irányában elmozdítva, összecsukható.



Előlről



Oldalról

Esővédő

Az esővédő műanyag fóliát (1) rá kell húzni a kocsira, és a tépőzár szalagokkal (2) kell a gyermekkosci vázához rögzíteni.



Műszaki adatok

Háttámla magasság [mm]:	680
Beülő mélység [mm]:	290
Beülő szélesség [mm]:	250-350 (fokozatosan FLEXI szűkítővel)
Üléstől a lábtartóig [mm]:	250-375
Háttámla dőlésszög [°]:	90 – 135
Ülés dőlésszög [°]:	26
Teljes hossz [mm]:	1080
Teljes szélesség [mm]:	590
Teljes magasság (fogantyúval) [mm]:	1000
Fék	lábműködtetésű
Tömeg [kg]:	14,5
Maximális terhelhetőség [kg]:	50
Összehajtott hossz [mm]:	1000
Összehajtott szélesség [mm]:	310
Összehajtott magasság [mm]:	300
Első kerék átmérő [mm]	Ø 175
Hátsó kerék átmérő [mm]	Ø 225

A gyermekkocsi minden egyes részegysége pótalkatrészként rendelhető.
Az opcionális tartozékok külön rendelhetők.

Karbantartás

A gyermekkocsi úgy lett kialakítva, hogy hosszú ideig lehessen használni anélkül, hogy szervizbe kellene vinni.

Rendszeresen ellenőrizni kell a biztonsági elemeket, féket, rögzítő elemeket, lábtámaszt, hogy megfelelően működnek-e. Ha nem megfelelő, azonnal szervizbe kell vinni javításra.

Ajánlott a gyermekkocsit évente elvinni szervizbe egy átvizsgálásra.

A gyermekkocsi javítását csak a kijelölt szervizek végezhetik.

A gyermekkocsi karbantartásához csak eredeti PATRON alkatrészeket használjon.

A forgó részeket, tengelyeket célszerű félévente kenőanyaggal (pl.: WD-40) kenni. Ne használjon olajat, vagy zsírt. Soha ne használjon nagy mennyiségű kenőanyagot, mert abba bele tud ragadni a szennyeződés.

A fölösleges kenőanyagot le kell törölni.

A gyermekkocsi könnyen nyílik és csukódik. Ha ez a művelet nehezen vagy egyáltalán nem megy, akkor olvassa át figyelmesen a kezelési útmutató vonatkozó részeit. Jellemző hiba, hogy a lábtámasz rajta marad és ez akadályozza a műveletet.




Ellenőrizze rendszeresen, hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.

A gyermekkocsit száraz, biztonságos helyen kell tartani, javasoltan 5 – 20 °C között.

Egyéb karbantartásként csak a tisztítani kell a gyermekkocsit. A gyermekkocsi minden huzata, illetve az egyes tartozékok huzata leszedhető és maximum 40 °C-os vízben kézzel mosható. A gyermekkocsi vázszerkezet nedves puha ruhával tisztítható. A tisztításhoz semleges mosószert, és kéz meleg vizet használhat. Makacs szennyeződés esetén kefével dörzsölje át a kárpitot, majd törölje szárazra. A gyermekkocsit összeszerelt állapotban kapja kézhez, de szükség lehet a kerekek leszerelésére például tisztítás céljából.

A használat ideje alatt minden rögzítést rendszeresen ellenőrizni, beállítani, illetve szükség esetén cserélni kell, különös tekintettel a kerekre, fékekre.


A kerekesszék veszélyes alapanyagot nem tartalmaz. Elhasználódás után a fém vázat a fémgyűjtő helyen lehet leadni.

	A kárpitot mosógépben mosni, szárítógépben szárítani, illetve vasalni tilos.
	Ne használjon erősen maró vegyszereket a tisztításhoz.
	A homok, csapadék és a tengervíz, télen a só károsíthatja az első- és hátsó kerekek csapágait. Mossa át és tisztítsa meg a keréktengelyeket az ilyen igénybevételű használat után.

Címkézés és csomagolás

Címkézés

A termék jobb oldali hátsó függőleges váz elemén található a gyártói címke. Ennek képe alább látható.

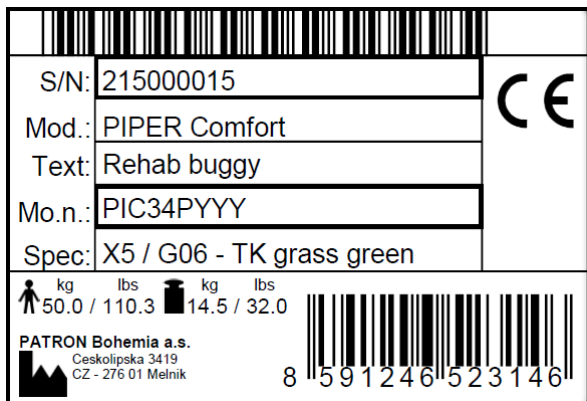

A címke tartalma:

Felső vonalkód: Cikkszám

Alsó vonalkód EAN kód

S/N: Termék szériaszáma

Mod.: Megnevezés

Text.: Rövid angol nyelvű felhasználási cél (Rehabilitációs gyermekkocsi)

Mo.n.: Cikkszám

Spec.: Típus részletes leírása



Terhelhetőség




Saját tömeg



Gyártó

Csomagolás

Kartondoboz, 380 x 330 x 1320 mm. A csomagoláson található címke és a terméken található címke tartalma megegyezik.

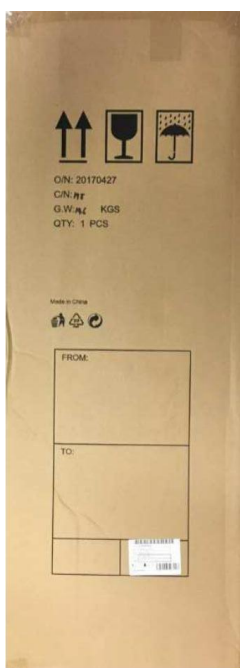

Jótállás

A jótállási jegy alapján a REHAB Zrt. az átadás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa gyártott, illetve forgalmazott termékekre.

A jótállás jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése, árleszállítás, vagy vételár megtérítése illeti meg.

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha a hiba:

- a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt következett be (pl.: túlterhelésből),
- a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt következett be (lábtartó törése, stb.), és bele értve a nem megfelelő út és időjárási viszonyok közötti használatot is,
- a nem megfelelő tárolás miatt következett be,
- balesetből származó sérülésekből következett (pl.: váz sérülése),
- elemi kár vagy egyéb (rongálás, kárpitsérülés, állat okozta kár, lopás, gondtalanság stb.), az átadás után keletkezett, nem a gyermekocsi hibájára visszavezethető károk, meghibásodások.

-

Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának:

- a természetes használatból eredő kopások (pl.: kárpit, gumik, kerekek stb.),
- a természetes használat során szükségessé váló után állítások (pl. fék).

-

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha

1. A terméken a jótállást vállaló szervén kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett.
2. A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő műszaki meghibásodás tekintetében.
3. A terméket váltott személyek használják (pl.: intézményi felhasználás), vagy túllépik a használati útmutatóban feltüntetett terhelést.
4. Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
5. A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá válik.

Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merül fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási kötelezettség.

Javító egységek

A garanciális hibák, valamint a jótállási időn túli javítás – szervizelés bejelentése a Szervizkönyvben feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,
- hibajelenséget,
- a javítás módját és idejét,
- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,
- a főszervelécek cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételeivel vásárolta!

A termék változtatási jogát a gyártó fenntartja.**Gyártó:**

PATRON Bohemia, a.s.

Českolipská 3419

276 01 Mělník

Telefon: 315 630 111

www.patron.eu/

info@patron.eu

Forgalmazó:

REHAB Zrt.

A **MEDORT** FIKMA ORTOPÉDIKUSZNA csoport tagja.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

www.rehabzrt.hu

info@rehabzrt.hu

