

VeriFine®

Inzulinadagoló tollhoz használatos tű

Használati útmutató

A VeriFine® inzulinadagoló tollhoz használatos tű egy steril műanyag tű, amelyet a gyors és kényelmes inzulinbeadáshoz fejlesztettek ki. Ez a tű egyszerűen használható a NOVO, LILLY, SANOFI AVENTIS, OWEN MUMFORD és a BERLIN CHEMIE inzulinadagoló tollakkal.

Övintézkedés

- Otthoni és egészségügyi felhasználásra egyaránt alkalmas.
- Tárolja a tűt hűvös és száraz helyen.
- Ne használja a tűt, ha a csomagolás sérült vagy hiányos.
- Mindig új és steril tűt használjon.
- A tűt egyszeri használatra tervezték. Többszöri használatra nem alkalmas, hogy az esetleges fertőzések elkerülhetők legyenek.
- Ne engedje, hogy a tű szennyeződéssel, krémmel vagy olajjal érintkezzék.
- A használt tűt csak megfelelő hulladékgyűjtő tárolódobozba dobja ki.
- Ne cserélgesse rendszertelenül a beadási felületet.
- Ne használjon lejárt szavatosságú vagy sterilítási tűt.

Szükséges kiegészítők

- Inzulinadagoló tollhoz használatos tű
- Csomagbetét

Szükséges kiegészítők, melyeket a csomag nem tartalmaz

- Alkoholos törülköző
- Inzulinadagoló toll

Használati útmutató

Az inzulin beadása előtt ellenőrizze az inzulin szabad folyását az adagoló toll használati útmutatójának megfelelően. Amennyiben először használ inzulin beadására alkalmas eszközt, vagy bármilyen kérdése merülne fel az eszközzel vagy annak használatával kapcsolatban, keresse fel kezelőorvosát vagy a diabéteszcentrumot.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag olyan inzulinadagoló tollal használható, melynek standard luer lock vagy univerzális csatlakozója van. Az összes tű steril, nem-toxikus és nem-pyrogén. Minden VeriFine® inzulinadagoló tollhoz használatos tű egyszer használatos.



Távolítsa el a védőcsomagolást.

1



Az óramutató járásával megegyező irányba csavarja rá a tollra a külső védőcsomagolással együtt.

2



Távolítsa el a külső védőcsomagolást, de ne dobja ki. Távolítsa el a belső védőcsomagolást is.

3 4



Csípje össze a bőrét, és adja be magának az inzulint orvosának utasításai szerint. Hogy a beadás során a megfelelő mennyiségű inzulin jusson a szervezetébe, a beadás után még 5 másodpercig tartsa a tűt a bőrében és csak ezután vegye ki.

5



Helyezze vissza óvatosan a külső védőcsomagolást.

6



Használat után az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja le a tűt és távolítsa el az adagoló tollról.

7

Szimbólumok jegyzéke

	Olvassa el a használati útmutatót.		Felhasználható		Felhatalmazott képviselő
	LOT-szám		Egyszer használatos		Katalógusszám
	Ethylén oxidban sterilizelve				Gyártó



Promised®

PROMISED MEDICAL DEVICES INC.
170 - 422 RICHARDS STREET,
VANCOUVER BC V6B 2Z4, CANADA
www.promised.ca

EC REP

Lotus Global Co., Ltd
1 Four Seasons Terrace West Drayton,
Middlesex London UB7 9DQ
Tel: 0044-20-75868010
Fax: 0044-20-78006187

CE 0197