

Umbrella
Gyermek kerekesszék
Kezelési útmutató



Tartalom

1. Bevezetés.....	3
2. Termék leírása	3
3. Indikáció	5
4. Kontra indikáció.....	5
5. Használat	5
6. Biztonsági előírások.....	9
7. Napi használat és karbantartás	11
8. Műszaki paraméterek.....	20
9. Szimbólumok	21
10. Jótállás	22
11. Gyártó.....	24
12. Forgalmazó	24

Figyelem

Az eszköz használata során mindig kövesse az alább olvasható alapvető óvintézkedéseket és a biztonsági intézkedéseket. A kezelési útmutatót a használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el. A kezelési útmutatót őrizze meg, az esetleges későbbi felhasználás érdekében.

Az Umbrella gyermek kerekesszéket három méretben lehet beszerezni, Umbrella 1, Umbrella 2, Umbrella 3. Részletesebb információk érdekében olvassa el a műszaki paraméterek fejezetet.

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Nagyon bízunk abban, hogy ez a termék ki fogja elégíteni az igényeit. Kérjük, hogy ezt a dokumentumot az első használat előtt figyelmesen olvassa el. Ez a kezelési útmutató annak érdekében készült, hogy biztosítsa a szükséges információkat a termék biztonságos használatához. Az ajánlások helyes alkalmazása jelentősen hozzájárul a termék hosszabb élettartamához és külső megjelenésének megőrzéséhez. Elkötelezettségünk, hogy folyamatosan javítsuk a termék minőségét, ami azt is eredményezheti, hogy kisebb eltéréseket találhat a termék és a leírás között.

2. Termék leírása



1. ábra: Az Umbrella gyermek kerekesszék konstrukciós ábrája

1. Toló kar, 2. Napvédő rögzítő, 3. Oldal zár, 4. Keret, 5. Lábtartó magasság állító csavar, 6. Dupla hátsó kerék (vagy szimpla, au Umbrella 3 esetében), 7. Első bolygókerék az egyenes futás rögzítővel 8. Napvédő, 9. Fejtámasz, 10. Háttámasz kárpit (oldalsó palettákkal), 11. Első kapaszkodó, 12. Abdukciós ék 13. Lábszár támasz, 14. Csomagkosár, 15. lábtartó

A gyermek kerekesszék alap és kiegészítő tartozékai:



2. ábra A gyermek kerekesszék összecukott állapotban



3. ábra Napvédő



4. ábra Fejtámasz, Elülső kapaszkodó (2 verzió, fekete – kiegészítő opció), abdukciós ék, oldalsó paletták ágyéki görgőtartóval.



5. ábra Csomagtartó kisebb tárgyakhoz, esernyő (opcionális), asztal (opcionális), pohártartó.



6. ábra Hálósák



7. ábra Esővédő

Külön vényre feliratható párna készlet



Fejtámasz, abdukciós ék és oldalsó paletták

3. Indikáció

A gyermek kerekesszék fogyatékkal élő és / vagy a központi idegrendszerének (CNS) károsodásával, működési zavarával küzdő gyermekek számára készült. Ez agyi bénulással, myelomeningocele, izomműködési zavarokkal, alsó végtagok működési zavarával küzdő gyermekek esetében is használható. Maximális terhelhetőség: 30 kg (Umbrella 1) 45 kg (Umbrella 2) & 75 kg (Umbrella 3).

4. Kontra indikáció

Ülés képtelenség.

5. Használat

- Kicsomagolás után ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható, ami a csomaglistán szerepel.
- Ellenőrizze le, hogy egyik elemen sem található látható sérülés. Ha bármilyen eltérést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- Ne használja a kerekesszéket mindaddig, amíg megfelelően nem csatlakoztatta az összes alkatrészt.

Összeszerelési útmutató: lásd 1. ábra



8. ábra A gyermek kerekesszék kinyitása.

- Nyissa szét a kerekesszék, a toló kar, a 8. ábrán látható nyíllal jelzett irányba történő mozgásával. Hogy ezt könnyen megtehesse, tartsa meg kézzel a kerekesszék ülőfelületét.
- Amikor a kerekesszék részben nyitva van, nyomja le lábbal a kerekesszék rögzítő karját (lásd 9. ábra) addig a pontid, amíg a kerekesszék nem stabilizálódik, az egyes elemek megállnak a vízszintes helyzetükben (Lásd 10. ábra).



Hátsó rögzítő
kar



9. ábra

10. ábra

- Hogy megakadályozza a kerekesszék nem tervezett mozgásait, rögzítse le a hátsó kerekek forgását.
- Ahhoz, hogy ezt megtegye, nyomja le a hátsó kerekek között található fékkart lábbal.
- Javasolt, hogy ezt követően győződjön meg arról, hogy mind a két kerék fékje meg van-e húzva.
- A gyermek kerekesszék fel van szerelve oldalsó rögzítőkkal. A keret rögzítéséhez, a rögzítő elemet húzza rá a keret szabad végére, lásd 11. és 12. ábrákat.



11. ábra nyitott rögzítő elem

Oldalsó
rögzítő
elem



12. ábra zárt rögzítő elem



13. ábra Összeszerelt és rögzített gyermek kerekesszék.

- Hogy rögzítse az első kapaszkodót, nyomja az első kapaszkodó műanyag végét a kereten található megvezetőre felülről lefelé (14., 15. ábra)



14. ábra első kapaszkodó rögzítő (nyitva)



15. ábra első kapaszkodó rögzítő (zárva)

- A patentek segítségével rögzítse a kárpitos övet az első kapaszkodóhoz. De először az abdukciós éket kell rögzíteni a kárpithoz.
- Ugyan ilyen módon lehet az asztalt is rögzíteni a kerekesszékhez. (lásd 16. ábra). Az abdukciós éket egy, a kárpitozott betétlen körbefutó, tépőzárral lehet rögzíteni (lásd 16. ábra).



16. ábra Abdukciós ék, asztal, kárpitozott betét

- Ezt követően szerelje fel a fejtámaszt. Nyissa ki a fejtámasz tépőzárát a kárpit mögött, válassza ki a megfelelő magasságban található nyílást a háttámlán. Dugja át a tépőzár szarait a kiválasztott nyíláson és ezt követően hátul zárja a tépőzárát.
- A napellenző felszereléséhez, illessze a műanyag véget a kerekesszék keretén található megvezetőbe fentről lefelé (17., 18. ábra)
- Illessze a lábtartót a lábtartó keret aljához és nyomja be teljesen.



17. ábra Napvédő rögzítő (nyitva)



18. ábra Napvédő rögzítő (zárva)

- A napvédő hátsó részét a háttámla külső része mögé kell húzni. A napvédő mindkét oldalán található tépőzárral lehet rögzíteni a kerekesszék keretéhez a toló kar alatt.



19. ábra Napvédő felszerelt állapotban



20. ábra Kosár felszerelt állapotban

- A kisebb tárgyak számára kialakított kosarat az ülés és a kereszt keret közé lehet felszerelni. (20. ábra). A kosár tépőzárral van ellátva, amelyet a babakocsi kerete köré kell zárni.

A kerekesszék összecsukása

- Ahhoz, hogy összecsukja a kerekesszéket, a lábtartó legalább az egyik oldalon bontani kell. Lazítsa meg a kárpitozott övet. A csúszó sint lentről felfelé húzza meg miközben megnyomja a elülső záró gombokat, melyek a csúszó sin mindkét végén megtalálható.

- Ha le kívánja venni a napvédőt, nyomja meg a nyvédő rögzítő gombot és csúsztassa letről felfelé.
- Nyissa ki mind a két oldalon levő oldalzárót.
- Nyissa a hátsó tázó karokat annak felfelé húzásával
- Ekor készen áll a kerekesszék összecsukására úgy, hogy a tolókart az első kerekek irányába nyomja, miközben a keret oldalai közelednek egymáshoz mindaddig, amíg a kocsi össze nem csukódik annyira, mint az a 7. ábrán látható.
- Az utolsó lépés a biztonsági öv meghúzása.

6. Biztonsági előírások


- a) Mielőtt a kerekesszéket használná, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és őrizze meg azt a későbbi felhasználhatóság érdekében.
- b) Gyermeke biztonsága veszélybe kerülhet a kézikönyvben szereplő szabályok be nem tartása esetén.
- c) Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Mindig tartsa a szemét a gyermekén, amikor az a kerekesszékben ül. Minden esetben felelős a gyermekéért.
- d) Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
- e) Mindig használja a biztonsági övet, hogy elkerülje a sérüléseket, hogyha a gyermek kiesne vagy kicsúszna a kerekesszékéből.
- f) Fontos, hogy a biztonsági övet húzza meg és gondosan állítsa be a felhasználó igényeinek megfelelően.
- g) Az ülés és az övek nem helyettesítik a gondnok megfelelő felügyeletét.
- h) Amikor a kerekesszék beállítását végzi, a gyermek ne tartózkodjon a kerekesszékben.
- i) A javításokat csak megfelelően képzett szakember végezheti. A garanciális időn belül csak szakszerviz végezhet javításokat.
- j) A kerekesszék nem használható futás, korcsolyázás, vagy görkorcsolyázás közben.
- k) A kerekesszék csak egy gyermek szállítására alkalmas.
- l) Nem használható a kerekesszék, ha látható, vagy kézzelfogható meghibásodása van, vagy ha az alkatrészei el vannak kopva, vagy potenciális balesetveszélyt jelentenek (pl.: Elkopott kerekek, vagy kárpit, törések, stb.).
- m) Minden használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e nyitva a kerekesszék. Használat előtt ellenőrizze, hogy a záró reteszek zártak-e.
- n) Balesetek elkerülése végett, mindig ellenőrizze, hogy nincs gyermek nincs a közelben, amikor összecsukja, vagy kinyitja a kerekesszéket.
- o) Amikor a kerekesszékkel szűk helyeken közlekedik, győződjön meg arról, hogy van elegendő hely mindkét oldalon, hogy elkerülje a kézsérüléseket illetve a kerekesszék sérüléseit.
- p) Ne hagyja, hogy a gyermeke játsszon ezzel a termékkel.
- q) Ne hagyja, hogy a gyermek felálljon a kerekesszékben, vagy a lábtartón. A kerekesszék felborulhat és megsérülhet a gyermek.
- r) Mozgás közben mindig fogja a kerekesszék toló karját.
- s) Legyen nagyon óvatos a kerekesszékkel lépcső közelében.
- t) A kerekesszék nem alkalmas lépcsőn, vagy mozgólépcsőn történő szállításra.
- u) Ne emelje fel a kerekesszéket, ha gyermek ül benne.

- v) Ne mozgassa a kerekesszéket az első kapaszkodónál fogva. Ha fel kell emelnie a kerekesszéket, minden esetben a keret egy fix pontjánál fogja meg.
- w) A kerekesszék véletlen elgurulása ellen, megállás után, amikor a gyermeket kiveszi, vagy beteszi a kocsiba, illetve megváltoztatja a pozícióját, mindig kapcsolja be a féket és kapcsolja be az egyenes futás rögzítőt.
- x) Ne állítsa a gyereket a lábtartóra. Ne hagyja felügyelet nélkül lejtőn a kerekesszéket, akkor sem, ha a fék be van kapcsolva.
- y) A kerekesszék 30 kg (Umbrella 1) 45 kg (Umbrella 2) 75 kg (Umbrella 3) tömegű gyermekek részére lett kialakítva.
- z) A kerekesszéknek mindig könnyen kinyithatónak kell lennie. Ha probléma van a kinyitással, olvassa át még egyszer a kezelési útmutatót, illetve vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- aa) Nagyon körültekintő legyen, ha egy akadályon halad át. Szélsőséges használat esetén, a kerekesszék sérülést okozhat, vagy megsérülhet.
- bb) Ne használja a kerekesszéket ülésként járműben (autó, busz) történő szállításkor.
- cc) Szállítás közben (pl. a csomagtartóban) ne terhelje a kerekesszéket, mert ez gyengítheti vagy károsíthatja a szerkezetét.
- dd) Ne hagyja a kerekesszéket nyílt láng közelében.
- ee) Tartsa szem előtt, hogy a kerekesszék felületei felmelegedhetnek, ha napfénynek, vagy sugárzó hőnek van kitéve. Valamint, alacsony hőmérsékleten a kerekesszék fém részei nagyon lehűlhetnek. Ez égési vagy fagyási sérüléseket okozhat.
- ff) Legyen óvatos, ha lejtős felületen mozgatja a kerekesszéket. A maximális megengedett lejtő vagy emelkedő 5%-os.
- gg) A kerekesszéket csak olyan felületen használhatja, ahol a kerekesszék mind a négy kereke leér és mind a négy kereke használatban van.
- hh) A kerekesszék úgy lett kialakítva, hogy azt vízszintes, burkolt beltéri vagy kültéri felületen használják.
- ii) A termék használata jeges, vizes, zsíros vagy durva szemcsés felületen borulásveszélyes.
- jj) A termék működésképeségének fenntartása érdekében különösen fontos, a megfelelő tisztítás karbantartás.
- kk) Ne tegyen további terheket (csomagot, stb.) a kerekesszék toló karjára.
- ll) Ha a terméket magas páratartalmú helyen (fürdőszoba, mosókonyha), vagy szabadtéren, vagy nem higiénikus helyen tárolja, az a termék károsodásához vezethet.
- mm) Ne hagyja a gyermeket sokáig a kerekesszékben, mert neurológiai nehézségekkel küzdő személyek esetén, ha sokáig változatlan helyzetben vannak, bőrproblémák léphetnek fel.
- nn) Ha a lábtartót nem veszi le az összehajtás előtt, akkor az megsérülhet.
- oo) Használat során, a termék kezelésekor, vagy összeszereléskor, a megvezető mechanizmusokban található lukak, rések, becsípődést okozhatnak és/vagy megnyomhatják a kezelő testrészeit.
- pp) Ezeket a műveleteket kiemelt gondossággal hajtsa végre. Beállítást követően, stabilizálja a kerekesszék helyzetét, gondosan meghúzza az anyákat és csavarokat.

7. Napi használat és karbantartás

Fékek és záró szerkezetek

- A hátsó kerekek el vannak látva fékkel.
- Hogy megelőzze a kerekek nem kívánt elmozdulását (Umbrella 1, Umbrella 2), kapcsolja be mindkét hátsó keréken a fékeket. (21A. ábra).
- Hogy ezt megtegye, nyomja meg a mind a két hátsó keréken megtalálható lábféket.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét fék megfelelően rögzít-e.
- Hogy kikapcsolja a féket, emelje fel a fékkart.
- Hogy megakadályozza a kerekek nem kívánt elmozdulását (Umbrella3), állítsa vízszintesbe a féket mind a két hátsó keréken (21B. ábra).
- Győződjön meg arról, hogy mindkét fék megfelelően rögzít-e
- A fékek felengedéséhez, fordítsa a fékkarokat a kerekek felé.

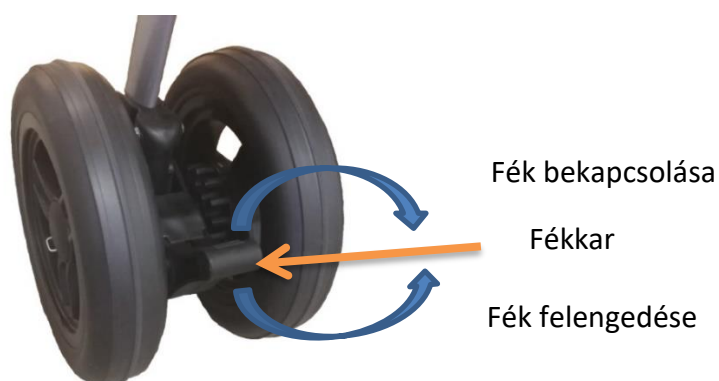

21A. ábra Hátsó fékkar szerkezet (Umbrella 1 & 2)



21B. ábra Hátsó fékkar szerkezet – nyitott és zárt (Umbrella 3)

- Lehetőség van az első kerék menetirányának rögzítésére is – csak egyenesen lehet előre haladni.
- Az első kerék hajtási irányának rögzítéséhez be kell állítani egyenes haladási irányba.
- A rögzítő tüskét mindkét első keréken a 22. ábrán látható helyzetből át kell állítani a 23. ábrán látható zárt helyzetbe.
- Ellenőrizze, hogy a kerék nem képes elfordulni.
- Ebben a helyzetben az első kerék elfordulása meg van akadályozva.



22. ábra Menetirány rögzítő túske (nyitva)

23. ábra Menetirány rögzítő túske (zárva)

- Ha engedélyezni akarja az első kerekek szabad elfordulását, húzza ki a rögzítő tüskét és fordítsa el 90 °-kal a 23. ábrán látható helyzetből a 22. ábrán látható helyzetbe.

Lábtartó hosszának beállítása

- A lábtartót 5 pozícióban lehet állítani 25 mm-es lépésekben.
- A lábtartó hosszának megváltoztatásához csavarja ki a lábtartó hossz beállító csavart, távolítsa el a fekete csavarrögzítő lapot, és ezt követően csavarja ki a csavart (24. ábra).
- Válassza ki a kívánt lábtartó hosszat, a lábtartó keretén található furatok segítségével. Ezt követően helyezze a csavart a furatba, csavarja be a csavart és biztosítsa a fekete rögzítő elemmel.
- Fontos, hogy a lábtartó mindkét oldalán azonos magasságot kell beállítani.



24. ábra Lábtartó hossz beállító csavar.

Fejtámasz beállítása

- A kerekesszék fel van szerelve fejtámasszal, amit két különböző helyzetben lehet elhelyezni.
- Hogy ezt a helyzetet megváltoztassa, nyissa ki a kárpit mögött, a fejtámasz hátsó részén található tépőzárát. Válassza ki a megfelelő fejtámasz magasságot. Illessze a tépőzár végeit a kárpit megfelelő nyílásába és a kárpit mögött zárja a tépőzárát.


A háttámla szögének beállítása

- A háttámla dőlésének beállításához állítsa be a háttámla állító szíjat (25. ábra). Ehhez nyomja meg a 25. ábrán látható gombot, és óvatosan döntse hátra a háttámlát. Amikor elérte a megfelelő dőlésszöget, engedje el a gombot.
- Ha a háttámlát előre kívánja dönteni, nyomja meg a gombot, és ezzel egyidőben húzza lefelé az öv végét.



25. ábra Háttámla beállító szíj.

Biztonsági rendszer

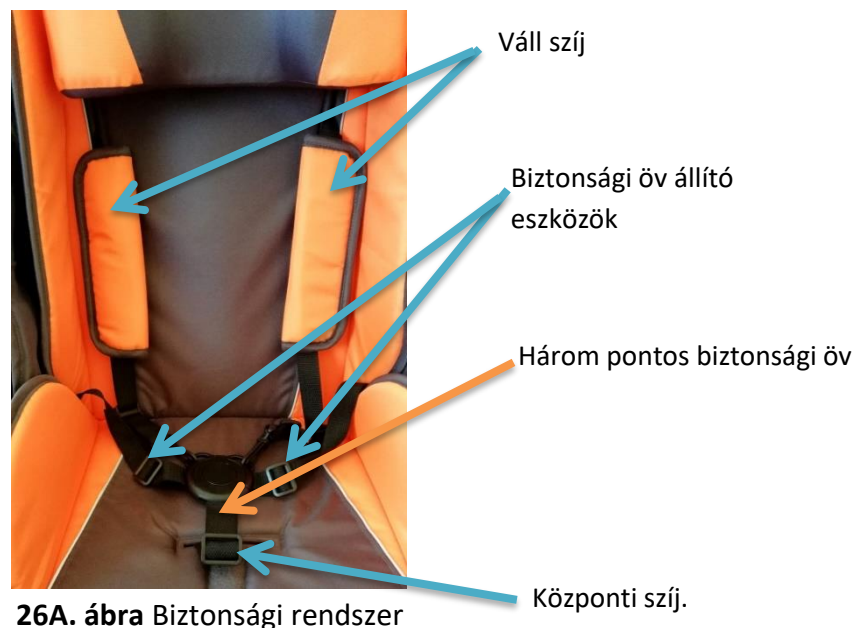

26A. ábra Biztonsági rendszer



26B.ábra Biztonsági rendszer - Fejtámasz, oldalsó szűkítők, ágyéki görgővel.

- A kerekesszék fel van szerelve egy rögzítő hevederrel, amelyet két különböző helyzetben lehet beállítani a hossz beállító segítségével, abdukciós ékkel, fej támasszal és egy kszlet oldal szűkítővel és ágyéki görgővel (26A. & 26B. ábra).
- Az egyes elemek beállításáról egyeztessen az orvosával vagy fizioterapeutájával.
- Ahhoz, hogy megváltoztassa a rögzítő heveder pozícióját, el kell távolítani azt a jelenlegi pozíciójából a háttámla kárpit tetején és a hevedert át kell fűzni a háttámla kárpitom található másik nyíláson.
- A biztonság érdekében, miután a gyermeket behelyezte a kerekesszékbe, azonnal csatolja be a rögzítő hevedert.



27.ábra rögzítő heveder (nyitva)



28. ábra rögzítő heveder (zárva)

- A biztonsági rendszer tartalmaz egy öt pontos biztonsági övet egy központi csattal. A váll öv végigfut a gyermek testén a vállától a derekáig. Mindkét csat elem behelyezhető a központi csatba. Hogy ezt megtegye, nyomja meg a csaton található gombot és helyezze az elemeket a csat nyílásaiba (27., 28. ábra)
- Amikor a csat elemeket összeilleszti, egy halt kattanást kell hallania. Csak akkor van a biztonsági öv megfeszítve, ha hallotta ezt a kattanást.
- A gyermek megfelelő védelme érdekében, állítsa be a hevederek hosszát a beállító elemek segítségével.
- A biztonsági öv kikapcsolásához, nyomja meg a középen található gombot.

A hátsó kerekek leszerelése és felszerelése

- A hátsó kerekek levételéhez, nyomja meg a gyorscsatlakozó elemet a tengely irányába, és húzza ki a kereket a tengely vonalában.
- A hátsó kerekek felszereléséhez, nyomja meg a gyorscsatlakozó elemet a tengely irányába, és csúsztassa a kerék tengelyét a furatba.
- Elengedve a gyorscsatlakozót, a kerék tengelye rögzül.
- A belső kerekek le és felszereléséhez, a kerekesszéket ki kell nyitni.
- Győződjön meg arról, hogy a kerekek a felszerelés után megfelelően rögzültek-e.
- Az Umbrella 3 esetében, használjon egy szabványos csavarkulcsot, hogy lecsavarja a kereket.



29. ábra Gyorscsatlakozó elem

A hálósák beállítása

- A hálósák el van látva patentekkel, amelyek a napvédő alsó részén található patentekbe kapcsolhatók. A hálósák alsó részét a lábtámaszhoz kell csatlakoztatni.



30. ábra Hálósák beállítása



31. ábra Hálósák (Napvédő alsó része)

Pohártartó

- Ahhoz, hogy a pohártartót felszerelje a kerekesszék vázára, illessze a pohártartó hátulját a toló karra, ahogy az a 31A., 31B. ábrán látható.



31A. ábra Pohártartó



31B. ábra Megfelelően felszerelt pohártartó



Mozgás lejtőn

- Amikor lejtőn mozog, legyen óvatos és csökkentse a sebességet.
- Ne menjen túl meredek lejtőn. A megengedett dőlésszög maximum 5%.



Áthaladás küszöbön és járdaszegélyen

- Ahhoz, hogy átmenjen küszöbön, vagy járdaszegélyen, az első kerekeket merőlegesen kell állítani a küszöbre vagy járdaszegélyre és teljesen rá kell tolni.
- Ezek után tegye a lábár a kerekesszék hátsó zárjára és finoman nyomja le a toló kart (32. ábra)
- A kerekesszék első kerekei kissé meg fognak emelkedni, ami lehetővé teszi az áthaladást az akadályon. Amikor az első kerék már az akadály tetején van, emelje meg a hátsó kerekeket előre döntve a kerekesszéket.




Kerekesszék hátsó rögzítő

32. ábra Hátsó rögzítő szerkezet

A gumik felpumpálása

(Ez csak a felpumpálható kerekű babakocsikra vonatkozik.)

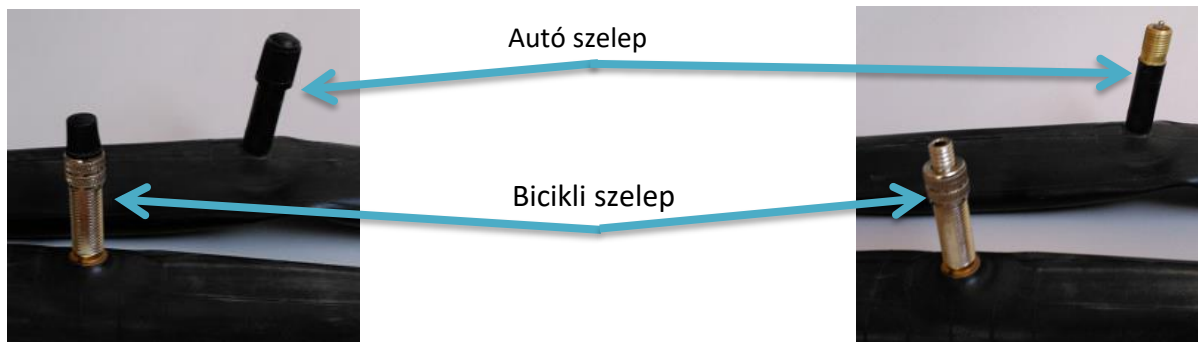

33. ábra Szelep szelepszapkával

34. ábra Szelep sapka nélkül

- Mielőtt felfújja a kereket, állapítsa meg, hogy milyen szelep található rajta. A lehetőségeket megtalálja a 33., 34. ábrán.
- A bicikli szelepen található egy kiegészítő kis felső elem, amit meg kell lazítani a pumpálás előtt.
- A szelep azonosítása után készítse elő a szelep típusának megfelelő pumpát.
- Az újonnan készített pumpák már mind a két szeleptípushoz megfelelnek. A legtöbbjüknek cserélhető a vége. A bicikli szelepeknek kisebb, az autós szelepeknek nagyobb a furata. Ha a pumpa nem alkalmazható a bicikli szelephez, akkor vennie kell egy adaptert, ami bármely bicikli szakboltban kapható.
- Ha a keréken bicikli szelep van, akkor ki kell csavarni a tetejét. Ez egy kis elem, amit kézzel ki lehet csavarni. Amikor ezt csinálja, a felső vég felfelé mozdul el. Ekkor a szelep nyitva van.
- Ezt követően vegye le a műanyag szelepszapkát a szelepről, és tegye egy biztonságos helyre. Fontos, hogy ne veszítse el, mert a szelepbe szennyeződés kerülhet, ami fújási problémákat okozhat, illetve gyorsan leengedhet a kerék.
- Helyezze a pumpa fúvókáját a szelepre és ellenőrizze, hogy megfelelően rajta van-e. Ha szükséges, nyomja a pumpát a szelepre, és győződjön meg arról, hogy a levegő nem szökik-e oldalt.
- Ha a pumpán van egy rögzítő kar, akkor rögzítse. Ha a pumpa végén található egy csavaros vég, akkor csavarja azt össze a szeleppel. Ennek eredményeképpen, a levegő beáramlik a gumibelsőbe és a csatlakozó nem válik le a szelepről.
- A pumpálás elején a guminyomást a kerék több pontján ellenőrizze. Ellenőrizze a nyomást a futófelületen, a nagyujjával. Ha csak egy milliméteres bemélyedést tud nyomni, akkor az azt jelenti, hogy a kerék megfelelően fel van fújva. Ha szükséges folytassa a pumpálást.
- A pumpálás végeztével, Vegye le vagy csavarozza le a pumpa fúvókáját a szelepről. Javasolt, hogy ezt gyorsan csinálja, hogy minimalizálni tudja a levegővesztést.
- Bicikli szelep esetén húzza meg az előzőleg meglazított felső véget.
- Csavarja vissza a szelepre a szelepszapkát.

Lábtartó helyzetének beállítása

(Ez csak azokra a kerekű székekre vonatkozik, amelyeken állítható a lábtartó)

- A lábtartó vázának felső részén található egy lábtartó beállító gomb (35. ábra).

- Amikor ezt a gombot nyomja, akkor a lábtartó állítható..
- A lábtartó mindkét oldalán egyszerre kell nyomni a két gombot.
- A megfelelő helyzetben engedje el a gombokat.



35.ábra lábtartó beállító szerkezet




36. ábra lábtartó beállító szerkezet




37. ábra lábtartó beállító szerkezet

Tolókar beállítása

A toló kar elfordításához, húzza ki a biztonsági zárat (38., 39.ábra) és forgassa el a tolókart.

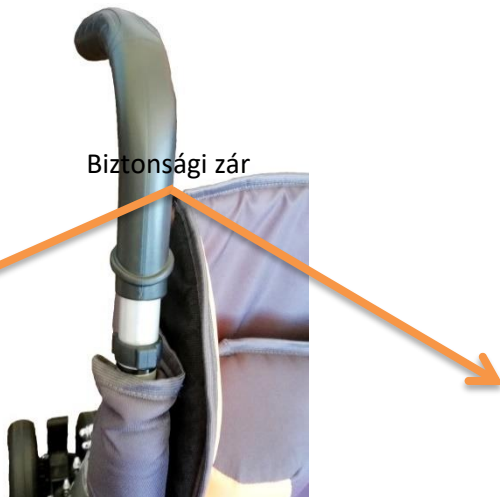

38. ábra Biztonsági zár zárva

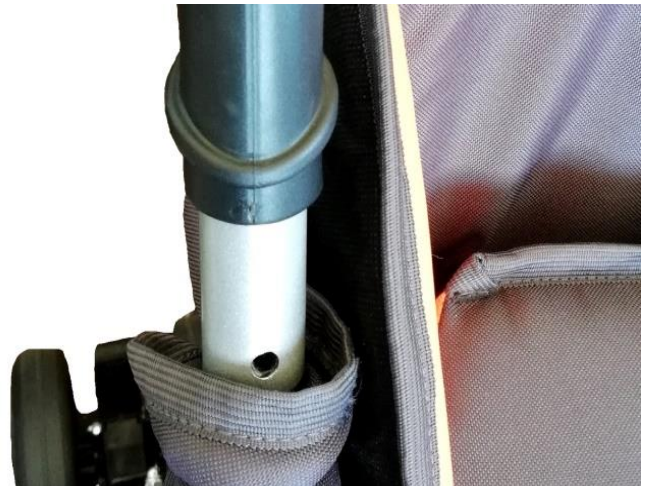

39. ábra Biztonsági zár nyitva

- Miután beállította a megfelelő helyzetet, helyezze vissza a biztonsági zárat (40. ábra).



40. ábra Biztonsági zár zárva a beállítás után

Karbantartás és tárolás

- A műanyag részeket és a vázat tisztító szerek nélküli puha nedves ruhával, vagy hasonlóval kell tisztítani.
- A szennyeződéseket alaposan távolítsa el a kerekesszék mozgó elemeiről (csavarok, mozgó szerkezetek).
- A kárpitozott részeket alaposan nedves ruhával lehet tisztítani.
- A termék funkcionális paramétereinek megtartása érdekében tisztítsa meg a babakocsi elemeit
- Nagyon magas páratartalmú helységben (fürdőszoba, konyha) vagy szabad levegőn tárolása alacsony higiénés körülményekkel kombinálva, a kerekesszék funkcionális és esztétikai paramétereinek gyors romlásához vezet. Ne tegye ki a kerekesszékot extrém időjárási körülményeknek (eső, hó, nagyon erős napfény), mert a festett részek színe megváltozhat.
- A kerekesszéknek burkolata (a burkolat a kárpitozás része és közvetlenül érintkezik a gyermekkel, nincs merevítve), kézzel 30 °C-on mosható.










Nem használhatók:









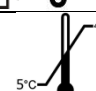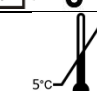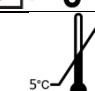








- Oldószerek,
- WC tisztítószer,
- éles kefék és kemény eszközök,
- Klór tartalmú tisztítószer,
- Maró tisztítószer,
- Nagy nyomású víz vagy gőz tisztítóberendezések.




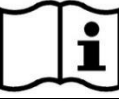










Gyakoriság	Ellenőrzés tárgya	Megjegyzés
Első használat előtt	A műszaki állapot ellenőrzése, minden szükséges alkatrész megvan-e.	Ellenőrizze, hogy egyik alkotóelemen sem található látható sérülés, deformáció.
Minden használat előtt	Kerekek, fékek, futásirány rögzítő ellenőrzése.	A fékek elhasználódhatnak, ellenőrizni kell a fékek állapotát és a futásirány rögzítő állapotát. Ellenőrizni kell a kerekek állapotát is, meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a sártól.
Kéthetente	Csavarok és anyák ellenőrzése, különösen a kerekek rögzítését..	Győződjön meg arról, hogy minden csavar és anya megfelelően meg van-e húzva. Ha nincs, húzza meg azokat.
Kéthavonta	Tisztaság és általános állapot.	Ha mechanikai sérüléseket tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Havonta egyszer	Kerék tengelyek	A kerék tengelyeket meg kell kenni, néhány csepp olajat vagy kenőanyagot kell kenni a kerék tengely és a kerékagy közé.




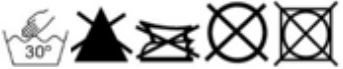
8. Műszaki paraméterek

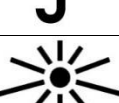Paraméter	Umbrella 1	Umbrella 2	Umbrella 3
Megengedett terhelhetőség	30 kg	45 kg	75 kg
A kosár maximális terhelhetősége	1 kg	1 kg	1 kg
Teljes szélesség	55 cm	60 cm	64 cm
Teljes hossz	88 cm	94 cm	105 cm
Teljes magasság	114 cm	116 cm	134 cm
Összecsukott méretek kerekkel.	122x37x44 cm	118x44x44 cm	128x44x50 cm
Ülés szélesség	30 cm	29-35 cm	40 cm
Ülés mélység	25-30 cm	30-35 cm	40-45 cm
Háttámla magasság	53 cm	54 cm	78 cm
Első kerék átmérő	19 cm	19 cm	17 cm
Hátsó kerék átmérő	24 cm	24 cm	25 cm
Önsúly	13,5 / 15,6 [kg]	~15 kg	19 / 22 [kg]
Maximális beteg magasság	120 cm	140 cm	170 cm
Lábtartó verzió	Lábtartó magasság 5 pozícióban 2,5 cm-enként állítható, 15 – 27.5 cm között.	Lábtartó magasság 5 pozícióban 2,5 cm-enként állítható, 21,5 – 34 cm között.	Lábtartó magasság 7 pozícióban 2,5 cm-enként állítható, 27,5 – 42,5 cm között.
Kerekek típusa	Tömör, hátul dupla, elől szimpla	Tömör, hátul dupla, elől szimpla	Felfújható, hátul szimpla, elől szimpla
Anyaga	Alumínium, acél műanyag, gumi	Alumínium, acél műanyag, gumi	Alumínium, acél műanyag, gumi
Maximális lejtőszög			
A környezet leírása, ahol javasolt a használata			
Tárolási és működési hőmérséklet			

Tárolási és működési páratartalom	30% - 70%	30% - 70%	30% - 70%
A kárpit tisztítási feltételei	    	    	    
Gyári szám:	A terméken található	A terméken található	A terméken található

9. Szimbólumok

	EU szabványoknak megfelelő termék
	Gyártási dátum
	Gyártó
	A használathoz olvassa el a kezelési útmutatót.
	Figyelem
	Cikkszám
	Gyári szám
	Védje nedvességtől
	Védje erős napfénytől
	Megengedett felhasználói tömeg
	Csak beltéren használható
	Az ujjak becsípődése lehetséges
	Tárolási és felhasználási hőmérséklet tartomány
	Maximális dőlés

	A terméket autóval történő szállításra szánják.
	A termék nem úgy lett kialakítva, hogy ülésként funkcionáljon gépjárművekben.
	A terméket repülővel történő szállításra szánják.
	Javasolt rövid ideig 30 °C-on kézzel mosni, ne használjon fehérítőt, ne vasalja, ne vegytisztítsa, ne használjon oldószert tartalmazó folttisztítókat, ne használjon szárítógépet.

10. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt az alábbiakkal egészítjük ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 - 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 - 250 000 forint eladási ár felett három év.
- E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használatól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebben az időtartamban a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta.

11. Gyártó



mdh Co., Ltd. St. 22/24 Ks. W. Tymienieckiego, 90-349 Łódź, Poland

tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21 www.mdh.pl, www.viteacare.com

12. Forgalmazó

Rehab Zrt, 2000 Szentendre, kalászi út 3.

Tel.: +3626 886 288 www.rehabrt.hu

SZERVIZKÖNYV

A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKŐZ JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:

..... gyártási számú gyerekkocsi

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi **fejedelem** út 125. Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: **06/47 560-130**

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606
Tel.: 06/1 783-3869
Tel.: 06/20 950-4735
Tel.: 06/30 465-7139

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137
Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196
Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

2000 Szentendre, Kalászi út 3 Tel.: 06/26-886-244

MEDIPLUSZ KFT.

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2. Tel.: 06/74 413-238

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jótállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

Az eszközt gyártó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: **Umbrella 1, 2, 3 gyerekkocsi**

Az eszköz típusa: **Umbrella 1,2,3**

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: **Nincs**

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

.....

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni.

Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Név:	Jótállási jegy Umbrella típusú gyerekkocsihoz		TAJ szám:
Eladó szerv tölti ki:			
A vásárlás napja 20.....hó.....nap (Hónap betűvel)	 aláírás (P.H.)	
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre		Levágandó jótállási, javítási szelvények	
Bejelentés időpontja:	5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	5
Bejelentett hiba:		Típus Umbrella	
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:		Kelt.:.....20..... hó nap:	
Munkalapszám:		Eladó:	aláírás (P.H.)
Kelt			
20... .. hó nap			
Bejelentés időpontja:	4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	4
Bejelentett hiba:		Típus Umbrella	
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:		Kelt.:.....20..... hó nap:	
Munkalapszám:		Eladó:	aláírás (P.H.)
Kelt			
20... .. hó nap			
Bejelentés időpontja:	3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	3
Bejelentett hiba:		Típus Umbrella	
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:		Kelt.:.....20..... hó nap:	
Munkalapszám:		Eladó:	aláírás (P.H.)
Kelt			
20... .. hó nap			
Bejelentés időpontja:	2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY	2
Bejelentett hiba:		Típus Umbrella	
Elhárított hiba leírása:		Gyártási szám:	
A jótállás új határideje:		Kelt.:.....20..... hó nap:	
Munkalapszám:		Eladó:	aláírás (P.H.)
Kelt			
20... .. hó nap			