

Kezelési útmutató

Junior Plus 2&3

Rehabilitációs gyermek kerekesszék
(VDRGOJ)

CE



Tartalom

1. Bevezetés.....	3
2. Termék leírása	3
3. Felhasználási cél	5
4. Ellenjavallatok	5
5. Használat	5
6. Biztonságos használat	8
7. Mindennapi használat és karbantartás	10
8. Műszaki paraméterek.....	17
9. Szimbólumok	19
10. Jótállás.....	20

FIGYELEM

A készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket az alábbiakban megadott információknak és a biztonsági intézkedéseknek megfelelően. Használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes utasítást. Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.



A Junior Plus gyermek rehabilitációs kerekesszék kétféle méretben kapható, **Junior Plus 2**, **Junior Plus 3** néven. Részletes információkért lásd a Műszaki paraméterek fejezetet.



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Mély meggyőződésünk, hogy ez megfelel az elvárásoknak. Kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót, mielőtt először használja. Ez a kezelési útmutató azért készült, hogy biztosítsa a szükséges információkat az eszköz biztonságos használata érdekében. Az útmutató helyes alkalmazása jelentősen hozzájárul a termék hosszabb élettartamához és kinézetének megőrzéséhez. Szeretnénk kiemelni, hogy a mai napig folyamatosan javítjuk termékeink minőségét, ami kisebb változásokat eredményezhet, amelyek előfordulhat, hogy nem szerepelnek ebben a kézikönyvben

2. Termék leírása



1. ábra. A Junior Plus gyermek rehabilitációs kerekesszék kialakítása

1. Toló kar, 2. Kar az ülés szögének és a háttámla dőlésszögének beállítására, 3. Hát stabilizátor, 4. Oldal támasz, 5. Oldal keret, 6. Hátsó kerék, 7. Kis tárgyak tároló rekesze, 8. Napvédő, 9. Fejtámasz, 10 Biztonsági öv, 11. Első biztosító rúd, 12. Első kerék kezelőszerv, 13. Lábtartó, 14. Első kerék.

A gyermek kerekesszék csomagolásának tartalma



Oldal keret csatlakozó

2. ábra. A kerekesszék teste



3. ábra. Ülés



Hátsó kerék

Első kerék tengely

Első kerék

4. ábra. Kerekek



5. ábra. Első biztosító rúd



6. ábra. Napvédő



7. ábra. Csomagtartó, esernyő (opcionális), terápiás asztal, ágyéktámasz, felszerelhető pohár



8. ábra. hálósák



9. ábra. esővédő

3. Felhasználási cél

A kerekesszéket a központi idegrendszer károsodása következtében fogyatékkal élő és / vagy diszfunkcionális gyermekek számára tervezték. CP agyi bénulás, myelomeningocele, izomzavarok, az alsó végtagok diszfunkcióban szenvedő gyermekeknél alkalmazható. A maximális súly 40 kg (Junior Plus 2) és 75 kg (Junior Plus 3).

4. Ellenjavallatok

Ülésképtelenség esetén nem alkalmazható.


5. Használat

Miután kicsomagolja, ellenőrizze, hogy a fenti alkatrész lista minden darabja megtalálható-e.

Ellenőrizze, hogy az összes alkotóelem sérülésmentes. Ha bármilyen hibát talál, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Ne használja a kerekesszéket mindaddig, amíg azt teljesen össze nem szerelte.

- a) A kerekesszék kinyitása

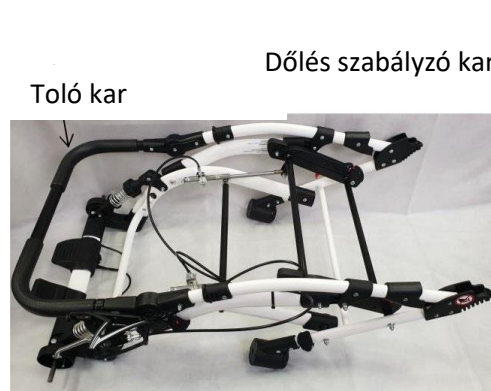

10. ábra összecukott kerekesszék



11. ábra. Kinyitott kerekesszék

A babakocsi kibontásakor nyissa ki teljesen a kerekesszéket úgy, hogy azt egy síkfelületre, lehetőleg a padlóra helyezze. A hajtás fogantyújának felfelé kell néznie (10. ábra).

A kerekesszék testét emelje felfelé a toló kar segítségével (11. ábra) mindaddig, amíg egy halk kattanást nem hall.

A kerekesszék összecsucása közben, húzza felfelé a két hajtó kart. Ekkor a zár kienged, és az oldalkeret elválik.

Hajtsa le a toló kart, amíg a kerekesszék úgy nem néz ki, mint az a 10. ábrán látható.

Győződjön meg arról, hogy a kezelő szerv kinyílik, miközben összecsucja, vagy kinyitja a kerekesszéket. Hogy ezt megtegye, nyomja az ülést és a háttámlát.

Figyelem! Amikor a kerekesszéket összehajtja, a hátsó kereket ki kell oldani!



12. ábra

13. ábra

A kinyitott állapotú kerekesszékre szerelje fel a kerekeket.

Az első kerék tengelyt csúsztassa a hüvelybe alulról felfelé, amíg egy kattanást nem hall.

Az első kerék levételéhez, nyomja meg a gombot a keréktartó tetején és húzza lefelé (12. ábra).

A hátsó kereket csúsztassa a kerekesszék hátulján található tengelyekre. Ezzel együtt nyomja meg a kerék közepén található gombot, amíg egy kattanást nem hall.

A hátsó kerék levételéhez nyomja meg a kerék közepén található gombot, és húzza le a kereket a kerekesszék vázáról (13. ábra).

A kisebb tárgyak tárolására szolgáló kosarat fel lehet szerelni a kerekesszék elejére, az oldalsó keret alsó részén található vékony rúdra a reteszek segítségével, míg, a vízszintes rúd hátsó részét tépőzárral lehet rögzíteni (13. ábra).



14. ábra Ülés a rudakkal



15. ábra Ülés foglalat

Az ülésen mindkét oldalon található 4 tüske

Amikor beszereli az ülést, a tüskeket a megfelelő foglalatokba kell illeszteni (15. ábra).

Az ülést mindkét kézzel fogni kell, az egyik kézzel az ülés elülső élét és a másik kézzel a háttámla felső élét.

Miután behelyezte az ülést a kerekesszékbe, az automatikusan rögzül.

Ahhoz, hogy az ülést kivegye a keretből, a biztonsági eszközt ki kell engedni. A biztonsági reteszt (1) lefelé kell mozdítani és a második biztonsági reteszt (2) az első biztonsági retesz felé kell mozdítani. Ezt követően az ülés kivehető.



1

2

16. ábra Biztonsági reteszek

A napvédő felszereléséhez, nyomja a napvédő fogantyúját a tartó keretbe (17. 18. ábra).

A hálósákot csak akkor helyezze fel a babakocsira, ha más a gyermek megfelelően rögzítve van a biztonsági övekkel (19. ábra).

A hálósák felszerelését az alján kezdje, beakasztva azt a lábtartóba.

A rögzítő fülekkel fel kell szerelni az első kapaszkodót az ülés keretére. Győződjön meg arról, hogy a megfelelően rögzítve van-e (18. ábra).



17. ábra Napvédő felszerelése

18. ábra összecukott napvédő

19. ábra kinyitott napvédő
és hálósák

Az esővédőt felülről lefelé kell feltenni. Húzza rá a napvédőre és ezek után húzza le a lábtartóig (20. ábra).

Ha az esővédőre már nincs szükség, szárítsa meg, a gyermektől elzárva.



20. ábra Az esővédő megfelelő felszerelése

b) A kerekesszék összecukása

A kerekesszék összecukásához, vegye le a napvédőt és az első kapaszkodót.

Nyissa az ülés zárát, és vegye ki az ülést.

Nyissa a hátsó kereket (le kell venni az első és hátsó kerekeket is)

Húzza fel a hajtó karokat

Hajtsa össze a kerekesszéket

Figyelem!

A következő útmutatások eltévesztése a kerekesszék sérüléséhez vezethet.

6. Biztonságos használat

- A kerekesszék használata előtt, olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és tegye el egy biztonságos helyre a későbbi használat érdekében.
- Gyermeke biztonságát veszélyezteti, ha nem tartja be a jelen kézikönyvben található útmutatásokat.
- Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül. A babakocsiban is mindig tartsa a szemét a gyermekén. A gondozók felelősek a gyermek biztonságáért.
- Az ülés 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem megfelelő.

- e) Minden esetben használja a biztonsági övet, hogy elkerülje az olyan súlyos baleseteket, amelyek a gyermek kieséséből vagy a kicsúszásából adódnak.
- f) Nagyon fontos, hogy a biztonsági övet megfelelően meghúzza és beállítsa a felhasználónak megfelelően.
- g) Az ülést és a biztonsági övet csak a gondozó felügyelete mellett végezzék.
- h) Amikor a kerekesszék paramétereit állítsa, a gyermek ne legyen a kerekesszékben.
- i) Minden javítást csak megfelelően képzett szakemberrel végezzen. A garanciális időszakon belül, csak a márkaszerviz javíthatja a kerekesszéket.
- j) A kerekesszék nem alkalmas futáshoz, korcsolyázáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.
- k) A kerekesszék csak egy gyermek szállítására lett kialakítva.
- l) Tilos használni a kerekesszéket, ha látható hiba van rajta, vagy bizonyos részei elhasználódtak, elkoptak és baleset kockázatát jelentik. (pl.: tönkrement kerekek, elkoptott kárpit, törés, stb.).
- m) Minden használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően ki van-e nyitva. Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítő megfelelően be van-e kapcsolva.
- n) A balesetek elkerülése érdekében, győződjön meg arról, hogy a gyerekek megfelelően távol legyenek, amikor kinyitja vagy összecsukja a kerekesszéket.
- o) Amikor a kerekesszéket ajtón vagy más átjárón tolja keresztül, győződjön meg arról, hogy mindkét oldalon van-e elegendő hely, annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket, illetve a kerekesszék sérülését.
- p) Ne engedje, hogy a gyermek játsszon a kerekesszékekkel.
- q) Ne engedje, hogy gyermeke felálljon a lábtartóra. A kerekesszék felborulhat és a gyermek megsérülhet.
- r) Amikor mozgatja, akkor mindig fogja a toló kart.
- s) Különösen figyeljen akkor, amikor a kerekesszéket lépcső közelében, vagy lépcsőn használja.
- t) A kerekesszék nem arra lett tervezve, hogy lépcsőn, vagy mozgólépcsőn használja.
- u) Ne emelje fel a kerekesszéket, ha a gyermek benne ül.
- v) Ne mozgassa a kerekesszéket az elülső kapaszkodónál fogva. Ha meg kell emelni a kerekesszéket, a keret fix részeinél fogja meg.
- w) Annak érdekében, hogy megakadályozza a kerekesszék véletlen elgurulását, minden esetben kapcsolja be a féket, és tegyen valami akadályt a mozgási irányba, amikor a kerekesszéket leállítja, a beteget kivesz, vagy beteszi, illetve ha a helyzetét megváltoztatja.
- x) Ne hagyja, hogy a gyermek felálljon a lábtartóra. Ne hagyja a kerekesszéket lejtőn, akkor sem, ha a féket behúzta.
- y) A kerekesszék legfeljebb 40 kg-os (junior plus2) és 75 kg-os (Junior Plus 3) gyerek számára lett kialakítva.
- z) A kerekesszéket könnyedén össze kell tudni csukni. Ha probléma merülne fel a kinyitáskor, akkor olvassa el a kezelési útmutatót, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- aa) Óvatosan menjen át akadályokon. A kerekesszék extrém körülmények közti használata a kerekesszék meghibásodásához vezet.
- bb) Ne használja a kerekesszéket ülésenként gépjárművekben.
- cc) Szállítás során (pl.: csomagtartóban), ne terhelje a kerekesszéket, ez tönkretetheti a kerekesszéket.
- dd) Ne hagyja a kerekesszéket nyílt tűz mellett.
- ee) Legyen tisztában azzal, hogy az erős napsütésnek, illetve hőforrásnak kitett kerekesszék bizonyos alkatrészei nagyon felmelegedhetnek, égési sérüléseket okozhatnak. Továbbá, alacsony hőmérsékleten az egyes alkatrészek fagyási sérüléseket okozhatnak.

- ff) Legyen óvatos, amikor lejtőn mozog. A legnagyobb megengedett dőlésszög 5%.
- gg) A kerekesszéket csak olyan felületen szabad tolni, ahol mind a négy kerék leér a földre.
- hh) A kerekesszék úgy lett kialakítva, hogy beltéren és kültéren is használható, burkolt, vízszintes felületen.
- ii) Ne használja a terméket jeges, zsíros, erősen szemcsés felületen, megnövekszik a kiesés lehetősége.
- jj) Nagyon fontos, hogy a kerekesszék alkatrészeit tartsa tisztán, annak érdekében, hogy megőrizze a termék tulajdonságait.
- kk) Ne tegyen külön súlyokat (pl.: csomag) a toló karra.
- ll) Ha a kerekesszéket olyan helyen tárolja, ahol magas a páratartalom (fürdőszoba, mosókonyha stb.), nyílt helyen vagy piszkos helyen, akkor az a termék esztétikai és működési paramétereit jelentősen ronthatja.
- mm) Ne hagyja a gyermeket a kerekesszékben túl hosszú ideig, mert neurológiai problémákkal küzdők esetében, ha hosszabb ideig egy helyben ül, bőr problémákat és felfekvést okozhat.
- nn) Ha a lábtartót nem veszi le, mielőtt a kerekesszéket összehajtja, az a kerekesszék meghibásodásához vezethet.
- oo) Használat során, a termék kezelése és összeszerelése során, a szerkezeten található résekbe és a mozgó alkatrészek közti résekbe a kezelő testrészei beszorulhatnak és balesetet okozhatnak.
- pp) Ezeket a lépéseket különös figyelemmel kell végezni. A kerekesszék beállítása után a csavarokat és anyákat húzza meg a stabilitás növelése érdekében.

7. Mindennapi használat és karbantartás

Elfordulás gátló – egyenes haladás segítő


Az első kerekek el vannak látva elfordulás gátlóval (21. ábra).

Ahhoz, hogy bekapcsolja, forgassa el jobbra a zárat, mindkét első keréken.

Ezt követően állítsa a kerekeket egyenesen előre, ezt követően az elfordulás nem lehetséges.

Győződjön meg arról, hogy a zár megfelelően működik.

A kikapcsoláshoz, fordítsa el a zárat balra mindkét keréken.

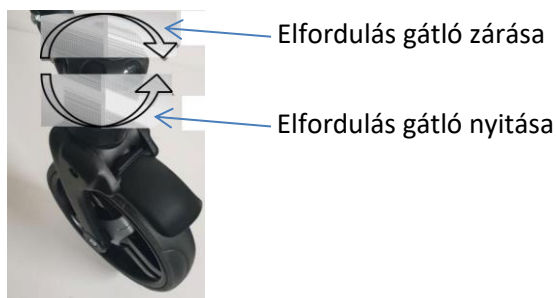


21. ábra Elfordulás gátló

A fékek kezelése

A hátsó kerekek fékekkel vannak ellátva.

A kerekesszék nem kívánt elgurulása ellen, kapcsolja be a féket a hátsó kerekeken (22 ábra).

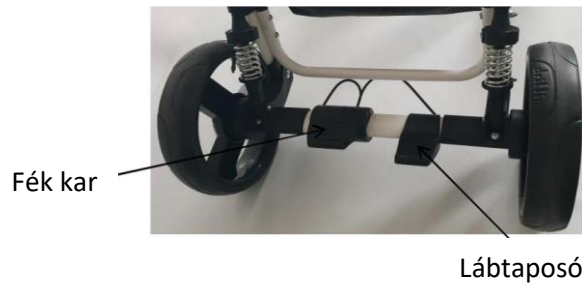

22. ábra Fék szerkezet

Az elmozdulás megakadályozása érdekében, nyomja le a fékkart.
Minden esetben győződjön meg arról, hogy a fék mind a két hátsó kereket rögzíti.
Ahhoz, hogy kikapcsolja a féket, emelje fel a fékkart.

Lábtartó hossz beállítás


A lábtartó hossza öt állásban állítható (vagy hét).

A lábtartó hosszának beállításához, vegye le a lábtartó rögzítőt, a lábtartó mindkét oldalán (23. ábra).

Állítsa be a kívánt hosszt, a kereten található furatok segítségével.

Ezt követően a lábtartó rögzítőt illessze a furatokba.

Nagyon fontos, hogy a lábtartó mindkét oldalán egyforma hosszat állítson be.

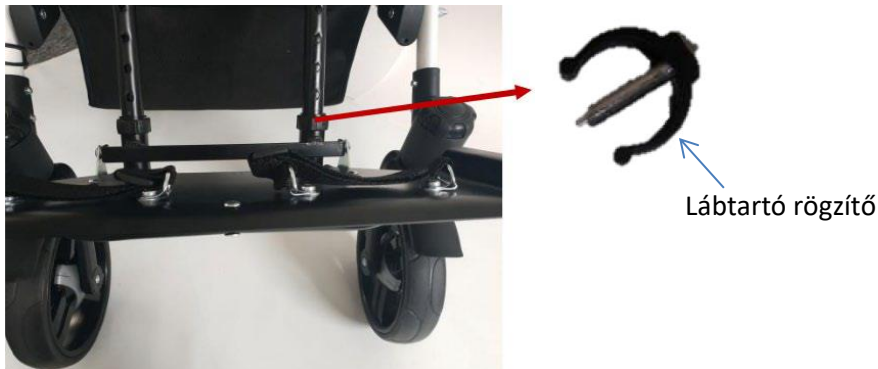


23. ábra Lábtartó beállítási rendszer

Lábtartó helyzet beállítása

Megnyomva a lábtartó mindkét oldalán megtalálható beállító gombot, megváltoztathatja a helyzetét le vagy fel (24. ábra).

Fontos, hogy a szabályzó gombot a nagyujjával nyomja, míg a kezének többi részével fogja a lábtartó keretet.

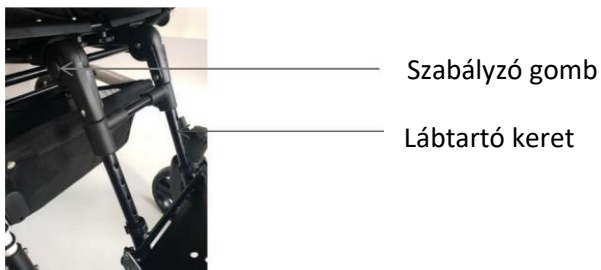

24. ábra Lábtartó állító szerkezet

Ülés mélység állítás

Hat gomb található az ülés alatt.

Ennek használatát a 25. ábra mutatja

Az ülésmélység állításhoz, lazítson meg két gombot az ülésmélység állításhoz.

Fogja meg az ülés élét kézzel, húzva nyomva állítsa be a megfelelő mélységre.

Ezt követően szorítsa meg a két gombot, hogy beállítsa az ülés mélységet, hogy megakadályozza az automatikus ülés mélység állítást.



25. ábra Ülés mélység beállítás

Oldalstabilizáló pozíció beállítása

Miután kibontotta a háttámla hátsó részét, láthatóvá válik nyolc gomb. A használatát a 26. ábra mutatja.

Az oldaltámasz pozíciójának megváltoztatásához, meg kell lazítani a jobb és bal beállító gombot. Fogja meg az oldalstabilizálót a bal oldalon, majd a jobb oldalon, állítsa a megfelelő helyzetbe az oldalstabilizálót.

Szorítsa meg az előzőleg meglazított gombokat.

Törzs stabilizáló helyzet beállítása

Miután kibontotta a háttámla hátsó részét, láthatóvá válik nyolc gomb. A használatát a 26. ábra mutatja.

A törzs stabilizáló pozíciójának megváltoztatásához, meg kell lazítani a csomagtartó stabilizáló beállító jobboldali gombpárt és a baloldali gombpárt.

Fogja meg a törzs stabilizátort a bal és a jobb oldalon, állítsa a megfelelő helyzetbe.

Szorítsa meg az előzőleg meglazított gombokat.



26. ábra Háttámla és törzs stabilizáló

Háttámla magasság beállítás

Hogy megváltoztassa a háttámla magasságot, meg kell lazítani a háttámla magasság beállító csavart (26. ábra)

Fogja meg a háttámla felső élét kézzel és állítsa a kívánt helyzetbe.

Szorítsa meg a meglazított gombokat.

Kartámasz magasság beállítása

Hogy megváltoztassa a kartámasz magasságát, csavarja ki a kartámasz alatt található mindkét csavart, ezek után állítsa be a megfelelő magasságot és hozza meg a csavarokat (27. ábra).



Kartámasz magasság beállító gomb

27. ábra Kartámasz beállítása

Háttámla dőlésszög beállítása

A háttámla dőlésszögének beállításához, nyomja a háttámla felső élét a hüvelykujjával. Fogja meg háttámla dőlésszög beállító kart. Húzza meg a kart és állítsa a négy lehetséges állásból a legmegfelelőbb állásba és engedje el a kart.

Biztonsági öv rendszer



28. ábra Öt pontos biztonsági öv rendszer

A kerekesszék el van látva stabilizáló hevederekkel, melyek hossza beállítható.

A stabilizáló hevederek beállítását egyeztesse orvosával vagy fizioterapeutával.

A biztonság érdekében, miután a gyermeket beültette a kerekesszékbe, a gondozónak azonnal be kell csatolnia a stabilizáló hevederekkel.

A biztonsági rendszer tartalmaz ötponthoz tartozó biztonsági övet egy központi csattal és övcsattal.

A csat minden elemét be kell helyeznie a központi feszítőbe. Hogy ezt megtegye, nyomja meg a gombot a csaton és helyezze be az elemeket (28., 29. ábra).

Amikor a csat elemeket behelyezi a központi csatba, egy kattantást kell hallania. Amikor a kattantást hallja, az öt pontos szíj megfelelően rögzítve van.

Hogy megfelelően megvédje a gyermeket, állítsa be a hevederek hosszát a beállító elemek segítségével.

A biztonsági öv kikapcsolásához, nyomja meg a központi csaton található gombot.




28. ábra 5 pontos biztonsági öv

A háttámla és az ülés dőlésszögének beállítása

A kerekesszék el van látva egy karral, aminek segítségével az ülés és a háttámla dőlésszöge beállítható (29. ábra).

Az ülés és a háttámla dőlésszögének beállításához, bal kézzel nyomja meg az ülés és a háttámla dőlésszög beállító kart a toló karon.

Jobb kézzel fogja meg a háttámla felső részét és mozgassa fel vagy le, amíg eléri a kívánt helyzetet.

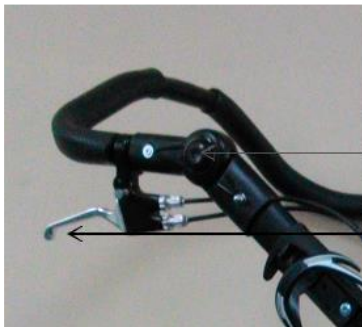

Toló kar magasság beállító gomb

Ülés és háttámla dőlésszög beállító kar.

29.A. ábra Dőlésszög beállítása

A Junior Plus 3 el van látva egy kiegészítő mechanizmussal, amely lehetővé teszi a háttámla dőlésszögének beállítását (29 B. ábra).



29.B. ábra Dőlésszög beállítása

Haladási irány beállítása

A kerekesszék rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy az ülés iránya megváltoztatható.

Ehhez, nyissa az ülés záró szerkezetét a kerekesszék mindkét oldalán.

Vegye ki az ülést a keretből. Fordítsa meg az ülést a kerethez képest 180 °-kal.

Tegye vissza az ülést a keretbe úgy, hogy a toló kar a 30. ábrán látható módon álljon.



30. ábra



31. ábra

Játékasztal felszerelése

A játékasztal felszereléséhez vegye ki az elülső kapaszkodót és helyezze fel a játékasztal tartó erre a helyre.

Helyezze az asztalt a tartóba.

Amikor le akarja venni az asztalt, nyomja meg az asztal két szélét az oldalsó furatoknál. tegye ezt meg a tartó mindkét oldalán.

Vegye le a tartót.

Az asztal távolsága beállítható a tartóban található csavarok segítségével. Csavarja ki mind a két csavart, húzza ki a csavarokat, és az asztal furatait tartalmazó részt állítsa a kívánt pozícióba, helyezze vissza a csavarokat és húzza meg azokat (32., 33. ábra).

Tegye ezt meg mind a két oldalon. A mélységnek egyformának kell lennie.



Nyílások az asztal számára.

32. ábra Nyílások az asztal számára



33. ábra megfelelően felszerelt asztal

Figyelem!

Amikor megváltoztatja az ülés és a háttámla dőlésszögét, figyeljen arra, hogy az asztalon van-e valami. A túl nagy mértékű dőlésszög változás a tárgyak leeséséhez vezethetnek. Az asztal opció nem lehetséges, ha az ülés a menetiránynak háttal van felszerelve.

Haladás lejtőn

Amikor lejtőn halad, figyeljen arra, hogy csökkentse a sebességet.

Ne menjen túl meredek lejtőn. A megengedett lejtő dőlésszöge 5%.

Áthaladás szegélyeken és küszöbökön


A küszöbön vagy akadályon való áthaladáskor, az első kerekeket a szegélyre merőlegesen kell állítani, a szegélyhez lehető legközelebb.

Helyezze a lábár a kerekesszék hátuljára, kissé nyomja meg és a toló kart nyomja lefelé.

Az első kerekek kissé meg fognak emelkedni, lehetővé téve az áthaladást az akadály fölött. Amikor az első kerék már az akadály tetején van, emelje fel a hátsó kerekeket, egy kissé előre döntve a kerekesszéket.

Kerekek felfújása

(Ez csak akkor értelmezhető, ha a kerekesszék felfújható kerekkel van felszerelve.)

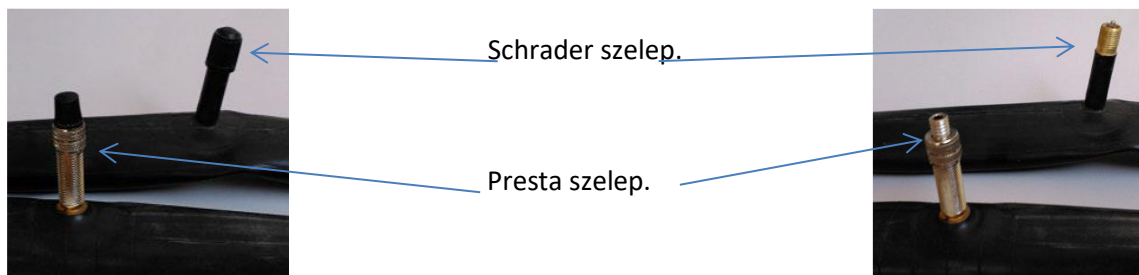

34. ábra Szelep szelepszapkával

36. ábra Szelep szelepszapka nélkül.

Mielőtt felfújná a kerekeket, határozza meg, hogy milyen szelep van a keréken. Ez a 34. és 35. képen látható szelepek valamelyike.

A Presta szelepen van egy kiegészítő kis rész a tetején, amit meg kell lazítani a felfújás előtt.

A szel azonosítása után, készítsen elő egy olyan pumpát, ami a szelepnek megfelel.

A legtöbb új pumpa már el van látva adapterrel mind a két szelephez. A Presta szelep furata kisebb, a Schrader nagyobb. Ha a pumpa nem alkalmas a Presta szelephez, akkor vennie kell saját magának egy adaptert, amely bármely bicikli boltban kapható.

Ha a szelep Presta, akkor meg kell lazítani a tetejét. Ez a kis csúcs kézzel meglazítható. Amikor ezt csinálja, akkor a csúcs felfelé mozdul. Ekkor a szelep nyitva van.

Ezt követően vegye le a műanyag szelepszapkát és tegye egy biztonságos helyre. Nagyon fontos, hogy ne veszítse el, mert különben a szelepbe szennyeződés kerülhet, amely megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a felfújást, illetve gyorsan leereszthet.

Tegye a szelepre a pumpa csővének végét és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedjen. Ha szükséges, nyomja a pumpát a szelepre és ellenőrizze, hogy a levegő nem szökik-e valahol.

A pumpálás elején, a gumi nyomását ellenőrizze pár helyen az ujjával. Ha csak egy milliméternyit tudja benyomni, akkor már elég nyomás van a kerékben. Ha szükséges, folytassa a pumpálást.

A pumpálás végén, vegye le a pumpát a szelepről. A Presta szelep esetében csavarja vissza a kis csúcsot. Ezt követően csavarja vissza a szelepszapkát.

Karbantartás

A műanyag részeket és a keretet némi tisztítószerrel átítatott puha ruhával lehet letörölni.

Alaposan távolítsa el a szennyeződéseket a mozgó alkatrészekről. Alaposan távolítsa el a szennyeződéseket a kárpitról egy nedves ruhával.

Tartsa tisztán a kerekesszéket, hogy megőrizze a kerekesszék tulajdonságait.

Ha a kerekesszéket olyan helyen tárolja, ahol magas a páratartalom (fürdőszoba, mosókonyha stb.), nyílt helyen vagy piszkos helyen, akkor az a termék esztétikai és működési paramétereit jelentősen ronthatja. Ne tegye ki a kerekesszéket extrém időjárási körülményeknek, mert egyes részek színe megváltozhat.

A kerekesszékek van egy burkolata, amely 30 C°-on mosható.

Ne használjon

oldószereket

WC tisztítót

éles kefét és kemény tárgyakat

klór tartalmú tisztítószerket









maró tisztítószerket

a kerekesszék tisztítása gőzzel vagy maga nyomáson.


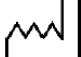



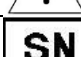









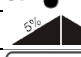


Gyakoriság	Ellenőrzendő rész	Megjegyzés
Első üzembe helyezés előtt	Műszaki állapot és minden, a csomagban található elem ellenőrzése.	Ellenőrizze, hogy az egyes elemeken van-e sérülés.
Minden használat előtt	Ellenőrizze a kerekeket, féket irányrögzítőt.	Ellenőrizze minden használat előtt, hogy a fék, és az irányrögzítő állapota megfelelő-e. Ellenőrizni kell a kerekek állapotát és tisztítsa meg, ha szükséges.
Kéthetente	Ellenőrizze, hogy a csavarok és anyák megfelelően rögzítettek.	Húzza meg azokat, ha lazák.
Kéthavonta	Tisztaság és általános állapot	Ha mechanikai sérüléseket talál, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Havonta egyszer	Kerék tengelyek	A kerék tengelyeket konzerválni kell kenőanyaggal. Ha száraz, pótolja a kenőanyagot.

8. Műszaki paraméterek

Paraméter	Junior Plus 2	Junior Plus 3
Megengedett felhasználói tömeg	40 kg	75 kg
A kosár maximális terhelhetősége	1 kg	1 kg
Maximális szélesség	60 cm	61 cm
Maximális hossz	100 cm	105 cm
Maximális magassága	116 cm	120 cm
Összehajtvá kerekkel	100 x 60 x 116	105 x 61 x 120
Ülés szélesség	26-37 cm	32-43 cm
Ülés mélység	29-35 cm	34-40 cm
Háttámla magasság	50-55 cm	60-70 cm
Első kerék átmérő	22 cm	22 cm
Hátsó kerék átmérő	27 cm	27 cm
Tömege	19,5 kg	21 kg
Maximális beteg magasság	130 cm	165 cm
Lábtartó	5 lépésben állítható lábtartó magasság (25 mm-ként), lábtartóval és vádli tartóval 24 cm-től 34 cm-ig	7 lépésben állítható lábtartó magasság (25 mm-ként), lábtartóval és vádli tartóval 26 cm-től 40 cm-ig
Kartámasz magasság	18-23 cm	22-27 cm
Kerék típusa	PP/PU	PP/PU
Anyaga	Alumínium, acél, műanyag, gumi	Alumínium, acél, műanyag, gumi

Maximális lejtő		
Használható		
Használati és tárolási hőmérséklet		
Használati és tárolási páratartalom	30%-70%	30%-70%
Kárpit mosási feltételek		
Gyári szám	A terméken megtalálható	A terméken megtalálható

9. Szimbólumok

	A termék megfelel az EU szabványoknak
	Gyártási dátum
	Gyártó
	Olvassa el a kezelési útmutatót
	Figyelem
	Katalógusszám
	Gyári szám
	Óvja a nedvességtől
	Óvja a napfénytől
	Felhasználó tömege
	Beltéri használatra
	Kéz becsípődésnek a veszélye
	Tárolási és használati hőmérséklet tartomány
	Maximális lejtő szöge
	A termék járműben történő szállításra készült
	A termék nem úgy lett kialakítva, hogy járművekben ülésként funkcionáljon.
	Repülőgépen szállítható
	30 C °-on mosható, ne centrifugázza, ne vasalja, ne szárítsa, ne tisztítsa vegyileg, ne használjon szárítógépet.

Gyártó:



MDH Co., Ltd. St. 22/24 Ks. W. Tymienieckiego, 90-349 Łódź, Poland
tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21 www.mdh.pl, www.viteacare.com

Forgalmazza:

Rehab Zrt, 2000 Szentendre, Kalászi út 3. www.rrehabrt.hu

10. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító- karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt az alábbiakkal egészítjük ki.

A termék jótállási ideje 2021.01.01-től a termék eladási árához kapcsolódik

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 - b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 - c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
- E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetészerű használatól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a javítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész

ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Viták esetében

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

SZERVIZKÖNYV

..... gyártási számú kerekesszékhez/mopedhez

Az eszközt gyártó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése:

Elektromos meghajtású 3 kerekű moped

Az eszköz típusa: EL-GO

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

.....

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni.

Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.

Tel.: 06/1 230-0593

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetésszerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jótállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók.

Név:	JÓTÁLLÁSI JEGY Junior Plusz 2&3 Gyermek kerekesszék	TAJ szám:
Eladószerző tölti ki!		
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)		
Jótéteményi szelvények a kötelező jótéteményi időre (szervíz tölti ki)		Levegandó jótéteményi, javítási szelvények (eladó tölti ki)
Bejelentés időpontja:	5	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5
Bejelentett hiba:		Típus: Junior Plusz 2&3
Etharmon hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapozatám:		20..... hó nap aláírás (P.H.)
Kelt:		Eladó aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja:	4	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4
Bejelentett hiba:		Típus: Junior Plusz 2&3
Etharmon hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapozatám:		20..... hó nap aláírás (P.H.)
Kelt:		Eladó aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja:	3	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Bejelentett hiba:		Típus: Junior Plusz 2&3
Etharmon hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapozatám:		20..... hó nap aláírás (P.H.)
Kelt:		Eladó aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja:	2	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Bejelentett hiba:		Típus: Junior Plusz 2&3
Etharmon hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapozatám:		20..... hó nap aláírás (P.H.)
Kelt:		Eladó aláírás (P.H.)
Bejelentés időpontja:	1	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
Bejelentett hiba:		Típus: Junior Plusz 2&3
Etharmon hiba leírása:		Gyártási szám:
A jótállás új határideje:		Kelt: 20..... hó nap
Munkalapozatám:		20..... hó nap aláírás (P.H.)
Kelt:		Eladó aláírás (P.H.)

VISSZAKÜLDENDŐ!

Cím:
Rehab Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Melléklet a Használati Útmutatóhoz

Biztonságtechnikai nyilatkozat az

**Junior Plusz 2&3
gyermek kerekesszék**

Alulírott.....tulajdonos

(gondnok) kijelentem, hogy aszámú mopedhez a mellékelt Használati Útmutatót, az érvényesített Jótállási jegyet és a Szervizkönyvet átvettem.

A Használati Útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat maradéktalanul betartom.

Dátum

.....
Átadó

.....
Üzemeltető (tulajdonos/gondnok)

VISSZAKÜLDENDŐ!

Rehab Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

REGISZTRÁCIÓS LAP

Név:

Lakcím:.....

Telefonszám:.....

TAJ-szám:.....

Közgyógy. ig. szám:.....

Típus: Junior Plusz 2&3

Gyártási szám:.....

Kiszolgálás dátuma:.....

Kiszogálta:

Ügyfél (üzemeltető) aláírása:

Jelen regisztrációs lap aláírásával és visszaküldésével hozzájárulásomat adom a REHAB Zrt.-nek, hogy személyes adataimat kapcsolattartás céljából kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.