

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GM 4321 KIFORDÍTHATÓ FÜRDŐKÁD ÜLŐKE

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi kérdések esetére. A jelen leírás az eszköz használati utasításait tartalmazza.



1. ÁTVÉTEL

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - lehetőleg az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg! Ellenőrizze, nincs-e látható sérülése a terméknek. Ha bármilyen sérülést lát, vagy hibát gyanít, ne használja a terméket, hanem lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A betegápolás egyik legfontosabb mozzanata, hogy a betegek megfelelő körülmények között tudják elvégezni alapvető fiziológiai szükségleteiket. Egy nehezen mozgó ember mindennapi teendőinek elvégzése megterhelő lehet megfelelő segédeszközök hiányában. Számukra segítséget nyújthat a már beépített fürdőszobák egyszerű átalakítása segédeszközökkel. A fürdőkád ülőké segítségével nyújthatnak a mozgásukban bármilyen okból időlegesen vagy tartósan akadályoztatott (betegség, műtét, sérülés, időskor miatt) személyek számára a fürdőkádban való tisztálkodás során. A nem teljesen elesett betegek házi betegfürdetésének megkönnyítésére szolgálhat, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segíthet minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes, de a fürdőkádba belépni ill. beülni nem tud. Megkönnyítheti a kádba való -és kiszállást valamint lehetővé teszi a kádban való mosakodást a kád aljára történő leülés nélkül. Előnye, hogy a beteget nem kell a kádba beemelni, mivel a forgatás során a beteg beül az ülőkébe, lábait vízszintbe emeli, a befordítás majd lerögzítés után a tisztálkodás könnyen elvégezhető.

3. INDIKÁCIÓ

Alsóvégtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén, paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén.


4. FELÍRÁSRA JOGOSULT ORVOSOK MEGHATÁROZÁSA

Ortopédia-traumatológia, ortopédia, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat), traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

5. MŰSZAKI ADATOK


Váz:	<ul style="list-style-type: none"> • fehér porszórt felület • hegesztett acél keret, kartartóval • rozsdamentes felület • a lábak végei és az oldaltámaszok csúszásmentes gumi anyaggal bevonatoltak. • váz a beépített csapágy segítségével 360 fokban körbe forgatható és negyedfordulatonként rögzíthető
Ülés:	<ul style="list-style-type: none"> • fehér műanyag polietilén ülés • a vízvezető furatok megakadályozzák a víz felhalmozódását az ülésen • az ülés méretei: magasság 36 cm * hossz 35 cm * szélesség 39 cm
Teljes méret:	<ul style="list-style-type: none"> • szélesség 73 cm * hossza 50 cm * magasság 46 cm
Súly:	<ul style="list-style-type: none"> • nettó súly: 4,5 kg / bruttó súly 5,3 kg
Csomagolás mérete:	<ul style="list-style-type: none"> • 77 cm * 56 cm * 33 cm • 1 darab/karton


6. ÖSSZESZERELÉS

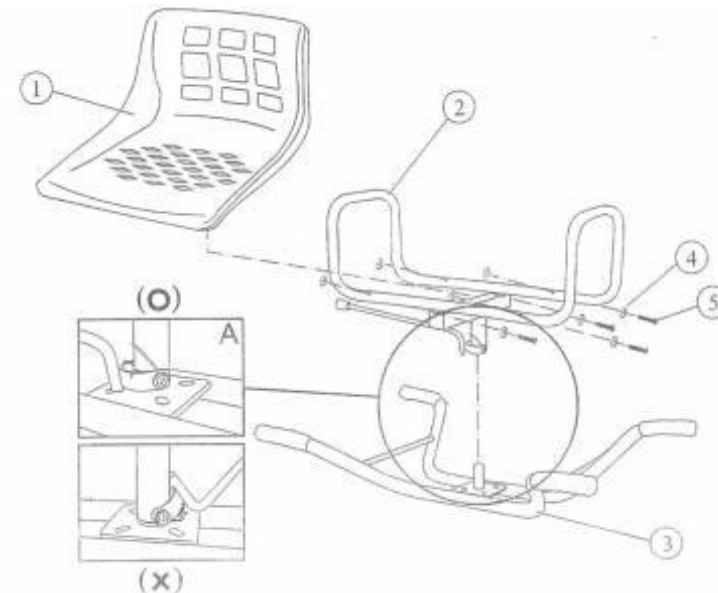


1. Ellenőrizze az alkatrészek megfelelőségét!
2. Helyezze az ülést (1) az alapra (3) és csatlakoztassa úgy, hogy lehetővé tegye a forgást.
3. Az ülést az alapra helyezve figyelembe kell venni (A rajz), hogy a reteszelő kar helyzete helyes legyen. A szék negyed fordulatonként forgatható és rögzíthető az oldalkar használatával.
4. A fürdőkád felső peremére felhelyezhető és a kád belső falához könnyedén biztonságosan rögzíthető az oldaltámaszok tekerésével, ameddig a szék stabilan feszül a kád oldalfalaira.


7. A TERMÉK HASZNÁLATA

 Győződjön meg arról használat előtt, hogy az ülőke mérete megegyezik a kád méretével. Standard 65-70 cm széles kádhoz ajánljuk!

 Győződjön meg arról, hogy a lábak négy vége stabilan helyezkednek el a kád oldalán.

 Az első használat előtt ellenőrizze az ülés stabilitását! Ezután lassan üljön a székbe, kerülje a hirtelen gyors mozdulatokat!

Az oldalán található kar felhúzásával oldal irányba ki- illetve visszafordítható. Megkönnyíti a beteg kád fölé helyezését. Az ülés elfordításához húzza felfelé a kart és fordítsa el az ülést a kívánt irányba. Az ülés rögzítéséhez engedje fel a kart amint megfelelő ülő helyzetben van.

 A termék maximális terhelhetősége 100 kg. A használati útmutatótól eltérő használatból, túlterhelésből, átalakításból és helytelen kezeléskből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget, így a jótállás nem érvényesíthető!

8. A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A forgatható kád ülését rendszeresen tisztítandó a háztartásokban használt nem agresszív, fertőtlenítő, semleges hatású tisztítószerekkel. A mosás után tiszta vízzel öblítse le, majd száraz ruhával törölje át!

9. A TERMÉK KARBANTARTÁSA

A termék karbantartást nem igényel, időszakosan érdemes ellenőrizni, hogy a csavarok meg vannak-e húzva.

10. GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ

Tájékoztatjuk, hogy az eszközzel kapcsolatban előforduló váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A magyarországi illetékes hatóság: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.



GYÁTRÓ ÉS FORGALMAZÓ

Patella-96 Kft.
HU-2045 Törökbálint
Kisfaludy u 49-1.
Tel.: +36 1 248 5300
info@patella.hu
www.patella.hu



DISTRIBUTOR

SC Vital Logistic Srl.
RO-540210 Tirgu Mures
str Gheorghe Doja nr 177
Corp C1-C2 Parter
comenzi@vital-logistic.ro
Tel.: +40 265 265 268
www.vital-logistic.ro

11. VONALKÓD



12. GARANCIA

Ezt a tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges. Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított

eszközt veszünk át. A műanyag alkatrészek (ülőlap és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, rongálódására a garancia nem terjed ki.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetéssel ellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A gyártó vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról értelmében az egyéves kihordási idejű és bruttó 10.000 Ft feletti értékű eszközre, valamint annak tartozékaira és alkotórészeire és más, a rendelet hatály alá tartozó eszközre 12 hónap jótállást vállal. 2. § (1) értelmében 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, és 250.000 Ft eladási ár felett három év a vállalt jótállási idő. Jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok...) rendszeres elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A nem rendeltetés szerű használatból eredő hibákra a jótállás nem vonatkozik, amelynek feltételeit a használati útmutató tartalmazza. Jótállási igényét a kiszolgálás helyén érvényesítheti. A jótállási idő kezdete a kiszolgálás napja. Ha az eszközt javítják, annak jótállása meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűen nem használhatta.

Reklamáció esetén az alábbi telefonszám hívható: +36-27-504-131, 06-30-442-8088

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: Patella-96 Kft. 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.

Termék megnevezése: **GM 4321 KIFORDÍTHATÓ FÜRDŐKÁD ÜLŐKE**

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):

Vásárlás időpontja:

A termék fogyasztó részére való *átadásának* vagy (amennyiben azt a forgalmazó, illetve annak megbízottja végzi) az *üzembe helyezés** időpontja:

(*a megfelelő aláhúzendő)

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A javítás-kijavítás időtartamával meghosszabbított -új határideje:

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés történt, amelynek időpontja: