

Kezelési útmutató

BASIC

Összecsukható standard kerekesszék
VCWK43B
VCWK43BP



**KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES
HASZNÁLATI UTASÍTÁST.**

Tartalomjegyzék


Tartalom

| | |
|--|----|
| 1. Bevezetés..... | 3 |
| 2. A termék leírása..... | 3 |
| 3. Felhasználás..... | 4 |
| 4. Ellenjavallat..... | 4 |
| 5. Használat..... | 4 |
| 6. Biztonságos használat..... | 6 |
| 7. Mindennapi használat és karbantartás..... | 8 |
| 8. Műszaki paraméterek..... | 14 |
| 9. Szimbólum..... | 15 |
| 10. Elérhetőségi adatok..... | 15 |
| Jótállás..... | 16 |
| Szavatosság..... | 17 |
| REGISZTRÁCIÓS LAP..... | 24 |

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Meggyőződésünk, hogy meg fog felelni az Ön elvárásainak. Kérjük, az első használat előtt olvassa el ezt a dokumentumot. A kézikönyv célja, hogy megadja a szükséges információkat az eszköz biztonságos használatához. Az ajánlások betartása jelentősen hozzájárul a termék tartósságának és szép esztétikai megjelenésének meghosszabbításához. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy termékeink minőségét jelenleg is igyekszünk javítani, így történhetnek olyan kisebb változtatások, amelyeket a kézikönyv nem tartalmaz.

2. A termék leírása

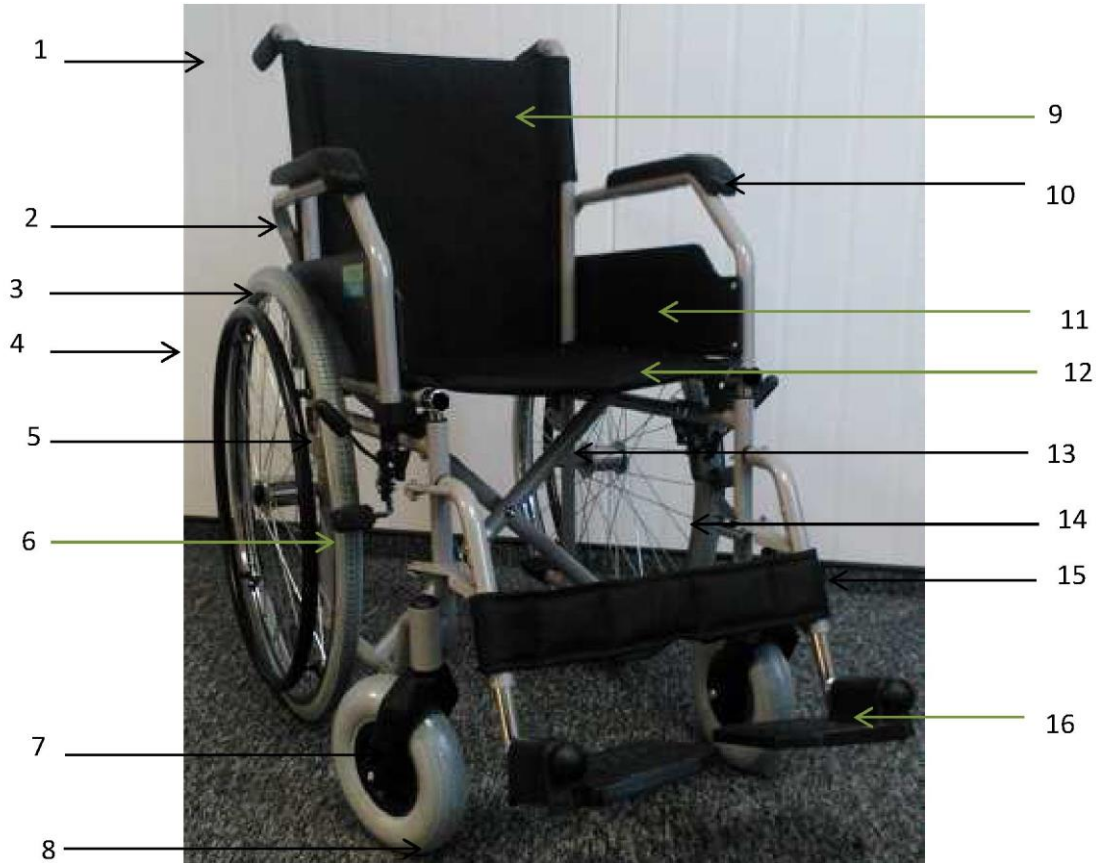

1. ábra.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fogantyú | 9. Háttámla |
| 2. Háttámla váza | 10. Kartámasz |
| 3. Hátsó kerék | 11. Kartámasz oldallemeze |
| 4. Fém hajtókarika | 12. Ülész |
| 5. Fékkar | 13. Ülészváz |
| 6. Fék | 14. Keresztváz |
| 7. Első kerék villája | 15. Lábtartó váza |
| 8. Első kerék | 16. Lábtartó lemez |

A csomagban található elemek:



2. ábra. Vádli támasztó heveder



Lábtartó váza

3. ábra. Lábtartó pár



4. ábra. Kerekesszék

3. Felhasználás

A kerekesszék fogyatékkal élők közlekedésének elősegítésére szolgál, pl. gerincvelő-károsodás, agyszélhűdés, az alsó végtag különféle sérülései, neuromuszkuláris betegségek, poszttraumás esetek, koponya- és agysérülések után, illetve idős betegek számára.

Olyan emberek számára is készült, akik aktívan és kényelmesen szeretnék megélni a mindennapi életet.



4. Ellenjavallat

Ülő helyzetre vonatkozó ellenjavallat. A felső gerincszakasz és a fej stabilizálását igénylő állapot. A mentális betegségben szenvedő betegeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni a kerekesszékben.

5. Használat

- A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy az minden fent felsorolt elemet tartalmaz-e.
- Győződjön meg arról, hogy egyetlen összetevőn sem lát sérülést. Kétség esetén forduljon a gyártóhoz.

- A kerekesszéket csak az összes alkatrész megfelelő csatlakoztatása után használja.

A KERESSZÉK KINYITÁSA

- A kerekesszéket úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó kerekei Ön előtt legyenek
- Hajtsa ki a fogantyúkat kifelé (5. ábra).
- Ezután helyezze el a kerekesszéket úgy, hogy az első kerekei legyenek Ön előtt.
- Nyomja le az ülésvázat kétoldalt, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik. (6. ábra.)



5. ábra.




6. ábra.

- A lábtartók felhelyezéséhez akassza a lábtartó rögzítő konzolját a kerekesszék vázán lévő akasztóra (7., 8. ábra) Ezután forgassa be a kerekesszék elejébe, amíg a helyére nem kattann („kattanás”).
- Győződjön meg a lábtartók megfelelő rögzüléséről. (9. ábra.)
- Hajtsa ki a lábtartó lemezt.



7. ábra.

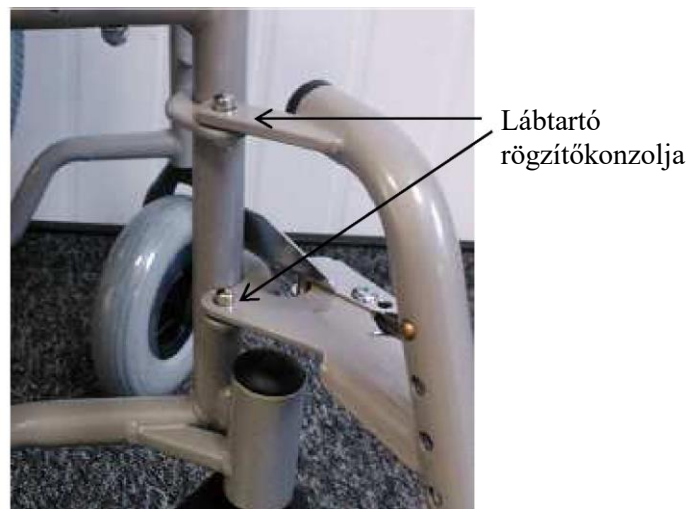

8. ábra.



9. ábra.

Lábtartó
fogantyú



10. ábra.

6. Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS!

- a) A kerekesszék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze azt meg későbbi használatra.
- b) A kerekesszékbe való beszállás és az abból való kiszállás közben a fékeknek mindig rögzítve kell lenniük!
- c) A kerekesszékbe való beszállás és az abból való kiszállás előtt ne álljon rá a lábtartóra, azt először fel kell hajtani vagy teljesen felfelé kell húzni.
- d) Tilos a kerekesszéket a felhasználóval együtt felemelni!
- e) Ajtókon és más átjárókon való áthaladáskor ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon elegendő hely maradjon, elkerülendő a kézsérüléseket és a kerekesszék károsodását.
- f) Közutakon pontosan tartsa be a közlekedési szabályokat.
- g) Más járművekhez hasonlóan a kerekesszéket se vezesse alkohol vagy kábítószer hatása alatt. Ez a beltéri használatra is vonatkozik.
- h) A kerekesszék nem alkalmas betegek lépcsőn történő szállítására vagy azon való húzására. A kerekesszék és az azon lévő összekötőelemek szerkezete nem úgy van kialakítva, hogy kibírja az ezzel járó többletterhelést. Az ilyen használat a kerekesszék teljes szerkezetének meggyengülését, károsodását okozhatja és balesetekhez vezethet!
- i) A kerekesszék bel- és kültéri használatra készült, kizárólag kemény és sima felületeken.
- j) Tilos a kerekesszéket instabil (jéggel borított, nedves, olajos, homokos) felületen használni – ez felveti az elesés veszélyét.
- k) A kerekesszéket csak olyan felületeken használja, ahol mind a négy kerék leér a talajra.
- l) Az építészeti akadályok leküzdéséhez (meredek vagy hosszú emelkedők, küszöbök, járdaszegélyek stb.) ápoló segítségére van szükség.
- m) Ha a felhasználó nem rendelkezik kellő tapasztalattal a kerekesszékek használatában, ápolói segítséget kell kérnie az akadályok leküzdéséhez.
- n) Ne hagyja a kerekesszéket a felhasználójával együtt nyílt tűzforrás közelében.
- o) Fontos megjegyezni, hogy a huzat és a vázrészek felületi hőmérséklete megemelkedhet, ha az eszköz napsugárzásnak vagy más hőforrásnak van kitéve. Ezenkívül alacsony hőmérséklet esetén fennáll a kerekesszéken lévő fém alkatrészek túlzott lehűlésének veszélye. Ez égési vagy fagyási sérüléseket okozhat az egyes testrészekben.
- p) A kerekesszéket a vázánál fogva kell szállítani. Soha ne szállítsa a kerekesszéket a kartámasznál vagy a lábtartónál fogva.
- q) Ne használja a kerekesszéket személygépkocsiban, buszban vagy bármilyen más gépjárműben ülésként.



- r) A kerekesszék maximális teherbírása 120 kg.
- s) A kerekesszéknek könnyen kinyithatónak és összehajthatónak kell lennie. Ha az összehajtás során probléma merül fel, olvassa el újra az utasítást, vagy forduljon a gyártóhoz.
- t) Lejtős felületeken való haladáskor legyen óvatos. A legnagyobb megengedett lejtésszög fel- és lefelé egyaránt 5%.
- u) A fékek nem alkalmasak a kerekesszék haladás közbeni lassítására, csak a nem kívánt elgurulás megelőzésére szolgálnak.
- v) Mindkét féket megfelelően be kell állítani. Ha valamelyik fék helytelenül van beállítva, akkor csak az egyik hátsó kerék blokkolódik. Erős lejtőn nehézséget okozhat a kerekesszék álló kerékkel való forgatása.
- w) Rendszeresen ellenőrizze az abroncsnyomást. Az ajánlottnál alacsonyabb abroncsnyomás esetén a fékteljesítmény jelentősen lecsökken!
- x) Ha tárgyak után nyúl, kerülje a kerekesszékéből való túlzott kihajolást, mert kieshet belőle (oldalra, előre, hátra).
- y) A kerekesszék véletlen elgurulásának elkerülése érdekében megálláskor, beszálláskor, kiszálláskor, helyzetváltoztatáskor mindig húzza be a féket.
- z) Ne hagyja a beteget a kerekesszékben (még akkor sem, ha mindkét fék rögzítve van) lejtőkön, rámpákon, lépcsőfordulókban stb.
- aa) Kerékszerelés után mindig ellenőrizni kell, hogy a keréktengely-rögzítés megfelelően működik-e. Felszereléskor hallani kell a retesz „kattanását”. A megfelelő rögzítés ellenőrzésére húzza meg erősen a kereket.
- bb) A rögzítőfék haladás közbeni használata balesethez vezethet, annak minden következményével együtt.
- cc) A kerekesszéken végzett minden beállítás után ellenőrizni kell a fék megfelelő működését.
- dd) Az olaj, a zsír, a víz vagy más vegyszerek csökkenthetik a fékek hatásfokát.
- ee) A fékerő a kerekesszék hosszan tartó használata után csökkenhet. A fékeket önállóan is átállíthatja. Ehhez meg kell lazítani a féket rögzítő csavarokat, a fékmechanizmust a kerék felé kell mozdítani, hogy a fék újbóli használatakor a kerék ne forogjon (próbálja meg a beállítást úgy elvégezni, hogy a felhasználó a kerekesszékben ül). A végleges beállítás után ismét rögzítse a mechanizmust a csavarokkal.
- ff) A termékjellemzők fenntartása érdekében rendkívül fontos a kerekesszék valamennyi alkatrészének tisztán tartása.
- gg) A kerekesszék nagyon magas páratartalmú helyen (fürdőszoba, mosókonyha stb.) vagy szabad levegőn történő tárolása, valamint a higiénia hiánya is az üzemi paraméterek és a termék megjelenésének gyors romlását okozza.
- hh) Tilos a kerekesszéket látható vagy kimutatható sérülések észlelése után használni, vagy olyankor, amikor egyes alkatrészek kopása balesetet okozhat. Minden javítást szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, és a garanciális időszak alatt csak a gyártó szervize végezhet javítást.
- ii) Felfújott kerekekkel ellátott kerekesszék esetén nem szabad túllépni a kerekek megengedett legnagyobb nyomását, az érték a kerekeken fel van tüntetve.
- jj) Szállítás közben (pl. a csomagtartóban) ne helyezzen terheket a kerekesszékre, mert azok gyengíthetik annak szerkezetét.
- kk) Öt év alatti gyermekektől elzárva tartandó.
- ll) A kerekesszék kinyitásakor/összehajtásakor legyen fokozottan óvatos, mert ellenkező esetben becsípődhetnek az ujjai a következő területeken:
 - lábtartó felhelyezési és eltávolítási pontjai,
 - fékek,
 - összehajtáskor a kerekesszék mozgó alkatrészei körül.

7. Mindennapi használat és karbantartás

ÜLÉS A KEREKESZÉKBEN:

- Állítsa a kerekesszéket egy olyan helyre, ahová könnyű áthelyezni a beteget (ágy vagy szék mellé, kis emelési távolságra).
- Blokkolja a kerekesszék mindkét fékét, hajtsa fel vagy távolítsa el a lábtartókat.
- Emelje fel a kartámasz elejét a rajta lévő kar megnyomásával. (11. ábra.)
- Helyezze a beteget a kerekesszékbe.
- Rögzítse a kartámaszt.
- Hajtsa ki a fékkart.
- Szerelje fel és nyissa ki a lábtartókat, majd helyezze rájuk a beteg lábait.
- Állítsa be a kerekesszéket úgy, hogy a benne ülő beteg függőleges ülő helyzetben legyen (a térdeknek ~ 90°-os szögben kell állniuk).



11. ábra.



12. ábra.

A KEREKESZÉK ÁPOLÓ ÁLTALI TOLÁSA

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a beteg egyetlen testrésze vagy ruhája sem tud beleakadni a kerekesszék mozgó alkatrészeibe.
- Ha a beteg nem tud önállóan ülni, a kerekesszéket stabilizáló övekkel kell felszerelni (az alapfelszereltség részét képező övek, amelyek megakadályozzák a beteg ülésről való lecsúszását).
- A kerekesszéket két kézzel kell tolni.

HALADÁS LEJTŐN

- Lejtőn való haladáskor legyen óvatos, és csökkentse a sebességét.
- Ne haladjon túl meredek lejtőkön. A legnagyobb megengedett lejtésszög fel- és lefelé egyaránt 5%.
- Mérlegelje az ápoló segítségének igénybevételét. Ha a kerekesszékben ülő személy nem elég erős a kerekesszék irányításához, a fékeket rögzíteni kell.
- A lejtős területen való haladás közbeni felborulás elkerülése érdekében enyhén előre kell dőlnie, hogy a súlypontja előre kerüljön.



LEHAJTÁS KÜSZÖBÖKRŐL ÉS JÁRDASZEGÉLYEKRŐL

➤ Előre, ápoló segítségével nélkül

- A tapasztalt kerekesszék-felhasználók önállóan is le tudnak hajtani küszöbökről és járdaszegélyekről.
- Alacsony járdaszegélyeken előre felé is áthaladhat. Győződjön meg arról, hogy a lábtartók nem érnek hozzá a talajhoz.
- Az első kerekekre nehezedő nyomás csökkentése érdekében helyezze a súlypontját a hátsó kerekekre.
- Ezután haladjon át a járdaszegélyen.




➤ Előre, ápoló segítségével

- A magasabb járdaszegélyek ápoló segítségével küzdhetők le.
- Az ápolónak kissé hátrafelé kell döntenie a kerekesszéket.
- Haladjon át a járdaszegélyen a hátsó kerekeken gurulva.
- Ezután helyezze le a kerekesszéket a négy kerekére.



➤ Hátrafelé, ápoló segítsége nélkül

- A tapasztalt kerekesszék-felhasználók önállóan is át tudnak hajtani küszöbökön járdaszegélyeken.
- Fordítsa el a kerekesszéket úgy, hogy mindkét hátsó kerék a járdaszegély felé nézzen.
- Hajoljon előre, hogy a súlypontja előbbre kerüljön.
- Álljon közelebb a kerekesszékekkel a járdaszegély széléhez.
- Ezután a hajtókarika ellenőrzött használatával a felhasználó lecsúsztatja a kerekesszéket a járdaszegélyről.

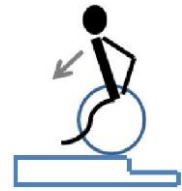

és

FELHAJTÁS KÜSZÖBÖKRE ÉS JÁRDASZEGÉLYEKRE

➤ Előre, ápoló segítségével

- A tapasztalt kerekesszék-felhasználók önállóan is le tudnak hajtani küszöbökről járdaszegélyekről.
- Az ápolónak kissé hátrafelé kell dőntenie a kerekesszéket.
- Az első kerekre nehezedő nyomás csökkentése érdekében a kerekesszék-felhasználónak a hátsó kerekre kell helyeznie a súlypontját.
- Hajtson fel a járdaszegélyre az első kerekkel, majd húzza fel a hátsó kerekeket a járdaszegélyre.



és

➤ A magasabb járdaszegélyekre hátrafelé, ápoló segítségével lehet felhajtani.

- Fordítsa el a kerekesszéket úgy, hogy mindkét hátsó kerék a járdaszegély felé nézzen.
- Az első kerekre nehezedő nyomás csökkentése érdekében a kerekesszék-felhasználónak a hátsó kerekre kell helyeznie a súlypontját.
- Az ápoló húzza át a kerekesszéket a járdaszegélyen.
- A kerekesszék-felhasználó térjen vissza a kerekesszéken elfoglalt normál helyzetéhez.



➤ Előre, ápoló segítsége nélkül

- A tapasztalt kerekesszék-felhasználók önállóan is le tudnak hajtani küszöbökről járdaszegélyekről.
- Állítsa az első kerekeket a küszöb vagy a járdaszegély szélére.
- Győződjön meg arról, hogy a lábtartók nem érnek hozzá a küszöbhez vagy a járdaszegélyhez.
- Ekkor az első kerekkel felhajthat a járdaszegélyre.
- Ezután a hátsó kerekeket is felhelyezheti a járdaszegélyre.



és



SZÁLLÍTÁS GÉPKOCSIBAN

- A kerekesszék egyszerű szállítása érdekében a lábtartó lemezt fel kell hajtani és el kell távolítani.
- Ezután húzza fel az ülés huzatját, így a kerekesszék összecsucodik.
- Ha a kerekesszék gyorskioldós hátsó kerekkel van felszerelve, távolítsa el a hátsó kerekeket. A hátsó kerekek felszereléséhez vagy eltávolításához nyomja meg a gyorskioldós hátsó kerekek gombját (13. ábra), majd húzza le vagy tolja fel a kereket.
- A kerekesszéket csak a vázszerkezet elemeinél fogva szabad mozgatni. Soha ne tartsa a kerekesszéket a kartámasznál vagy a lábtartónál fogva.



gyorskioldó

13. ábra.

BEÁLLÍTÁS: FÉKMECHANIZMUS



Fékbeállító csavarok

Fékkar



14. ábra.

15. ábra.

- A 14. ábra a fékmechanizmust mutatja.
- A fék rögzítéséhez húzza a fékkart az első kerék felé annyira, hogy a fék szorosan hozzáérjen a hátsó kerékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a kerekesszék megmozdításakor a fékkar nem kapcsol ki automatikusan.
- A fék kikapcsolásához húzza a fékkart a hátsó kerék felé.
- 15. ábra. A fékmechanizmust ábrázolja a kerekesszék belseje felől nézve.
- A fékmechanizmus átállításához lazítsa meg a csavart a 10. kulcs segítségével.
- Mozdítsa el a teljes mechanizmust a hátsó kerék irányába, majd húzza meg a csavart.
- A fék rögzítése esetén a keréknek nem szabad elfordulnia (a beállítás helyességét a kerekesszékben ülő beteg mellett ellenőrizze).
- Ha mindkét fék beállításra szorul, mindkettőt be kell állítani.

LÁBTARTÓ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A lábtartó hatféle magasságba állítható be.
- A lábtartó kívánt magasságának beállításához lazítsa meg a biztonsági csavart.
- Ezután nyomja be a két lábtartó-magasságbeállító pecket (16. ábra).
- Állítsa be a lábtartó magasságát igény szerint.
- A lábtartó megfelelő magasságának beállítása után húzza meg a biztonsági csavart.




Lábtartó magasságbeállító pecke


Biztonsági csavar

16. ábra.

AZ ABRONCSOK FELPUMPÁLÁSA (a felpumpált kerekkel ellátott kerekesszékre vonatkozik)

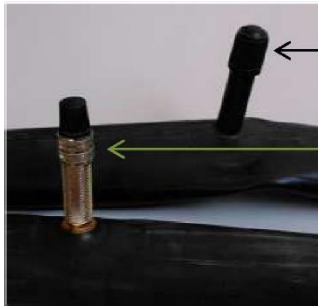

17. ábra.

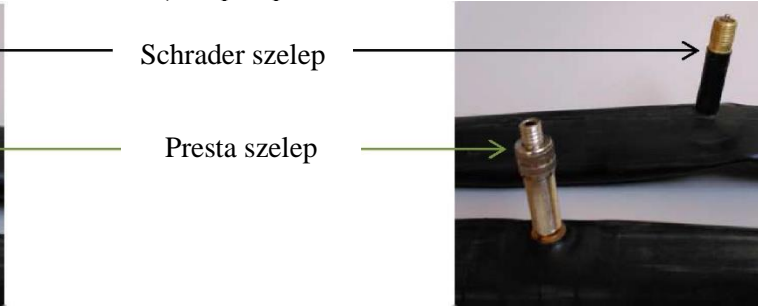

18. ábra.

- Az abroncsok felpumpálása előtt azonosítsa az abroncson található szelep típusát. Ez a 17. és 18. ábrán látható két szelep egyike lehet.
- A Presta szelep tetején lévő kis felső részt pumpálás előtt meg kell lazítani.
- A szelep azonosítása után készítse elő az adott szeleptípushoz való pumpát.
- A legtöbb új pumpával Presta és Schrader szelepek egyaránt felfújhatók. Sok pumpa megfordítható csúccsal van ellátva. A kisebbik lyuk a Presta szelephez, a nagyobbik a Schrader szelephez való. Ha az Ön pumpája nem támogatja a Presta szelepet, „Presta adaptert” kell vásárolnia magának, amely bármelyik kerékpárboltban beszerezhető.
- Ha a keréken Presta szelep található, le kell csavarni a szelepen lévő felső részt. A kisméretű felső rész az ujjainkkal kicsavarható. Csavarás közben a felső résznek felfelé kell mozognia. A szelep ekkor nyitott állapotúnak minősül.
- Ezután távolítsa el a műanyag sapkát a szelepről, és tegye félre biztonságos helyre. Fontos, hogy ne veszítse el, mert a szelepbe szennyeződés kerülhet, ami megnehezítheti a pumpálást, és gyorsabb levegővesztéshez vezethet.
- Helyezze a pumpa fúvókáját a szelepbe, és ellenőrizze, hogy megfelelően szorul-e. Szükség esetén nyomjon levegőt a szelepbe, így ellenőrizve, hogy oldalt nem szökik-e a levegő.
- Ha a pumpán egy csatos kar is található, azt szorítsa meg. Ha a pumpa fúvókáján és a szelepen menetes csúcs található, csavarja egymásba őket. Ekkor a levegő közvetlenül a belső tömlőbe áramlik, és a fúvóka nem távolítható el a szelepről.
- A pumpálás kezdetén az abroncsnyomást időnként ellenőrizni kell. Az abroncsnyomást az ujjával ellenőrizze a futófelület szélén. Az lehetőleg csak egy milliméternyire legyen benyomható. Ez azt jelenti, hogy az abroncsban már elegendő levegő van. Szükség esetén folytassa a pumpálást.
- Pumpálás után húzza ki vagy csavarja ki a fúvókát a szelepből úgy, hogy közben a végét a hüvelykujjával összenyomja. Ezt ajánlott minél gyorsabban végrehajtani, hogy ne veszítsen túl sok levegőt.
- Presta szelep esetén szorítsa rá a korábban meglazított kis felső részt.
- Csavarja fel a szelepsapkát.

ABRONCSOK CSERÉJE (a felpumpált kerekkel ellátott kerekesszékre vonatkozik)

Az abroncsok cseréjének megkezdése előtt olvassa el az alábbiakat.

Mindenekelőtt ki kell engedni a levegőt a belső tömlőből, majd az abroncs-felni kapcsolat megszüntetéséhez az abroncsot a felni közepe felé kell nyomni. Egy speciális eszközzel át kell húzni az abroncsot a felni peremén, így az abroncs fala teljes egészében kívülre helyezhető. Ezután a tömlő kihúzása már rendkívül egyszerű művelet.

Az új tömlő behelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy:

- az alsó szalagon nincsenek sérülések, és nem láthatók benne idegen testek,
- a felni külső falai simák, nincsenek bennük külső testek által létrehozott benyomódások vagy más sérülések.

Az alsó szalagot és a felnit szükség esetén alaposan meg kell tisztítani.

Az abroncsok felszereléséhez az alsó szalagon egy lyukat kell készíteni a szelep fölé, majd azt a felniben kialakított szelephelyhez kell igazítani. Fenntartva ezt a helyzetet, helyezze el az alsó szalagot a felni teljes kerületén, ügyelve arra, hogy a szalag ne csavarodjon meg, ne sérüljön meg, és teljes egészében fedje a küllőfeszítőket.

Az abroncs falát a felnitől elhúzva illessze be a szelepet a felniben lévő szelephelyre, és enyhén pumpálja fel a belső tömlőt, hogy az kerek formát kapjon, majd tegye a belső tömlőt a felnibe.

A biztonság kedvéért ellenőrizze, hogy a belső tömlő nincs-e megcsavarodva (eltérés vagy deformáció esetén pumpáljon bele még egy kis levegőt). Tegye az abroncs falát a felnire a szeleppel ellentétes oldalról indulva, és a műveletet a szelepnél befejezve.

A kerék mindkét oldalán ellenőrizni kell, hogy a belső tömlőt nem nyomja-e az abroncs, és hogy az abroncs szabályszerűen a felnihez tapad-e. A szelepet enyhén befelé kell nyomni, majd vissza kell nyomni kifelé, hogy megfelelően a helyére illeszkedjen.

Az abroncs megfelelő felszerelésének ellenőrzéséhez annyi levegőt kell az abroncsba pumpálni, hogy a hüvelykujját le tudja nyomni a felni aljára. Ezután ellenőrizze, hogy az abroncs mindkét oldalon egyenletesen a felnihez tapad-e, és hogy középen helyezkedik-e el. Ha hibát észlel, engedjen ki egy kis levegőt a kerékből, és korrigálja az abroncsok beállítását. Ha mindent rendben talál, pumpálja fel a kereket a maximális nyomásra, majd helyezze fel a kupakot a szelepre.

KERÉKNYOMÁS ÉS FÉKERŐ

- A kerekeken belüli nyomást a felhasználó súlyának megfelelően kell megválasztani, majd az ápoló segítségével ellenőrizni kell a rögzítőfékek működését (a kerekesszék nem gurulhat el egy 15%-os lejtőn a lejtő felé néző felhasználóval).
- Az összes beállítás elvégzése után gondosan ellenőrizze az összes csatlakozást.

MEGJEGYZÉSEK

- Nem megfelelő szerszámok használata vagy nem megfelelő üzemeltetés esetén a felni vagy az abroncsok sorozatosan károsodhatnak;
- Műanyag felnik esetén nincs használatban alsó szalag;
- Ügyeljen arra, hogy a szerelés során ne kerüljön idegen test a felni és az alsó szalag közötti térbe, mert az tömlőkárosodást vagy kézsérülést vonhat maga után;
- Tartsa be a helyes nyomásszintet, amelyet a gyártó az abroncs oldalain ad meg.
- Használjon nyomásmérővel ellátott pumpát vagy kézipumpát.

NAPI HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a huzatot és a vázat nedves ruhával, tisztítószeres és más hasonló vegyszerek használata nélkül.
- Rendszeresen távolítsa el a szennyeződések a kerekesszék mozgó alkatrészeiről (csavarok, tartóelemek).
- A termék üzemi jellemzőinek fenntartása érdekében tartsa tisztán a kerekesszék minden elemét.
- A nagyon párás helyiségekben (fürdőszoba, mosókonyha stb.) vagy szabad téren való tárolás nem megfelelő higiénia esetén az üzemi és esztétikai jellemzők gyors romlását eredményezi.
- Ne tegye ki a kerekesszékét szélsőséges időjárási körülményeknek (eső, hó, igen erős napsütés), mert egyes alkatrészei elszíneződhetnek.

Ne használjon:

- oldószereket,
- WC-tisztító szereket,
- erős sörtéjű keféket és kemény tárgyakat,
- klórtartalmú tisztítószereket,
- korrozív hatású tisztítószereket.

Ne tisztítsa a terméket nagynyomású vagy gőztisztító berendezésekkel!

MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT

A felülvizsgálatot rendszeresen el kell végezni, és azt a kerekesszék alapos tisztításának kell megelőznie (az esetleges rejtett sérülések láthatóvá válása érdekében).

| Gyakoriság | Ellenőrzés tárgya | Megjegyzések |
|-----------------------------|---|--|
| Az első összeszerelés előtt | A műszaki állapot és a csomagban található összes elem ellenőrzése. | Ellenőrizze, hogy nincs-e bármelyik elemen látható mechanikai sérülés. |
| Minden használat előtt | Kerekek, fékek ellenőrzése | Előfordulhat, hogy a fékek elkoptak; minden használat előtt ellenőrizze a fékek állapotát. Ellenőrizze a kerekek állapotát is, és tisztítsa le róluk a port és a homokot. |
| Kéthetente | Csavarok és anyák megfelelő rögzítésének ellenőrzése. | Ellenőrizze, hogy minden csavar és anya erősen meg van-e húzva. |
| Kéthavonta | Tisztaság és általános állapot. | Mechanikai sérülés esetén azonnal forduljon a gyártóhoz. |
| Havonta | Keréktengelyek | A keréktengelyeket konzerválószerrel kell ellátni, a tengely és az agy közé néhány csepp konzerválószerrel kell juttatni. Ezenkívül teszteljen minden kereket. Emelje fel a kerekesszéket úgy, hogy a vizsgált kerék a talaj felett helyezkedjen el; ekkor a keréknek szabadon kell forognia, és nem lehet holtjátéka a tengelyen. |
| Havonta | Állandó csatlakozások (menetes, forrasztott) gyorskioldós hátsó kerekek | Figyelje a fémben keletkező repedéseket a csatlakozásoknál (menetes, forrasztott) és a gyorskioldós hátsó kerekeknél. |
| Havonta | Abronsok állapota | Győződjön meg arról, hogy az abroncs futófelülete nem kopott, és az abroncsokon nincsenek látható sérülések. |




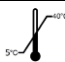
Javítás

- Javítás esetén forduljon a gyártóhoz.

Vevőszolgálat

- Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon a gyártóhoz.

8. Műszaki paraméterek

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Felhasználó megengedett tömege | 120 kg  | | |
| Felhasználási idő: | Gyártás időpontjától számított 5 év | | |
| Kerekesszék mérete | 16" | 18" | 20" |
| Kerekesszék magassága | 91 cm | | |
| Kerekesszék szélessége | 58 cm | 63 cm | 68 cm |
| Kerekesszék hosszúsága | 110 cm | | |
| Ülésszélesség | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| Ülésmagasság (a padlótól) | 50 cm | | |
| Ülésmélység | 40 cm | | |
| Háttámla magassága | 42 cm | | |
| Kerekesszék méretei összecsukva | 91 x 80 x 28 cm | | |
| Kerekesszék tömege | 18,5 kg +/- 5% | 19 kg +/- 5% | 20 kg +/- 5% |
| Kerekesszék tömege összetevők nélkül | 17 kg +/- 5% | 17,5 kg +/- 5% | 18,5 kg +/- 5% |
| Legkisebb fordulási sugár | 105° | | |
| Anyag | Acél váz; nejlon huzat; | | |
| Hátsó kerekek átmérője gyorskioldós hátsó kerekkel | 24" | | |
| Első kerék mérete | 8" | | |
| Legnagyobb biztonságos lejtő |  | | |
| A termék felhasználási környezetének leírása |  | | |
| Tárolási és használati hőmérséklet |  | | |
| Tárolási és használati páratartalom | 30% – 70% | | |
| SN | Gyári szám, a termékre nyomtatva | | |
| Beállításhoz szükséges szerszámok | Imbuszkulcs 5 mm, villáskulcs 10 mm, 13 mm | | |


9. Szimbólum



Uniós szabványoknak való megfelelés igazolása



Gyártó

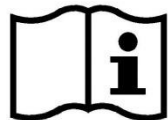

Olvassa el a felhasználói kézikönyvet



Figyelmeztetés



Katalógusszám



Sorozatszám



Óvja a nedvességtől



Óvja a napsugárzástól



Felhasználó megengedett tömege.



Legnagyobb biztonságos lejtő.



Épületeken belül és kültéren is használható



Gyártás dátuma



A termék gépkocsival szállítható.



A terméket nem gépjárműben, ülésként történő használatra tervezték.




A termék repülőgéppel szállítható.



Ujjak beszorulásának veszélye.




Ne álljon rá a lábtartóra

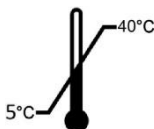

Tárolási és használati hőmérséklet

10. Elérhetőségi adatok

| | |
|--|--|
|  mdh sp. z o.o. ul. Maratońska 104 94-007 Łódź Lengyelország tel.: +48 42 674 83 84 www.mdh.pl www.viteacare.com | Forgalmazza: Rehab Zrt 2000 Szentendre, Kalászi út 3 +36-26-886-288 www.rehabzrt.hu |
|--|--|

11. Jótállás

A Magyar közlöny 2020. évi 140. számában közzétett 270/2020. (VI. 12.) Kormányrendelet alapján, ami az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása, a Rehab Zrt a kezelési útmutatókban található jótállási és szavatossági ismertetőt adja ki.

A termék jótállási ideje a termék eladási árához kapcsolódik

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállási jegy

A termékhez a forgalmazó köteles jótállási jegyet biztosítani. A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállás iránti igény elutasítható, amennyiben

- a terméket a kezelési útmutatóban meghatározott rendeltetésszerű használattól eltérően használták, átalakították, nem a kezelési útmutatóban meghatározott módon kezelték vagy tárolták, erőszakos külső behatás érte, szakszerűtlen beavatkozás történt, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
- a termék hibáját nem jelentették be és ebből adódóan a kár mértéke megnőtt,
- a termékben található, a természetes használatból adódóan gyorsan kopó alkatrészekben következik be meghibásodás (gumiköpeny, gumibelső, defekt, üléskárpit és karfakopás és sérülés, kerékcsapágyak, izzók stb.).
- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése történik
- nem rendelkezik a termékre vonatkozó jótállási jeggyel, vagy a vállalkozó által kiadott számlával.

Tartozékok jótállása

A termékekben található tartozékokra, az azok árának megfelelő jótállás érvényesíthető. Például az akkumulátorok esetében, mivel azok ára nem haladja meg a 100 000 Ft-t, így azokra egy év jótállás vonatkozik.

Javítási igény

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a kapcsolódó dokumentumban feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti.

Ha a termék a vásárlást követő három napon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk gyártási hibára visszavezethető okból, a vállalkozás által elfogadott, három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig a vállalkozás hibájából nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ebbe az időtartamba a beszállító késedelmes alkatrész ellátásából származó idő, a fogyasztó hibája miatt meghiúsuló javítási késedelem ideje nem tartozik bele. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Javítások jótállása

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen vagy kapcsolódó dokumentumban feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbodott jótállási idő.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Minden 20000 Ft-ot meghaladó javítás esetén a javításra és a beépített alkatrészekre 6 hónap jótállás vonatkozik.

Vitás esetben

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért. A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt. Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Ha panaszának elbírálásával továbbra is elégedetlen, úgy a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat jogorvoslatért.

A szavatosság a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

VÉNY FELÍRATÁSI SEGÉDLET JAVÍTÁSHOZ

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELENEK FELTÉTELEI:

- A jótállási idő (1 év) lejárt.
- Orvosi vény megléte.
- Legyen megállapítható, hogy a gyógyászati segédeszköz a javítást igénylőnek lett társadalombiztosítási támogatással felírva és kiszolgálva.
 - *A használati útmutató megléte, benne az eszköz gyári száma és a jótállási jegy fejlécében és/vagy a szervizkönyvben a jogosult neve, TAJ száma, a kiszolgálás dátuma, **vagy***
 - *kórházi zárójelentés vagy ambuláns lap megléte, amin a felíró orvos a segédeszközt felírta, a kiszolgálás kori számla vagy egyéb okirat, amin a beteg neve és a felírt eszköz azonosítása együtt szerepel, **vagy***
 - *OEP igazolás, hogy a javítást kérőnek ki lett szolgálva az adott eszköz a kiszolgálás dátumával.*
- Szervizkönyv megléte, benne az eddigi javításokkal és azok költségével.
- Az eszköz legyen azonosítható (típusábra, gyári szám megléte magán az eszközön).

JAVÍTÁSI VÉNY

Ki írhat fel javítási vényt?

A 14/2007.(III./14.) EüM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése szerint:

“A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a **kezelőorvosnak** vagy a **háziornosnak** vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.”

Mit kell tartalmaznia a vénynek?

Eszköz pontos megnevezése, Gyártási száma (A)
Hiba jellege (B)

(A) Megnevezés a társadalombiztosítással rendelhető gyógyászati segédeszközök jegyzékében (tb. lista) szereplő módon és az eszköz gyártási száma.

(B) Hiba jellege az OEP által meghatározottak szerint:

- Vázjavítás
- Fék jav, csere, beállítás
- Karfa, kárpit csere
- Kerék javítás, csere
- Gumi csere

Amennyiben több hiba is javítást igényel, azokat egy vényre kell felírni.

Javasoljuk, hogy a vény felíratás előtt a szervizkönyvben lévő javító egységek valamelyikével lépjen kapcsolatba és kérjen segítséget a hiba jellegének meghatározásához.

Példák:

| | |
|---|--|
| „B-4200/P Önhajtós kerekesszék Gy.sz.: 15025879 FékJavítás” | „B-4200/P + TH+ TL Önhajtós kerekesszék Gy.sz.: 15005616 Vázjavítás” |
|---|--|

HOL ÉS HOGYAN VÁLTHATÓ BE A JAVÍTÁSI VÉNY

A felírt vény birtokában kell jelentkezni az eszköz használati útmutatójában található **szervizkönyvben feltüntetett javító egység** valamelyikénél (telefon, e-mail).

A vényt nem kell postázni, azt a javítás során veszik át a munka elvégzésekor.

SZERVIZKÖNYV

A REHAB ZRT. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ JAVÍTÁSRA SZERZŐDÖTT PARTNEREI:

REHAB-ÉSZAK KFT.

| | |
|---|----------------------------|
| 3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. | Tel.: 06/46 508-284 |
| 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. | Tel.: 06/35 300-224 |
| 3300 Eger, Knézich u. 20. | Tel.: 06/36 320-826 |
| 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) | Tel.: 06/47 560-130 |

REHAB-GENERAL KFT.

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1044 Bp., Reviczky utca 38. | Tel.: 06/1 320-1606 |
| | Tel.: 06/1 783-3869 |
| | Tel.: 06/20 950-4735 |
| | Tel.: 06/30 465-7139 |

REHAB-HUNGARIA KFT.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. | Tel.: 06/62 553-480 |
|-------------------------------|---------------------|

PRÍMA PROTETIKA KFT.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. | Tel.: 06/66 441-137 |
| | Tel.: 06/20 952-2135 |

PROMOBIL ZRT.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. | Tel.: 06/1 433-7190 |
|-----------------------------------|---------------------|

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 2000 Szentendre, Kalászi út 3. | Tel.: +36-26-886-244 |
|--------------------------------|----------------------|

MEDIPLUSZ KFT.

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2. | Tel.: 06/74 413-238 |
|---------------------------------------|---------------------|

Figyelem!

Az eszköz nem rendeltetészerű használatából, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából, az eszköz nem megfelelő tárolásából, tisztításából eredő károk, meghibásodások jótállásban, illetve társadalombiztosítási támogatással nem javíthatók. Az ilyen jellegű meghibásodások, csak a tulajdonos költségére javíthatók!

.....gyártási számú kerekesszékhez/mopedhez

Az eszközt gyártó/forgalmazó cég: Rehab Zrt.

Az eszköz megnevezése: Önhajtós kerekesszék

Az eszköz típusa: B-4200/P (+TH+TL)

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás: nincs

TB finanszírozott szervizjogosultság utolsó időpontja:

Kiadva:

Név:

TAJ szám:

Kiadta (bélyegző/aláírás):

A kiadás időpontja:

Figyelem!

A szervizkönyvet őrizze meg a kihordási idő végéig, mert javítást társadalombiztosítási támogatással csak a szervizkönyv birtokában tudnak a javító egységek vállalni. Társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, csak az jogosult, akinek eredetileg az eszközt felírták.

Jótállási Jegy

| | |
|--|--|
| Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ | Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ |
| Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ | Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ |
| Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ | Jótállásos javítások Hiba jellege: Cserélt illetve javított alkatrészek: _____ _____ Szerviz bélyegzője: Aláírás: _____ Dátum: _____ |

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás nincs.

Az eszköz sorozatszám:

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása:

VISSZAKÜLDENDŐ!

Cím:
Rehab Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Melléklet a Használati útmutatóhoz

**Biztonságtechnikai nyilatkozat a
Basic
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKHEZ**

Alulírott.....tulajdonos
(gondnok)

kijelentem, hogy aszámú kerekesszékhez a mellékelt
Használati útmutatót, érvényesített Jótállási jegyet, valamint a Szervizkönyvet átvettem.
A Használati útmutatóban foglaltakat megismertem, s a használat során azokat maradéktalanul
betartom.

Dátum

.....
átadó

.....
üzemeltető (tulajdonos/gondnok)

VISSZAKÜLDENDŐ!
REGISZTRÁCIÓS LAP

Név:

Lakcím:.....

Telefonszám:.....

TAJ-szám:.....

Vény vonalkód:.....

Közgyógy. ig. szám:.....

Típus:Basic összecukható kerekesszék

Gyártási szám:.....

Méret:.....

Kiszolgálás dátuma:.....

Kiszorgálta:

.....

Jelen regisztrációs lap aláírásával és visszaküldésével hozzájárulásomat adom a REHAB Zrt.-nek, hogy személyes adataimat kapcsolattartás céljából kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.